Официальный импортер продукции W&H на территории РФ 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, офис 630

Тел.: +7 (499) 995-23-78

E-mail: info@omt.ru



# Правильный уход за инструментами дешевле ремонта!



наконечников и хирургических моторов

Подготовка хирургических прямых, угловых

### Замечания по подготовке

Для того чтобы продукция компании W&H служила вам долгие годы, ознакомьтесь с советами и рекомендациями по гигиене и уходу.

## Общие замечания

- Обратите внимание, механические инструменты необходимо очищать и дезинфицировать сразу после каждого применения. > Рекомендуется использовать защитную
- одежду (прочные на разрыв перчатки, защитные очки, средства для защиты полости рта).
- Соблюдайте инструкцию по эксплуатации от производителя.

135°C Стоматологические инструменты с данным 555

символом могут подвергаться стерилизации.



символом возможна термодезинфекция.

Для стоматологических инструментов с данным

дезинфицирующие средства для механических инструментов W&H и хирургических моторов, соблюдайте соответствующую дозировку и время экспозиции. Используемое дезинфицирующее средство не должно содержать хлора. > Используйте чистый сухой воздух.

> Используйте сертифицированные и проверенные

- W&H рекомендует использовать
- деминерализованную воду. ь Более подробная информация указана на сайте
- wh.com

Подготовка





Механическая





Ручная





продлит срок службы ваших инструментов и отложит ваше плановое сервисное обслуживание!

Проведение всех этапов ухода

и стерилизации заметно









соответствующим адаптером.

Смазка

Дезинфекция / Сушка




Ручная





Механическая




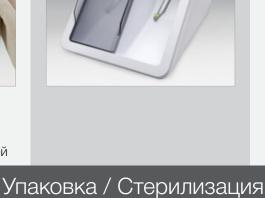



135°C { } { }



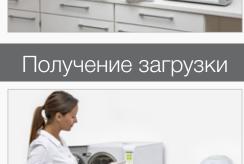

W&H рекомендует стерилизацию

в соответствии со стандартом

убедитесь, что загрузка сухая после очистки и стерилизации!

EN 13060. Пожалуйста,



должна храниться в сухом и чистом месте без пыли.

Упаковка с инструментами

Дальнейшая информация на wh.com/hygiene



