



PIP CAMERA

Краткое руководство пользователя

Создано для первоклассных стоматологов

1. Структура системы






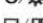
Проверьте подключение камеры к монитору.


Включите монитор, затем удерживайте кнопку  , чтобы начать работу.



2. Характеристики камеры

Кнопки


-  Видео и фото
-  Вверх/Вниз
-  Установка часов
-  Переключение функций
-  Вкл./Выкл. Свет
-  Режим PIP

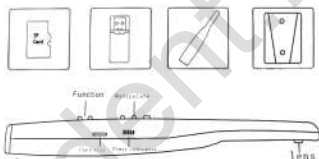

Технические характеристики


Линзы: угол обзора 100 градусов, zoom 2x, зона видимости 0-5 см
Источник света: светодиод, 4 шт
Сенсор: 500 млн. пикс, AWB/AGC
Источник питания: 5V 1A < 2W, VGA
Вес: 185 г

- Широкий угол обзора и глубина
- Универсальность: видео/фото/накопитель
- Индивидуальная настройка часов
- Уникальный интерфейс картинка-в-картинке

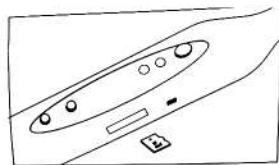


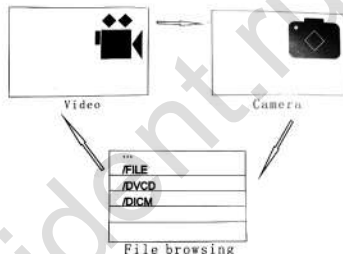
- Убедитесь, что вставляете правильно карту памяти в слот
- Карта памяти должна быть высокого качества
- Нестандартные карты памяти могут быть причиной поломки камеры

Установка часов

- В режиме видео / фото удерживайте кнопку **▲+▼**, чтобы войти в настройки часов
- Короткое нажатие кнопки  устанавливает по очереди год-месяц-день-час-минуты-секунды
- Короткое нажатие кнопок **▲▼** устанавливает нужное число
- Как только вы закончите выстраивать параметры, нажмите клавишу **⏻/⚙**, чтобы завершить настройку часов.

Режим эксплуатации

Короткое нажатие на кнопку  включает режим видео, фото или обзор файлов.



PIP режим

В режиме камеры удерживайте кнопку **□/⊞**, чтобы включить режим PIP

Коротких 4 нажатия на кнопку  делает 4 снимка.

Выбор одно из изображений можно кнопкой **▲▼**

Удерживание кнопки **□/⊞** позволяет выйти из PIP режима



3. Настройки монитора

Технические характеристики:


Разрешение: 1280*1024

Интерфейс: VGA HDM AV USB TV AUDIO

Размер экрана: 17" /TFT 4:3

Питание: AC220V / DC 12V 3A

Вес: 3 кг.

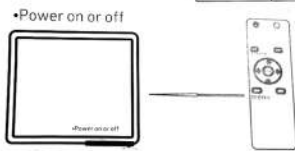

Настройка монитора



Настройка сигнала



Настройка языка

Режим картинка-в-картинке



4. Советы по эксплуатации

- При периоде неиспользования более, чем 5 дней, настройки даты и часов обнуляются.
- Карты памяти низкого качества могут вызвать сбой или поломку системы.
- Копируйте информацию с карты памяти на компьютер каждую неделю, чтобы не потерять данные.
- Автоматическое выключение через 5 минут в режиме ожидания.
- Автоматический контроль изображения: сенсор автоматически регулирует яркость на расстоянии 5 см от объекта.