Официальный импортер продукции W&H на территории РФ 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, офис 630 Тел.: +7 (499) 995-23-78

E-mail: info@omt.ru



дешевле ремонта!



Подготовка угловых, прямых наконечников и моторов

Замечания

по подготовке

Для того чтобы продукция компании W&H служила вам долгие годы, ознакомьтесь с советами и рекомендациями по гигиене и уходу.

Общие замечания

- > Обратите внимание, механические инструменты необходимо очищать и дезинфицировать сразу после каждого применения.
- > Рекомендуется использовать защитную одежду (прочные на разрыв перчатки, защитные очки, средства для защиты полости рта).
- > Соблюдайте инструкцию по эксплуатации от производителя.

Стоматологические инструменты с данным символом могут подвергаться стерилизации.



Для стоматологических инструментов с данным символом возможна термодезинфекция.

- > Используйте сертифицированные и проверенные дезинфицирующие средства для механических наконечников W&H и моторов, соблюдайте соответствующую дозировку и время экспозиции. Используемое дезинфицирующее средство не должно содержать хлора. Используйте чистый сухой воздух.
- » W&H рекомендует использовать деминерализованную воду.
- » Более подробная информация указана на сайте **wh.com**







Если необходимо, протрите












Ручная Внутренняя очистка

с помощью спрея W&H



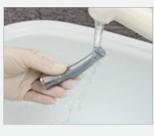







личных результатов в любых случаях (включая внутренние

поверхности).





Дезинфекция/Сушка



Если необходимо, протрите

ние высоких стандартов от персонала для получения отличных результатов в любых случаях (включая внутренние поверхно-



Следуйте инструкциям









Визуальный контроль

Смазка





обслуживания: > После каждой внутренней очистки

- > Перед каждой стерилизацией
- После 30 минут использования,
- дважды в день











> Перед каждой сте-


рилизацией







W&H рекомендует стерилизацию в соответствии со стандартом

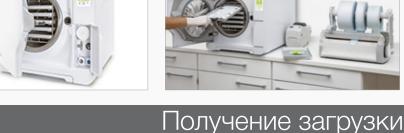

EN 13060. Пожалуйста, убедитесь, что загрузка сухая после очистки и стерилизации!







месте без пыли.

Упаковка с инструментами должна храниться в сухом и чистом

Дальнейшая информация на wh.com/hygiene

