

Euronda®

Pro System

ПАМЯТКА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СТЕРИЛИЗАТОРОВ EURONDA



GoldiDent™

Ваш поставщик
стоматологического
оборудования



GoldiDent[™]

СТАЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

Euronda[®]

ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ
ОКРУГУ

Для длительной бесперебойной и безопасной работы стерилизатор, как и все электроприборы, нуждается в регулярном техобслуживании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОКЛАВА:



ВНИМАНИЕ! Перед обслуживанием отключите стерилизатор от сети!



НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ дезинфицирующие средства и иные агрессивные моющие средства.



НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ металлические щетки или губки.



НЕ НАПРАВЛЯТЬ на стерилизатор струи воды и не мыть его водой под давлением. Можно повредить электронные компоненты!



ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ. Выполнять операцию только на холодном стерилизаторе.

GoldiDent[™]

Ваш поставщик
стоматологического
оборудования



Euronda | Pro System®

ПАМЯТКА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СТЕРИЛИЗАТОРОВ EURONDA E8, E9 NEXT, E10:

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

1. Очистка уплотнителя дверцы стерилизационной камеры. Очистка наружных поверхностей. Очистка внутренних поверхностей.

Извлеките держатель поддонов (см. рис. 1.1) и тщательно очистите стерилизационную камеру (см. рис. 1.2) мягкой влажной тканью. Для увлажнения губки использовать только дистиллированную или деминерализованную воду. Таким же образом очистить поддоны и держатель. Таким же образом очистить внешние поверхности.

Для удаления известковых отложений использовать уксус. Скопление отложений может отрицательно повлиять на герметичность камеры. Их наличие может свидетельствовать о плохом качестве дистиллированной воды.

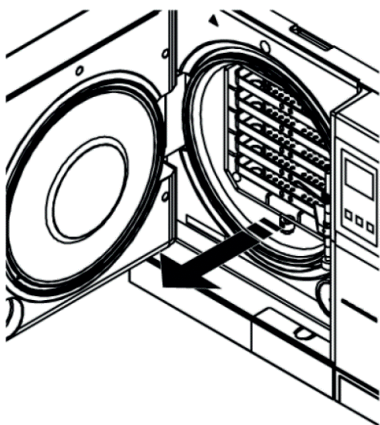


Рис. 1.1

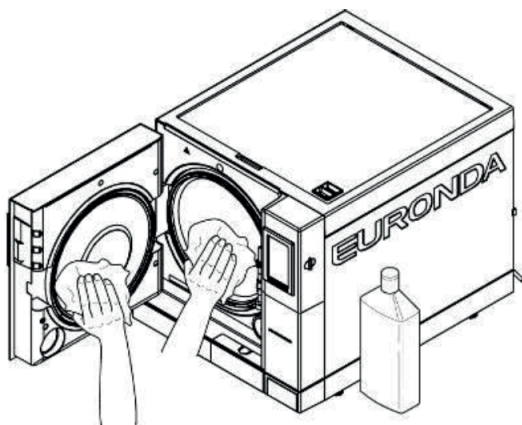


Рис. 1.2

Появление ржавчины на частях стерилизатора или стерилизуемых инструментах является следствием помещения в стерилизатор ржавых инструментов, даже если они сделаны из нержавеющей стали, или инструментов из углеродистой стали, которые вызывают гальваническую реакцию.

Стерилизация инструментов даже с незначительными следами коррозии может стать причиной появления ржавчины на стерилизаторе или стерилизуемых в нем инструментах. Коррозия может появиться вследствие использования хлорированной или морской воды, дезинфицирующих или моющих средств, входящих в химическую реакцию с материалами стерилизатора.

Используйте только дистиллированную воду с высокой степенью очистки.

Для удаления ржавчины со стенок стерилизационной камеры или с держателя поддонов используйте антикоррозионные средства для нержавеющей стали. Следуйте вышеописанным инструкциям.



ВНИМАНИЕ! Не используйте металлические щетки или губки. Пятна следует удалять влажной мягкой тканью.

ЕЖЕМЕСЯЧНО ИЛИ ПО ЗАПРОСУ АВТОКЛАВА

2. Очистка сливного фильтра камеры

Рекомендуется периодически визуально проверять чистоту фильтра камеры на предмет скопления загрязнений, волокон. При необходимости очистить сливной фильтр стерилизационной камеры; открутить фильтр как показано на рис. 2.1, промыть его под проточной водой, почистить с помощью щетки и установить на место.

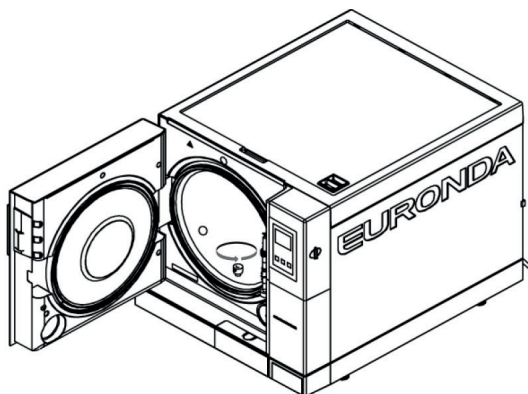


Рис. 2.1

3. Очистка баков дистиллированной и отработанной



ВНИМАНИЕ! Если стерилизатор не используется на протяжении трех дней, во избежание выпадения осадка, необходимо слить воду из емкостей.

Для слива емкости для чистой воды присоединить один конец дренажной трубки к крану на передней панели стерилизатора (см. рис. 3.1, поз. 1), другой конец опустить в пустую емкость. Для слива емкости для использованной воды присоединить один конец дренажной трубки к крану на передней панели стерилизатора (см. рис. 3.2, поз. 2), другой конец опустить в пустую емкость. Отсоединить дренажную трубку, нажав на кнопку и потянув за штуцер.

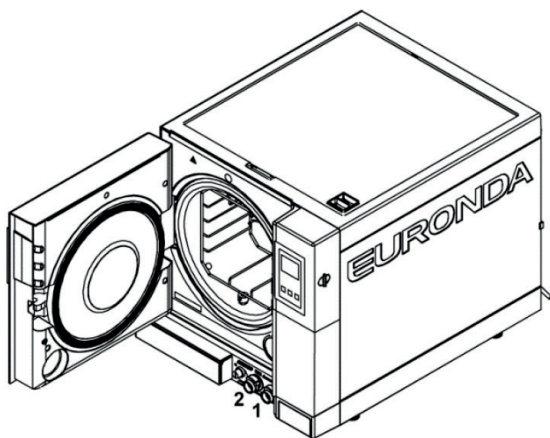


Рис. 3.1

Для доступа к емкостям для воды необходимо снять крышку стерилизатора, откинув ее на 45° (см. рис. 3.2) и далее потянув ее на себя (см. рис. 3.3).

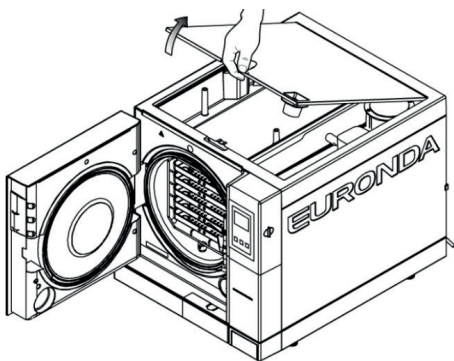


Рис. 3.2

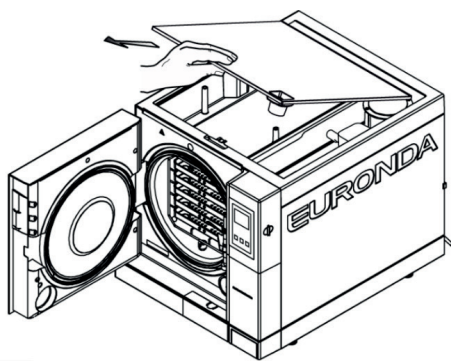


Рис. 3.3

Очистить емкости для воды мягкой стороной губки, увлажненной водой, или тряпкой. Губка поставляется в комплекте. Удалить все отложения, особенно из углов.

Снять сетчатые фильтры с обеих емкостей (см. рис. 3.4), почистить их щеткой в проточной воде и поставить на место, предварительно запомнив их первоначальное положение.



ВНИМАНИЕ! При очистке емкостей для воды не повредите поплавковые датчики уровня воды.

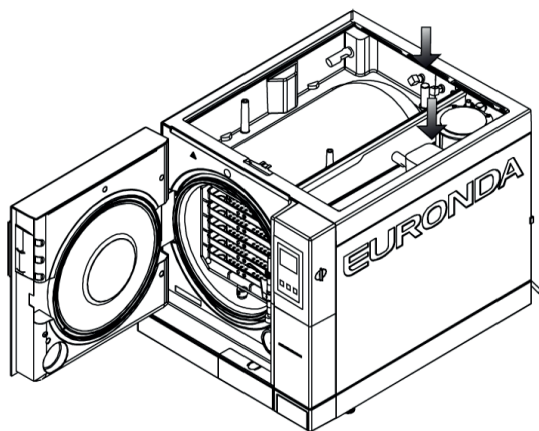


Рис. 3.4

Все **тщательно прополоскать** и слить остатки воды.
Выполнить одну программу стерилизации без загрузки.





ПАМЯТКА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СТЕРИЛИЗАТОРОВ EURONDA E9 MED:

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

1. Очистка уплотнителя дверцы стерилизационной камеры. Очистка наружных поверхностей. Очистка внутренних поверхностей.

Извлеките держатель поддонов (см. рис. 1.1) и тщательно очистите стерилизационную камеру (см. рис. 1.2) мягкой влажной тканью. Для увлажнения губки использовать только дистиллированную или деминерализованную воду. Таким же образом очистить поддоны и держатель. Таким же образом очистить внешние поверхности.

Для удаления известковых отложений использовать уксус. Скопление отложений может отрицательно повлиять на герметичность камеры. Их наличие может свидетельствовать о плохом качестве дистиллированной воды.

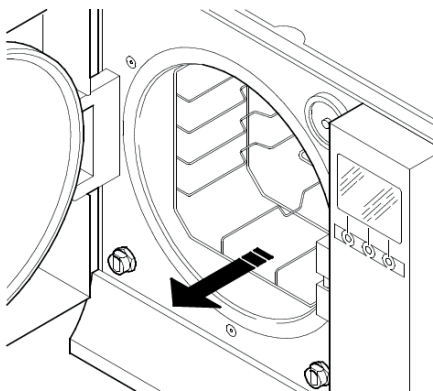


Рис. 1.1

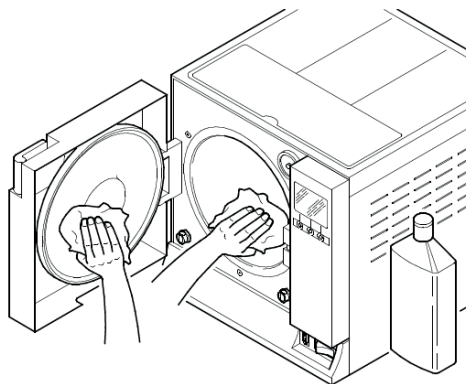


Рис. 1.2

Появление ржавчины на частях стерилизатора или стерилизуемых инструментах является следствием помещения в стерилизатор ржавых инструментов, даже если они сделаны из нержавеющей стали, или инструментов из углеродистой стали, которые вызывают гальваническую реакцию.

Стерилизация инструментов даже с незначительными следами коррозии может стать причиной появления ржавчины на стерилизаторе или стерилизуемых в нем инструментах. Коррозия может появиться вследствие использования хлорированной или морской воды, дезинфицирующих или моющих средств, входящих в химическую реакцию с материалами стерилизатора. Используйте только дистиллированную воду с высокой степенью очистки.

Для удаления ржавчины со стенок стерилизационной камеры или с держателя поддонов используйте антикоррозионные средства для нержавеющей стали. Следуйте вышеописанным инструкциям.



ВНИМАНИЕ! Не используйте металлические щетки или губки. Пятна следует удалять влажной мягкой тканью.

ЕЖЕМЕСЯЧНО ИЛИ ПО ЗАПРОСУ АВТОКЛАВА

2. Очистка сетчатого фильтра парогенератора

Рекомендуется периодически визуально проверять чистоту фильтра парогенератора на предмет скопления загрязнений. При необходимости произведите очистку фильтра парогенератора. Открутите фильтр, как показано на рисунке (рис. 2.1) и промойте его водой с использованием щетки.



ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны, чтобы винты или другие предметы не упали в генератор.

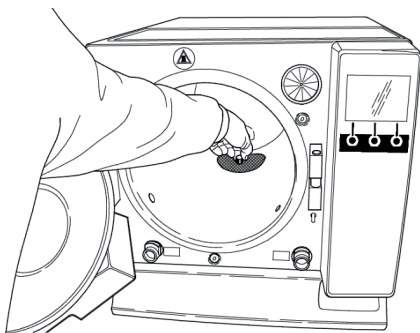


Рис. 2.1

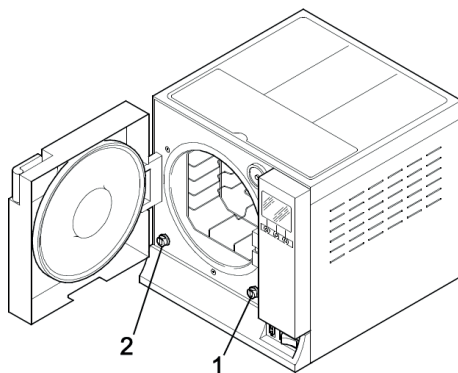


Рис. 3.1

3. Очистка баков дистиллированной и отработанной



ВНИМАНИЕ! Если стерилизатор не используется на протяжении 3-х дней, во избежание выпадения осадка, необходимо слить воду из емкостей.

Для слива емкости для чистой воды присоединить один конец дренажной трубки к крану на передней панели стерилизатора (см. рис. 3.1, поз. 1), другой конец опустить в пустую емкость. Для слива емкости для использованной воды присоединить один конец дренажной трубки к крану на передней панели стерилизатора (см. рис. 3.2, поз. 2), другой конец опустить в пустую емкость. Отсоединить дренажную трубку, нажав на кнопку и потянув за штуцер.

Для доступа к бакам воды необходимо открутить 5 винтов под крышкой для залива дистиллированной воды крестовой отверткой (в комплекте), см. рис.3.1. Далее необходимо снять крышку стерилизатора, откинув ее на 45° (см. рис. 3.2) и затем потянув ее

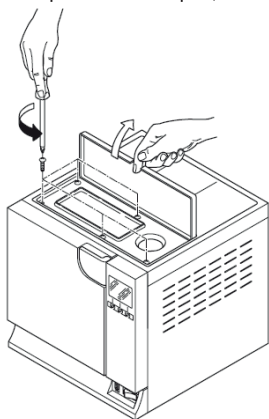


Рис. 3.1

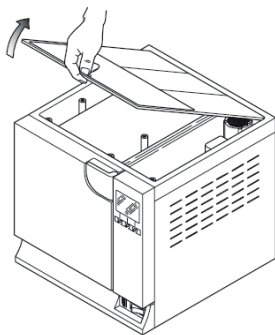


Рис. 3.2

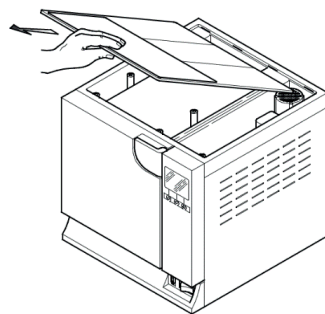



Рис. 3.3

Очистить емкости для воды мягкой стороной губки, увлажненной водой, или тряпкой. Губка поставляется в комплекте. Удалить все отложения, особенно из углов.

Снять сетчатые фильтры с обеих емкостей (см. рис. 3.4), почистить их щеткой в проточной воде и поставить на место, предварительно запомнив их первоначальное положение.



ВНИМАНИЕ! При очистке емкостей для воды не повредите поплавковые датчики уровня воды.

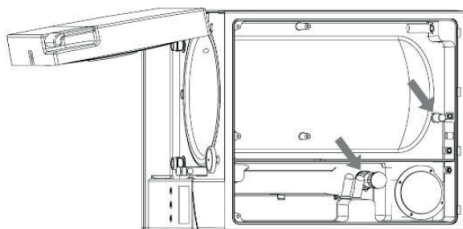

Все **тщательно прополоскать** и слить остатки воды. Выполнить одну программу стерилизации без загрузки.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ EURONDA НА НАШЕМ САЙТЕ, ПЕРЕЙДЯ ПО QR-КОДУ →



GoldiDent[™]

Ваш поставщик
стоматологического
оборудования



г. Москва, 2-ой Котляковский пер., д. 18
Тел.: 8 800 775-41-98, +7 (964) 629-34-05 (whatsapp)
WWW.GOLDIDENT.RU