



DTE®



Пособие по применению ультразвуковых насадок









Содержание

Удаление зубного камня

Насадка

Страница

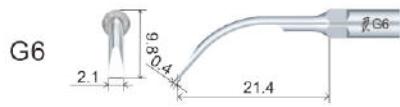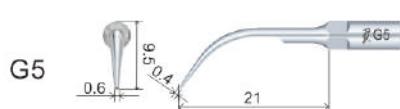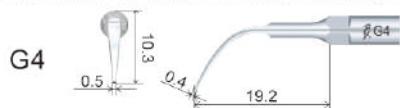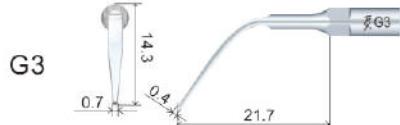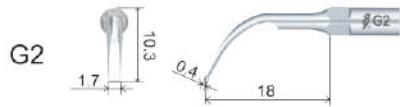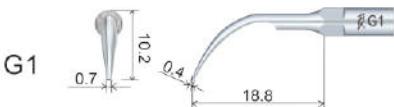

1

2

3



4

5

6

Насадка

Страница

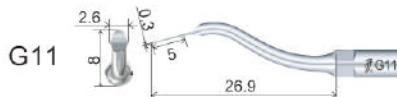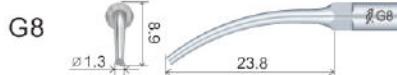

7

8

9


10

11

Периодонтия

Насадка


Страница

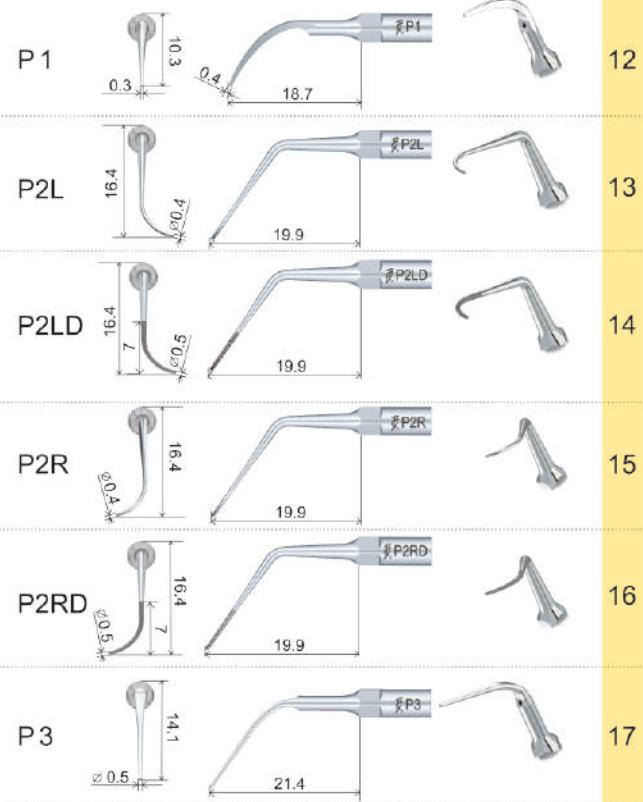

www.goldident.ru


Насадка

Единица измерения:mm
Страница

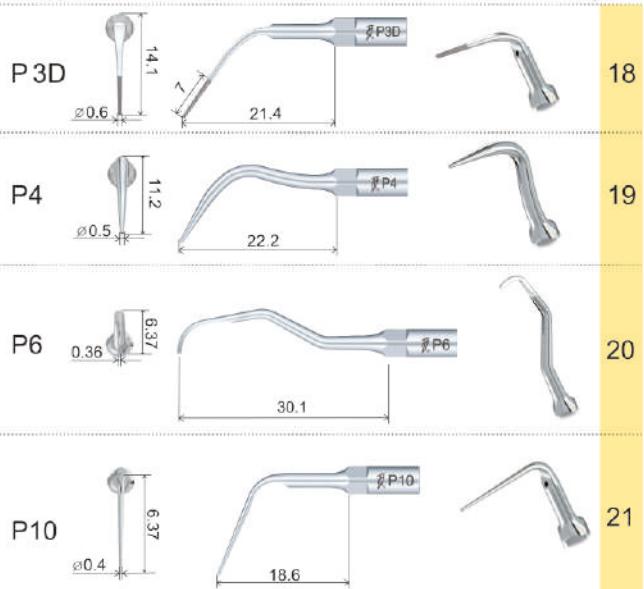

Эндодонтия

Насадка

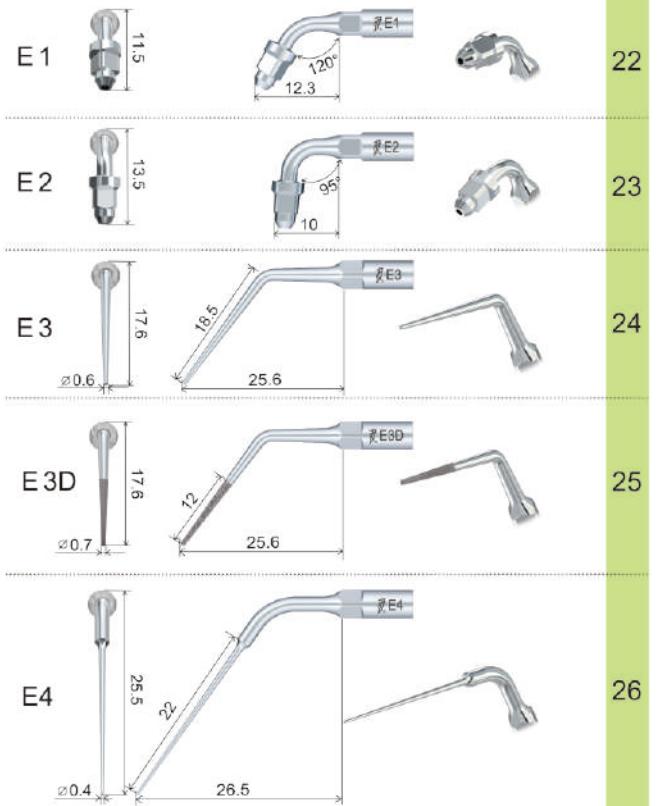

Страница

22

23

24

25

26


www.goldident.ru

Единица измерения:mm

Страница


Насадка

E4D

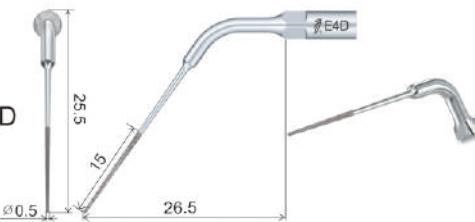


27

E5

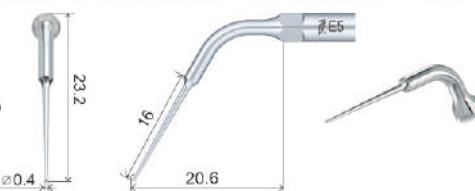

28

E5D

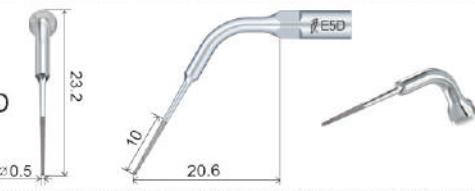

29

P4D




30

Эндодонтия

Насадка

Страница

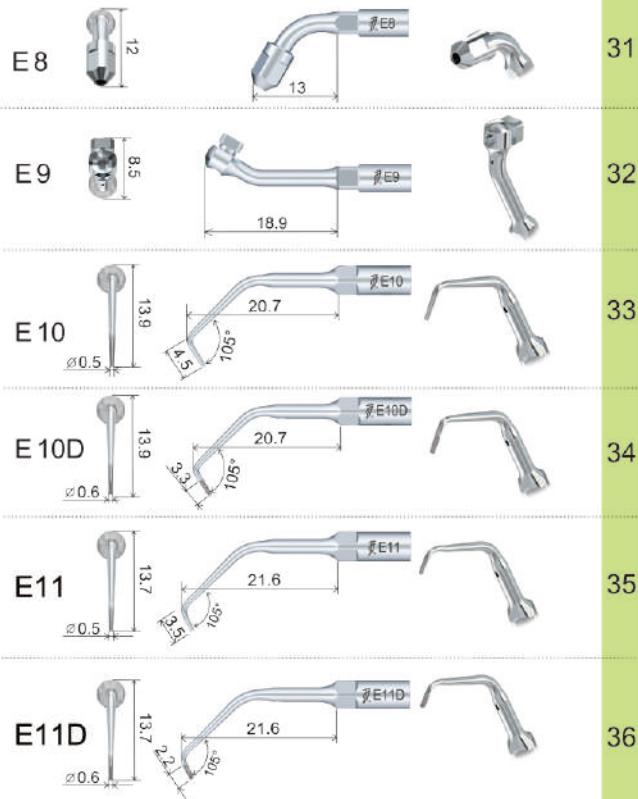

Единица измерения:мм

Страница



Препарирование кариозной полости

Насадка

SB1



Страница

41

SB2



42

SB3



43

SBL



44

SBR



45


Удаление зубного камня

Насадка

Единица измерения:мм

Страница

GK1

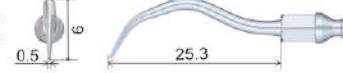

46

GK2



47

GK3



48

GK4



49

GK5




50


Удаление зубного камня

Насадка

GK6

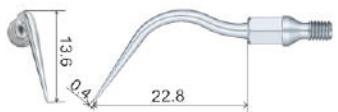

GK7

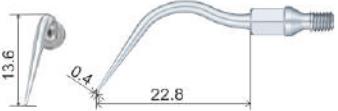

GC1




GC2



Периодонтология

PC1

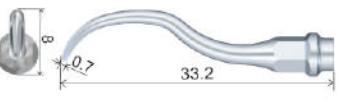

Страница

51

52

53


54

55

Единица измерения:mm

Насадка

A1

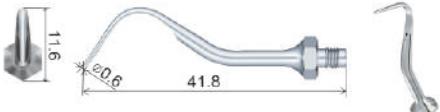


A2



Костная хирургия


US1

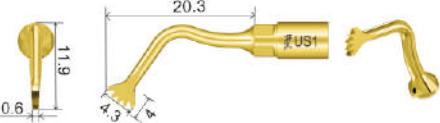

US1L



US1R

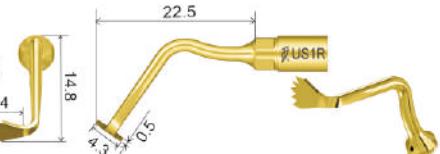

Страница

56

57


58

59

60

Костная хирургия

Насадка

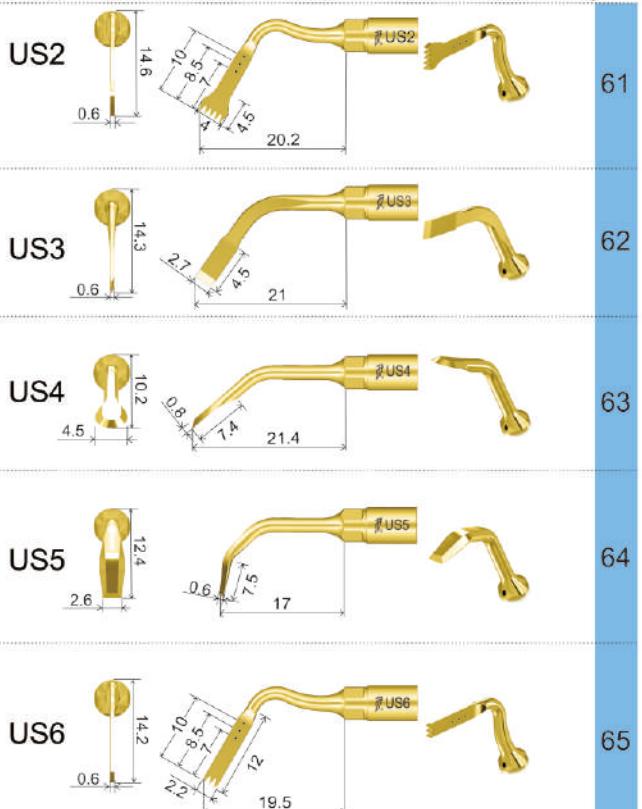

Страница

61

62


63

64

65

Синус-лифтинг

Насадка

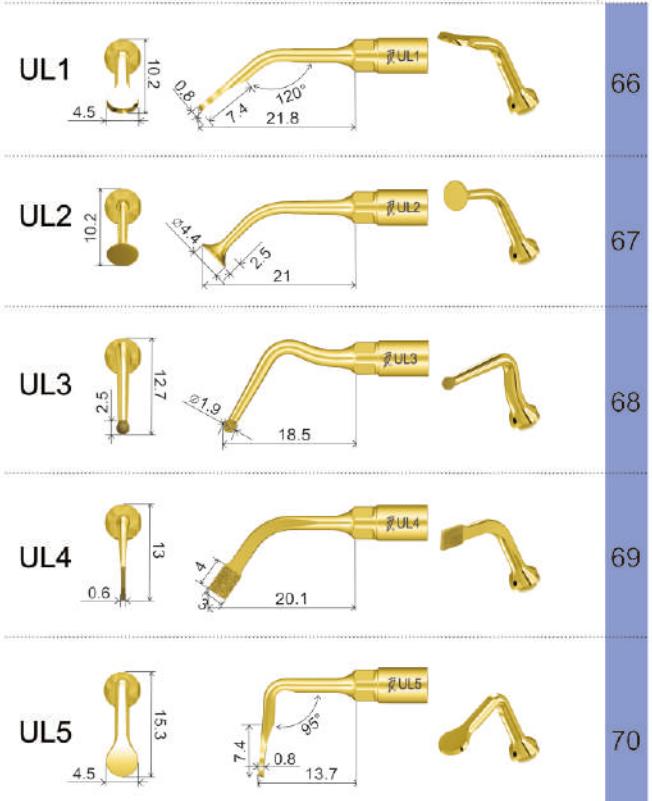

Единица измерения:мм

Страница

66

67




68

69

70

Эндодонтия

Насадка

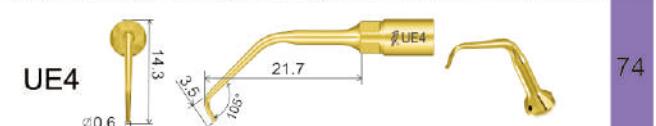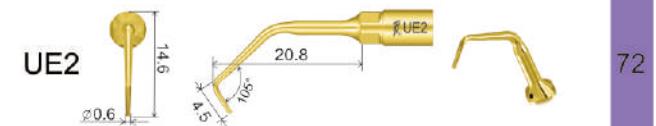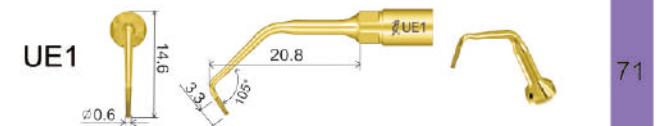

Эксельцимоз



Страница

71

72




73

74

75

Имплантация

Насадка

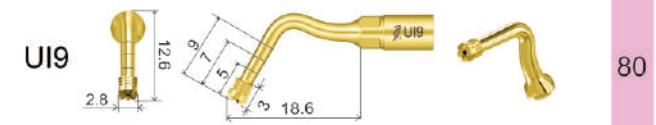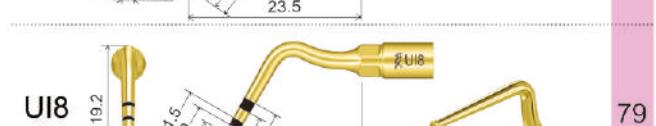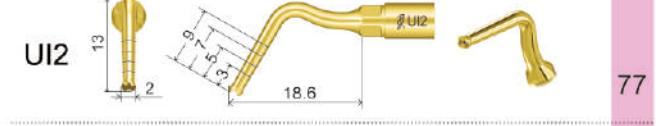

Единица измерения:mm

Страница

76

77

78


79

80

Периодонтальная хирургия

Насадка

Страница

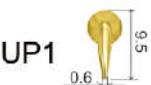

81




82



83



84

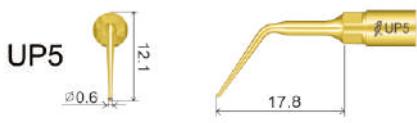

85



www.goldident.ru

Единица измерения:мм

Страница





UP6

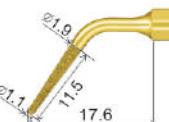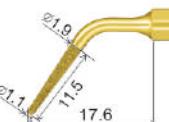

86




UP7

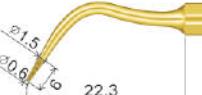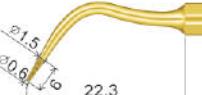

87


G1(GD1/GS1)

Удаление наддесневых зубных отложений во всех квадрантах.

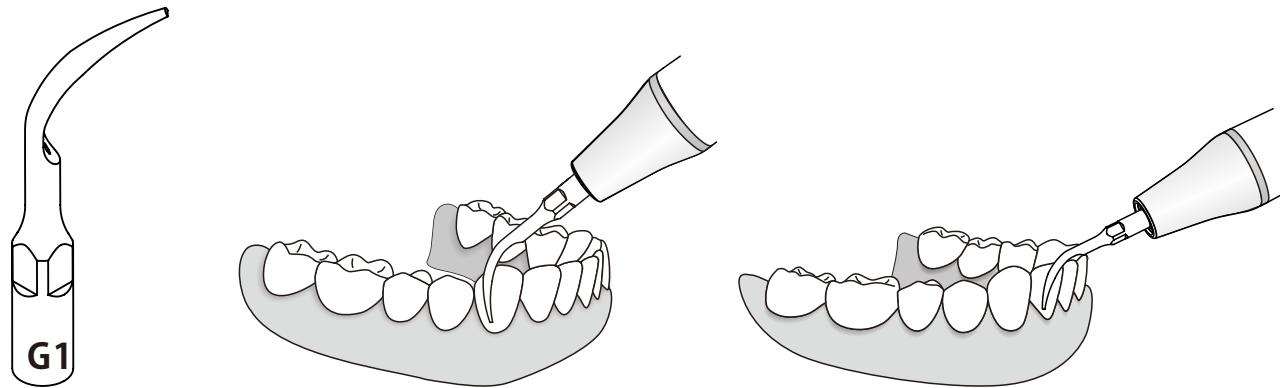


РЕЖИМ: G

МОЩНОСТЬ

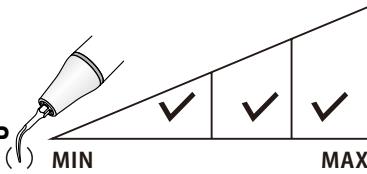

www.goldident.ru



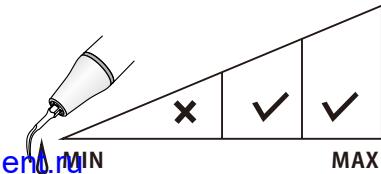


ИРРИГАЦИЯ

G2(GD2/GS2)

Удаление твердых зубных отложений.

Обрабатывайте поверхность зуба плоским концом.

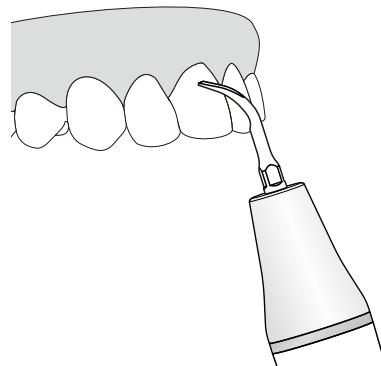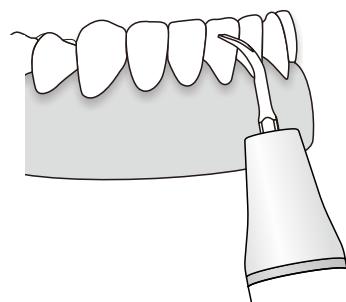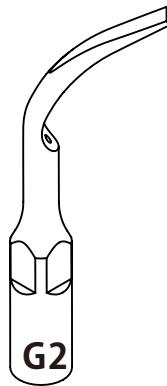

РЕЖИМ: G


МОЩНОСТЬ



ИРРИГАЦИЯ


G3(GD3/GS3)

Удаление наддесневого налета во всех квадрантах, включая межзубные промежутки и десневые бороздки.

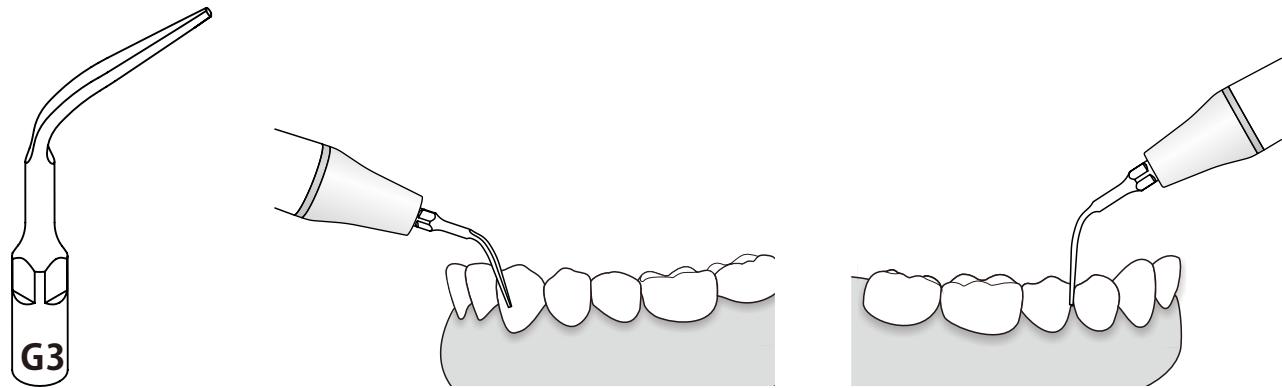


G4(GD4/GS4)

Рекомендуется для обработки межзубных промежутков и для удаления наддесневого налата или камня.

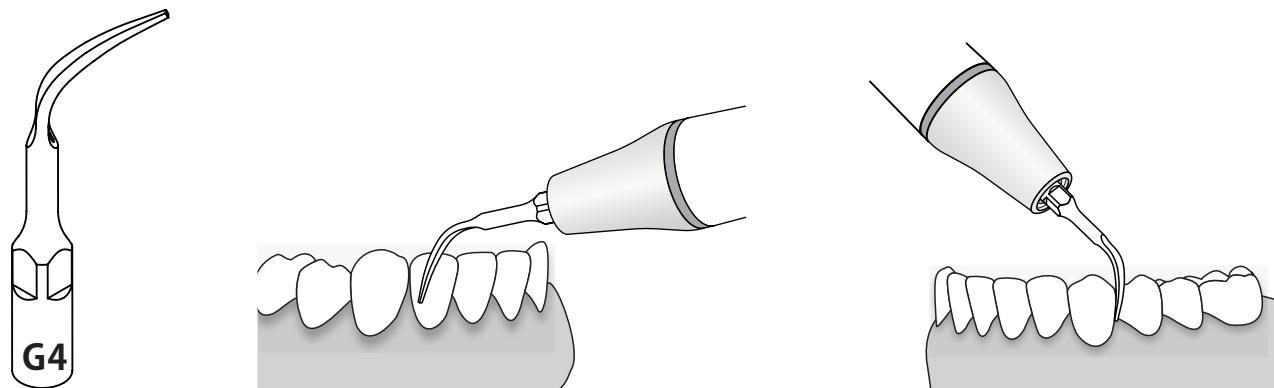


G5(GD5/GS5)


Рекомендуется для пигментированного налета и зубного камня.

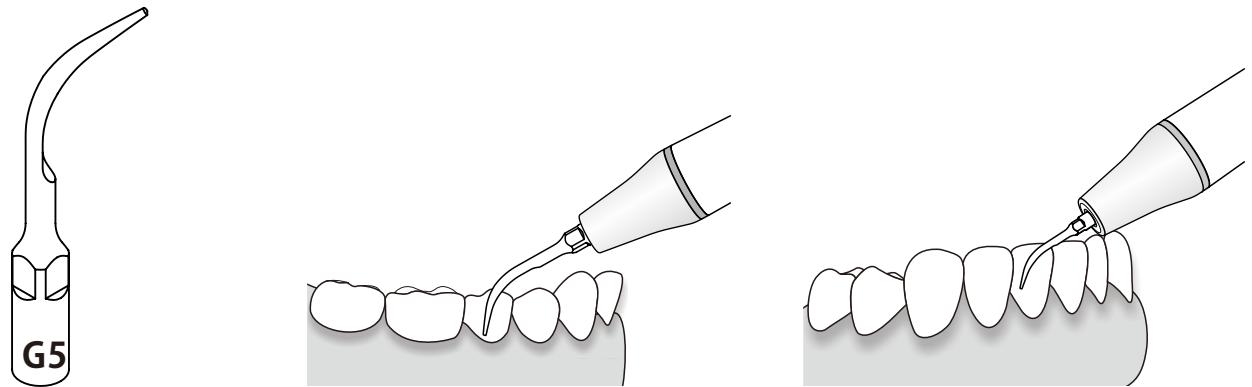

РЕЖИМ: G
МОЩНОСТЬ

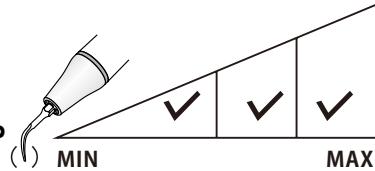


www.goldident.ru

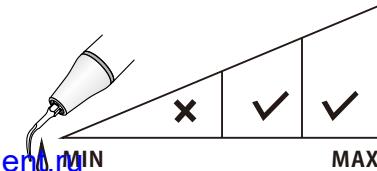


G6(GD6/GS6)

Рекомендуется для удаления большого количества зубных отложений.
Обрабатывайте поверхность зуба плоским концом.

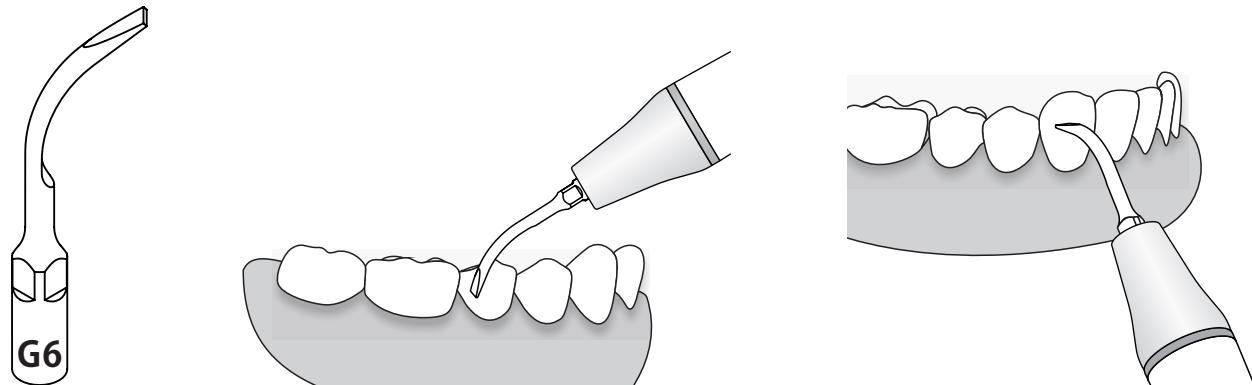


РЕЖИМ: G

МОЩНОСТЬ

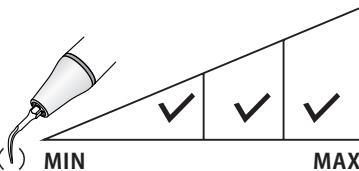

www.goldidens.ru

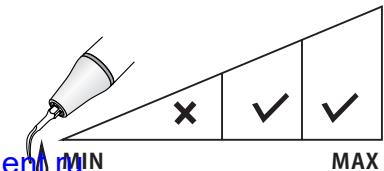


ИРРИГАЦИЯ

G7(GD7/GS7)


Удаление коронок.

Приложите инструмент к поверхности коронки и включите подачу питания.
Усильте давление до тех пор, пока не исчезнет звук вибраций и удерживайте
в течение нескольких секунд.

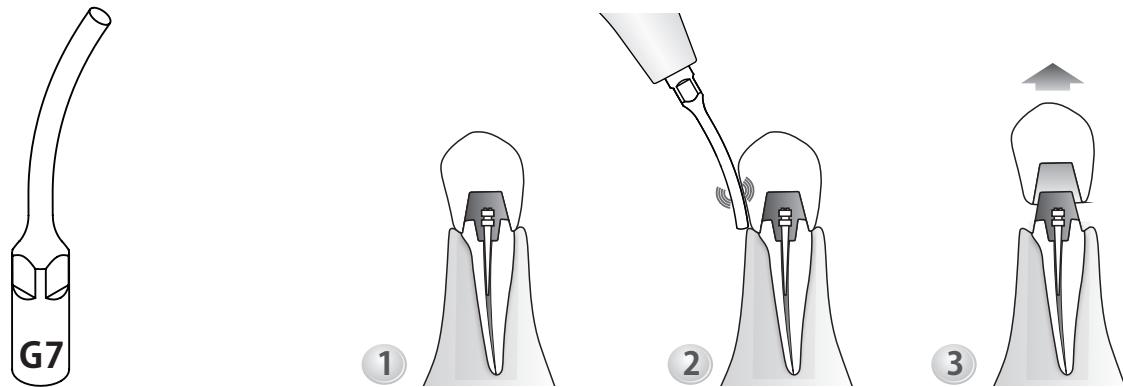


РЕЖИМ: G

МОЩНОСТЬ

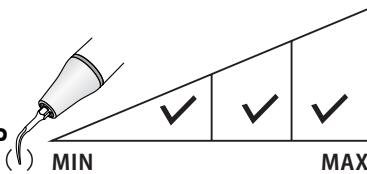

www.goldidens.ru

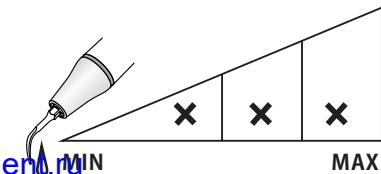


ИРРИГАЦИЯ

G8(GD8/GS8)


Удаление штифтов.

Ультразвуковая высокая эффективность для удаления сложных деталей зубного протеза.

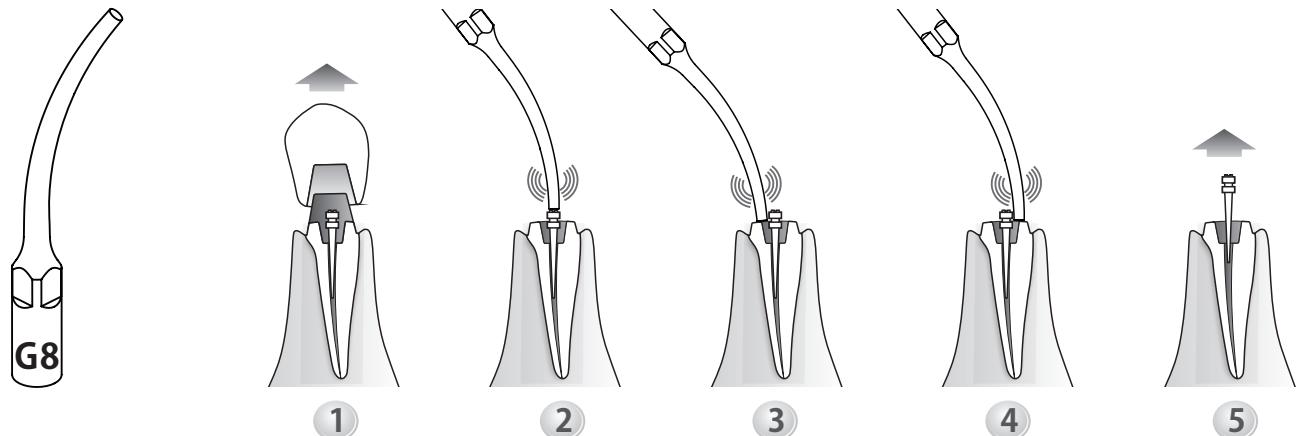


РЕЖИМ: G

МОЩНОСТЬ

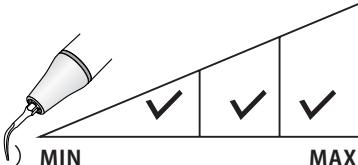



www.goldidem.ru

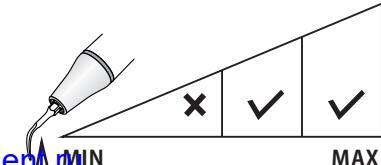

ИРРИГАЦИЯ


G9(GD9)

Удаление наддесневого камня на всех поверхностях зуба.

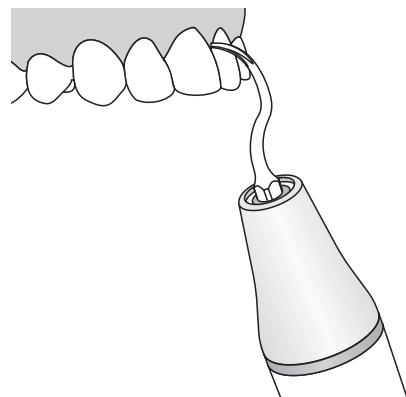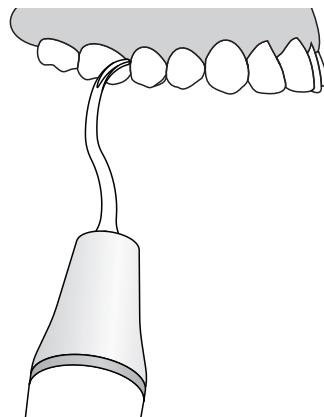


РЕЖИМ: G

МОЩНОСТЬ

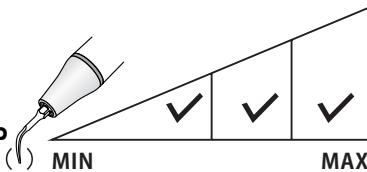




www.goldident.ru

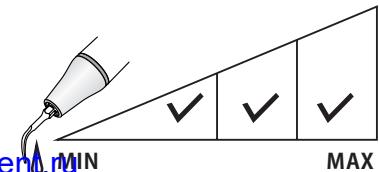

ИРРИГАЦИЯ


G10(GD10)

Удаление наддесневого налета во всех квадрантах, включая межзубные промежутки и десневые бороздки.

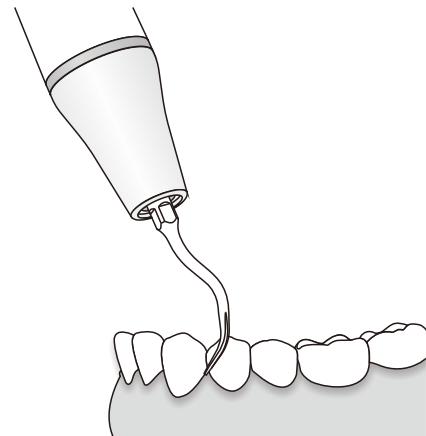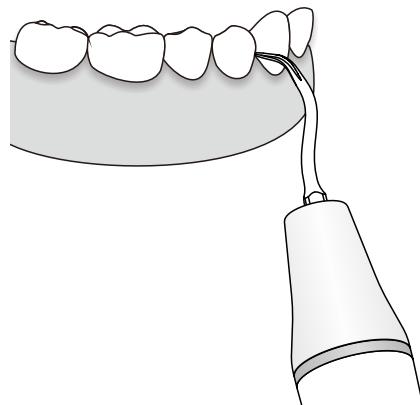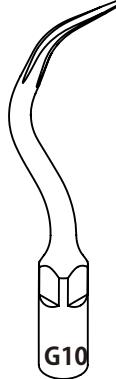


РЕЖИМ: G

МОЩНОСТЬ

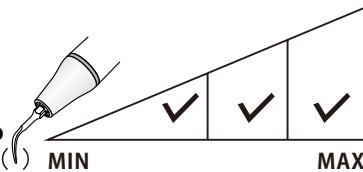


www.goldidens.ru

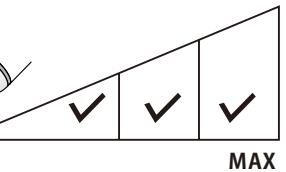

ИРРИГАЦИЯ


G11(GD11/GK11)

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для полировки обрабатываемой поверхности зубов в межзубных промежутках без повреждения соседних зубов во время ортодонтического лечения

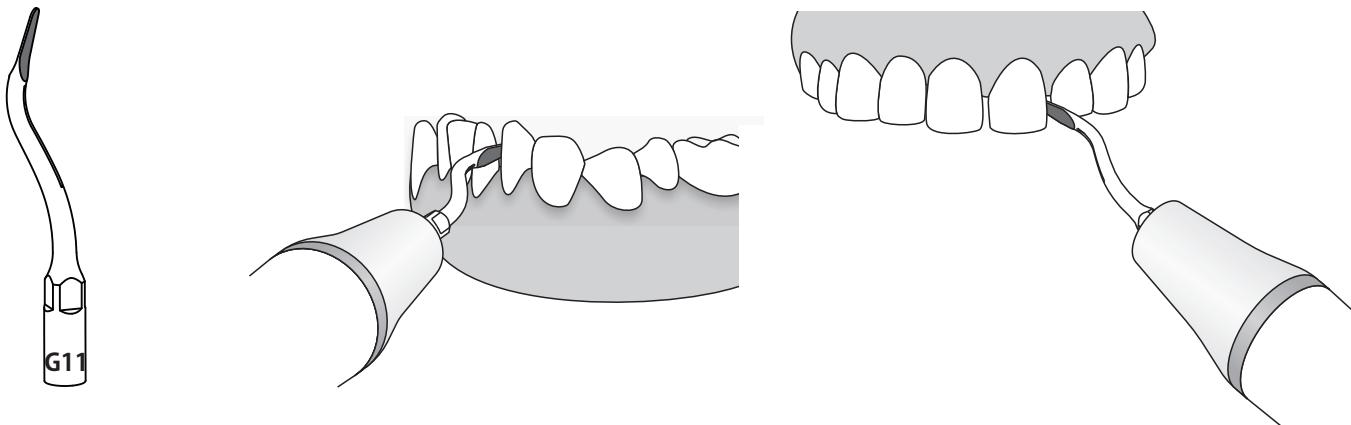


РЕЖИМ: G

МОЩНОСТЬ

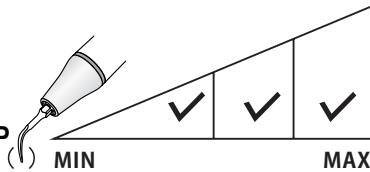


www.goldidens.ru

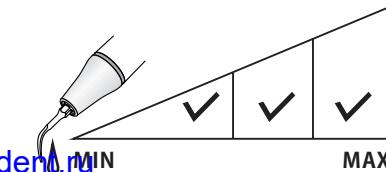

ИРРИГАЦИЯ

P1(PD1/PS1)

Узкий и острый, рекомендуется для очистки и ирригации зубо-десневой бороздки или пародонтальных каналов.

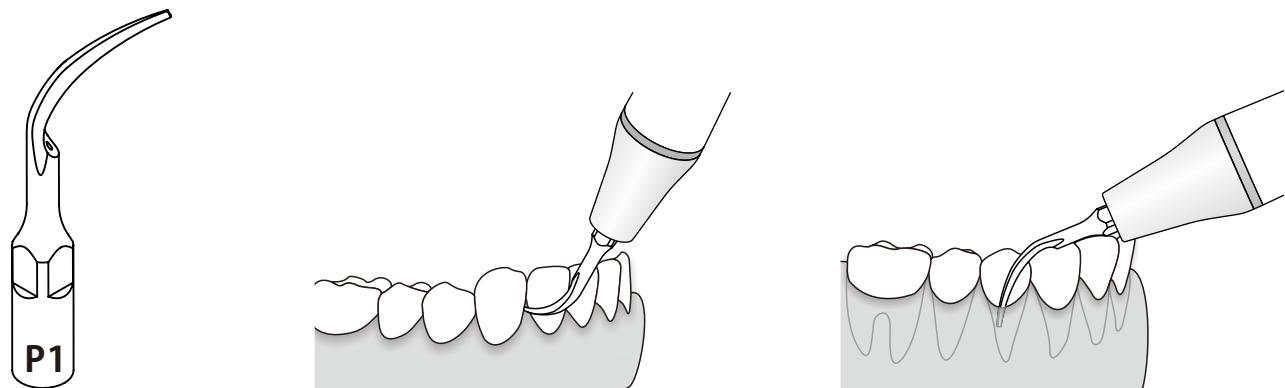

РЕЖИМ: Р


МОЩНОСТЬ



ИРРИГАЦИЯ


P2L(PD2L)

Инструмент, изогнутый под углом влевую сторону, используется для очистки области фуркационных дефектов от зубных отложений.

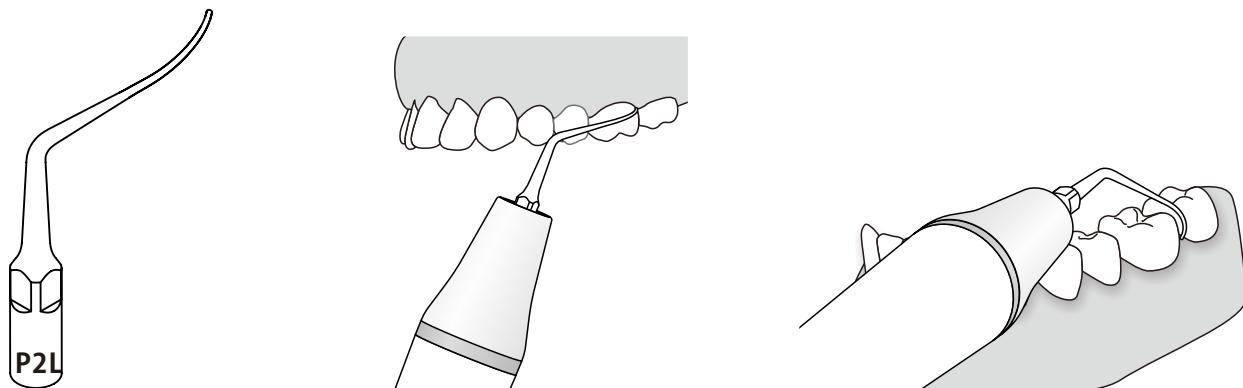




P2LD(PD2LD)

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм), изогнутый под углом в левую сторону, для удаления зубных отложений в области шейки зуба и коронарной трети корня зуба.

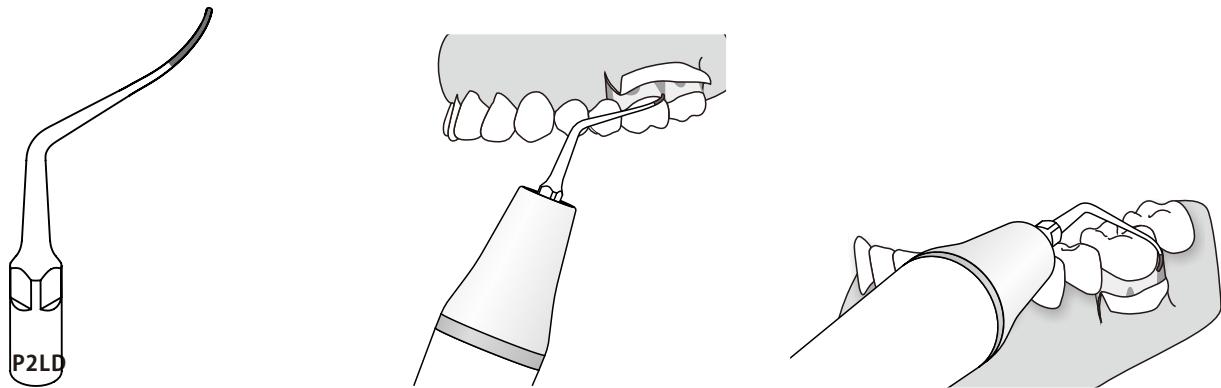


P2R(PD2R)

Инструмент, изогнутый под углом в правую сторону, используется для очистки области фуркационных дефектов от зубных отложений.

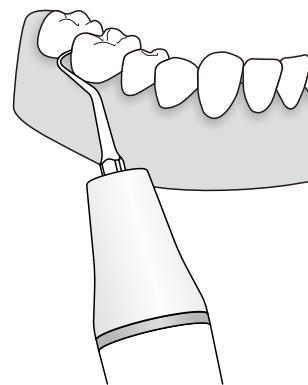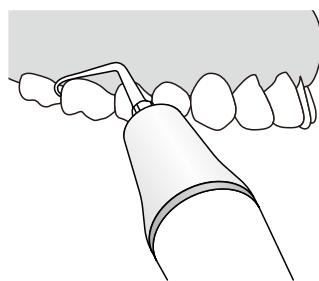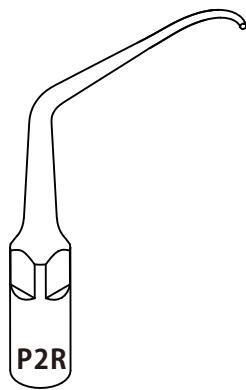




P2RD(PD2RD)

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм), изогнутый под углом правую сторону, для удаления зубных отложений в области шейки зуба и коронарной трети корня зуба.

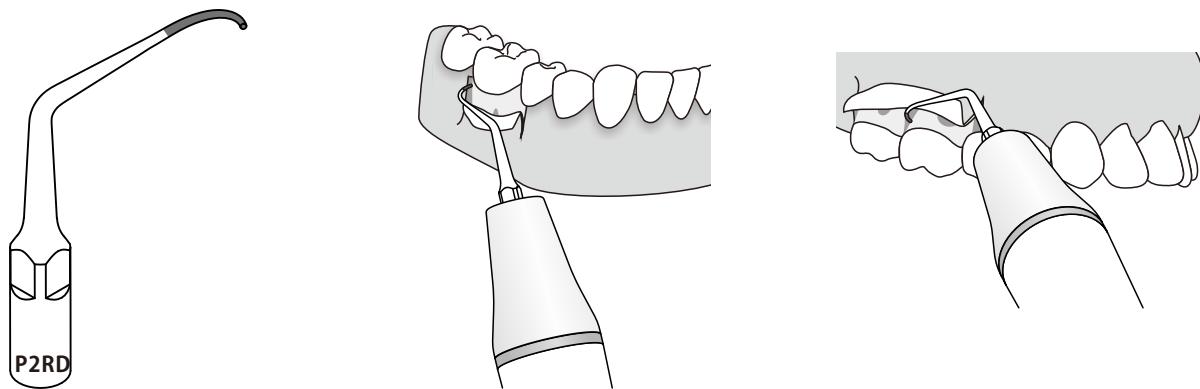


P3(PD3/PS3)

Рекомендуется для очистки и промывания глубоких зубодесневых карманов.

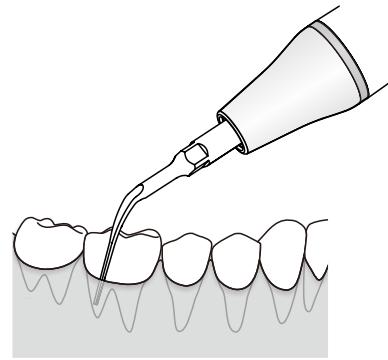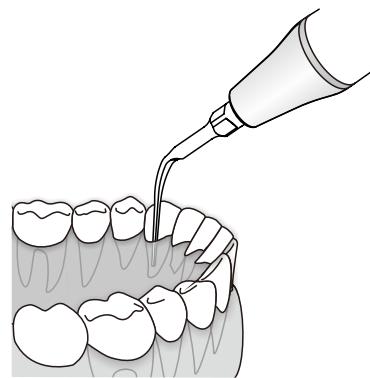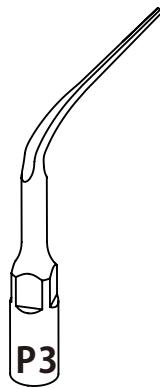


РЕЖИМ: Р

МОЩНОСТЬ

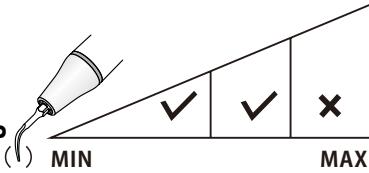


www.goldidem.ru

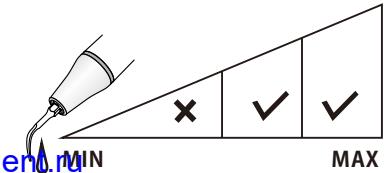

ИРИГАЦИЯ


P3D(PD3D/PS3D)

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для прикорневой очистки зубов после периодонтальной лоскутной хирургии. Он также используется для формирования краев коронки и для расширения фуркаций зубов

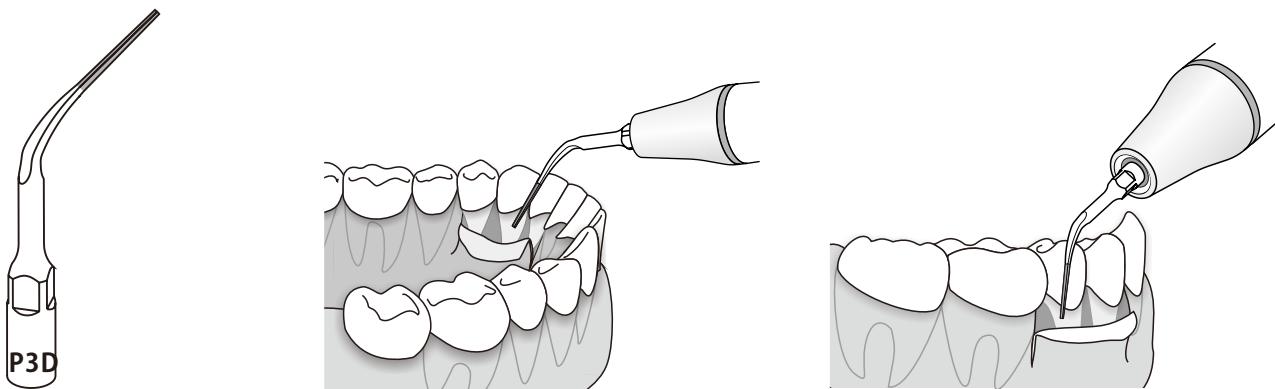


P4(PD4/PS4)

Рекомендуется для очистки и промывания неглубоких зубодесневых карманов.

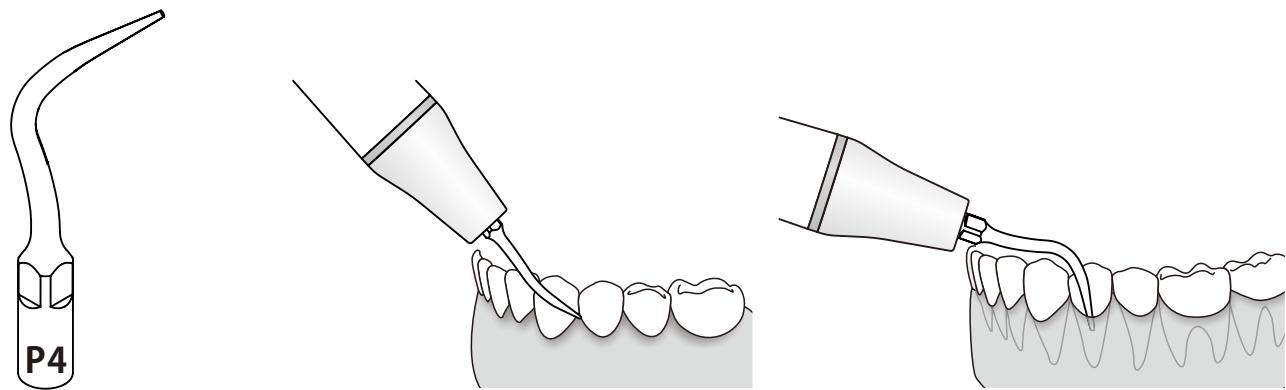


РЕЖИМ: Р

МОЩНОСТЬ

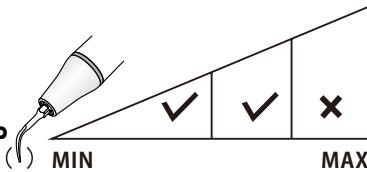



www.goldidens.ru

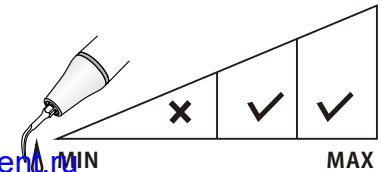


ИРРИГАЦИЯ

P6 (PD6/PS6)


Инструмент с острой рабочей частью, применяется для удаления поддесневого налета или камня.

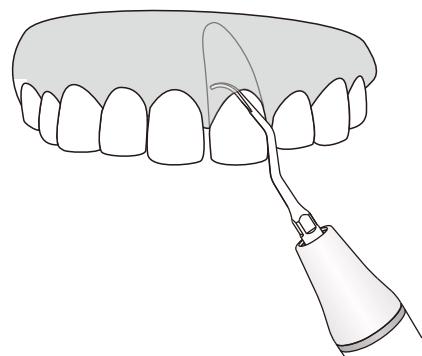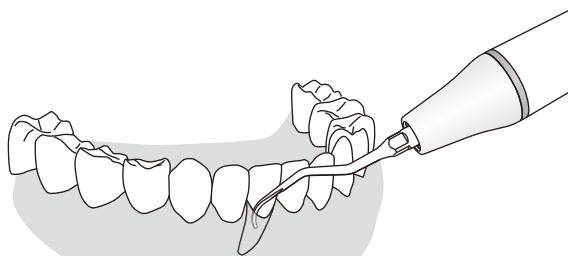

РЕЖИМ: Р
МОЩНОСТЬ

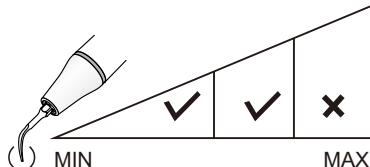


www.goldidens.ru

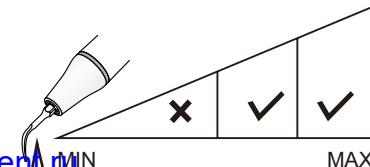


P10 (PD10/PS10)

Применяется для обработки среднего и глубокого десневого кармана.

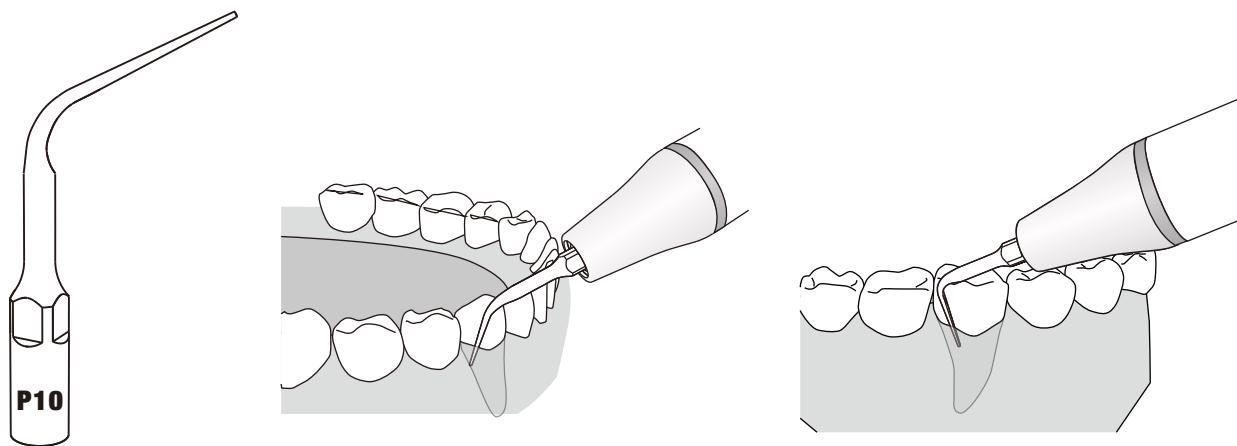


РЕЖИМ: Р

МОЩНОСТЬ

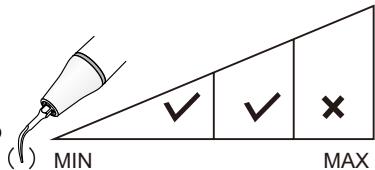


www.goldident.ru

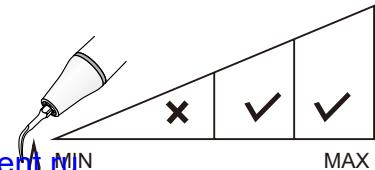

ИРРИГАЦИЯ

E1(ED1/ES1)


Держатель под углом 120°, используется для файла диаметром 0,7 мм или 0,8 мм. Рекомендуется для очистки и промывания зубного канала, обычно используется для зубов переднего ряда.

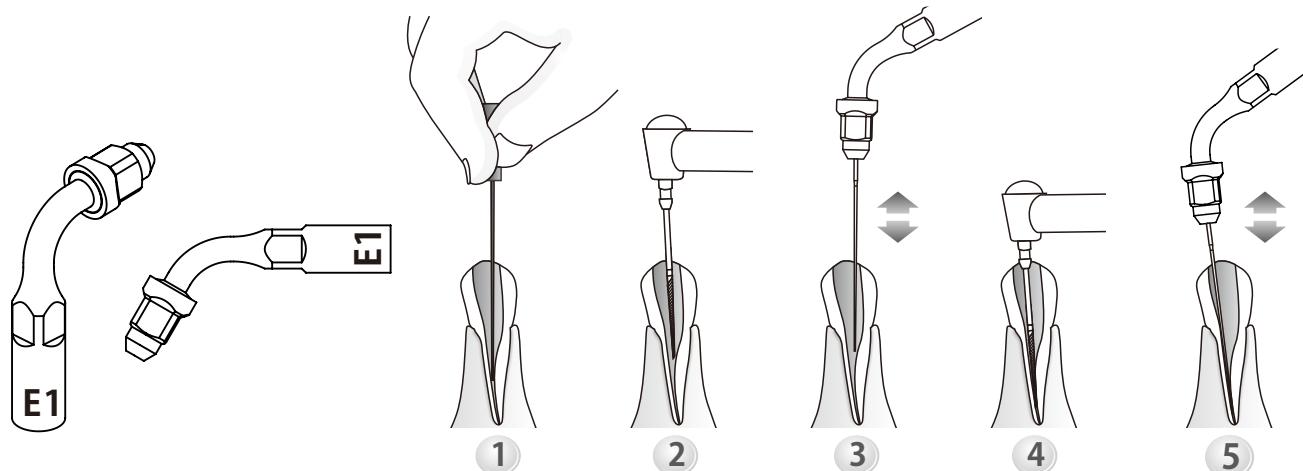

Используйте только плоский динамометрический ключ для закрепления держателей файлов на стоматологической насадке, а также для аккуратного закрепления файлов или инструментов в держателе. Не перетягивайте. Не затягивайте гайку держателя, если файл или инструмент в держателе не установлен, так как это может привести к его поломке. Используйте только надлежащее оборудование, используйте держатель с файлом диаметром 0,7 мм и 0,8 мм, вы не сможете установить файл 0,8 мм после установки на держателе файле 0,7 мм.

РЕЖИМ: Е

МОЩНОСТЬ

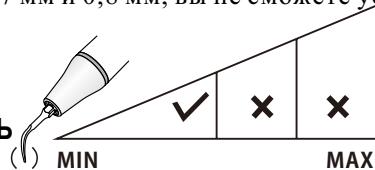

MIN

MIN

MAX




ИРРИГАЦИЯ

www.goldidem.ru

E2(ED2/ES2)

Держатель под углом 95°, используется для файла диаметром 0,7 мм или 0,8 мм.


Рекомендуется для очистки и промывания зубного канала, обычно используется для моляров.

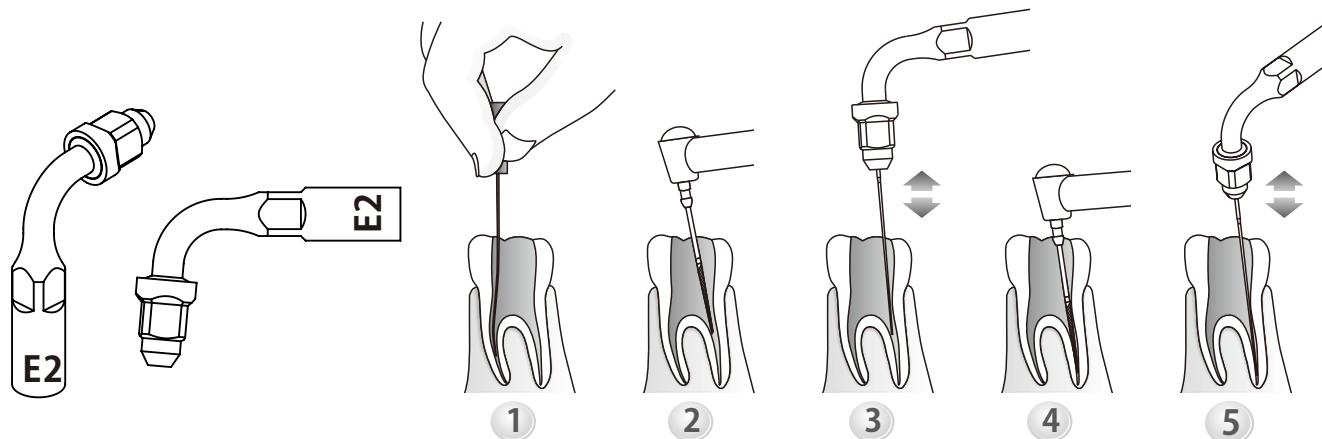

Используйте только плоский динамометрический ключ для закрепления держателей файлов на стоматологической насадке, а также для аккуратного закрепления файлов или инструментов в держателе. Не перетягивайте. Не затягивайте гайку держателя, если файл или инструмент в держателе не установлен, так как это может привести к его поломке. Используйте только надлежащее оборудование используйте держатель с файлом диаметром 0,7 мм и 0,8 мм, вы не сможете установить файл 0,8 мм после установки на держателе файле 0,7 мм.

РЕЖИМ: Е

МОЩНОСТЬ

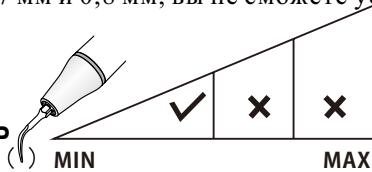


MIN

MAX

www.goldidem.ru

www.goldidem.ru

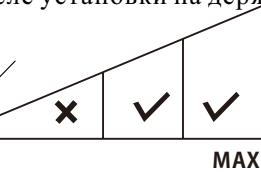

MIN

MAX


ИРРИГАЦИЯ

E3(ED3/ES3)

Рекомендуется для растапливания гуттаперчи.

Погрузите инструмент в эвгенол перед установкой в канал.

Слегка нажмите инструментом на гуттаперчевый штифт и активируйте инструмент, чтобы разогретая гуттаперча лучше обтурировала канал.

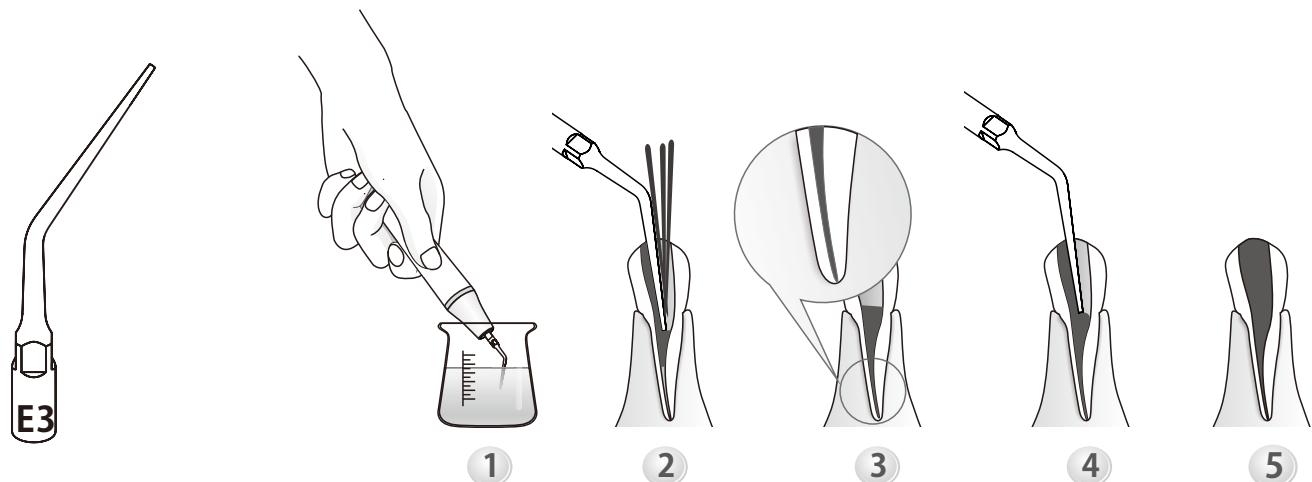

РЕЖИМ: Е

МОЩНОСТЬ




ИРИГАЦИЯ

E3D (ED3D/ES3D)

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для расширения зубного канала и формирования доступа к файлам, сломанных внутри канала.



Не трогайте сломанный файл при расширении зубного канала, иначе он может уйти в канал еще глубже.

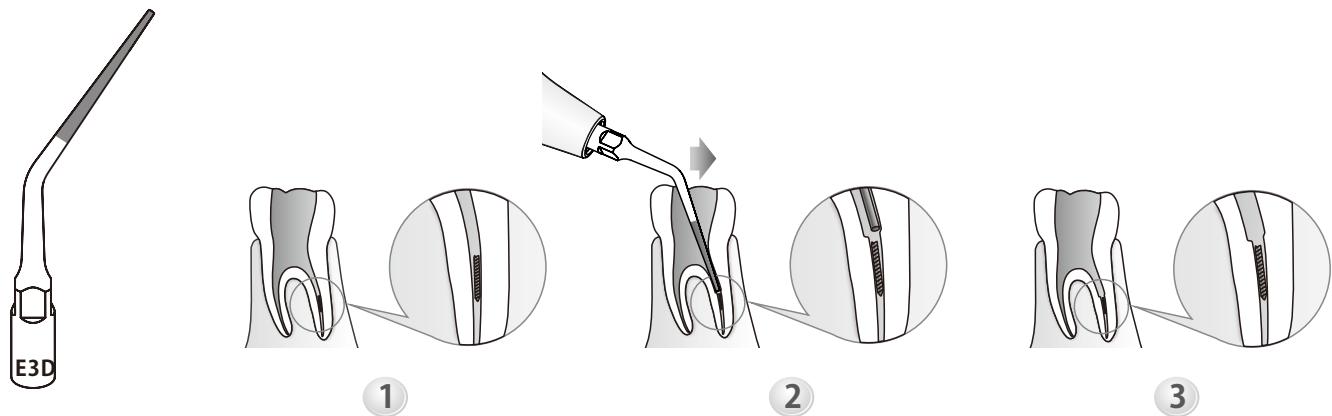

E4(ED4/ES4)


Используется для удаления препятствий при пломбировании корневого канала при его повторной обработке.

Длина части насадки малого диаметра составляет 22 мм.

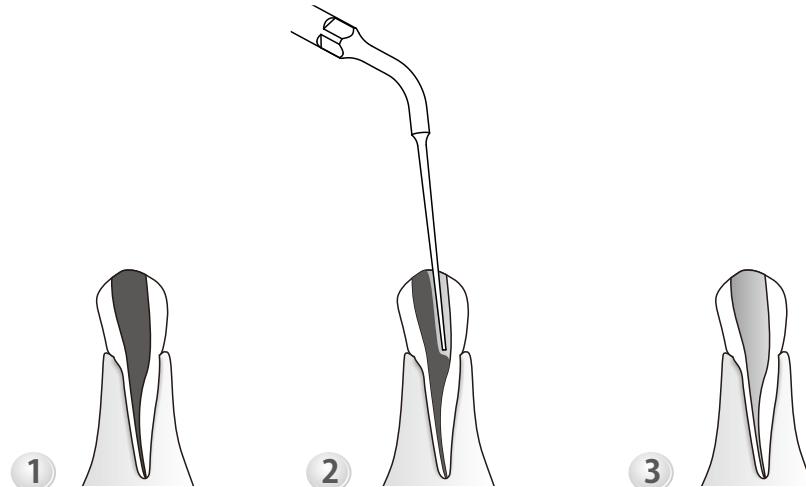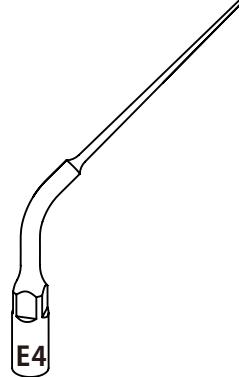


РЕЖИМ: Е

МОЩНОСТЬ

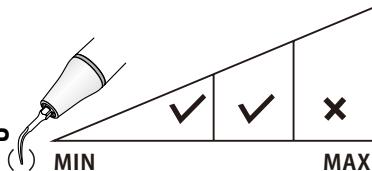


www.goldidens.ru

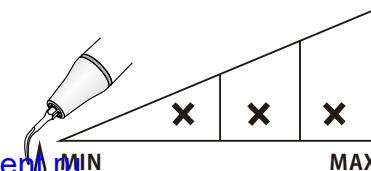

ИРРИГАЦИЯ



E4D(ED4D/ES4D)

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для удаления кальцифицированных фрагментов и плохо установленного пломбировочного материала в зубном канале при повторной обработке канала. Длина алмазного покрытия составляет 15 мм.

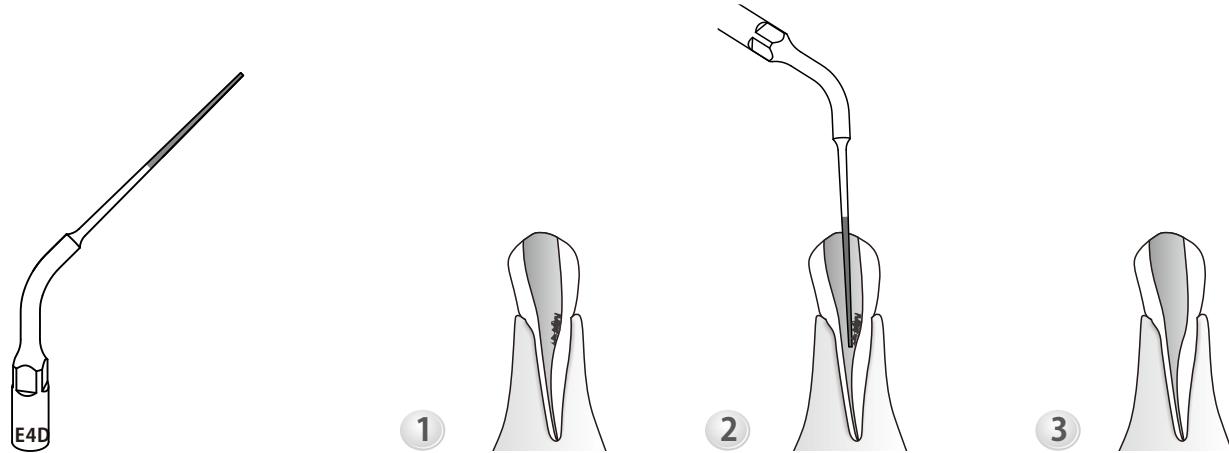


E5(ED5/ES5)


Используется для удаления препятствий при пломбировании корневого канала при его повторной обработке. Длина части насадки малого диаметра составляет 16 мм.

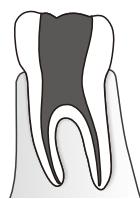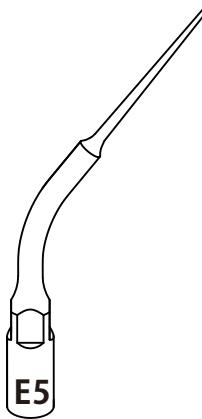

1

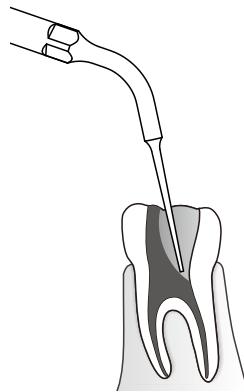


2

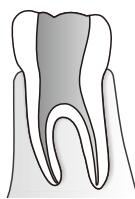


3

РЕЖИМ: Е

МОЩНОСТЬ

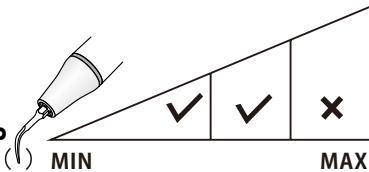


www.goldidens.ru

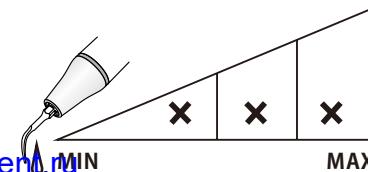

ИРРИГАЦИЯ


E5D(ED5D/ES5D)

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для удаления кальцифицированных фрагментов и плохо установленного пломбировочного материала в зубном канале при повторной обработке канала. Длина алмазного покрытия составляет 10 мм.

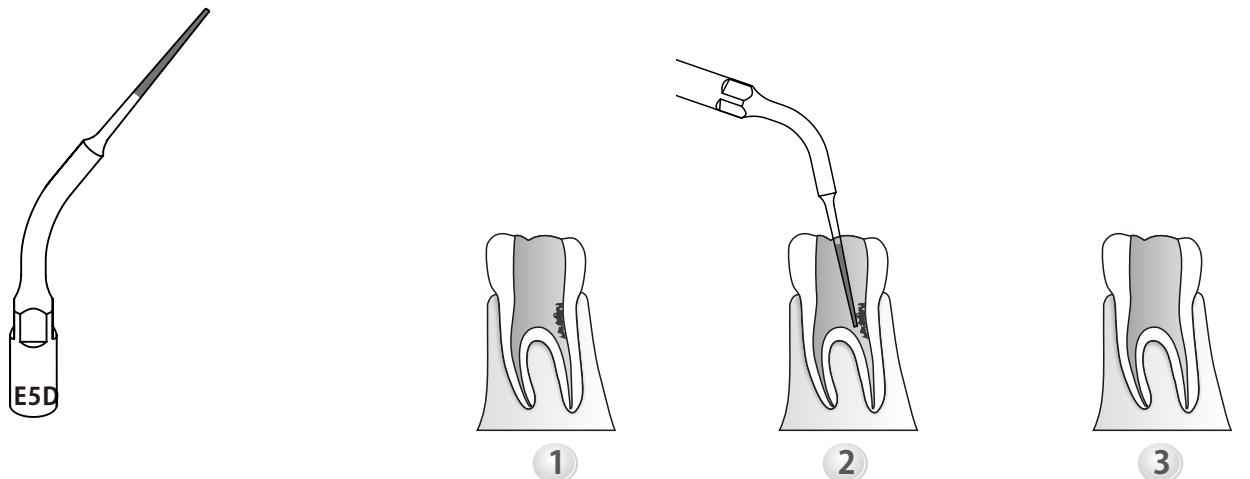

P4D(PD4D/PS4D)

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для ориентации зубного канала. Он также может использоваться для удаления кальцифицированных фрагментов, расположенных в 1/3 части зубного канала. Не нажимайте на инструмент слишком сильно во время обработки, чтобы не допустить повреждения корневого канала.

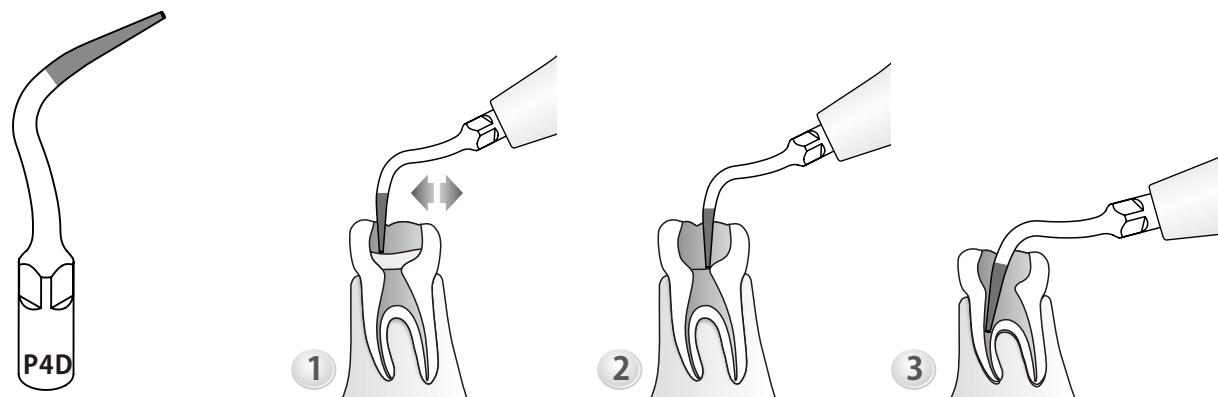


E8(ED8/ES8/EK8)

Рекомендуется для удерживания различных типов стоматологических боров для проведения различных процедур на зубах.

Обычно используется для фронтальной группы зубов.


Также могут использоваться особые боры для зубных имплантатов.

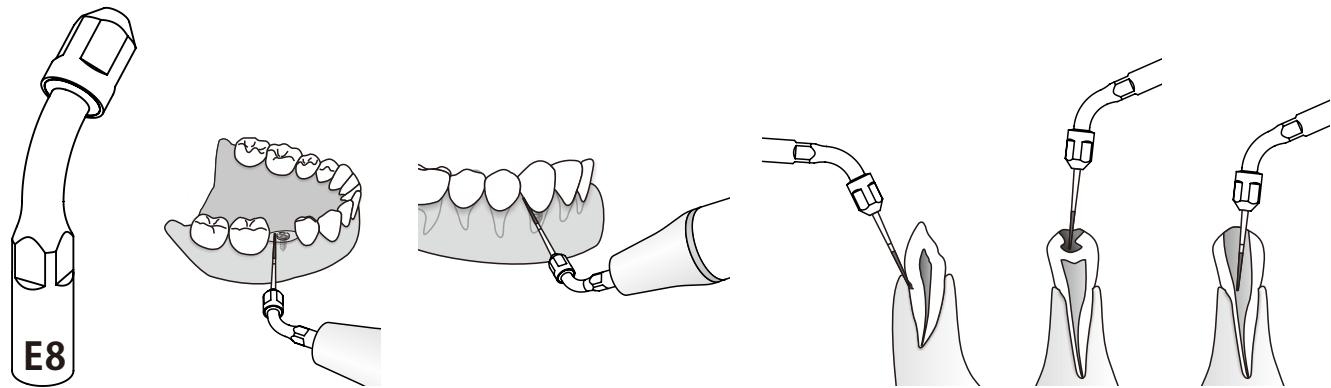

E9(ED9)


Рекомендуется для удерживания различных типов стоматологических боров для проведения различных процедур на зубах. Обычно используется для моляров.

Также могут использоваться особые боры для зубных имплантатов.

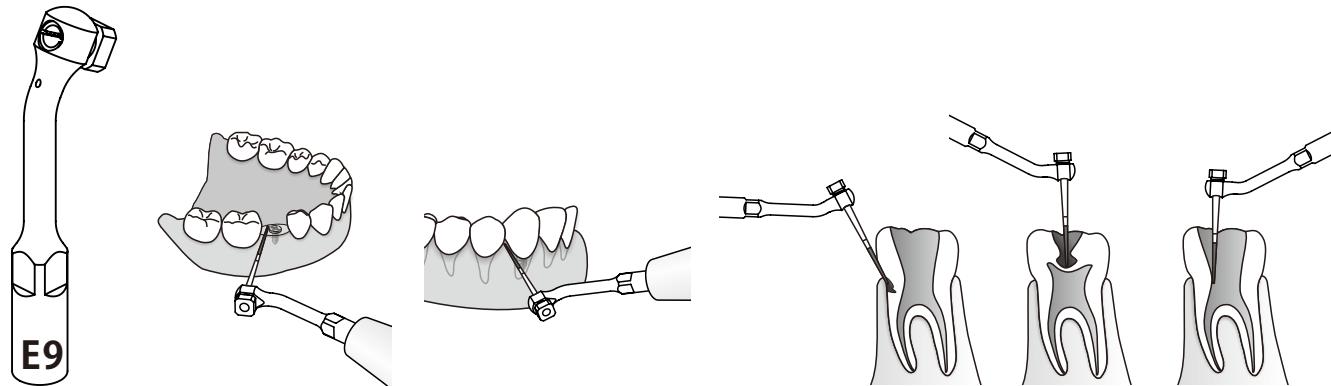


E10(ED10/ES10)

Используется при ретроградной подготовке зубных каналов.
Длина части насадки малого диаметра составляет 4,5 мм.

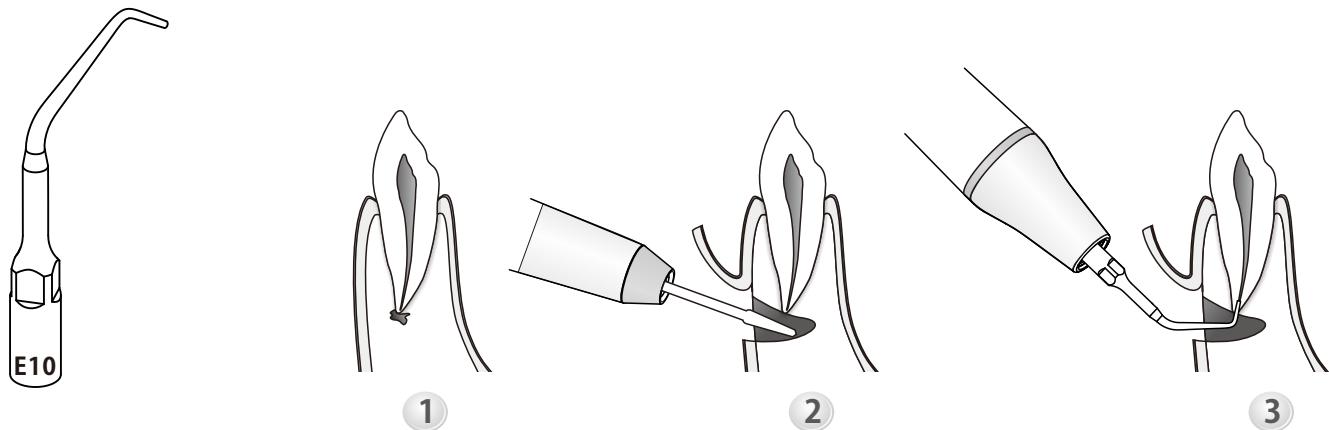


E10D(ED10D/ES10D)

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для высокоэффективного выравнивания поверхности корней в ретроградной подготовке зубных каналов.
Длина алмазного покрытия составляет 3,3 мм.

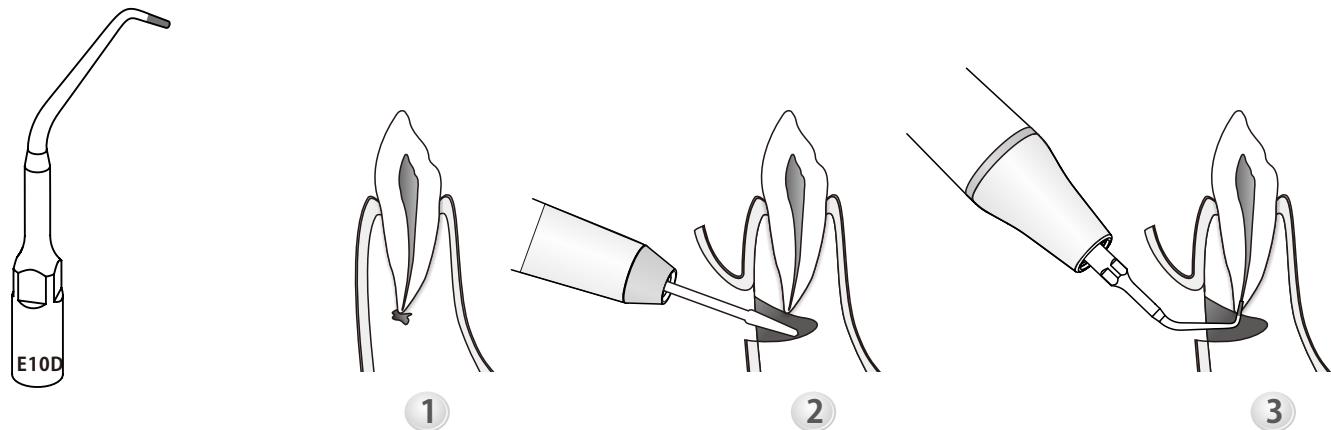

E11(ED11/ES11)


Используется при ретроградной подготовке зубных каналов.
Длина части насадки малого диаметра составляет 3,5 мм.

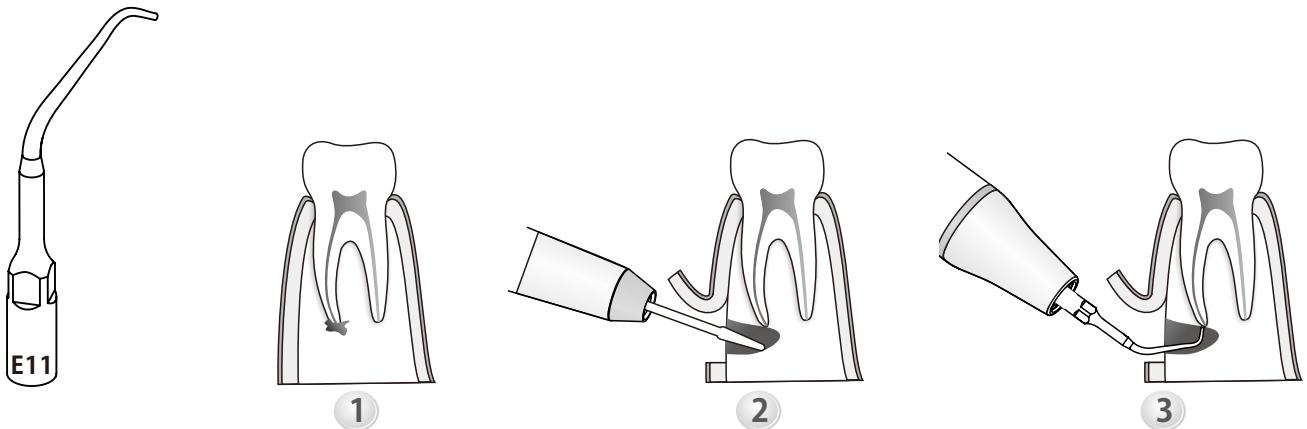

E11D(ED11D/ES11D)


Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для выравнивания поверхности корней в ретроградной подготовке зубных каналов.

Длина алмазного покрытия составляет 2,2 мм.

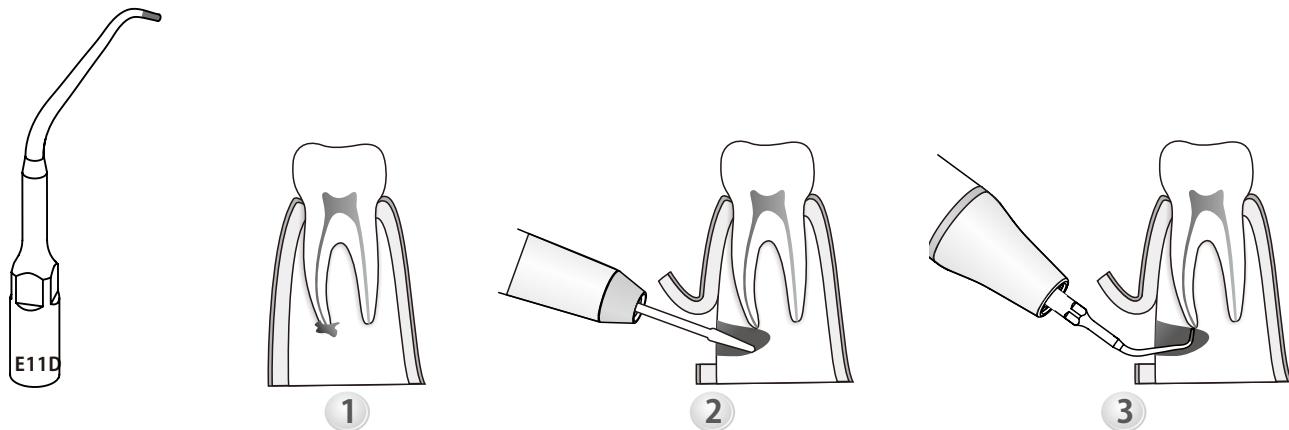


РЕЖИМ: Е

МОЩНОСТЬ

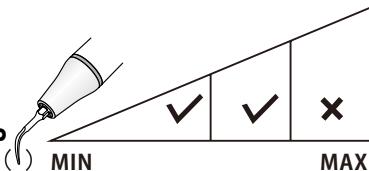

www.goldidens.ru

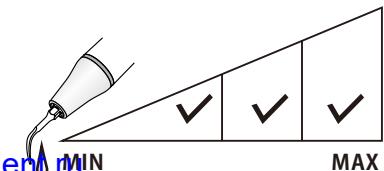


ИРРИГАЦИЯ

E14(ED14/ES15)

Инструмент для удаления сломанных файлов внутри зубного канала. Длина части насадки малого диаметра составляет 22 мм.

Если возможно, расположите голову пациента так, чтобы зубной канал находился на горизонтальной поверхности с наклоном вниз. Вращайте наконечник инструмента по направлению часовой стрелки вокруг сломанной части до тех пор, пока она не будет извлечена из зубного канала.


Чтобы не допустить углубления сломанного файла в зубном канале, не используйте давления на инструмент в осевом направлении.

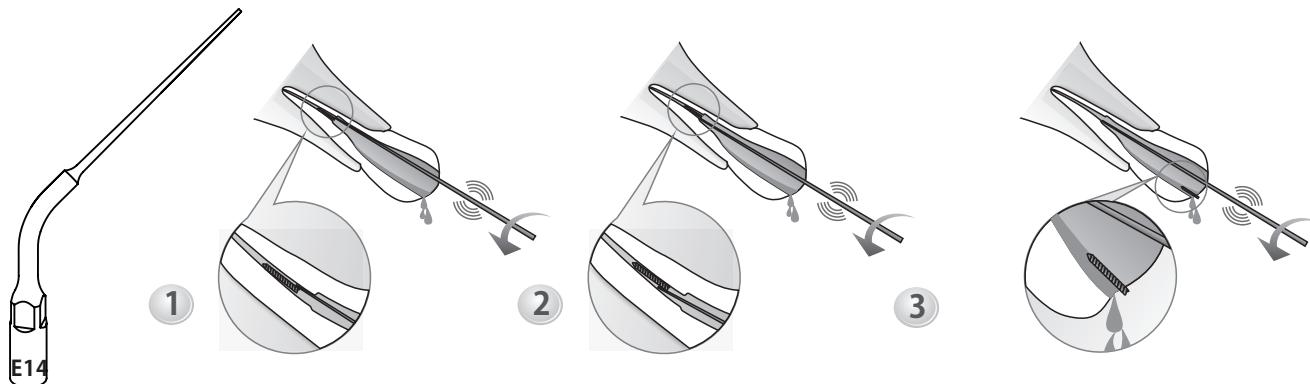

E14D(ED14D/ES14D)

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для удаления кальцифицированных фрагментов в канале зуба. Применяется для чистки и расширения зубного канала.


Длина алмазного покрытия составляет 15 мм.

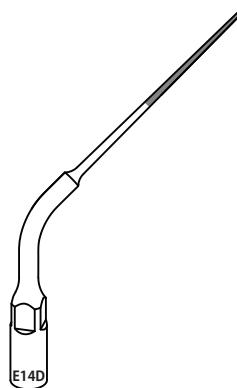

1




2

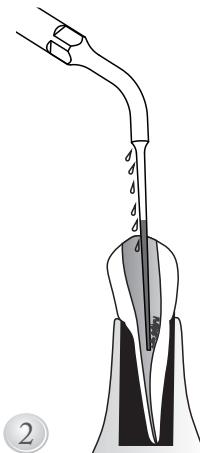


3



РЕЖИМ: Е
МОЩНОСТЬ

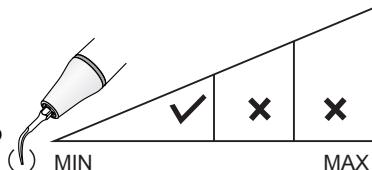

www.goldidens.ru

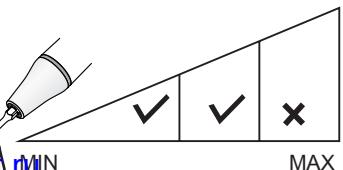


ИРРИГАЦИЯ

E15(ED15/ES15)

Инструмент для удаления сломанных файлов внутри зубного канала. Длина части насадки малого диаметра составляет 16 мм.

Если возможно, расположите голову пациента так, чтобы зубной канал находился на горизонтальной поверхности с наклоном вниз. Вращайте наконечник инструмента по направлению часовой стрелки вокруг сломанной части до тех пор, пока она не будет извлечена из зубного канала.



Чтобы не допустить углубления сломанного файла в зубном канале, не используйте давления на инструмент в осевом направлении.

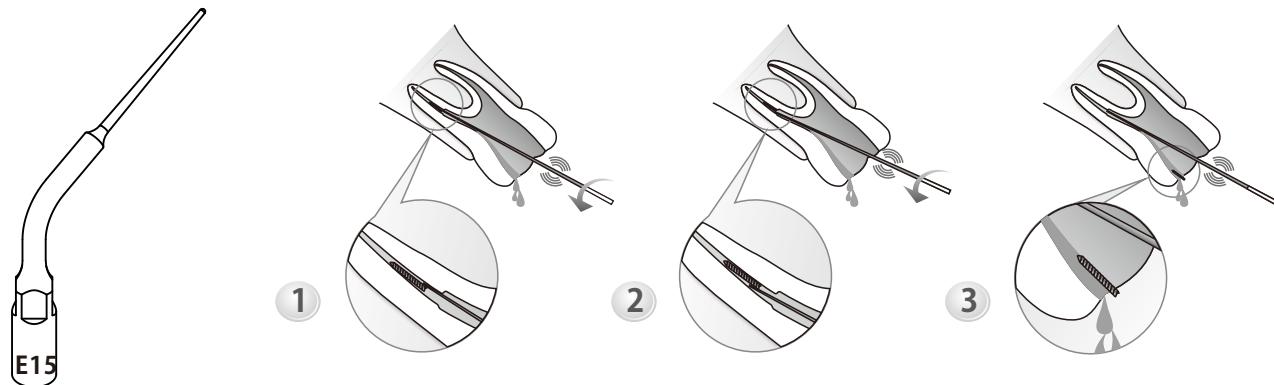


E15D(ED15D/ES15D)

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для удаления кальцифицированных фрагментов в канале зуба. Применяется для чистки и расширения зубного канала.


Длина алмазного покрытия составляет 10 мм.

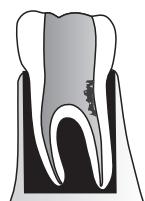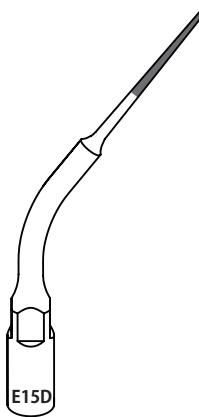

1

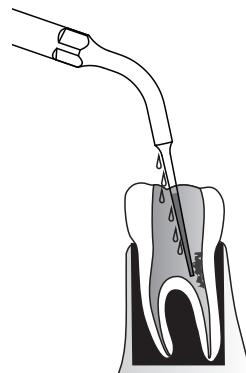


2

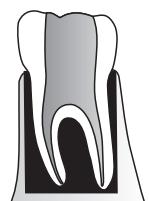


3

РЕЖИМ: Е
МОЩНОСТЬ

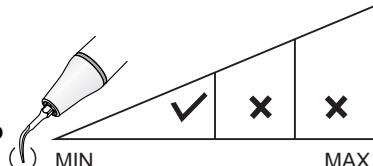

www.goldidens.ru

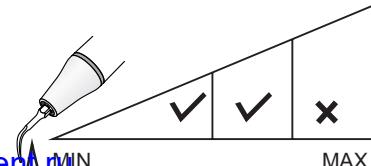


ИРРИГАЦИЯ

SB1 (SBD1)


Инструмент с алмазным покрытием (85 мкм) для удаления кариеса на окклюзионной поверхности зубов и на шейке зуба.

Расположите инструмента на кариозной полости и медленно двигайте им, легко надавливая

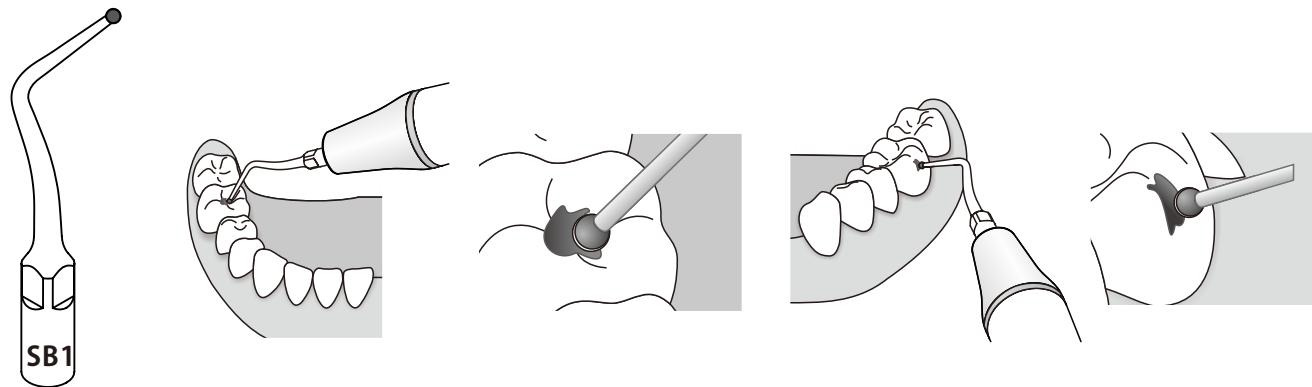

РЕЖИМ: Р

МОЩНОСТЬ

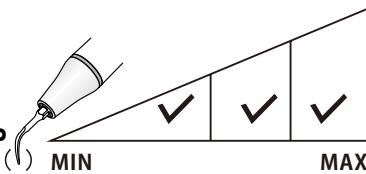

www.goldidens.ru


MIN MAX



ИРРИГАЦИЯ

SB2 (SBD2)

Инструмент с алмазным покрытием (85 мкм) для удаления кариеса на мезиальной поверхности смежных зубов.

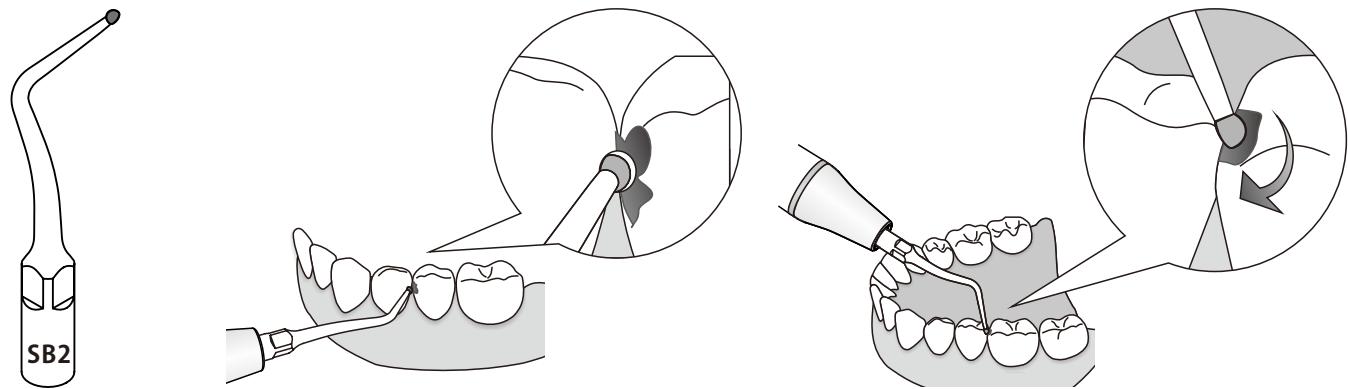

РЕЖИМ: Р




МОЩНОСТЬ



ИРРИГАЦИЯ


SB3 (SBD3)

Инструмент с алмазным покрытием (85 мкм) для удаления кариеса на дистальной поверхности зубов.

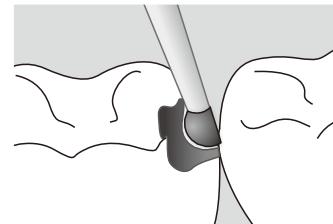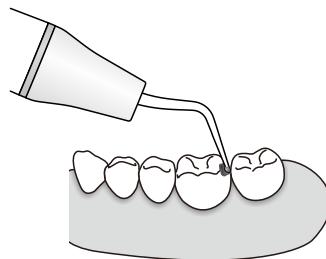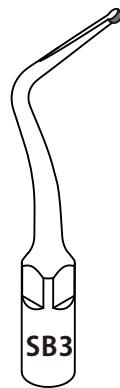


РЕЖИМ: Р

МОЩНОСТЬ

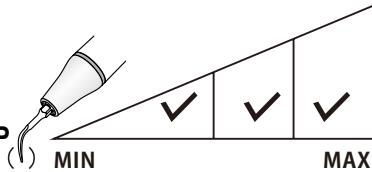


www.goldidem.ru

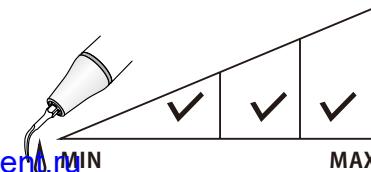

ИРРИГАЦИЯ


SBL(SBDL)

Инструмент с алмазным покрытием (85 мкм) для удаления зубного кариеса, он не повреждает смежные зубы в связи с наклоном рабочей части под углом 45° справа налево.

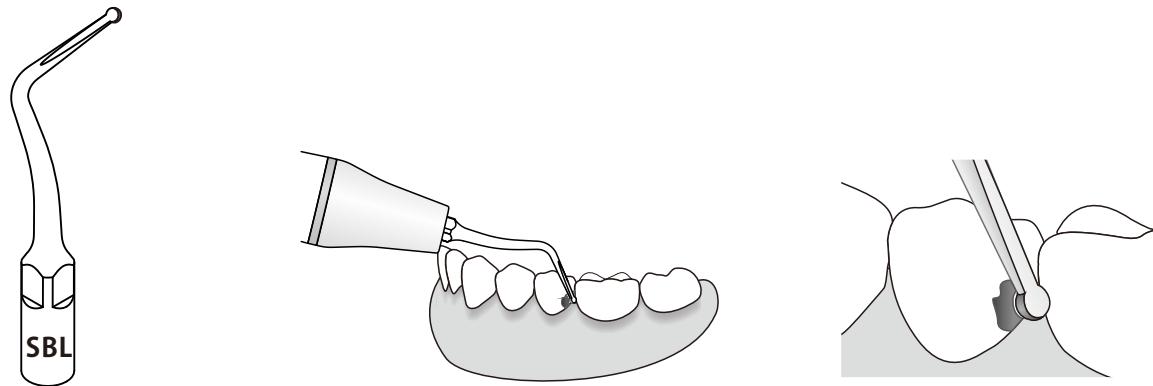




SBR(SBDR)

Инструмент с алмазным покрытием (85 мкм) для удаления зубного кариеса, он не повреждает смежные зубы в связи с наклоном рабочей части под углом 45° слева направо.

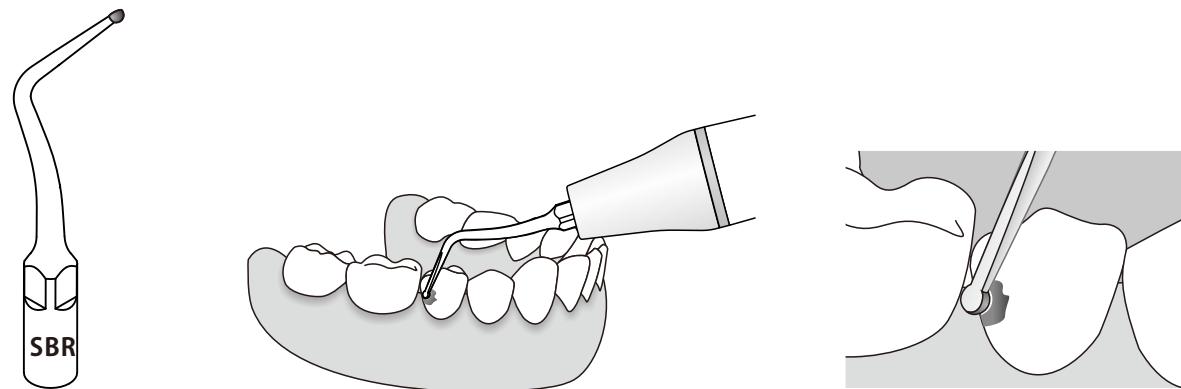




GK1

Удаление наддесневых зубных отложений во всех квадрантах.

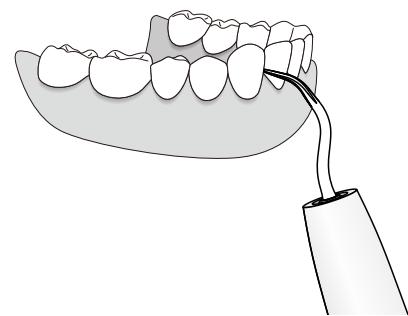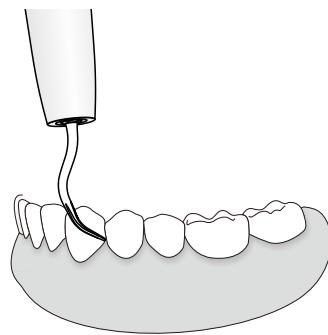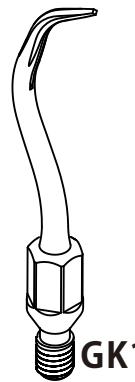




GK2

Удаление наддесневых зубных отложений.

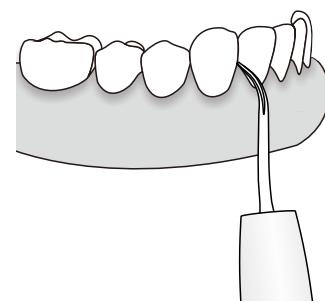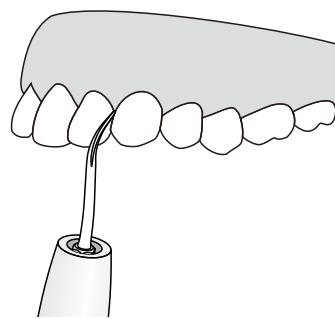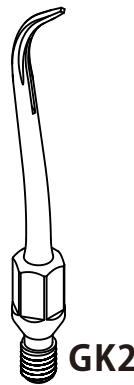


GK3

Удаление наддесневого зубного камня, межзубного камня и камня у шейки зубов.

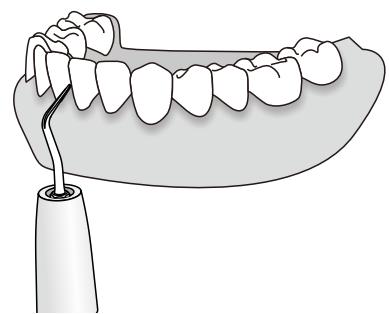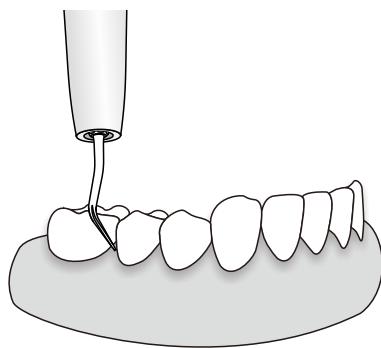
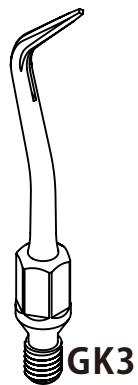


GK4

Удаление наддесневого зубного камня, включая межзубные промежутки и область десневых борозд.



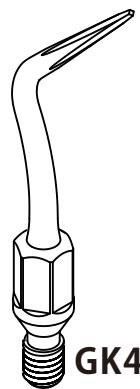


GK4

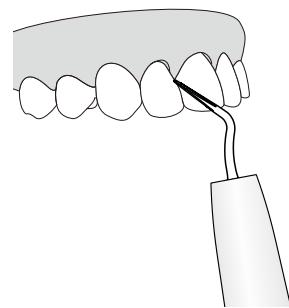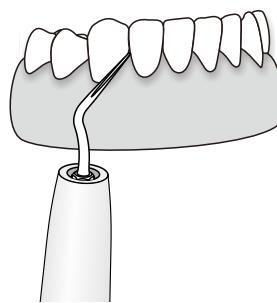





GK5

Удаление поддесневого зубного камня.

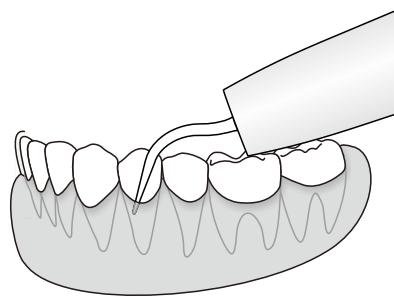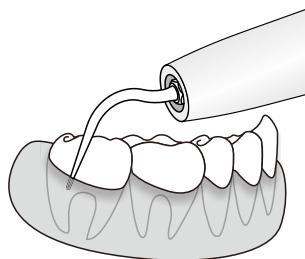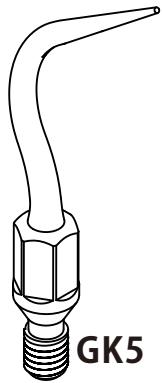


GK6

Инструмент, изогнутый под углом в левую сторону, для удаления поддесневого зубного камня.

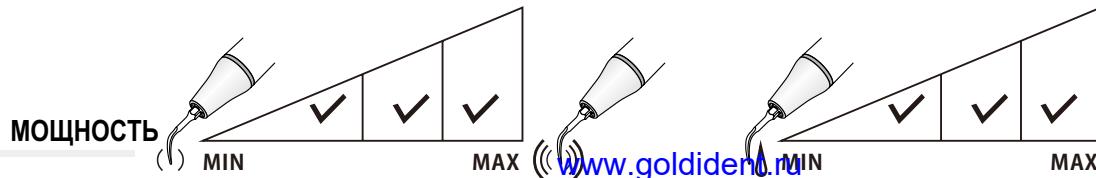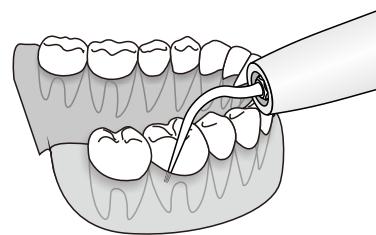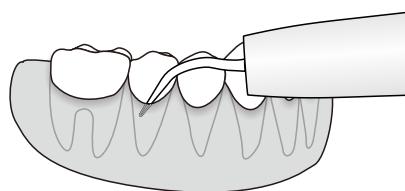
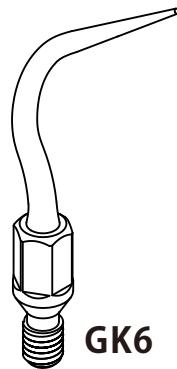


GK7

Инструмент, изогнутый под углом в правую сторону, для удаления поддесневого зубного камня.

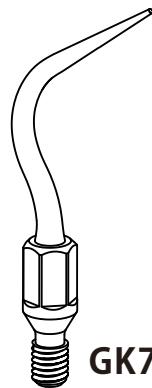


GK7

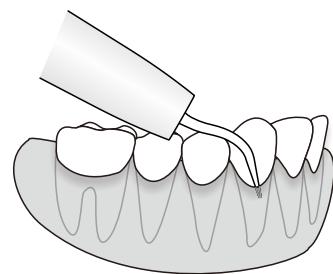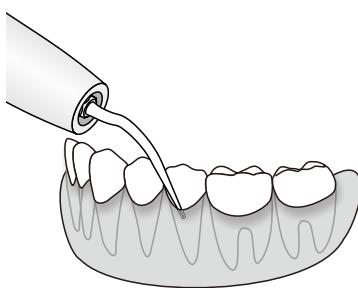


GC1

Удаление наддесневых зубных отложений во всех квадрантах.

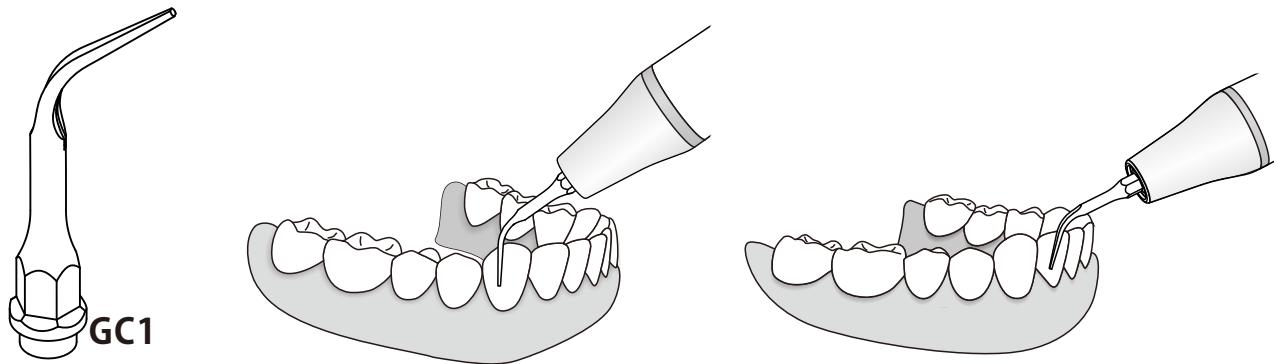


GC2

Удаление наддесневого камня, межзубного камня и камня у шейки зубов.

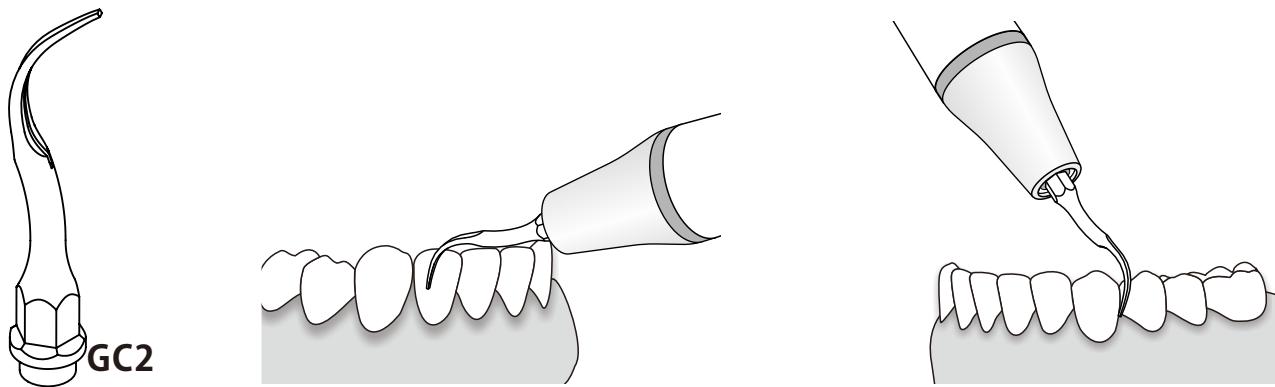


РЕЖИМ: G

МОЩНОСТЬ

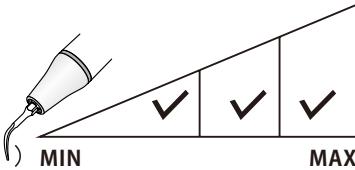




www.goldident.ru

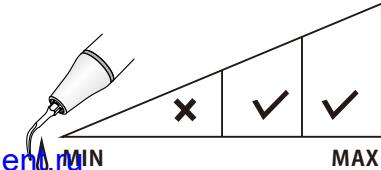

ИРРИГАЦИЯ


PC1

Удаление поддесневых зубных отложений, включая межзубные промежутки и область десневых борозд.

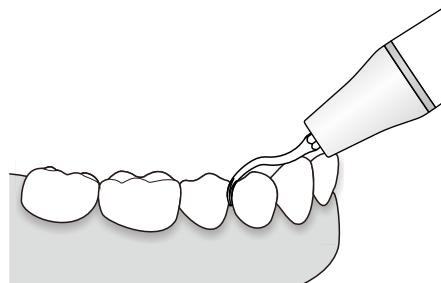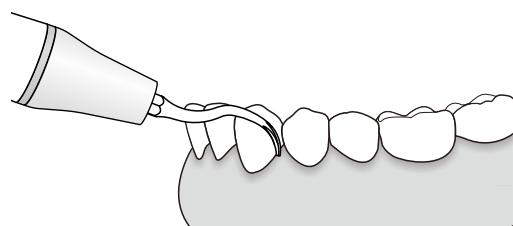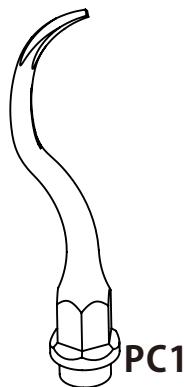


РЕЖИМ: Р

МОЩНОСТЬ

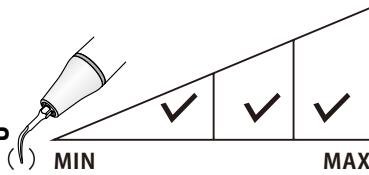


www.goldident.ru

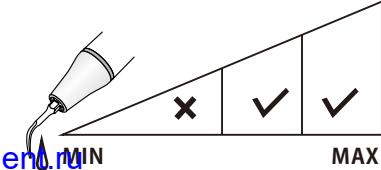



ИРРИГАЦИЯ

A1

Удаление наддесневых зубных отложений, включая межзубные промежутки и область десневых борозд.

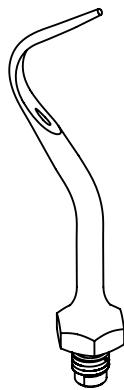


A1

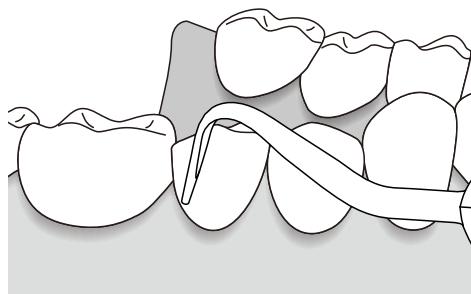
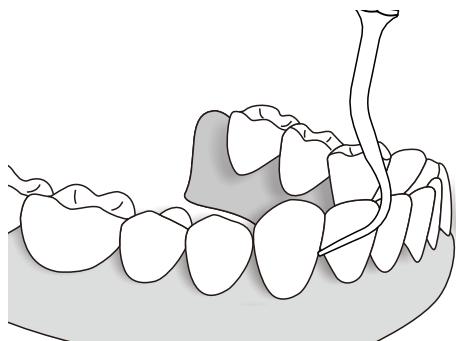


A2

Удаление наддесневого камня во всех квадрантах, включая шейки зубов и смежные части зубов.




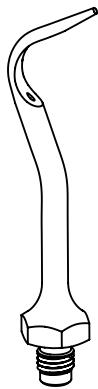


A2

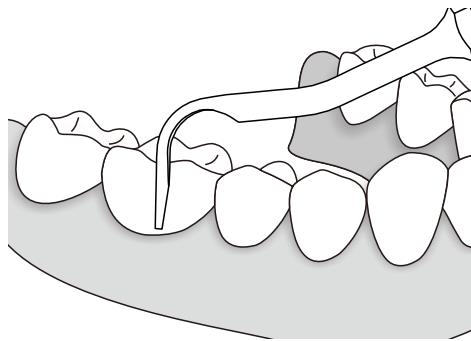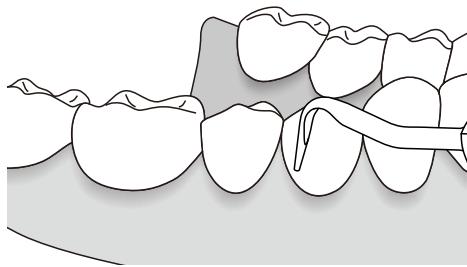

US1


Высокоэффективное разделение крупных участков зубов, инструмент может использоваться для удаления зуба.

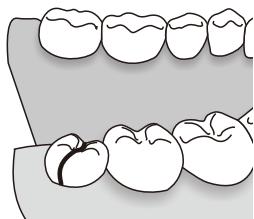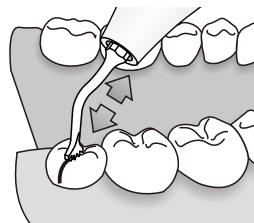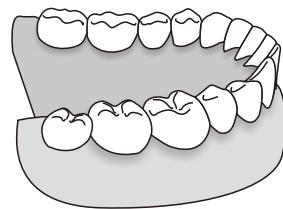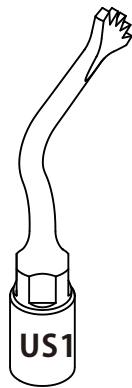

РЕЖИМ: BONE

МОЩНОСТЬ Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)




www.goldident.ru

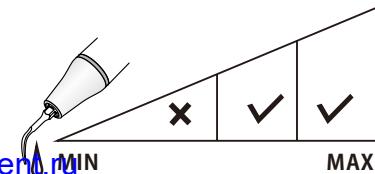


ИРРИГАЦИЯ

US1L


Левый угол 90°, техника горизонтальной остеотомии на нижней и верхней челюсти.

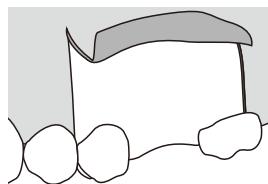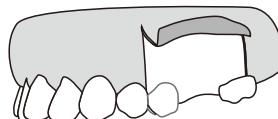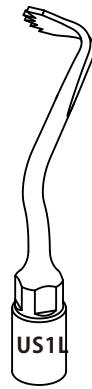

1

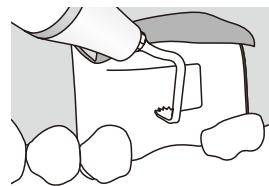

2

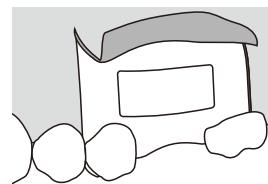


3

РЕЖИМ: BONE

МОЩНОСТЬ Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)




www.goldidem.ru

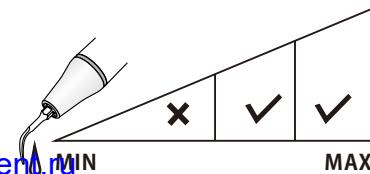


ИРРИГАЦИЯ

US1R


Правый угол 90°, техника горизонтальной остеотомии на нижней и верхней челюсти.

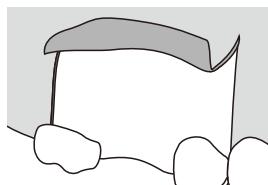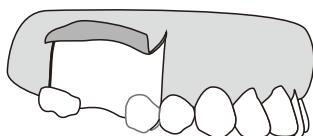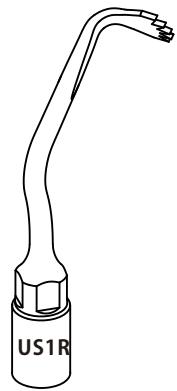

1

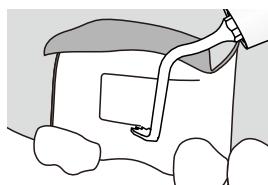

2


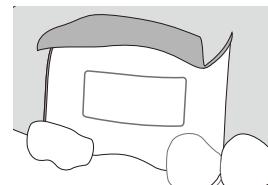


3

РЕЖИМ: BONE

МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)



www.goldident.ru

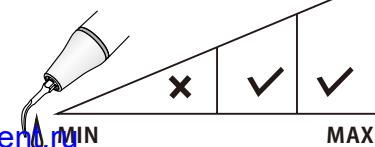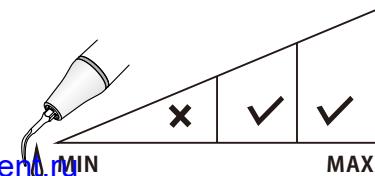


ИРРИГАЦИЯ

US2


Высокоэффективная остеотомия на нижней и верхней челюсти (увеличение гребня, техника кортикотомии, имплантация костного блока).

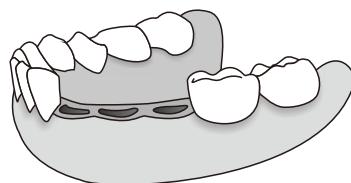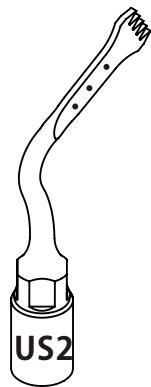

1

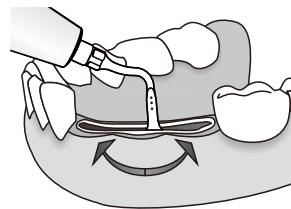

2

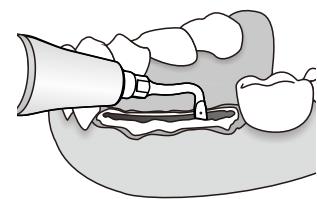


3

РЕЖИМ: BONE

МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)




www.goldident.ru

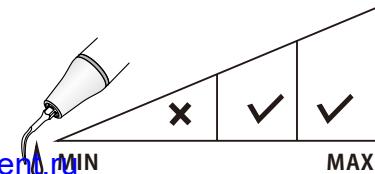


ИРРИГАЦИЯ

US3


Остеотомия: остеотом высокой точности на анатомически тонких структурах.

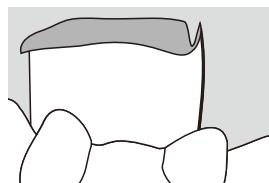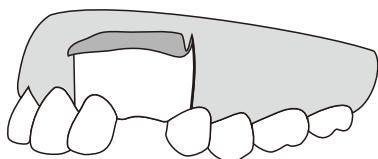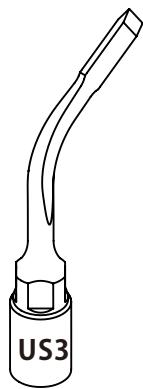

1

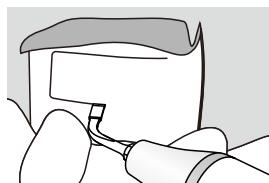

2

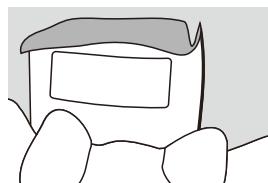


3

РЕЖИМ: BONE

МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3

(Кортикальный/губчатый)




www.goldidens.ru

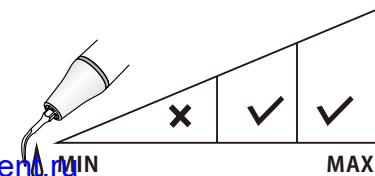


ИРРИГАЦИЯ

US4

Универсальная остеопластика: Периодонтальная остеэктомия, сбор обломков кости, удаление воспалительной ткани (кисты и т.д.)

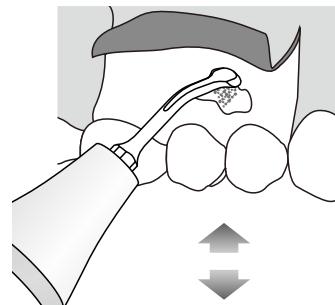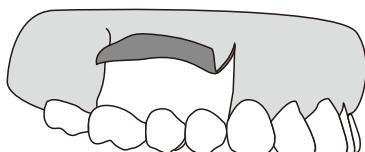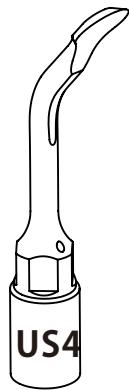

1

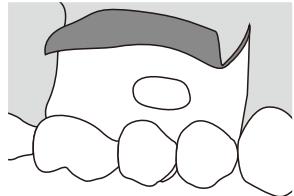


2

РЕЖИМ: BONE

МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)



www.goldident.ru

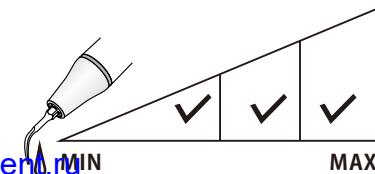


ИРРИГАЦИЯ

US5


Высокоэффективная остеопластика кости: ремоделирование кости и сбор обломков кости.

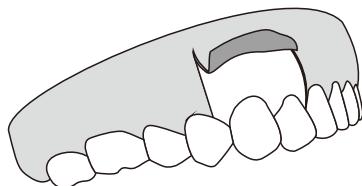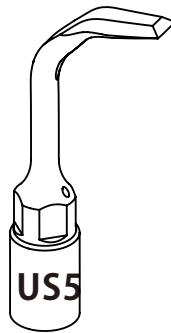

1

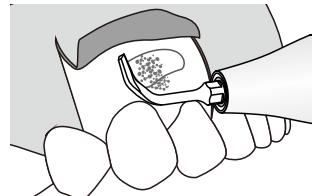

2

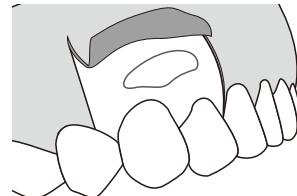


3

РЕЖИМ: BONE

МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)



www.goldident.ru

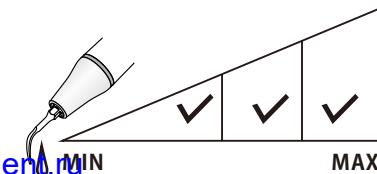


ИРРИГАЦИЯ

US6


Остеотомия: остеотом высокой точности на анатомически тонких структурах (увеличение гребня, техника кортикотомии, имплантация костного блока).

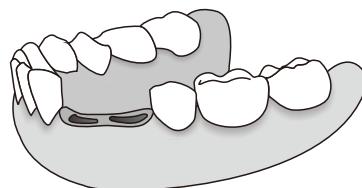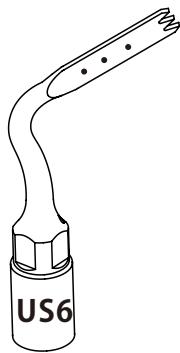

1

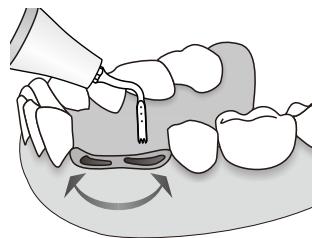

2

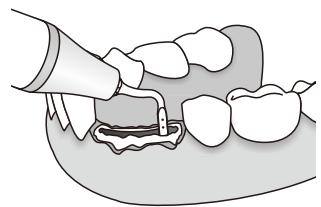


3

РЕЖИМ: BONE

МОЩНОСТЬ: Special


www.goldidens.ru

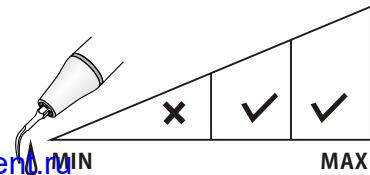

ИРРИГАЦИЯ

UL1


Наклон наконечника под углом 120°, отслаивание мембранны верхнечелюстной пазухи во внутренних зонах, нережущий стоматологический элеватор мембранны верхнечелюстной пазухи.

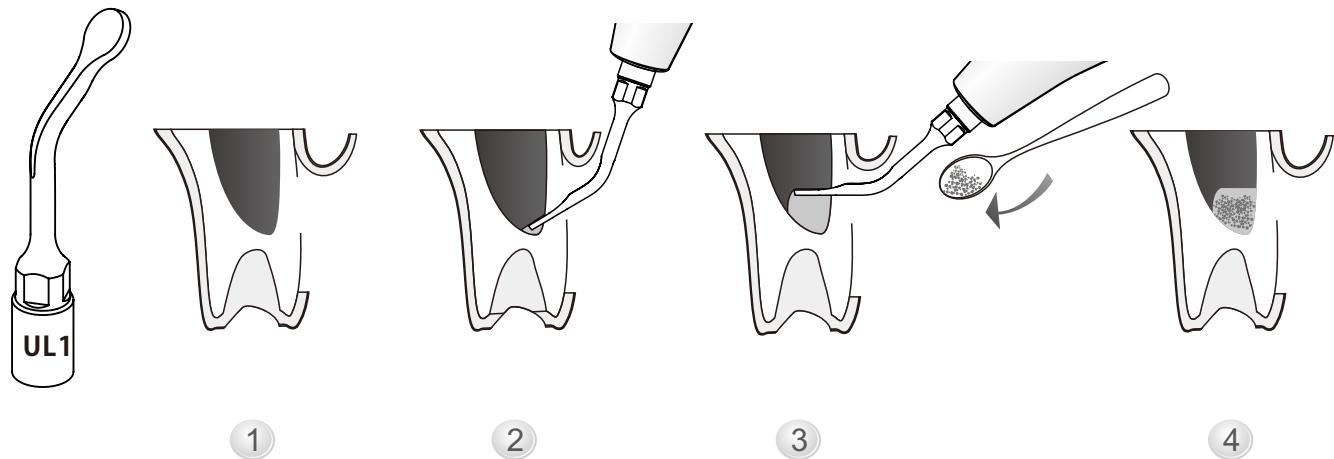

РЕЖИМ: ROOT

МОЩНОСТЬ: Endo(максимальная разрешенная мощность)




www.goldidem.ru

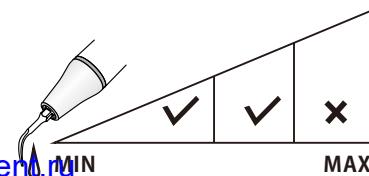

ИРРИГАЦИЯ

UL2


Отслаивание мембраны Шнайдера от стенок кости: отслаивание мембраны верхнечелюстной пазухи.

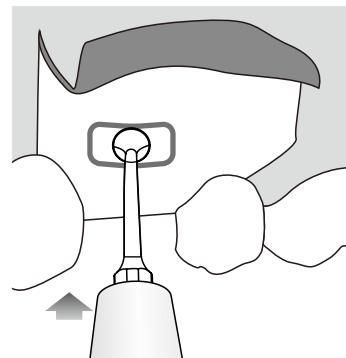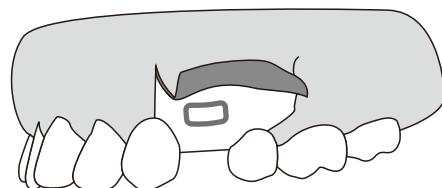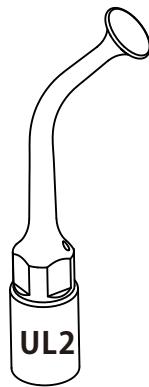

РЕЖИМ: ROOT

МОЩНОСТЬ: Endo(максимальная разрешенная мощность)



www.goldidens.ru

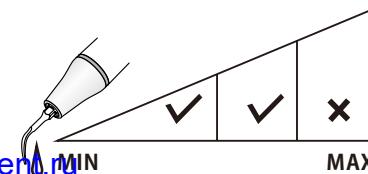


ИРРИГАЦИЯ

UL3

Инструмент с алмазным покрытием (100 мкм) для микрометрической остеотомии или остеопластики: нетравматичная техника, завершение остеотомии или остеопластики на тонкой кости и/или рядом с нежными анатомическими структурами.

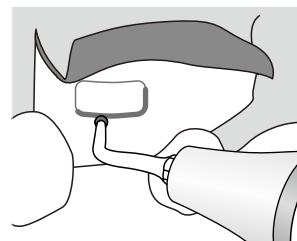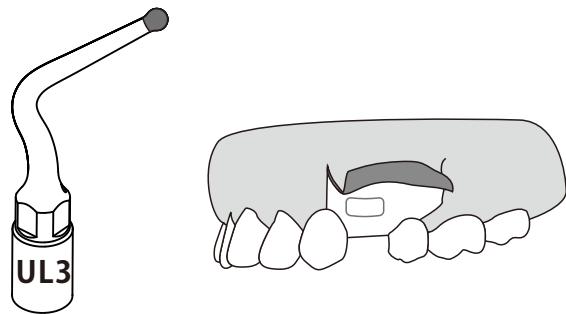

1

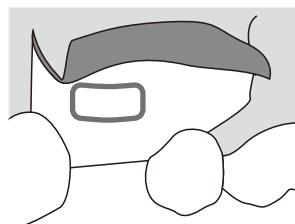


2

РЕЖИМ: BONE

МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)




www.goldident.ru

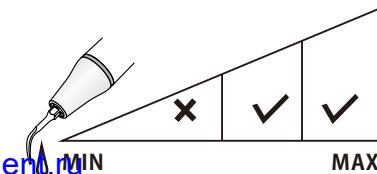


ИРРИГАЦИЯ

UL4

Инструмент с алмазным покрытием (100 мкм) для микрометрической остеотомии: для завершения остеотомии вблизи мягкой ткани (мембрана пазухи, сосуд, нижнеальвеолярный нерв).

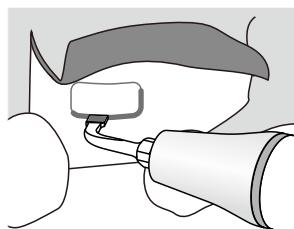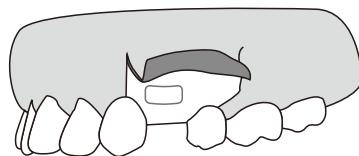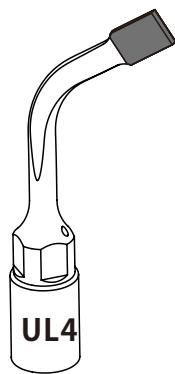

1

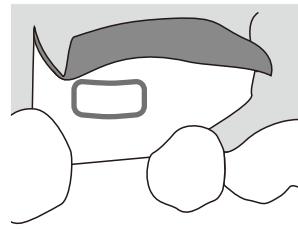


2

РЕЖИМ: BONE

МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)


www.goldidens.ru

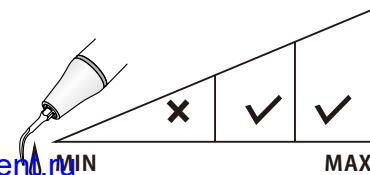

ИРРИГАЦИЯ

UL5


Наклон наконечника под углом 95°, отслаивание мембранны верхнечелюстной пазухи во внутренних зонах, нережущий стоматологический элеватор мембранны верхнечелюстной пазухи.

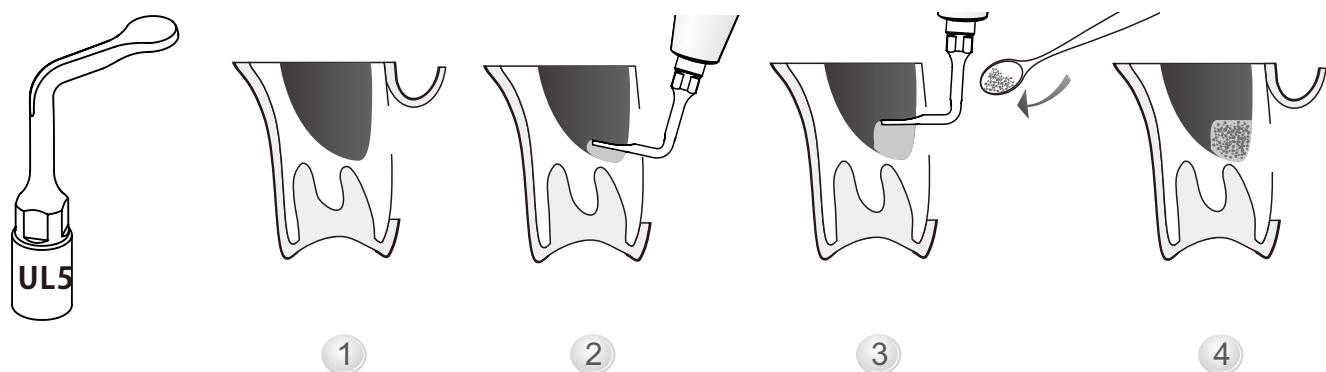

РЕЖИМ: ROOT



МОЩНОСТЬ: Endo(максимальная разрешенная мощность)

www.goldident.ru

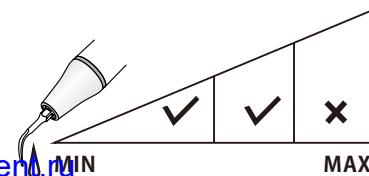


UE1


Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для санации верхушки корня: инструмент с алмазным покрытием для эффективного выравнивания поверхности корней.
Длина части с алмазным покрытием составляет 3,3 мм.

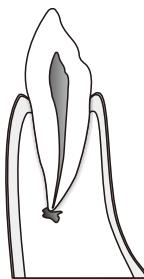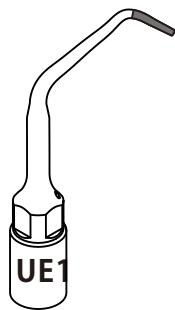

1

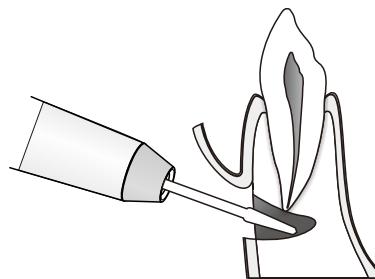

2

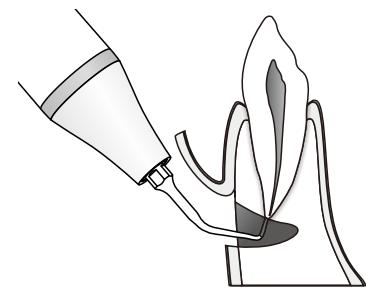

3

РЕЖИМ: ROOT

МОЩНОСТЬ: Endo(максимальная разрешенная мощность)





www.goldidens.ru



ИРРИГАЦИЯ

UE2

Используется для мягкой очистки канала. Длина части насадки малого диаметра составляет 4,5 мм.

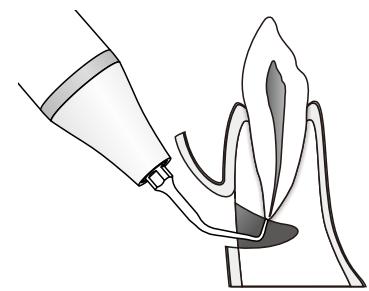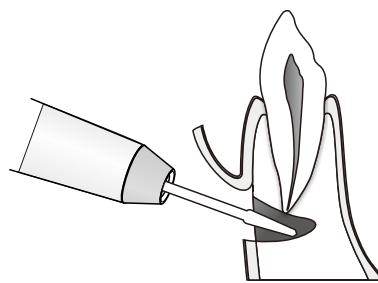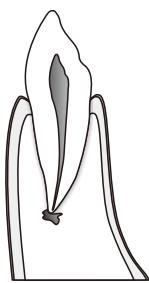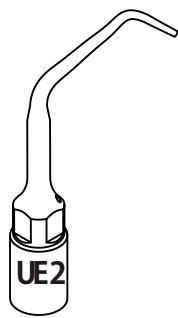

1

2


3

РЕЖИМ: ROOT

МОЩНОСТЬ: Endo(максимальная разрешенная мощность)

www.goldidens.ru



MIN MAX

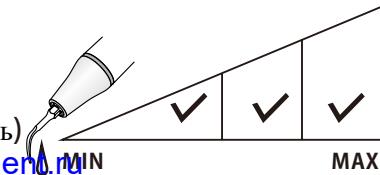


ИРРИГАЦИЯ

UE3

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для санации верхушки корня: инструмент с алмазным покрытием для эффективного выравнивания поверхности корней. Длина части насадки с алмазным покрытием составляет 2,2 мм.

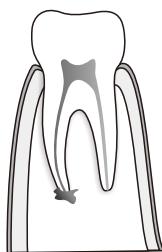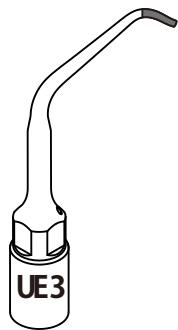

1

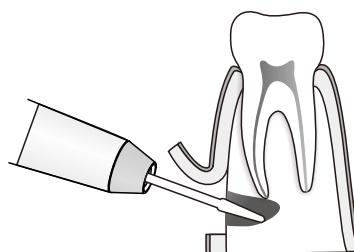

2




3

РЕЖИМ: ROOT

МОЩНОСТЬ: Endo(максимальная разрешенная мощность)



www.goldidenu.ru

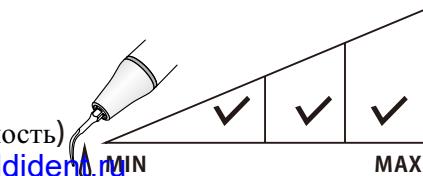


ИРРИГАЦИЯ

UE4


Используется для мягкой очистки канала. Длина части насадки малого диаметра составляет 3,5 мм.

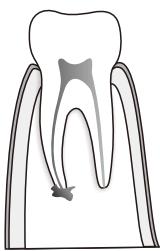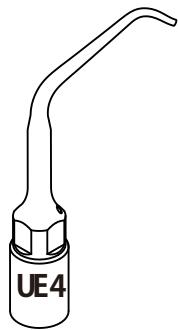

1

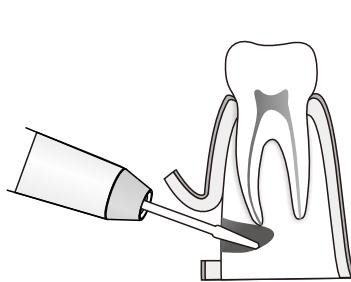

2

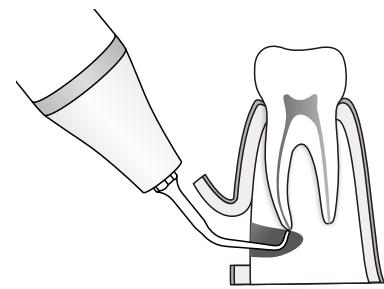


3

РЕЖИМ: ROOT

МОЩНОСТЬ: Endo(максимальная разрешенная мощность)

www.goldidens.ru




MIN MAX

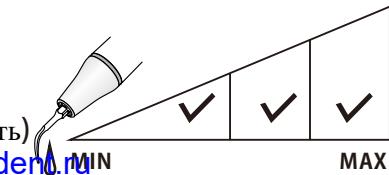

ИРРИГАЦИЯ

UC1


Используется для обрезания анкилозированной кости и удаления фрагментов корня.

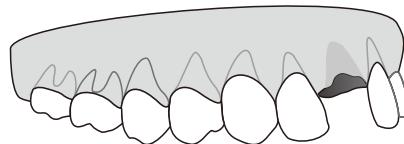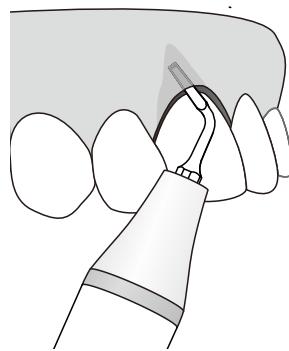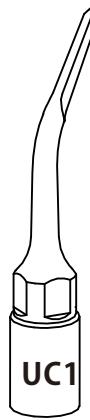

РЕЖИМ: BONE

МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)




www.goldident.ru

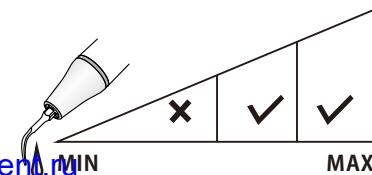


ИРРИГАЦИЯ

UI1


Вставка для подготовки установки имплантата Ø1.6 мм. Рабочая длина составляет 9 мм.

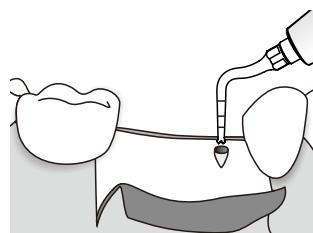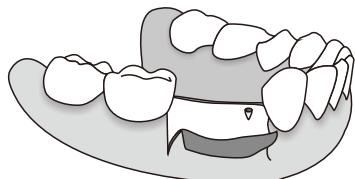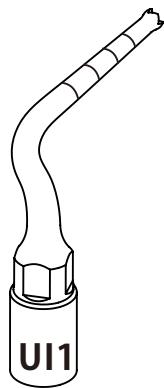

1

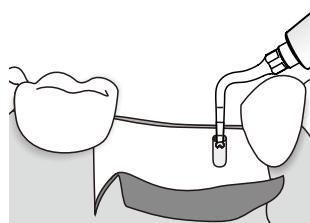

2

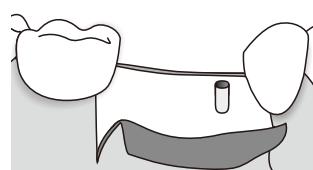


3

РЕЖИМ: BONE

МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)




www.goldident.ru

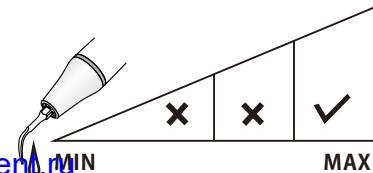


ИРРИГАЦИЯ

UI2


Вставка для подготовки установки имплантата Ø2 мм. Отверстие в центре верхней части инструмента для разбрзгивания воды снижает температуру.

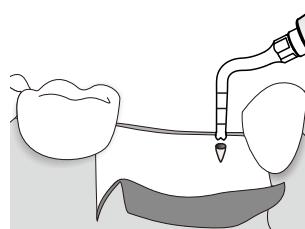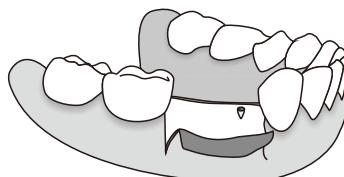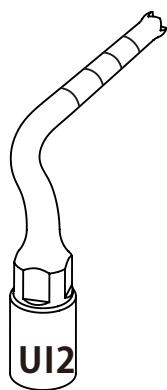

1

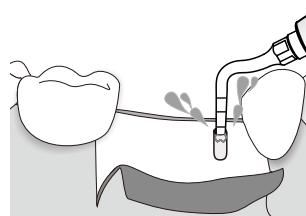

2

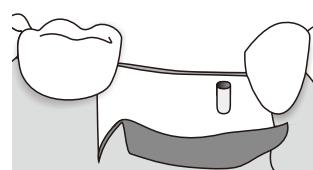


3

РЕЖИМ: BONE

МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)

www.goldident.ru

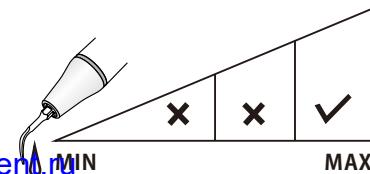

MIN

X

X




✓




ИРРИГАЦИЯ

UI7

Инструмент с алмазным покрытием (85 мкм) для завершения обработки места для установки имплантата рядом с альвеолярным нервом.

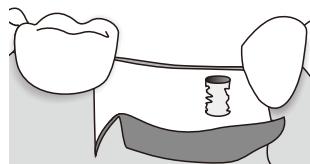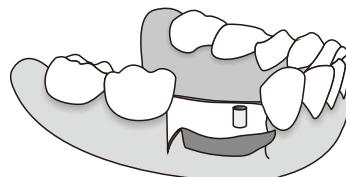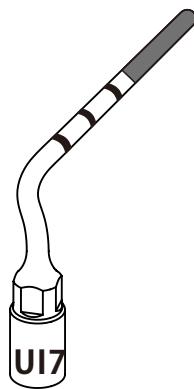

1

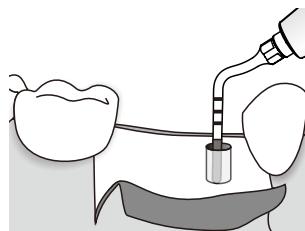

2




3

РЕЖИМ: BONE

МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)




www.goldidens.ru

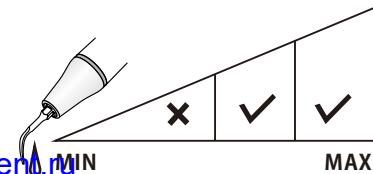


ИРРИГАЦИЯ

UI8


Вставка для подготовки установки имплантата Ø1.6 мм. Рабочая длина составляет 15 мм.

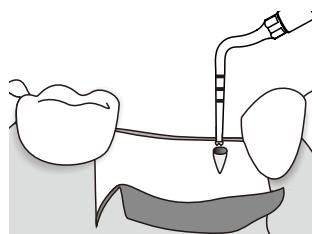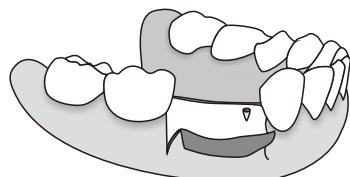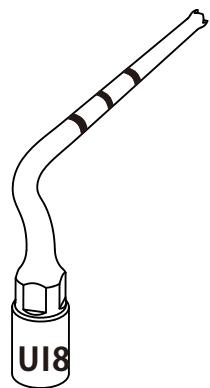

1

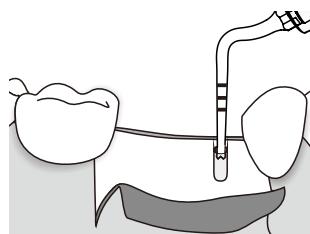

2

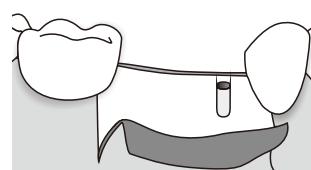


3

РЕЖИМ: BONE

МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)




www.goldident.ru

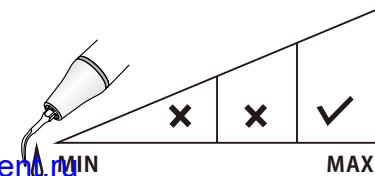


ИРРИГАЦИЯ

UI9


Вставка для подготовки установки имплантата Ø2,8 мм. Отверстие в центре верхней части инструмента для разбрзгивания воды снижает температуру кости.

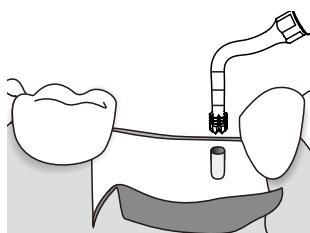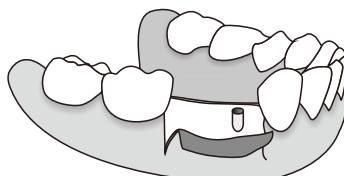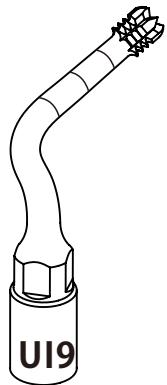

1

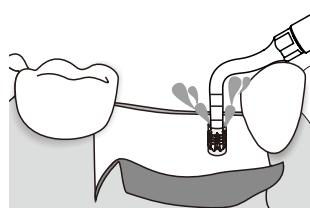

2

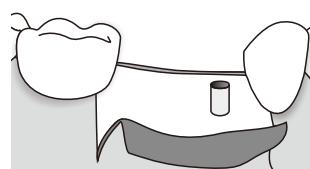


3

РЕЖИМ: BONE

МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)



www.goldidem.ru

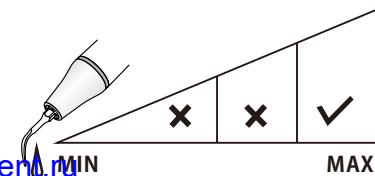


ИРРИГАЦИЯ

UP1


Рекомендуется для периодонтального щадящего удаления налета и камня кюретажем.

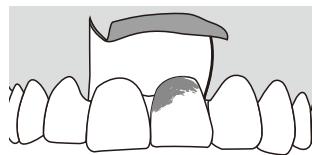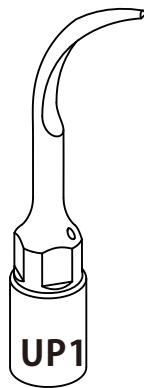

1

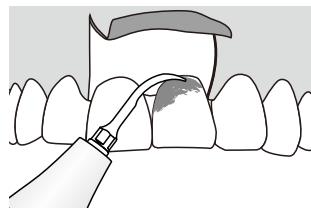

2

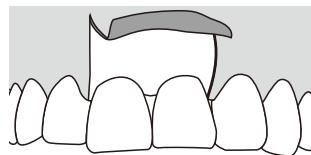


3

РЕЖИМ: ROOT

МОЩНОСТЬ: PERIO




www.goldident.ru

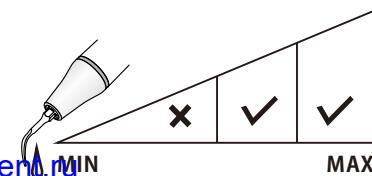


ИРРИГАЦИЯ

UP2


Удаление воспалительной ткани и извлечение апекса обломков зубов.

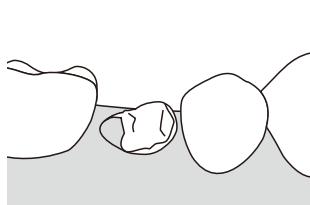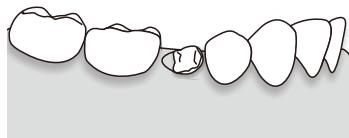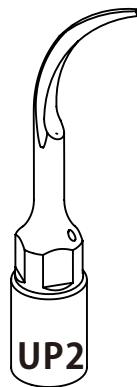

1

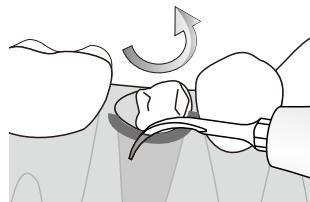

2

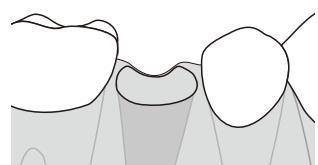


3

РЕЖИМ: ROOT

МОЩНОСТЬ: PERIO




www.goldident.ru

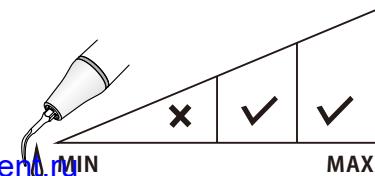


ИРРИГАЦИЯ

UP3

Рекомендуется для щадящего удаления пигментированного зубного налета и камня кюретажем под углом.

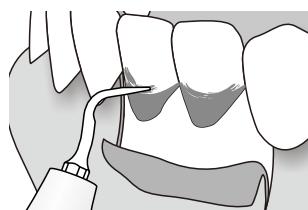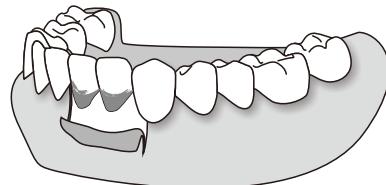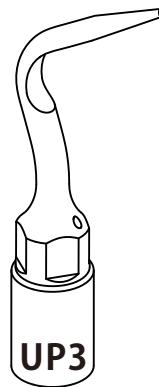

1

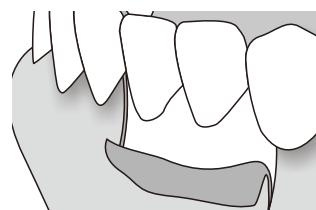


2

РЕЖИМ: ROOT

МОЩНОСТЬ: PERIO





www.goldidens.ru

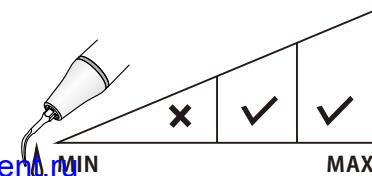

ИРРИГАЦИЯ

UP4

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для санации корня зуба и выравнивания поверхности зубного корня.

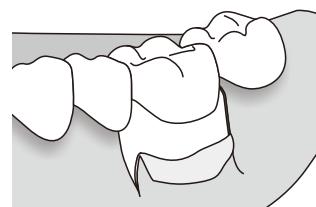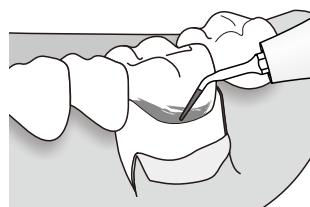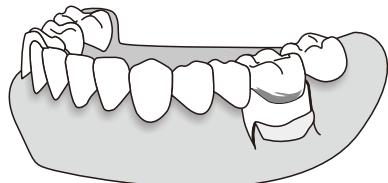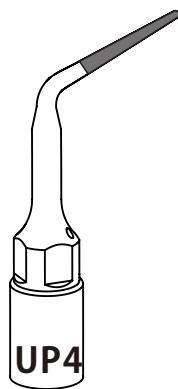


1

2

РЕЖИМ: ROOT

МОЩНОСТЬ: PERIO




www.goldident.ru

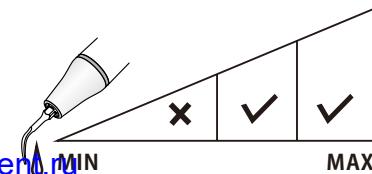


ИРРИГАЦИЯ

UP5

Рекомендуется для микровыравнивания поверхности зубного корня.

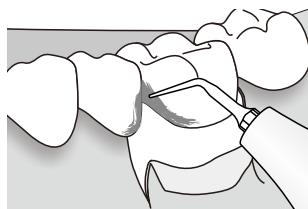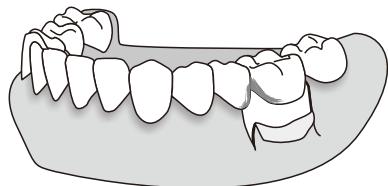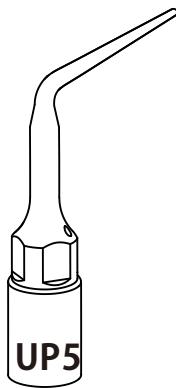

1

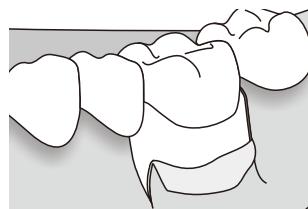


2

РЕЖИМ: ROOT

МОЩНОСТЬ: PERIO





www.goldident.ru

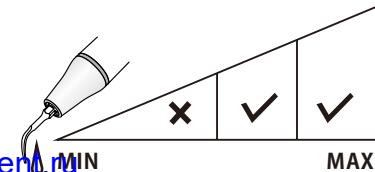

ИРРИГАЦИЯ

UP6

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для микро-остеопластики: остеопластика межзубных промежутков и выравнивания поверхностей зубных корней.

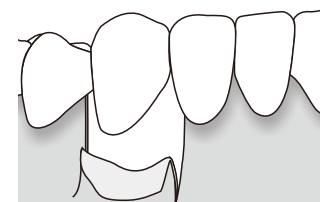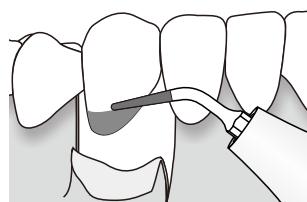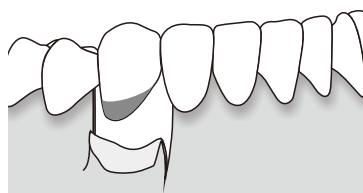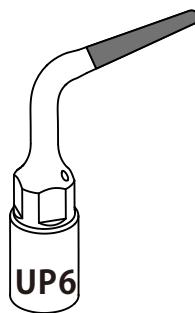


1

2

РЕЖИМ: ROOT

МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)


www.goldident.ru

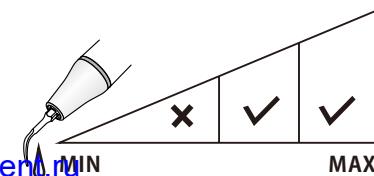

ИРРИГАЦИЯ

UP7

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для ориентации зубного канала и удаления кальцифицированных фрагментов, расположенных в 1/3 части зубного канала.
Он также может использоваться для микро остеопластики.

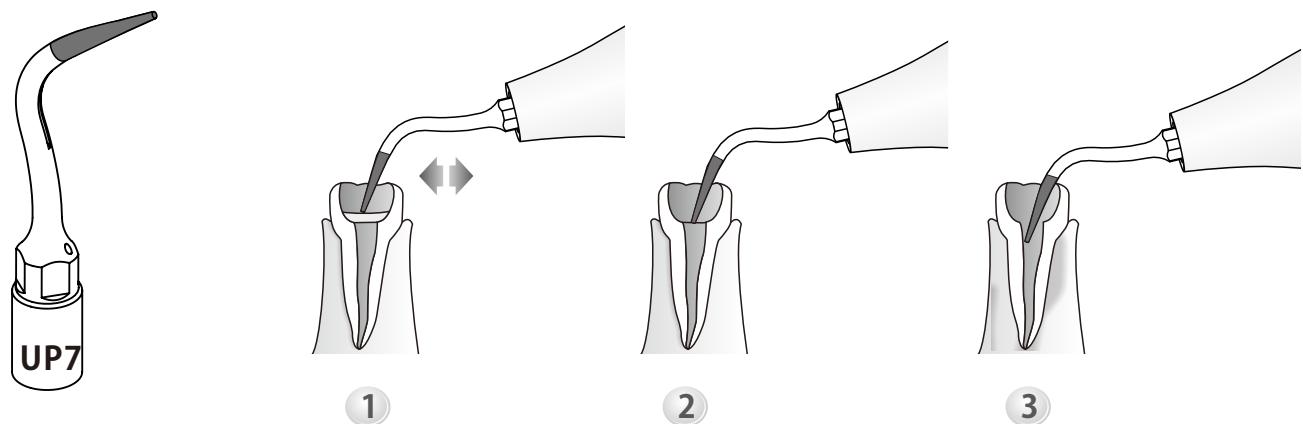


РЕЖИМ: ROOT

МОЩНОСТЬ: Endo (максимальная разрешенная мощность)

www.goldidens.ru

MIN MAX

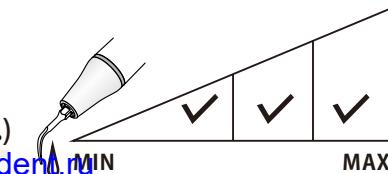

ИРРИГАЦИЯ

Рекомендуемая мощность скалеров Woodpecker

WOODPECKER Модель Насадка	UDS-E (LED) UDS-L (LED) UDS-A (LED) UDS-P (LED)	UDS-J2 (LED)	UDS-J UDS-B UDS-K (LED)	UDS-N3 (LED)	UDS-N1 UDS-N2 (LED) UDS-N4	
Удаление зубного камня						
G1	1-10 (G)	1-10	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	Совместимость с WOODPECKER & EMS Ultrasonic Scalers
G2	1-10 (G)	1-10	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	
G3	1-10 (G)	1-10	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	
G4	1-10 (G)	1-10	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	
G5	1-10 (G)	1-10	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	
G6	1-10 (G)	1-10	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	
G7	1-10 (G)	1-10	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	
G8	1-10 (G)	1-10	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	
G9	1-10 (G)	1-10	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	
G10	1-10 (G)	1-10	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	
G11	1-10 (G)	1-10	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	
Периодонтит						
P1	1-10 (P)	1-7	1-6	LOW-MID	LOW-MID	Совместимость с WOODPECKER & EMS Ultrasonic Scalers
P2L	1-3 (P)	1-2	1-2	LOW	LOW	
P2LD	1-2 (P)	1	1	LOW	LOW	
P2R	1-3 (P)	1-2	1-2	LOW	LOW	
P2RD	1-2 (P)	1	1	LOW	LOW	
P3	1-6 (P)	1-4	1-3	LOW-MID	LOW-MID	
P3D	1-6 (P)	1-4	1-3	LOW-MID	LOW-MID	
P4	1-6 (P)	1-4	1-3	LOW-MID	LOW-MID	

Рекомендуемая мощность скалеров Woodpecker

WOODPECKER Модель	UDS-E (LED) UDS-L (LED) UDS-A (LED) UDS-P (LED)	UDS-J2 (LED)	UDS-J UDS-B UDS-K (LED)	UDS-N3 (LED)	UDS-N1 UDS-N2 (LED) UDS-N4	
Насадка	Мощность	Эндодонтия				
E1	1-3 (E)	—	—	LOW	—	Совместимость с WOODPECKER & EMS Ultrasonic Scalers
E2	1-3 (E)	—	—	LOW	—	
E3	1-6 (E)	—	—	LOW	—	
E3D	1-3 (E)	—	—	LOW	—	
E4	1-6 (E)	—	—	LOW	—	
E4D	1-3 (E)	—	—	LOW	—	
E5	1-6 (E)	—	—	LOW	—	
E5D	1-3 (E)	—	—	LOW	—	
P4D	1-6 (E)	—	—	LOW	—	
E8	1-10 (E)	—	—	LOW	—	
E9	1-10 (E)	—	—	LOW	—	
E10	1-6 (E)	—	—	LOW	—	
E10D	1-6 (E)	—	—	LOW	—	
E11	1-6 (E)	—	—	LOW	—	
E11D	1-6 (E)	—	—	LOW	—	
E14	1-3 (E)	—	—	LOW	—	
E15	1-3 (E)	—	—	LOW	—	

Рекомендуемая мощность скалеров Woodpecker

WOODPECKER Насадка	Модель Мощность	UDS-E (LED) UDS-L (LED) UDS-A (LED) UDS-P (LED)	UDS-J2 (LED)	UDS-J UDS-B UDS-K (LED)	UDS-N3 (LED)	UDS-N1 UDS-N2 (LED) UDS-N4	
Препарирование кариозной полости							
SB1	1-10 (P)	1-7	1-6	LOW-MID	LOW-MID		Совместимость с WOODPECKER & EMS Ultrasonic Scalers
SB2	1-10 (P)	1-7	1-6	LOW-MID	LOW-MID		
SB3	1-10 (P)	1-7	1-6	LOW-MID	LOW-MID		
SBL	1-10 (P)	1-7	1-6	LOW-MID	LOW-MID		
SBR	1-10 (P)	1-7	1-6	LOW-MID	LOW-MID		

Рекомендуемая мощность скалеров DTE

DTE Насадка	Модель Мощность	D7 (LED) D5 (LED)	D2 LED	D3 (LED)	D1	V3 (LED)	V1 V2 (LED)	
Препарирование кариозной полости								
SBD1	1-10 (P)	1-8	1-10 (P)	1-6	LOW-MID	LOW-MID		Совместимость с DTE & Satelec Ultrasonic Scalers
SBD2	1-10 (P)	1-8	1-10 (P)	1-6	LOW-MID	LOW-MID		
SBD3	1-10 (P)	1-8	1-10 (P)	1-6	LOW-MID	LOW-MID		
SBDL	1-10 (P)	1-8	1-10 (P)	1-6	LOW-MID	LOW-MID		
SBDR	1-10 (P)	1-8	1-10 (P)	1-6	LOW-MID	LOW-MID		

[Примечание] : "G" - режим "Удаление зубного камня"; "P" - режим "Периодонтия"; "E" - режим "Эндодонтия"; "—" - "не подходит для данной модели скалера".

Рекомендуемая мощность скалеров DTE

DTE Модель Насадка	D7 (LED) D5 (LED)	D2 LED	D3 (LED)	D1	V3 (LED)	V1 V2 (LED)	
Удаление зубного камня							
GD1	1-10 (G)	1-11	1-10 (G)	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	Совместимость с DTE & Satelec Ultrasonic Scalers
GD2	1-10 (G)	1-11	1-10 (G)	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	
GD3	1-10 (G)	1-11	1-10 (G)	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	
GD4	1-10 (G)	1-11	1-10 (G)	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	
GD5	1-10 (G)	1-11	1-10 (G)	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	
GD6	1-10 (G)	1-11	1-10 (G)	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	
GD7	1-10 (G)	1-11	1-10 (G)	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	
GD8	1-10 (G)	1-11	1-10 (G)	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	
GD9	1-10 (G)	1-11	1-10 (G)	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	
GD10	1-10 (G)	1-11	1-10 (G)	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	
GD11	1-10 (G)	1-11	1-10 (G)	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	
Периодонтология							
PD1	1-10 (P)	1-8	1-10 (P)	1-6	LOW-MID	LOW-MID	Совместимость с DTE & Satelec Ultrasonic Scalers
PD2L	1-3 (P)	1-3	1-3 (P)	1-2	LOW	LOW	
PD2LD	1-2 (P)	1-2	1-2 (P)	1	LOW	LOW	
PD2R	1-3 (P)	1-3	1-3 (P)	1-2	LOW	LOW	
PD2RD	1-2 (P)	1-2	1-2 (P)	1	LOW	LOW	
PD3	1-6 (P)	1-5	1-6 (P)	1-3	LOW-MID	LOW-MID	
PD3D	1-6 (P)	1-5	1-6 (P)	1-3	LOW-MID	LOW-MID	
PD4	1-6 (P)	1-5	1-6 (P)	1-3	LOW-MID	LOW-MID	

Рекомендуемая мощность скалеров DTE

DTE Модель Насадка \ Мощность	D7 (LED) D5 (LED)	D2 LED	D3 (LED)	D1	V3 (LED)	V1 V2 (LED)	
Эндодонтия							
ED1	1-3 (E)	—	—	—	LOW	—	Совместимость с DTE & Satelec Ultrasonic Scalers
ED2	1-3 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED3	1-6 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED3D	1-3 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED4	1-6 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED4D	1-3 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED5	1-6 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED5D	1-3 (E)	—	—	—	LOW	—	
PD4D	1-6 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED8	1-10 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED9	1-10 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED10	1-6 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED10D	1-6 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED11	1-6 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED11D	1-6 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED14	1-3 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED15	1-3 (E)	—	—	www.goldident.ru		LOW	

ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСАДКИ

	Насадка	Совместимость с
Удаление зубного камня	GS1/GS2/GS3/GS4/GS5/GS6/GS7/GS8	Sirona Scalers
Периодонтия	PS1/PS3/PS3D/PS4	
Эндодонтия	ES1/ES2/ES3/ES3D/ES4/ES4D/ES5/ES5D/PS4D/ES8/ES10/ES10D/ES11/ES11D/ES14/ES15	
Удаление зубного камня	GK1/GK2/GK3/GK4/GK5/GK6/GK7/GK11	Kavo Scalers
Эндодонтия	EK8	
Удаление зубного камня	GC1/GC2	
Периодонтия	PC1	Amdent Scalers
Удаление зубного камня	A1/A2	
Костная хирургия	US1/US1L/US1R/US2/US3/US4/US5/US6	
Синус-лифтинг	UL1/UL2/UL3/UL4/UL5	WOODPECKER & Mectron Ultrasurgery
Эндодонтия	UE1/UE2/UE3/UE4	
Эксельцимоз	UC1	
Имплантация	UI1/UI2/UI7/UI8/UI9	
Периодонтальная хирургия	UP1/UP2/UP3/UP4/UP5/UP6/UP7	



www.glwoodpecker.com



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, National High-Tech
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China

Tel:

Europe Sales Dept.: +86-773-5873196, +86-773-2125222

North America, South America &

Oceania Sales Dept.: +86-773-5873198, +86-773-2125123

Asia & Africa Sales Dept.: +86-773-5855350, +86-773-2125896

Fax: +86-773-5822450

E-mail: woodpecker@mailgl.cn, sales@goldident.ru

Website: <http://www.glwoodpecker.com>



Wellkang Ltd (www.CE-Marking.eu)
29 Harley St., LONDON, W1G 9QR, UK

ZMN/WI-09-036 1.1 RU



www.goldident.ru