

Мотор воздушный стоматологический TX-414 9C

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации нового наконечника необходимо ознакомиться с данной инструкцией, и в дальнейшем строго следовать указаниям, изложенным в ней. Спасибо за то, что выбрали наши наконечники. Надеемся, что Вы оцените преимущества работы с инновационными наконечниками.



Описание изделия

Микромотор воздушный. Предназначен для закрепления наконечников и приведении их во вращение при выполнении зубоврачебных работ. Область применения - терапевтическая и ортопедическая стоматология.

Данным инструментом может работать только обученный, квалифицированный персонал.

Технические характеристики:

Давление воздуха (КПа (кгс/см ²))	Скорость вращения мотора (об. в мин.)	Потребление воздуха (л/мин)	Вес (г)
245 (2.5)	22000	42	90
294 (3.0)	25000	51	
392 (4.0)	27000	72	
Уровень шума, не более, dB			65

Правила техники безопасности.

Если при работе мотора обнаружится вибрация, шум, или нагрев - немедленно прекратите его использование и обратитесь в местную службу поддержки клиентов.

Не ронять, не подвергать мотор нагрузкам и ударам!

Мотор должен храниться очищенным и смазанным.

При проведении дезинфекции не допускается погружение мотора в дезраствор.

Ненадлежащий уход и техобслуживание могут привести к преждевременному износу и поломке мотора.

Хранение и транспортировка инструмента


Процедура хранения и транспортировки должна соответствовать контракту

Хранить можно при относительной влажности 80%, хорошей вентиляцией, избегайте воздействия коррозионных газов.

Для настройки рабочего давления воздуха в микромоторе необходимо обратиться в местную службу поддержки клиентов.

Смазка наконечника

насадка масляного спрея угловой/прямой наконечник

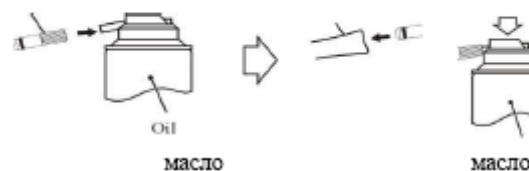

Используйте только оригинальную смазку TOSI.

Смазывайте мотор в течение 1-2 секунд.

Процедура смазки: Встряхните баллон 3-5 раз. Затем вставьте насадку в отверстие подачи воздуха до упора и распыляйте спрей в течение 1-2 секунд.


Подключите микромотор, включите в работу.

После остановки бора удалите с мотора салфеткой излишки масла.

Эксплуатация наконечника

ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы, проверьте работу мотора вне полости рта пациента. Работать только с исправными инструментами, которые необходимо использовать по назначению и тем самым обезопасить пациента и третьих лиц от любой возможной опасности.

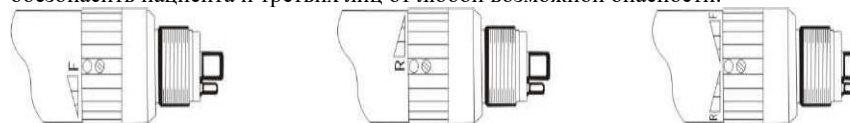

Переключатель

Вращение вперед (по часовой стрелке): поверните кольцевой переключатель в (F) сторону.

Вращение назад: поверните кольцевой переключатель в (R) сторону.

Когда переключатель находится между (F) или (R) мотор прекратит вращение.

Наружная очистка мотора

Почистите инструмент снаружи 70% этиловым спиртом или другим дезинфицирующим средством, не содержащим аммиак, кислоту или хлор.

Компектация:

1. Микромотор воздушный ТХ-9С - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации

Гарантия

1. Гарантия данного инструмента распространяется на производственные дефекты и действует в течение одного года на корпус с даты реализации инструмента, гарантия на картридж – 90 дней, гарантия на подшипники не распространяется.
2. Гарантия распространяется только на ремонт или замену деталей с производственными дефектами, наличие таких дефектов должно быть должным образом засвидетельствовано производителем или через официальную сеть технической помощи.
3. Данная гарантия не распространяется на неисправности, произошедшие не соблюдения инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, из-за падения, ударов, неправильного хранения, действия природных факторов, и технических работ, проведенным не уполномоченным персоналом.
4. Действие гарантии прекращается по истечению ее срока действия, из-за изменений, внесенных в инструмент или использования неправильных креплений, и если технические работы были проведены неуполномоченным лицом.
5. Ремонт и замена деталей во время гарантийного периода не служит поводом для продления изначального срока действия этой гарантии.
6. Данная гарантия распространяется на ремонт и замену бракованных деталей, и не включает детали, подвергшиеся естественному износу, в соответствии с вышеприведенными условиями.
7. Замененные детали по гарантии, свободные от долгов являются собственностью поставщика.

Гарантийный талон

Номер наконечника _____

Покупатель _____

Покупатель, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен _____

Дата продажи _____

Продавец _____ М.П.

Сведения о ремонте
