

Create it 

TIP GUIDE

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
КОСТНАЯ ХИРУРГИЯ



NSK

SURG	
КОСТНАЯ ХИРУРГИЯ	05 - 12
КОСТНЫЕ СКРЕБКИ	13 - 14
УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ	15 - 16
СИНУСЛИФТИНГ (ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ)	17 - 20
ИМПЛАНТАЦИЯ	21 - 24
СИНУСЛИФТИНГ (ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ)	25 - 26*
СИНУСЛИФТИНГ	27
ОТСЛАИВАНИЕ СИНУСНОЙ МЕМБРАНЫ	28
PERIO	
УДАЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ	29 - 31
ПАРОДОНТОЛОГИЯ	32
УХОД ЗА ИМПЛАНТАТАМИ	33 - 34
ENDO	
ЭНДОДОНТИЯ	35 - 36
НАБОРЫ НАСАДОК	37 - 40

*Фотографии предоставлены стоматологом-хирургом д.м.н. Ясухиро Кизу, ОМФС (КЛИНИКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ, ЙОКОГАМА)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД НАСАДОК VARIOSURG

- SURG** ХИРУРГИЧЕСКИЙ режим для костной хирургии
- PERIO** ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЙ режим для процедур по уходу
- ENDO** ЭНДОДОНТИЧЕСКИЙ режим для лечения каналов зубов



Насадки имеют специальную конструкцию, позволяющую сохранять мягкие ткани, поддерживать постоянную скорость препарирования и легко погружаться в костную ткань. Режущая кромка насадки представляет собой набор зубьев с поочередным наклоном, как на микропиле, что повышает качество препарирования. Данная конструкция также предотвращает закупоривание стружкой распила и способствует поддержанию скорости проведения операции.

КОСТНАЯ ХИРУРГИЯ	КОСТНЫЕ СКРЕБКИ	УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ	СИНУСЛИФТИНГ (ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ)
ИМПЛАНТАЦИЯ	СИНУСЛИФТИНГ	ОТСЛАИВАНИЕ МЕМБРАНЫ	УДАЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ПАРОДОНТОЛОГИЯ	УХОД ЗА ИМПЛАНТАТАМИ	ЭНДОДОНТИЯ	НАБОРЫ НАСАДОК

Можно обрабатывать в термодезинфекторе.

Автоклавирование

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ Данная насадка может использоваться при мощности до 150%


VarioSurg 3

УВЕЛИЧЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Результат стремления к совершенству

Использование хирургических ультразвуковых систем необходимо в современном хирургическом и имплантологическом лечении. Мощный наконечник VarioSurg 3 обладает тонким и легким корпусом, обеспечивающим минимальную нагрузку на кисть и превосходный обзор операционного поля. Разнообразие насадок упрощает проведение процедур и способствует точному и эффективному лечению.



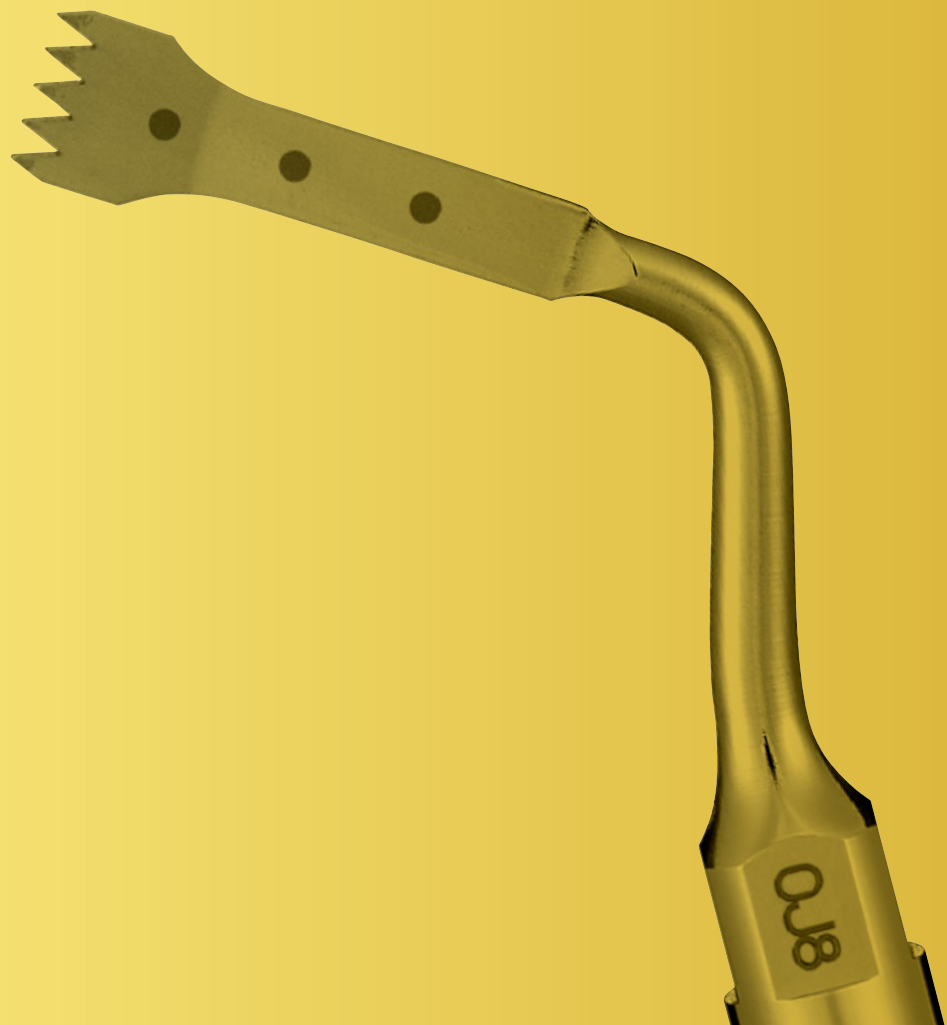

КОСТНАЯ ХИРУРГИЯ

КОСТНАЯ ХИРУРГИЯ

Для забора костной ткани с подбородка, особенно для подбородочного отверстия и нижнечелюстного альвеолярного гребня. Для костной хирургии.

МОДЕЛЬ

SG1

МОЩНОСТЬ

SURG

80%

МОДЕЛЬ

H-SG1

МОЩНОСТЬ

SURG

150%


МОДЕЛЬ

SG1A


МОЩНОСТЬ

SURG


80%

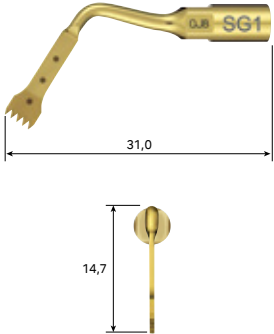

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

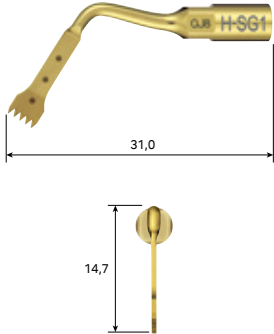

Удлиненная насадка для работы в более глубоких зонах.

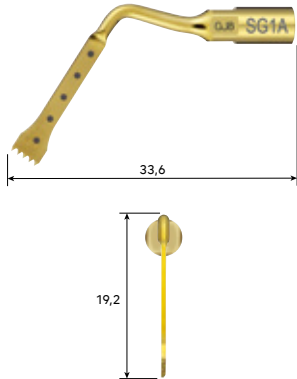

КОД ЗАКАЗА

Z305101

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки
- 5 зубцов толщиной 0,6 мм

КОД ЗАКАЗА

Z305151

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки
- 5 зубцов толщиной 0,6 мм

КОД ЗАКАЗА

Z305138

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Точечная метка 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм и 15 мм от кромки
- 5 зубцов толщиной 0,6 мм



Односторонний забор костной ткани с вестибулярной поверхности тела нижней челюсти.

SG1, H-SG1, SG1A

КОСТНАЯ ХИРУРГИЯ

Для клинических случаев, когда рабочее поле насадки имеет критические ограничения.

МОДЕЛЬ

SG8

МОЩНОСТЬ

SURG

80%

МОДЕЛЬ

H-SG8

МОЩНОСТЬ

SURG

150%

МОДЕЛЬ


SG8A

МОЩНОСТЬ

SURG

80%


ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

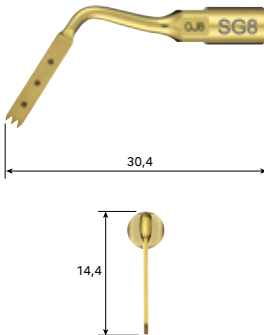

КОД ЗАКАЗА

Z305109


- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки
- 3 зубца толщиной 0,6 мм

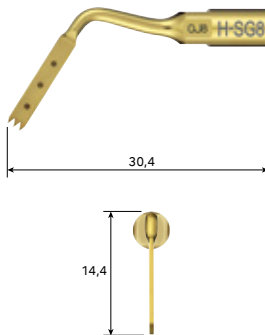

КОД ЗАКАЗА

Z305155

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки
- 3 зубца толщиной 0,6 мм

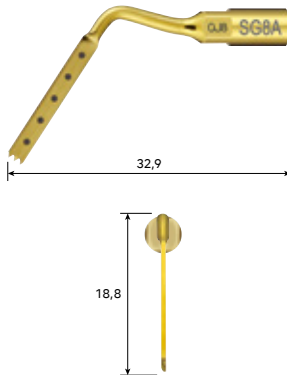

КОД ЗАКАЗА



Z305139

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Точечная метка 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм и 15 мм от кромки
- 3 зубца толщиной 0,6 мм

КОСТНАЯ ХИРУРГИЯ



Для забора костной ткани с альвеолярного гребня на нижней челюсти.

МОДЕЛЬ **SG14R** МОЩНОСТЬ **SURG** 80% МОДЕЛЬ **SG14L** МОЩНОСТЬ **SURG** 80%

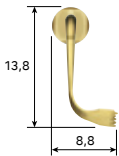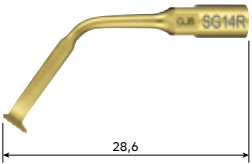

КОД ЗАКАЗА

Z305122

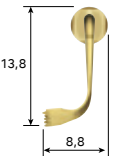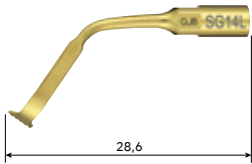

КОД ЗАКАЗА

Z305123

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
 - Насадка с наклоном 90° вправо*
 - 5 зубцов толщиной 0,6 мм
- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
 - Насадка с наклоном 90° влево*
 - 5 зубцов толщиной 0,6 мм



Забор костного блока с передней части нижней челюсти

SG14R, SG14L



*Направление изгиба насадки определяется по передней проекции.

Для забора костной ткани с альвеолярного гребня на нижней челюсти.

КОСТНАЯ ХИРУРГИЯ

МОДЕЛЬ **H-SG8R** МОЩНОСТЬ **SURG** 150% МОДЕЛЬ **H-SG8L** МОЩНОСТЬ **SURG** 150%

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

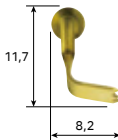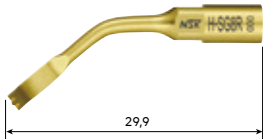


КОД ЗАКАЗА

Z305156

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Насадка с наклоном 90° вправо*
- 3 зубца толщиной 0,6 мм

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

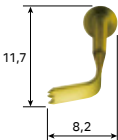

КОД ЗАКАЗА

Z305157





- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Насадка с наклоном 90° влево*
- 3 зубца толщиной 0,6 мм

*Направление изгиба насадки определяется по передней проекции.

КОСТНАЯ ХИРУРГИЯ

Для препарирования в зонах под наклоном, на выступах или в зонах, где доступ для насадки SG1 и других прямых насадок ограничен.

МОДЕЛЬ **SG2R** МОЩНОСТЬ **SURG** 80% МОДЕЛЬ **SG2L** МОЩНОСТЬ **SURG** 80%

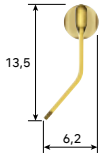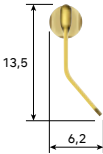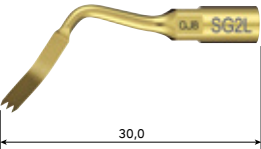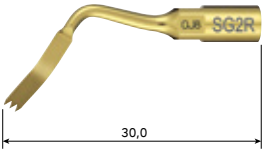

КОД ЗАКАЗА

Z305102

КОД ЗАКАЗА

Z305103

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Насадка с наклоном вправо*
- 3 зубца толщиной 0,6 мм

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Насадка с наклоном влево*
- 3 зубца толщиной 0,6 мм



Забор костного блока
SG2R, SG2L

*Направление изгиба насадки определяется по передней проекции.




Для использования в зонах с ограниченным доступом, преимущественно в ретромолярной области на нижней челюсти и в других зонах с изогнутой поверхностью.

МОДЕЛЬ **SG19** МОЩНОСТЬ **SURG** 80% МОДЕЛЬ **SG30** МОЩНОСТЬ **SURG** 50% МОДЕЛЬ **SG58** МОЩНОСТЬ **SURG** 80%

Для препарирования в зонах с изогнутой поверхностью.

Для узкого разреза, когда необходима минимальная потеря костной ткани. Также подходит для кортикотомии.

Для удаления костных выступов с язычной и вестибулярной сторон тела нижней челюсти.

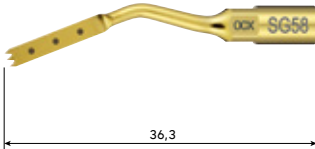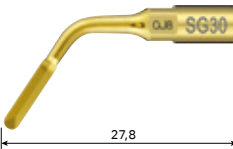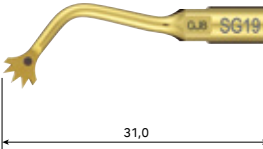

КОД ЗАКАЗА

Z305135

КОД ЗАКАЗА

Z305137

КОД ЗАКАЗА

Z305141

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Точечная метка 3 мм от кромки
- 5 зубцов толщиной 0,8 мм

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Острая кромка
- Толщина 0,5 мм

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Точечная метка 3 мм, 6 мм, 9 мм от кромки
- 3 зубца толщиной 0,6 мм



Формирование зоны
доступа перед забором
костного блока.
SG19



Забор костного блока с
ретромолярной области
альвеолярного гребня
(при минимальной потере
костной ткани в зоне реза).
SG30



Удаление экзостозов
(сглаживание неровной
поверхности кости).
SG58

КОСТНЫЕ СКРЕБКИ



МОДЕЛЬ **SG3**



МОЩНОСТЬ **SURG** 80%

МОДЕЛЬ **SG4**

МОЩНОСТЬ **SURG** 80%

МОДЕЛЬ **SG5**


МОЩНОСТЬ **SURG** 80%

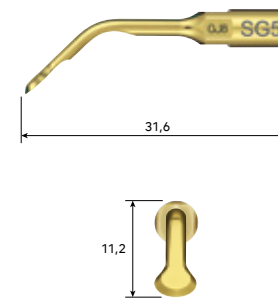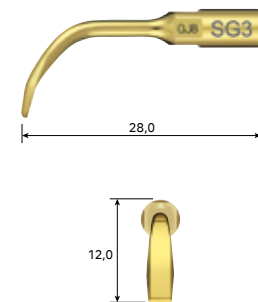

КОД ЗАКАЗА

Z305104

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Шпатель с тремя рабочими поверхностями
- Скребок с одной рабочей кромкой

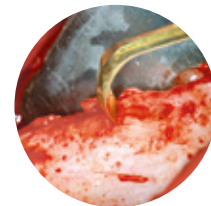


Выравнивание
альвеолярного гребня
SG3

КОД ЗАКАЗА

Z305105

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Шпатель
- Скребок с двумя рабочими кромками

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Шпатель с закругленной рабочей поверхностью
- Скребок с одной рабочей кромкой

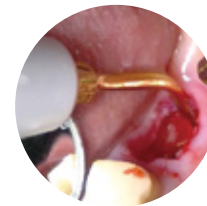

Остеопластика
SG5

Для удаления гранулем из лунки после удаления зуба.



УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ

Для отслаивания периодонтальной связки, чтобы упростить удаление зуба. Также данные насадки эффективны для удаления анкилозированных зубов.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ

МОДЕЛЬ **SG17**



МОЩНОСТЬ **SURG** 80%

МОДЕЛЬ **SG18R**

МОЩНОСТЬ **SURG** 50%

МОДЕЛЬ **SG18L**



МОЩНОСТЬ **SURG** 50%

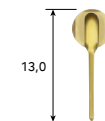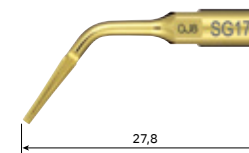

КОД ЗАКАЗА

Z305132



- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Толщина 0,7 мм

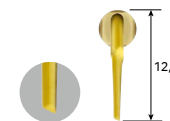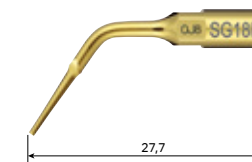

КОД ЗАКАЗА

Z305133

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Насадка с наклоном вправо* • Толщина 0,7 мм

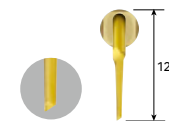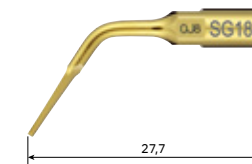

КОД ЗАКАЗА


Z305134

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Насадка с наклоном влево* • Толщина 0,7 мм




Удаление
SG17, SG18R, SG18L

*Направление изгиба насадки определяется по передней проекции.

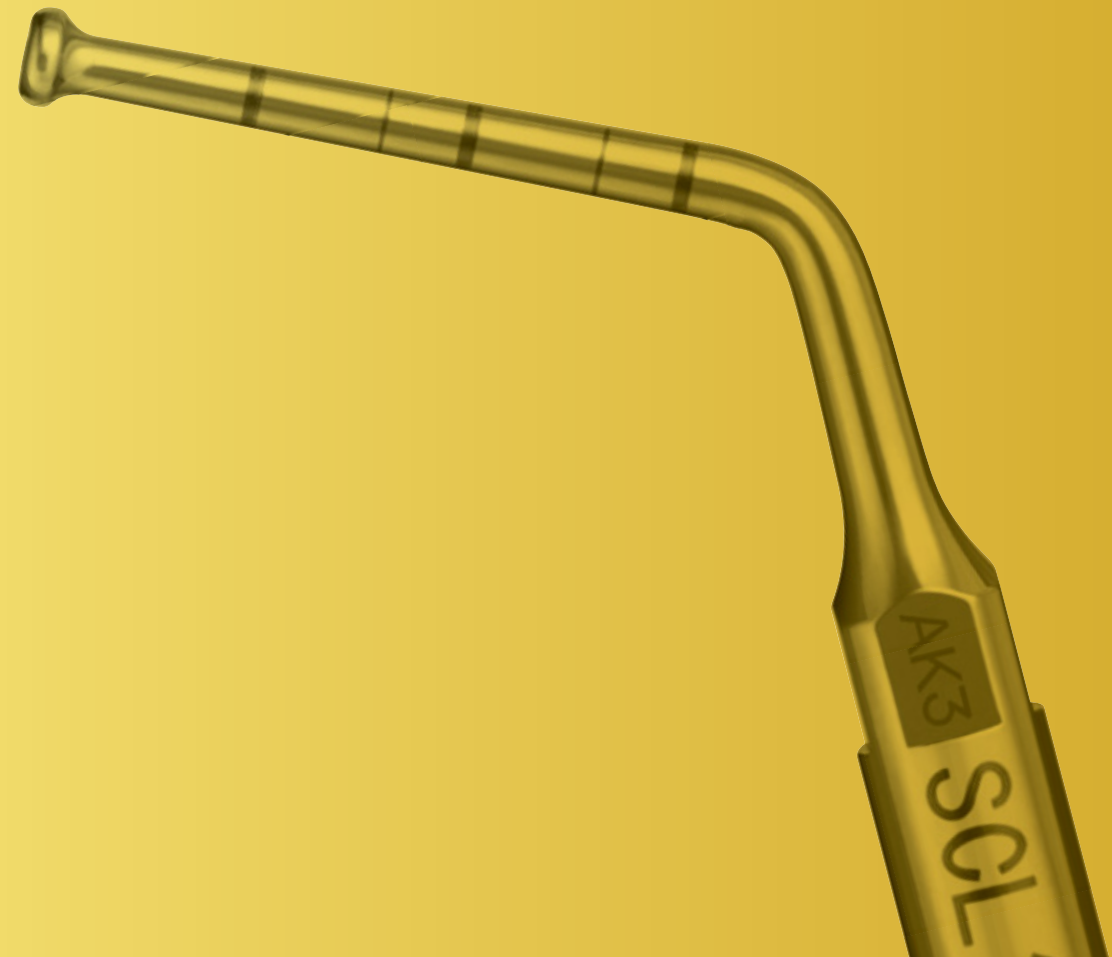

СИНУСЛИФТИНГ
(ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ)


Насадки для закрытого синуслифтинга повышают безопасность проведения процедуры. Являясь менее инвазивными, они позволяют поднимать мембрану гайморовой пазухи за короткое время. Остеотомия вместе с ультразвуковой вибрацией снижает риск повреждения мембраны Шнайдера. Отсутствие ударных толчков при остеотомии повышает комфорт пациента и снижает риск возникновения головокружения.

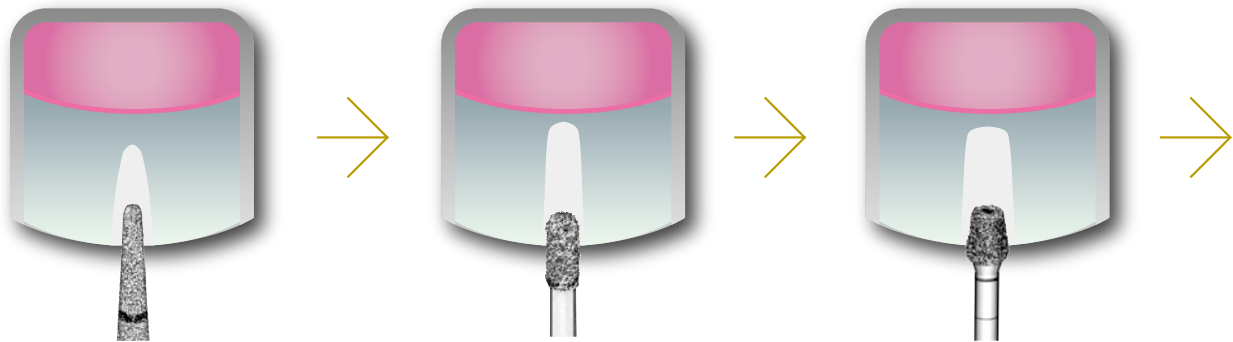

Маркировка зоны имплантации.

Формирование ложа под имплантат.

Расширение и формирование ложа под имплантат.

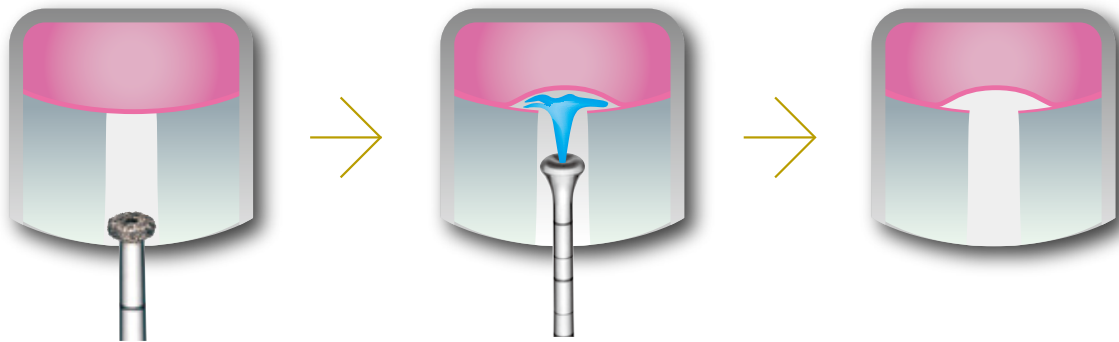

Верхнечелюстная перфорация и формирование отверстия на альвеолярной кости.



Поднятие синусной мембраны Шнайдера путем внутренней ирригации.

Формирование ложа под имплантат после проведенного синуслифтинга.

ИМПЛАНТАЦИЯ

Для предварительной подготовки ложа под имплантат, формирования лунки и других манипуляций.

МОДЕЛЬ **SG15A** МОЩНОСТЬ **SURG** 50% МОДЕЛЬ **SG15B** МОЩНОСТЬ **SURG** 50%

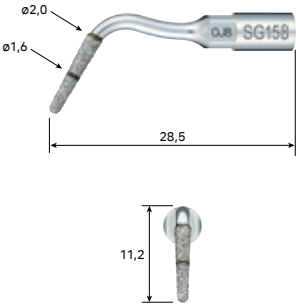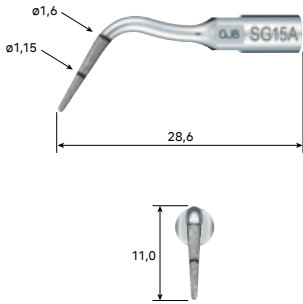

КОД ЗАКАЗА
Z305124

КОД ЗАКАЗА
Z305125

- Алмазное покрытие
- Диаметр кончика насадки 0,7 мм
- Точечная метка 5 мм и 10 мм от кромки

- Алмазное покрытие
- Диаметр кончика насадки 1,3 мм
- Точечная метка 5 мм и 10 мм от кромки





Маркировка зоны имплантации.
SG15A, SG15B



Для предварительной подготовки ложа под имплантат, формирования лунки и других манипуляций.

ИМПЛАНТАЦИЯ

МОДЕЛЬ **SG15C** МОЩНОСТЬ **SURG** 50% МОДЕЛЬ **SG15D** МОЩНОСТЬ **SURG** 50%

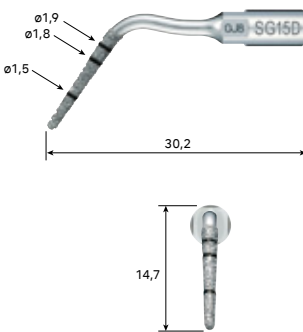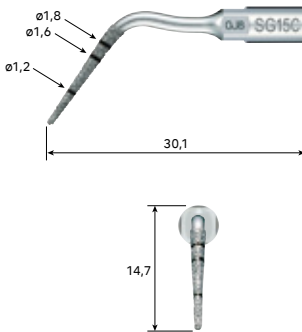

КОД ЗАКАЗА
Z305126

КОД ЗАКАЗА
Z305127

- Алмазное покрытие
- Диаметр кончика насадки 0,9 мм
- Точечная метка 5 мм, 10 мм и 12 мм от кромки

- Алмазное покрытие
- Диаметр кончика насадки 1,3 мм
- Точечная метка 5 мм, 10 мм и 12 мм от кромки



Маркировка зоны имплантации и
формирование направления.
SG15C, SG15D




ИМПЛАНТАЦИЯ

Для расширения и формирования ложа под имплантат на альвеолярной кости.

МОДЕЛЬ **SG16A** МОЩНОСТЬ **SURG** 50%

МОДЕЛЬ **SG16B** МОЩНОСТЬ **SURG** 50%

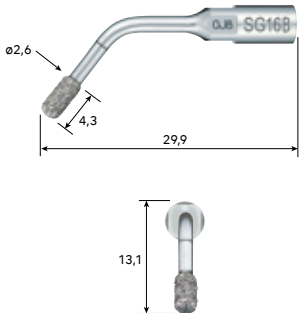

КОД ЗАКАЗА
Z305128

КОД ЗАКАЗА
Z305129

- Алмазное покрытие
- Диаметр насадки 2,0 мм
- Точечная метка 5 мм и 10 мм от кромки



Подготовка ложа под имплантат.
SG16A



Подготовка ложа под имплантат.
SG16B



Для расширения и формирования ложа под имплантат на альвеолярной кости.



ИМПЛАНТАЦИЯ

МОДЕЛЬ **SCL2D** МОЩНОСТЬ **SURG** 50%

МОДЕЛЬ **SCL4D** МОЩНОСТЬ **SURG** 80%

ВНУТРЕННЯЯ ИРРИГАЦИЯ

ВНУТРЕННЯЯ ИРРИГАЦИЯ

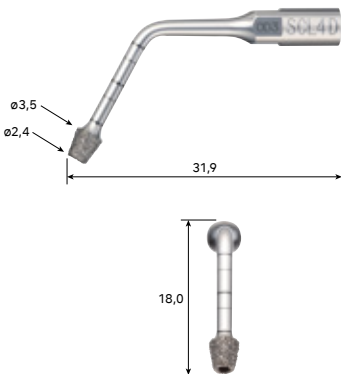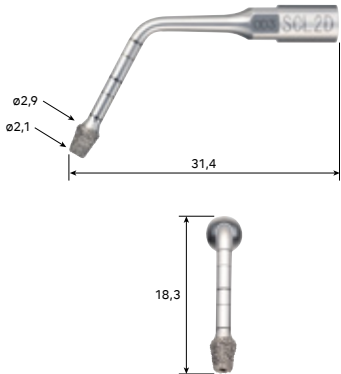

КОД ЗАКАЗА
Z305182

КОД ЗАКАЗА
Z305184

- Алмазное покрытие

- Алмазное покрытие



Глубина ложа под имплантат может быть измерена при помощи меток на насадке.



асирение ложа под имплантат.
SCL2D, SCL4D




СИНУСЛИФТИНГ (ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ)

Для остеотомии при создании доступа к синусной мембране на верхней челюсти через альвеолярный гребень и подготовки ложа под имплантат.

МОДЕЛЬ **SCL1D** МОЩНОСТЬ **SURG** 80%

ВНУТРЕННЯЯ ИРРИГАЦИЯ

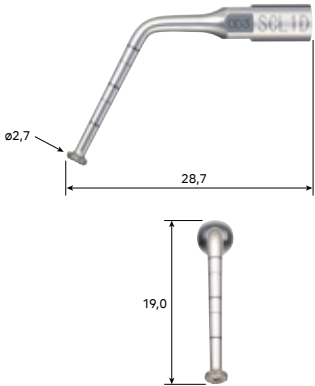


КОД ЗАКАЗА
Z305171

• Алмазное покрытие

МОДЕЛЬ **SCL3D** МОЩНОСТЬ **SURG** 80%

ВНУТРЕННЯЯ ИРРИГАЦИЯ

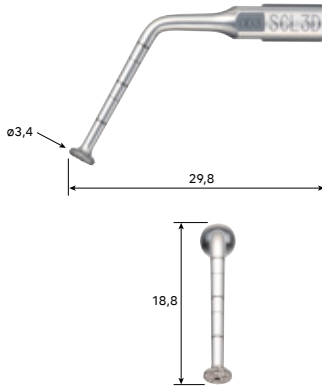


КОД ЗАКАЗА
Z305173

• Алмазное покрытие

МОДЕЛЬ **SCL5D** МОЩНОСТЬ **SURG** 80%

ВНУТРЕННЯЯ ИРРИГАЦИЯ

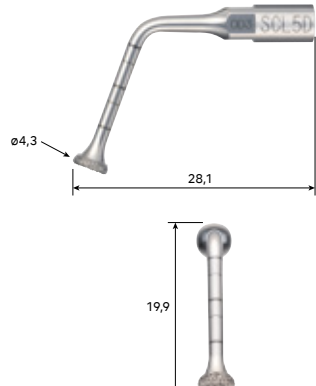

КОД ЗАКАЗА
Z305175

• Алмазное покрытие



Глубина ложа под имплантат может быть измерена при помощи меток на насадке.



Препарирование дна лунки под имплантат.

SCL1D, SCL3D, SCL5D




Поднятие синусной мембраны путем внутренней ирригации.

СИНУСЛИФТИНГ (ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ)

МОДЕЛЬ **SCL1** МОЩНОСТЬ **SURG** 50%

ВНУТРЕННЯЯ ИРРИГАЦИЯ

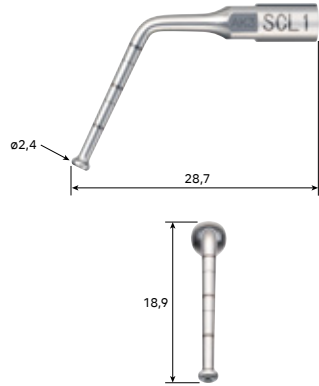


КОД ЗАКАЗА
Z305170

Глубина ложа под имплантат может быть измерена при помощи меток на насадке.



МОДЕЛЬ **SCL3** МОЩНОСТЬ **SURG** 50%

ВНУТРЕННЯЯ ИРРИГАЦИЯ

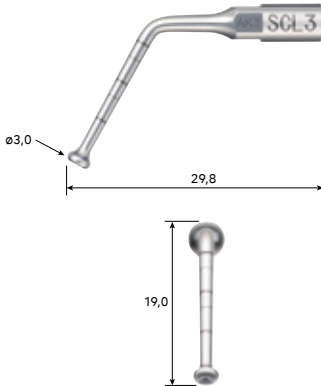

КОД ЗАКАЗА
Z305172




Начальный этап отслаивания мембраны со дна верхнечелюстной пазухи.

SCL1, SCL3, SCL5

МОДЕЛЬ **SCL5** МОЩНОСТЬ **SURG** 50%

ВНУТРЕННЯЯ ИРРИГАЦИЯ

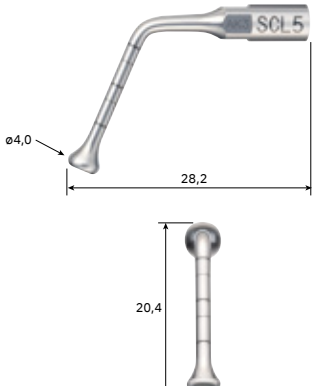


КОД ЗАКАЗА
Z305174

СИНУСЛИФТИНГ


Для создания отверстий в кости и костной пластики.

МОДЕЛЬ **SG6D** МОЩНОСТЬ **SURG** 80% МОДЕЛЬ **SG7D** МОЩНОСТЬ **SURG** 50%


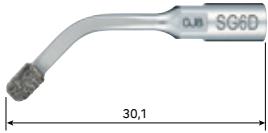


КОД ЗАКАЗА
Z305107

• Алмазное покрытие

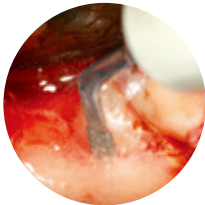

Удаление зубов мудрости и ретинированных зубов
SG6D

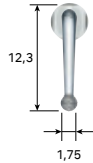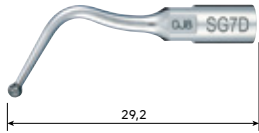

КОД ЗАКАЗА
Z305108

• Алмазное покрытие





Для формирования окна с вестибулярной поверхности верхнечелюстной пазухи и точной пластики кости.
SG7D

ОТСЛАИВАНИЕ МЕМБРАНЫ


Для отслаивания и поднятия синусной мембраны на верхней челюсти.

МОДЕЛЬ **SG9** МОЩНОСТЬ **SURG** 50% МОДЕЛЬ **SG10** МОЩНОСТЬ **SURG** 50% МОДЕЛЬ **SG11** МОЩНОСТЬ **SURG** 50%

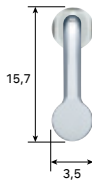
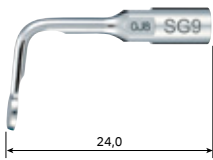


КОД ЗАКАЗА
Z305110

• Плоский круговой выпуклый элеватор
• Угол наклона 90°


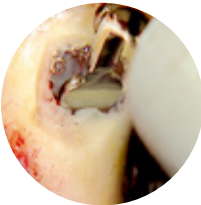


Отделение синусной мембраны
SG9, SG10

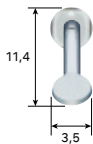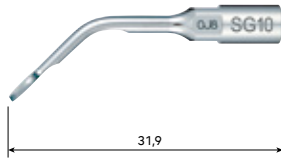


КОД ЗАКАЗА
Z305111

• Плоский круговой выпуклый элеватор
• Угол наклона 135°

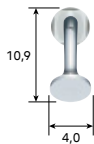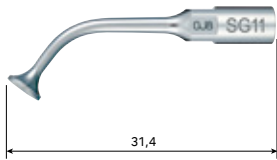


КОД ЗАКАЗА
Z305112

• Коническая насадка

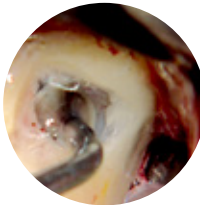

Поднятие синусной мембраны
SG11

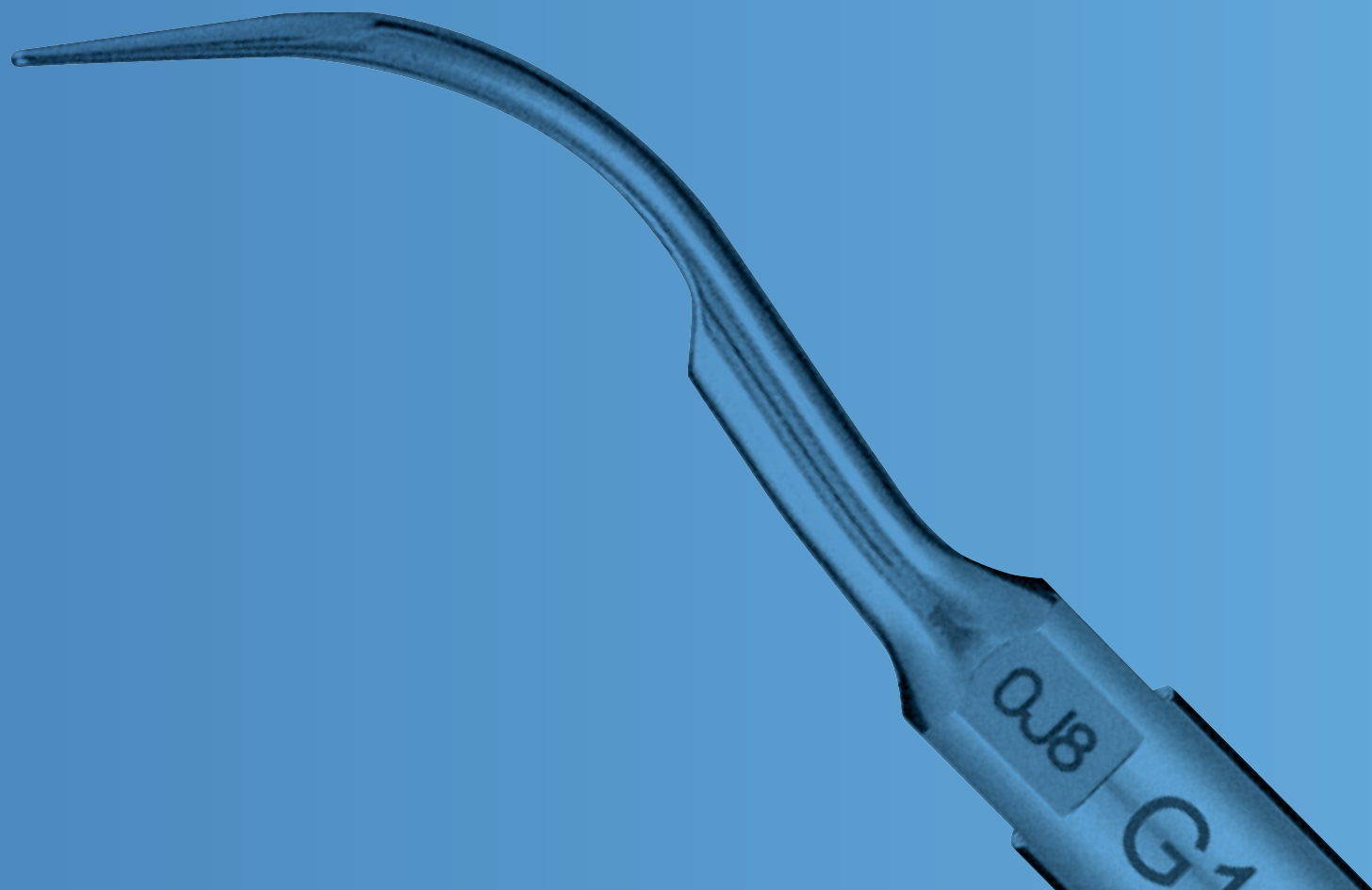

УДАЛЕНИЕ ЗУБНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ

УДАЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Удаление твердых и мягких зубных отложений над десневым краем.

МОДЕЛЬ **G1-S** МОЩНОСТЬ **SURG** 50%



КОД ЗАКАЗА

Z305113





Однокорневые /
Многокорневые зубы
G1-S

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

Удаление зубных отложений под десной.

МОДЕЛЬ **P20-S** МОЩНОСТЬ **PERIO** 100%

Для всех групп зубов.

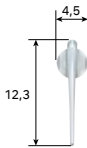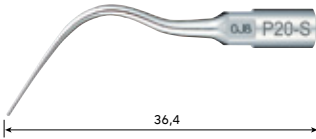

КОД ЗАКАЗА


Z305114



Однокорневые /
Многокорневые зубы
P20-S

МОДЕЛЬ **P25R-S** МОЩНОСТЬ **PERIO** 100%

Для обработки контактных поверхностей всех групп зубов и зон фуркаций.

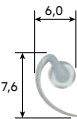

КОД ЗАКАЗА

Z305115


* Насадка с наклоном вправо*



Однокорневые /
Многокорневые зубы
P25R-S, P25L-S

МОДЕЛЬ **P25L-S** МОЩНОСТЬ **PERIO** 100%

Для обработки контактных поверхностей всех групп зубов и зон фуркаций.

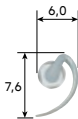

КОД ЗАКАЗА

Z305116


* Насадка с наклоном влево*

*Направление изгиба насадки определяется по передней проекции.

МОДЕЛЬ **V10-S** МОЩНОСТЬ **PERIO** 100% МОДЕЛЬ **V-P10**



Для гигиены вокруг несъемных ортопедических конструкций, установленных на имплантатах и собственных зубах. Изготовлены из специального полимерного материала, который позволяет проводить безопасную чистку без риска повреждения имплантата и керамических конструкций.

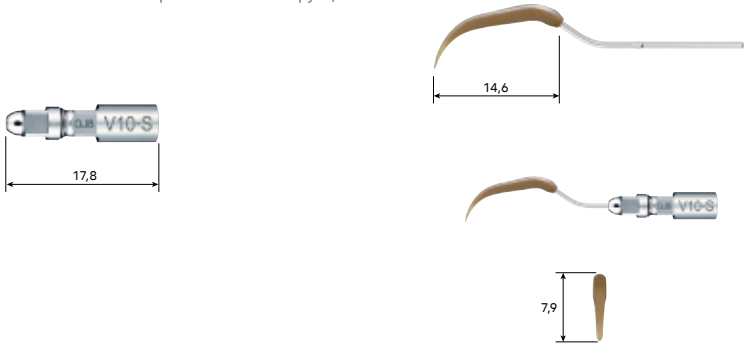

КОД ЗАКАЗА

Z305117

КОД ЗАКАЗА

Y900184

- Ключ E-типа включен в комплект
- Пластиковая насадка не включена

- Набор из 3 штук
- Держатель V10-S не включен




V-P10

МОДЕЛЬ **V-P11R** МОДЕЛЬ **V-P11L** МОДЕЛЬ **V-P12**

Насадки с двойным изгибом имеют специальное удлинение для облегчения доступа к труднодоступным местам.

Более длинная версия популярной насадки V-P10.

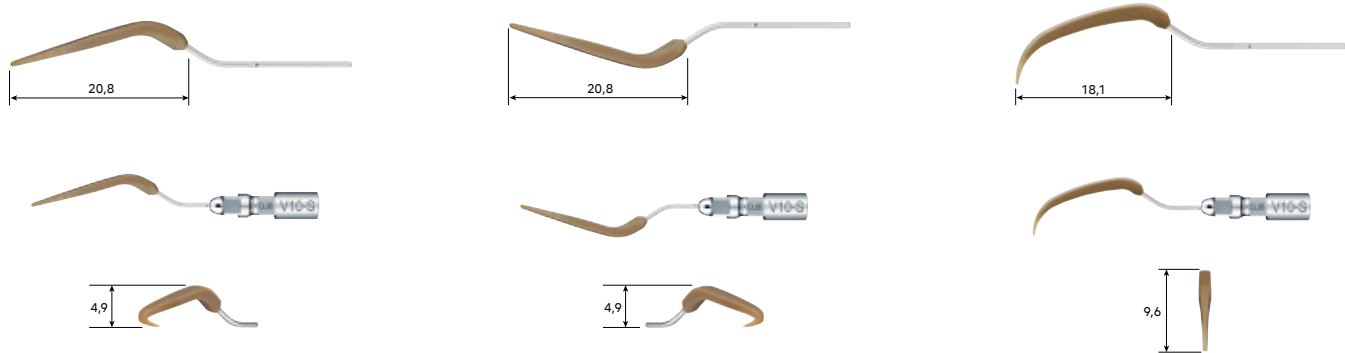

КОД ЗАКАЗА

Y1002165

КОД ЗАКАЗА

Y1002166

КОД ЗАКАЗА

Y1002167

- Набор из 3 штук
- Насадка с наклоном вправо*
- Держатель V10-S не включен

- Набор из 3 штук
- Насадка с наклоном влево*
- Держатель V10-S не включен

- Набор из 3 штук
- Держатель V10-S не включен




V-P11R, V-P11L



V-P12

■ V-P11R/L, V-P12 могут использоваться только для системы VarioSurg 3. *Направление изгиба насадки определяется по передней проекции.



ЭНДОДОНТИЯ

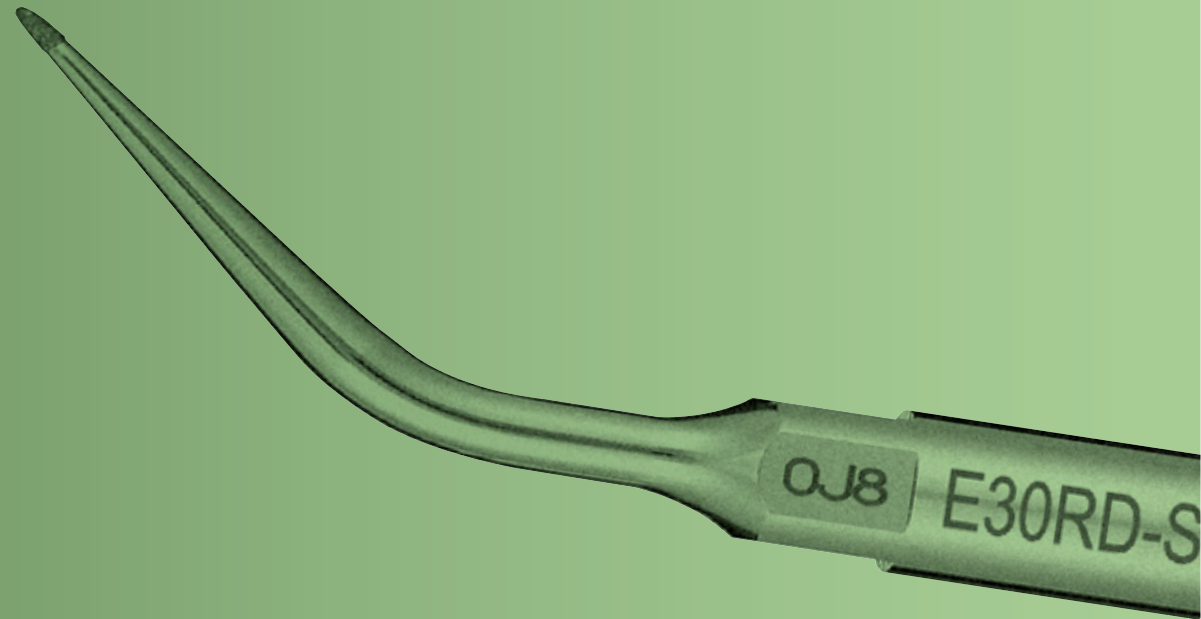

Насадки для периапикальной хирургической эндодонтии с микроскопическим алмазным напылением.

ЭНДОДОНТИЯ



МОДЕЛЬ **E30RD-S** мощность **ENDO** 50% МОДЕЛЬ **E30LD-S** мощность **ENDO** 50% МОДЕЛЬ **E31D-S** мощность **ENDO** 50% МОДЕЛЬ **E32D-S** мощность **ENDO** 50%

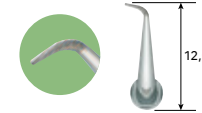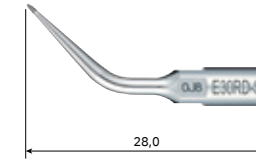

КОД ЗАКАЗА

Z305118



- Алмазное покрытие
- Для жевательных зубов (с наклоном вправо*)

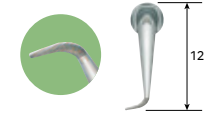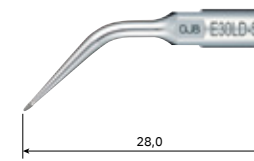

КОД ЗАКАЗА

Z305119



- Алмазное покрытие
- Для жевательных зубов (с наклоном влево*)

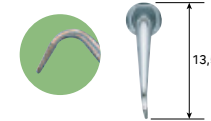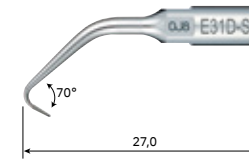

КОД ЗАКАЗА

Z305120


- Алмазное покрытие
- Для передних и жевательных зубов (70°)

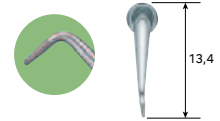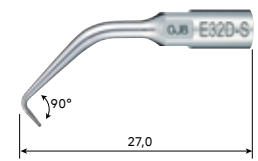


КОД ЗАКАЗА

Z305121

- Алмазное покрытие
- Для передних зубов (90°)

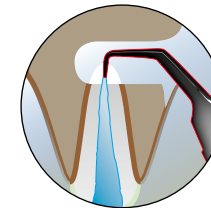

*Направление изгиба насадки определяется по передней проекции.

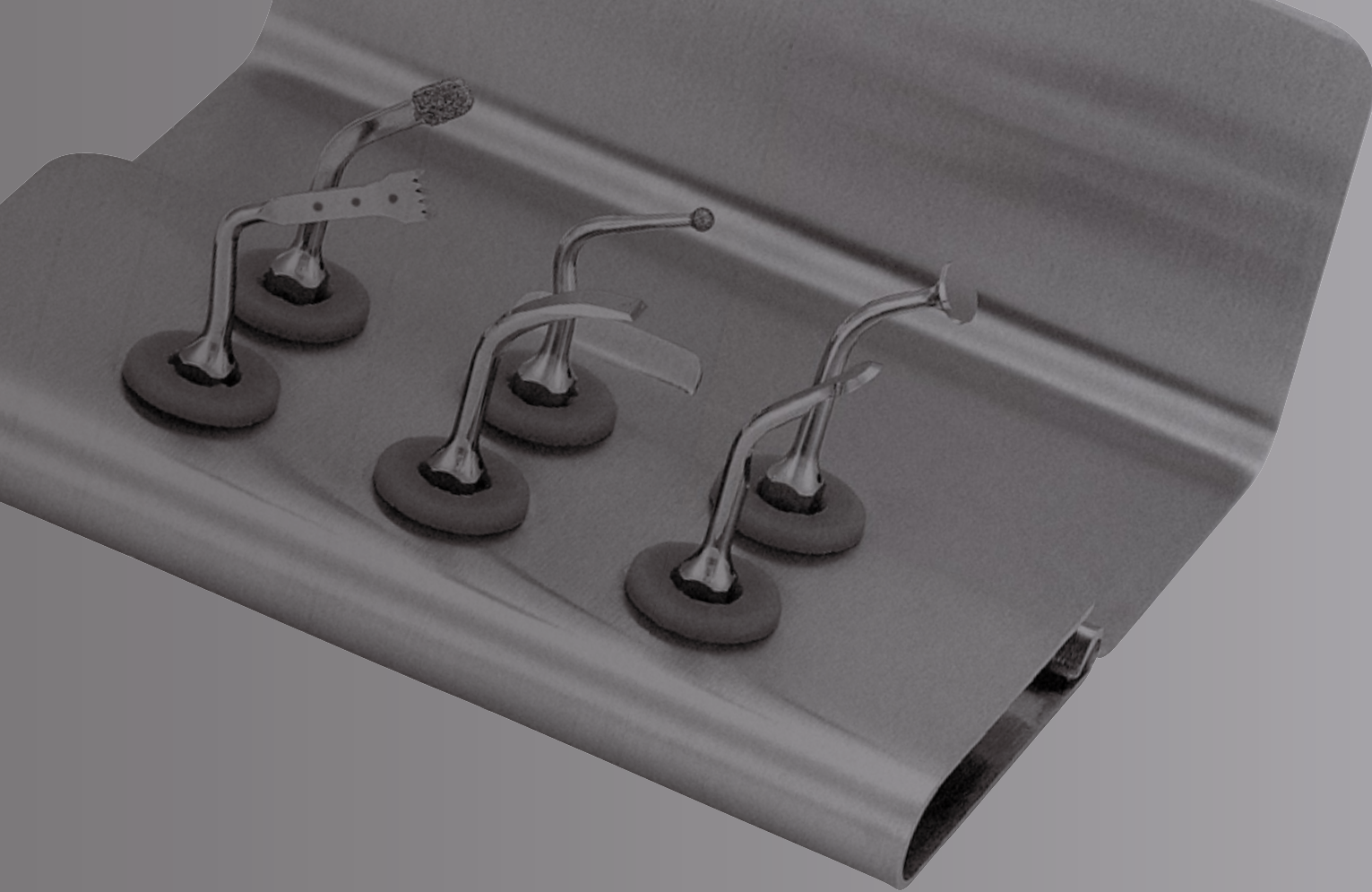

НАБОРЫ НАСАДОК

НАБОРЫ НАСАДОК

МОДЕЛЬ Basic H-S Kit

Комплектация
• H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11
• Бокс для насадок



- Костная хирургия
- Синуслифтинг
- Костные скребки
- Работа с мембраной

КОД ЗАКАЗА
Y1002775

МОДЕЛЬ Sinus Lift Kit

Комплектация
• SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11
• Бокс для насадок



- Синуслифтинг

КОД ЗАКАЗА
Y900689

МОДЕЛЬ Bone Cut Kit

Комплектация
• SG1, SG2R, SG4, SG2L, SG6D
• Бокс для насадок



- Костная хирургия

КОД ЗАКАЗА
Y900688

МОДЕЛЬ Endo-S Kit

Комплектация
• G1-S, E30RD-S, E30LD-S, E31D-S, E32D-S
• Бокс для насадок



- Эндоретроградный

КОД ЗАКАЗА
Y900691

МОДЕЛЬ Implant Preparation Kit

Комплектация
• SG15A, SG15B, SG16A, SG16B
• Бокс для насадок



- Имплантация

КОД ЗАКАЗА
Y900774

МОДЕЛЬ Socket Lift (ЗАКРЫТИЙ СПОСОБ) Набор для стандартного диаметра имплантата

Комплектация
• SCL2D, SCL3D, SCL4D, SCL3
• Ключ для насадок типа VS • Бокс для насадок • Инструкция



- Синуслифтинг (ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ)

КОД ЗАКАЗА
Y1002842

МОДЕЛЬ Socket Lift (ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ) Набор для стандартного диаметра имплантата

Комплектация
• SCL1D, SCL2D, SCL1
• Ключ для насадок типа VS • Бокс для насадок • Инструкция



- СИНУСЛИФТИНГ (ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ)

КОД ЗАКАЗА
Y1002841

VarioSurg 3

Преимущества

- Супертонкий наконечник с подсветкой LED
- Большой модельный ряд насадок для широкого спектра операций
- Объединение с Surgic Pro (физиодиспенсер) в одну систему



Комплекты		
С Оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	VarioSurg3 (230V)	Y1002726

Комплектация
•Блок управления •Наконечник с оптикой LED с кабелем 2 м •Педаль FC-78
•Стерилизационный блок •Подставка для наконечника
•Ирригационный шланг (5 шт.) и другие аксессуары
•Базовый набор Basic H-S Kit (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 и бокс для насадок)

Комплект без педали		
С Оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	VarioSurg 3 (230V) Non FT	Y1002248

Комплектация
•Блок управления •Наконечник с оптикой LED с кабелем 2 м
•Стерилизационный блок •Подставка для наконечника
•Ирригационный шланг (5 шт.) и другие аксессуары
•Базовый набор Basic H-S Kit (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 и бокс для насадок)

Технические характеристики (Блок управления)
•Частота : 28-32 кГц
•Питание : 230 В переменного тока, 50/60 Гц
•Мощность насоса : 10-75 мл/мин
•Программы : SURG (хирургия) x 5, ENDO (эндодонтия) x 2,
PERIO (пародонтология) x 2
•Размеры : Ш 265 x Д 220 x В 100 мм

NAKANISHI INC. www.nsk-dental.com
700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

NSK RUS LLC www.nsk-russia.ru
2, Entuziastov bulvar, 11th floor, Moscow 109544, Russia

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.