

**Инструкция по эксплуатации**

**Пневмодвигатель с внутренним охлаждением MERCURY 2000; TX 414-9D**

**ВНИМАНИЕ!**

Перед началом эксплуатации пневмодвигателя необходимо ознакомиться с данной инструкцией, и в дальнейшем строго следовать указаниям, изложенным в ней.



**Описание изделия**

Предназначен для использования в бормашинах и стоматологических установках в качестве привода стоматологических низкоскоростных наконечников. Подача водяной струи для охлаждения бора в наконечнике происходит внутри самого пневмодвигателя.

**Технические характеристики:**

Давление воздуха (КПа (кгс/см <sup>2</sup> ))	Скорость вращения мотора (об. в мин.)	Потребление воздуха (л/мин)	Вес (г)
245 (2.5)	22000	42	90
294 (3.0)	25000	51	
392 (4.0)	27000	72	
Уровень шума, не более, dB		65	

**Правила техники безопасности.**

Если при работе пневмодвигателя обнаружится вибрация, шум, или нагрев - немедленно прекратите его использование и обратитесь в местную службу поддержки клиентов.


Не ронять, не подвергать пневмодвигатель нагрузкам и ударам!

Пневмодвигатель должен храниться очищенным и смазанным.

Для настройки рабочего давления воздуха в пневмодвигателе необходимо обратиться в местную службу поддержки клиентов.

**Смазка пневмодвигателя**

насадка масляного спрея    угловой/прямой наконечник

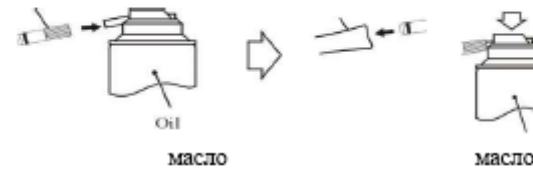

Смазывайте пневмодвигатель в течение 1-2 секунд.

Процедура смазки: Встряхните баллон 3-5 раз. Затем вставьте насадку в отверстие подачи воздуха до упора и распыляйте спрей в течение 1-2 секунд.


Подключите пневмодвигатель, включите в работу.

После остановки бора удалите с мотора салфеткой излишки масла.

**Эксплуатация наконечника**

**ВНИМАНИЕ!**

Перед началом работы, проверьте работу пневмодвигателя вне полости рта пациента. Работать только с исправными инструментами, которые необходимо использовать по назначению и тем самым обезопасить пациента и третьих лиц от любой возможной опасности.

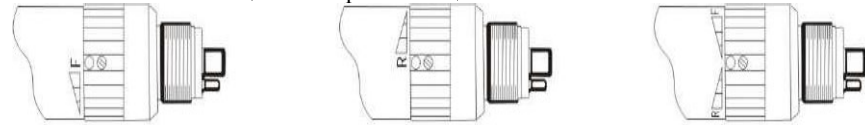

**Переключатель**

Вращение вперед (по часовой стрелке): поверните кольцевой переключатель в (F) сторону.

Вращение назад : поверните кольцевой переключатель в ( R ) сторону.

Когда переключатель находится между (F) или (R) мотор прекратит вращение .

**Наружная очистка пневмодвигателя**

Почистите пневмодвигатель снаружи 70% этиловым спиртом или другим дезинфицирующим средством, не содержащим аммиак, кислоту или хлор.

При проведении дезинфекции не допускается погружение пневмодвигателя в дезраствор. Ненадлежащий уход и техобслуживание могут привести к преждевременному износу и поломке пневмодвигателя.

Хранение и транспортировка пневмодвигателя

Процедура хранения и транспортировки должна соответствовать контракту

Хранить можно при относительной влажности 80%, хорошей вентиляцией, избегайте воздействия коррозионных газов.

Компектация:

1. Пневмодвигатель с внутренним охлаждением MERCURY 2000
2. Руководство по эксплуатации

Гарантия

1. Гарантия данного инструмента распространяется на производственные дефекты и действует в течение одного года с даты реализации инструмента
2. Гарантия распространяется только на ремонт или замену деталей с производственными дефектами, наличие таких дефектов должно быть должным образом засвидетельствовано производителем или через официальную сеть технической помощи.
3. Данная гарантия не распространяется на неисправности, произошедшие не соблюдения инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, из-за падения, ударов, неправильного хранения, действия природных факторов, и технических работ, проведенным не уполномоченным персоналом.
4. Действие гарантии прекращается по истечению ее срока действия, из-за изменений, внесенных в инструмент или использования неправильных креплений, и если технические работы были проведены неуполномоченным лицом.
5. Ремонт и замена деталей во время гарантийного периода не служит поводом для продления изначального срока действия этой гарантии.
6. Данная гарантия распространяется на ремонт и замену бракованных деталей, и не включает детали, подвергшиеся естественному износу, в соответствии с вышеприведенными условиями.
7. Замененные детали по гарантии, свободные от долгов являются собственностью поставщика.

Генеральный директор

ООО «Новгодент» \_\_\_\_\_ С.Е. Новгородский

## Гарантийный талон

Номер наконечника \_\_\_\_\_

Покупатель \_\_\_\_\_

Покупатель, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_ М.П.

Сведения о ремонте

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_