

ДИПЛОМАТ ДЕНТАЛ с.р.о.
Врбовска Цеста 17
921 01 Пиештяны
СЛОВАКИЯ



Руководство Пользователя

Стоматологические установки

DIPLOMAT ADEPT DA 270, DA 280
DIPLOMAT ADEPT DA 370, DA 380

СОДЕРЖАНИЕ

1	НАЗНАЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	3
2	ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	4
3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	5
3.1	Технические характеристики.....	5
3.2	Символы	5
4	ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ УСТАНОВКИ	6
4.1	Метка с заводским номером.....	7
5	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ	9
5.1	Требования к установке рабочих медий.....	9
5.2	Требования к электричеству.....	10
5.3	Требования к окружающей среде.....	10
6	УСТАНОВКА СБОРКА И МОНТАЖ	11
7	ВВЕДЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	12
8	ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	14
8.1	Панель управления с инструментами	14
8.1.1	Основной / исходный экран	14
8.1.2	Система изменения параметров в отдельных экранах	18
8.1.3	Настройка количества воды	29
8.1.4	Таста тормоза панели управления (в зависимости от варианта).....	29
8.1.5	Обслуживание отдельных инструментов	30
8.1.6	Турбина.....	31
8.1.7	Микромотор BLDC - DX, DX BLUE, DX PRO, DX PRO BLUE	34
8.1.8	Хирургический микромотор с перистальтическим насосом DX SRG	40
8.1.9	Скейлер - Устранитель зубного камня	44
8.2	Педаль ножного управления	47
8.3	Блок плевательницы	51
8.3.1	Панель ассистента	52
8.3.2	Простые панели ассистента	52
8.3.3	Оснащение блока плевательницы	52
8.4	Стоматологический операционный светильник.....	53
8.5	Тележка (только для установки DA 280 – CART).....	53
8.6	Гигиена	54
8.7	Регулировка заголовника вручную	54
8.8	Регуляция позиции правого подлокотника вручную	54
8.9	Окончание работы	56
9	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ	56
10	ОЧИСТКА, ДЕЗИНФИЦИРОВАНИЕ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ	57
10.1	Дезинфицирование внутренних распределений инструментов	57
10.2	Полуавтоматическая дезинфекция водяных дорожек шлангов инструментов (по запросу).....	57
10.3	Очистка и обеззараживание слюноотсасывателя	60
10.4	Очистка и обеззараживание большого и маленького отсасывателя	60
10.5	Очистка ситка сепарационного блока	60
10.6	Очистка и дезинфекция клапана Dürr в плевательнице	61
10.7	Обеззараживание плевательницы	62
10.8	Очистка, дезинфицирование и обеззараживание остальных частей стом. установки	63
11	УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА	64
12	РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА	64
13	ГАРАНТИЯ	64
14	СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ	65
15	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ	65
16	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	65
17	ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ПО EN 60601-1-2	66

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Это Руководство по эксплуатации описывает правильный вид эксплуатации стоматологических установок **DIPLOMAT ADEPT DA 270, DA370 и DA 280, DA380**. До начала пользования стоматологическими установками прочтите, пожалуйста, внимательно это Руководство по эксплуатации.

Пользоваться стоматологической установкой разрешено только ознакомленному с этим Руководством по эксплуатации и позволенным стоматологической установкой видами аппликации зубному врачу. В интересах обеспечения Вашего полного довольства работой стоматологической установки надо удовлетворить следующие условия: установка, настройка и éventуальные переработки и отделки должны быть осуществлены только квалифицированным, авторизованным сервисным специалистом правомочной для этой деятельности организации. Надо также удовлетворить приведенные в Руководстве по эксплуатации стоматологической установки **DIPLOMAT ADEPT DA 270, DA370 и DA 280, DA380** условия по установке и рабочим медиям.



Выключатель питания

DIPLOMAT ADEPT DA 270



DIPLOMAT ADEPT DA 280



DIPLOMAT ADEPT DA 370



DIPLOMAT ADEPT DA 380



DIPLOMAT ADEPT DA 280, DA 380 CART



Знак безопасности

2 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Стоматологическая установка **DIPLOMAT ADEPT DA 270** конструирована в качестве неподвижной стоматологической установки с несенным креслом пациента и верхней проводкой шлангов инструментов и **DIPLOMAT ADEPT DA 280** с нижней проводкой шлангов инструментов, причем DA 280 может быть конструирована также в исполнении CART. В верхней части несущей колонны блока плевательницы помещен пантограф панели управления с собственной панелью, оснащенной контактной клавиатурой и инструментами и пантограф стоматологического операционного светильника с операционным светильником. В исполнении DA 280 CART используется панель управления с подвесной проводкой шлангов, помещенная на тележке. Управление инструментами - с исключением стоматологического шприца, большого и маленького отсасывателя, слюноотсасывателя (или же полимеризационной лампы и внутриротовой камеры) - осуществляется посредством педали ногового управления. Для перестановки позиции панели управления служит рукоятка. Блок плевательницы поставляется в различных вариантах со слюноотсасывателем или консолей ассистентки с большим и маленьким отсасывателем. Плевательница и трубка споласкивания плевательницы снимаемы. Привод плевательницы ручной или моторный (соответственно заказу). Наконечники отсасывания маленького и большого отсасывателя снимаемы, их можно дезинфицировать и стерилизовать. Наконечники слюноотсасывателя предназначены для однократного применения. В качестве оснащения по выбору, по заказу, монтируется столик для откладывания инструментов к консоли пантографа стоматологического операционного светильника и консоль монитора с ЖК-монитором. Стоматологическая установка **DIPLOMAT ADEPT DA 270, DA 280** оснащена всегда на панели управления стоматологическим шприцем.

На панели управления можно монтировать следующие инструменты:

Условие	Примечание
минимально 1 стоматологический шприц	
Максимально 4 ротационных инструмента	DA270, DA280
Максимально 5 ротационных инструмента	DA370, DA380
Максимально 3 турбины с освещением	
Максимально 3 BLDC микродвигателя с освещением	макс. 3 x DX макс. 3 x DX BLUE макс. 2 x DX PRO + 1 x SRG макс. 2 x DX PRO BLUE + 1 x SRG
1 скейлер	устранитель зубного камня
1 полимеризационная лампа	LED

i Опционально и дополнительное оборудование (см. действительный прайс-лист)

В руководстве приняты следующие сокращения и условные обозначения:

Скейлер – ультразвуковой устранитель зубного камня

ПЛМ/PLM – полимеризационная лампа


BLDC двигатель – безуглеродный двигатель

Части установки, вступающие до контакта с пациентом:

- Сиденье кресла
- Опора спины
- Опора головы
- Опора руки
- Большой и малый отсасыватель
- Слюноотсасыватель
- Инструменты панели управления







3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

3.1 Технические характеристики

Стоматологическая установка	Значение
Питательное напряжение	230V ± 10%
Частота	50 Hz ± 2 %
Максимальная потребляемая мощность	1900 VA + 10%
Входное давление воздуха	с 0,45 по 0,8 МПа
Входное давление воды	с 0,3 по 0,6 МПа
Вес стоматологической установки нетто	145 кг + макс.20 кг в зависимости от варианта
Вес стоматологической установки брутто	210 кг + макс.35 кг в зависимости от варианта
Тип защиты от поражения электроническим током	Прибор класса защиты I
Степень защиты от поражения электрическим током	Наружные части типа B 
Степень защиты крышкой	IP21
Температура воды для стакана пациента	35 ± 5 °C (если монтирован обогреватель)
Макс. рекомендуемая нагрузка на лоток на плечи светильника	1,5 кг
Макс. рекомендуемая нагрузка на лоток подноса панели дантиста:	
• для лотка из нержавеющей стали 180x280 mm	0,5 кг
• для лотка из нержавеющей стали 290x370 mm	1,5 кг
Режим эксплуатации	длительный с прерывистой загрузкой, которая соответствует принятой стоматологической практике



Кресло	Значение
Диапазон высоты сиденья над уровнем пола	385 мм - 825 мм ± 15 мм (DA270,DA280)
	320 мм - 825 мм ± 15 мм (DA370,DA380)
Диапазон подуклона опоры спины от вертикальной плоскости	20° ± 2° по 90° ± 2° (DA270,DA280)
	13° ± 2° по 97° ± 2° (DA370,DA380)
Диапазон подуклона сиденья от горизонтальной плоскости	3° по 21° ± 2° (DA370,DA380)
Срок длительности вертикального движения кресла	максимум 20 секунд
Срок длительности движения опоры спины в незагруженном состоянии	максимум 18 секунд
Длительность наклона сиденья	максимум 8 секунд
Подъемная способность кресла пациента (EN ISO 7494-1)	максимум 200 кг
Вес кресла у установок DA270,DA280 нетто	60 кг + макс. 5 кг в зависимости от оснащения
Вес кресла у установок DA270,DA280 брутто	110 kg + max. 20 кг в зависимости от оснащения
Вес кресла у установок DA370,DA380 нетто	65kg + max. 5 кг в зависимости от оснащения
Вес кресла у установок DA370,DA380 брутто	115 kg + max. 20 кг в зависимости от оснащения
Режим эксплуатации	1 : 16 (цикл например 25 секунд ход, 400 секунд неподвижное состояние)
Уровень шума кресла пациента	максимум 54 dB

3.2 Символы

Символ	Описание	Символ	Описание
	Осторожно, Предупреждение		Наружные части типа B
	Примечание	IP21	Защита от вертикально падающих капель воды
	Дополнительная информация		Обязательные соответствующие маркировки для определенных продуктов, продаваемых в рамках Европейской экономической зоны
	См. руководство по эксплуатации/буклета		Серийный номер
	См. инструкции по использованию		Стерилизуемый в паровом стерилизаторе (автоклаве) при температуре 135°C
	Дата изготовления		Символ указывает на отдельный сбор отходов электрического и электронного оборудования
	Производитель		Оборудование класса II



4 ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ УСТАНОВКИ

ОПИСАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ДА270, ДА370

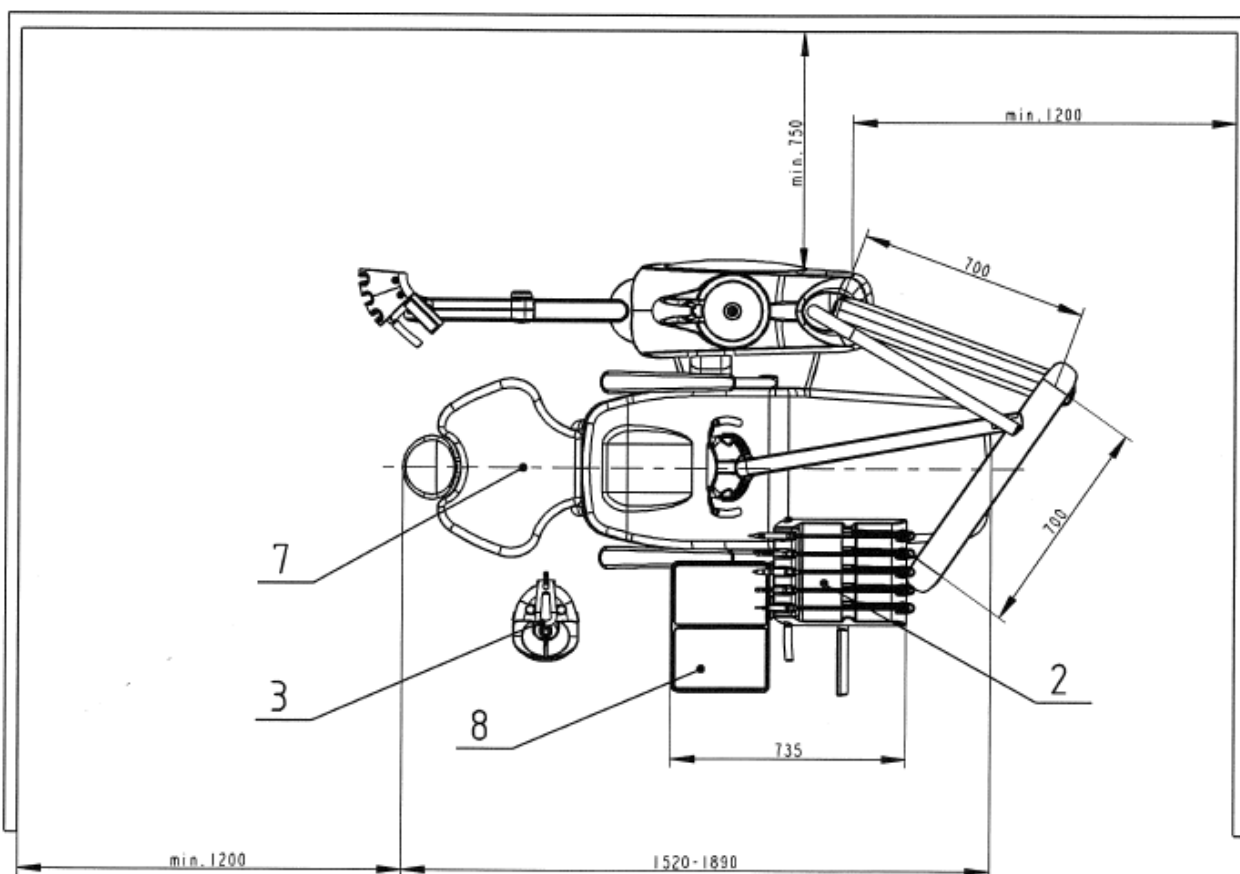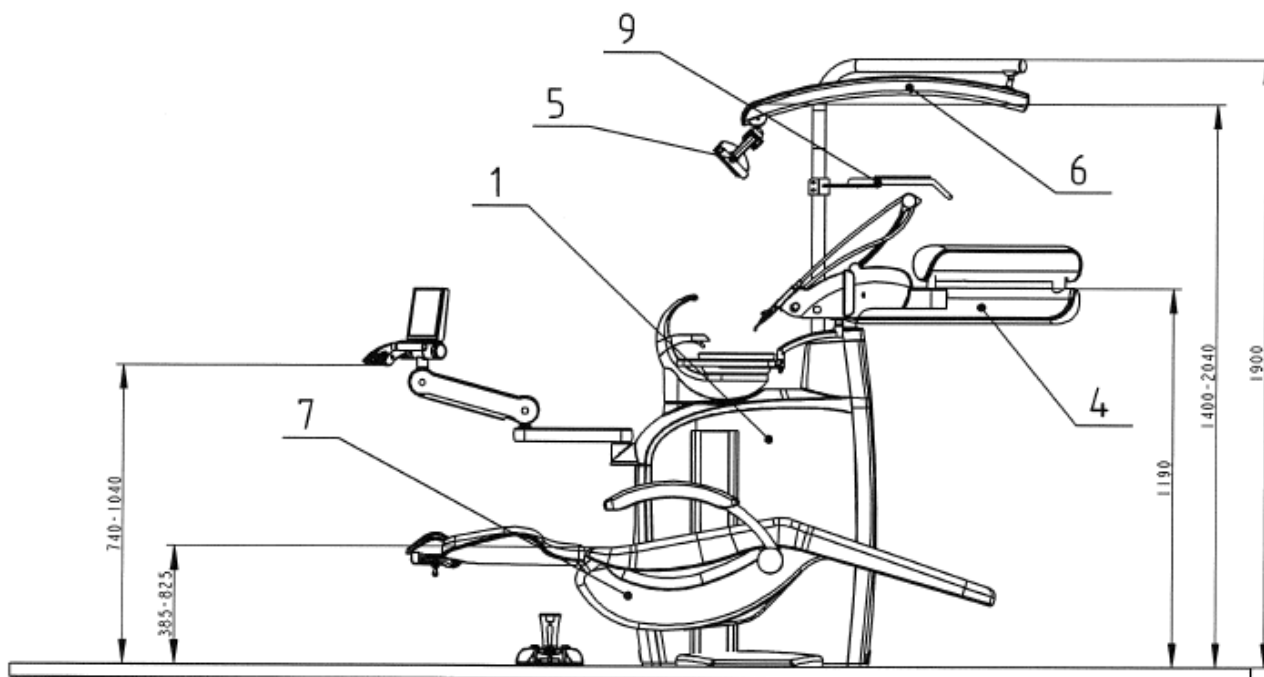



- 1.Блок плевательницы с консолей ассистентки
- 2.Панель управления
- 3.Педаля ножного управления
- 4.Пантограф панели управления
- 5.Стоматологический операционный светильник
- 6.Пантограф стоматологического операционного светильника
- 7.Стоматологическое кресло пациента
- 8.Трей-столик
- 9.Столик для откладывания

ОПИС,

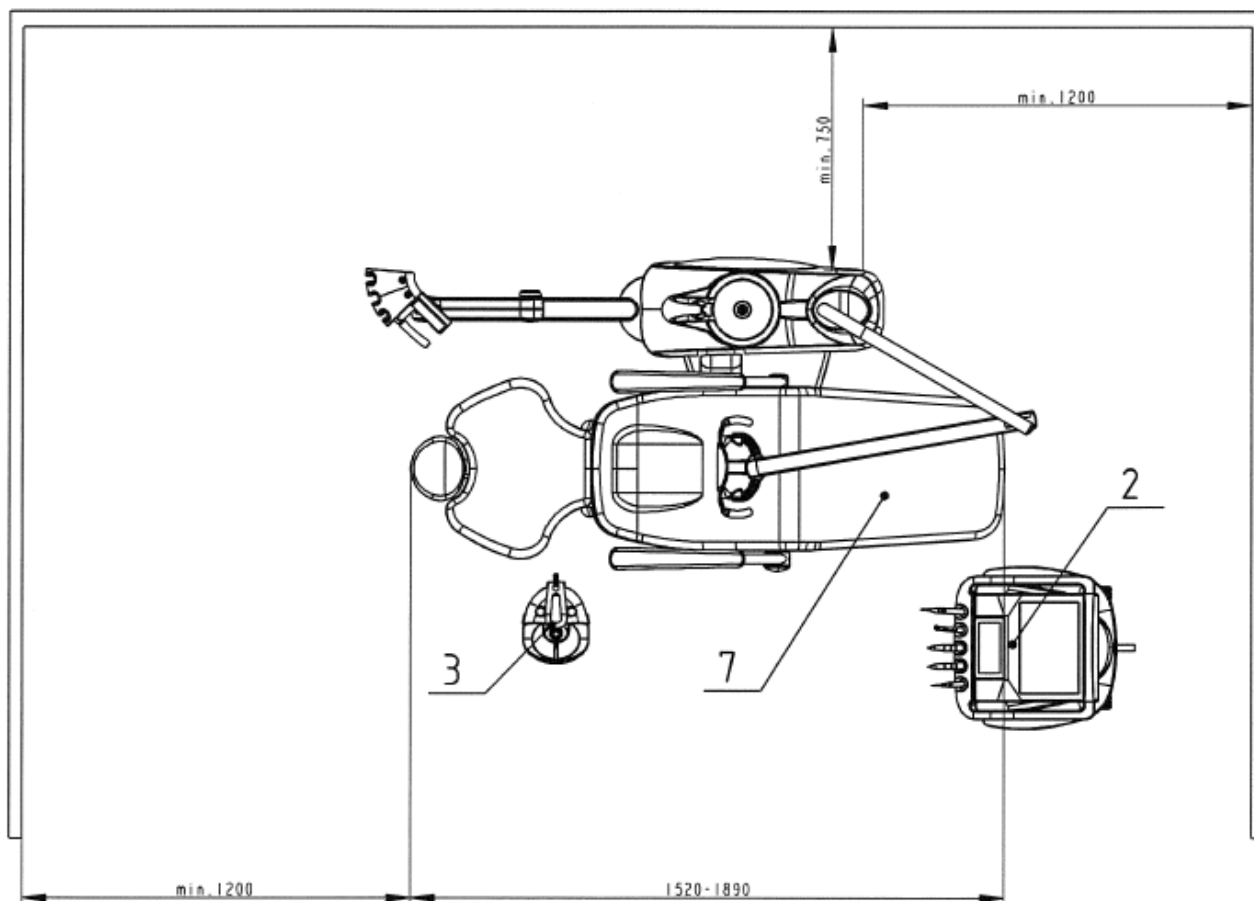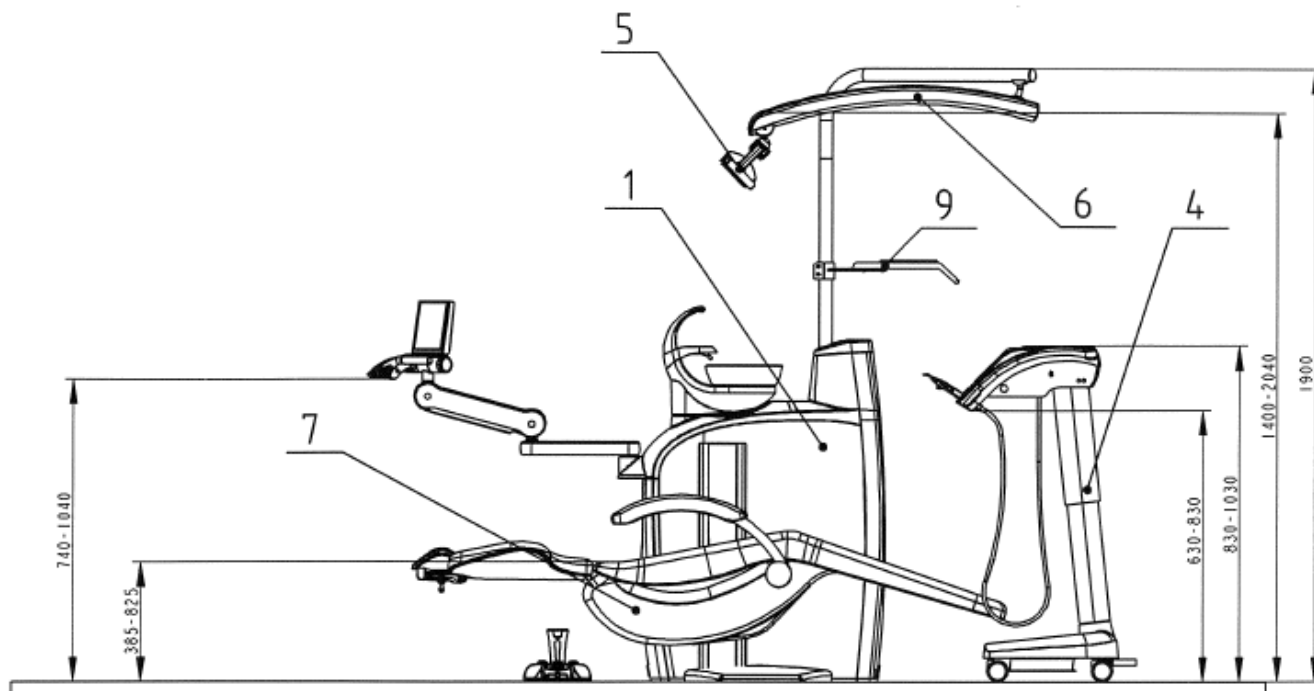

- 1.Блок плевательницы с консолью ассистентки
- 2.Панель управления
- 3.Педаль ножного управления
- 4.Тележка (CART)
- 5.Стоматологический операционный светильник
- 6.Пантограф стоматологического операционного светильника
- 7.Стоматологическое кресло пациента
9. Столик для откладывания


4.1 Метка с заводским номером

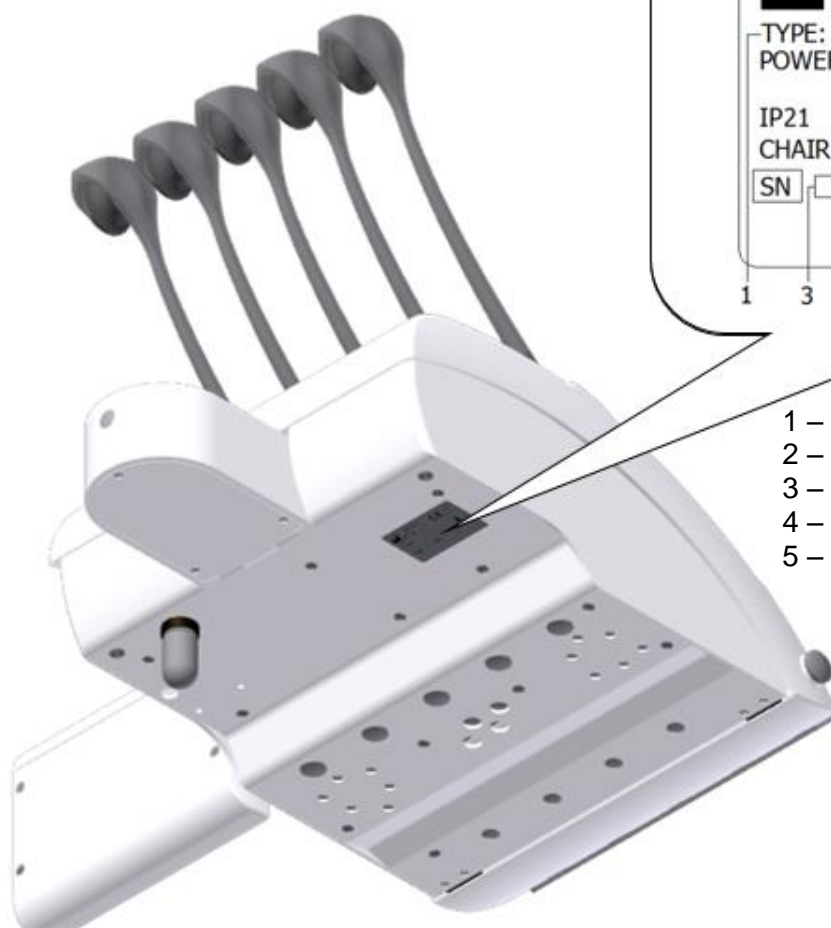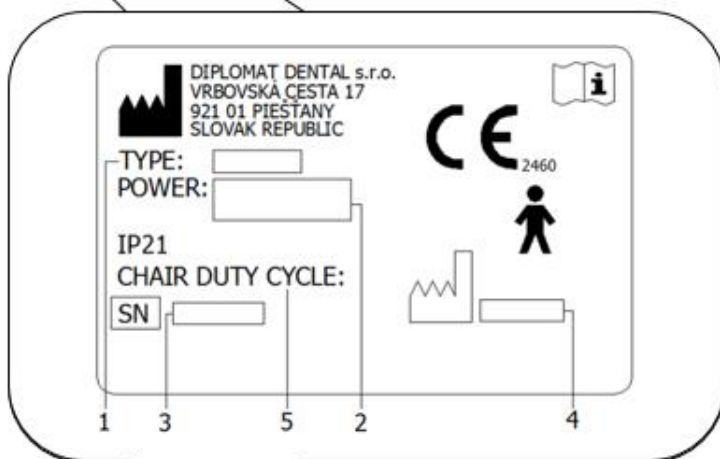


- 1 – обозначение типа стом. установки
- 2 – основные электрические параметры
- 3 – заводской номер
- 4 – дата производства
- 5 – режим эксплуатации кресла пациента

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ

Предупреждение

	<p>Подготовительную установку и установку необходимо провести соответственно действующим нормативам в конкретной стране и в соответствии с действующей документацией изготовителя, имеющейся в распоряжении у каждого авторизованного представителя компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.</p> <p>Не допускается эксплуатация в помещениях с опасностью взрыва</p>
---	---

Осторожно

	<p>Чтобы избежать риска поражения электрическим током, необходимо это устройство должно быть подключенное к сети электропитания с защитным заземлением.</p> <p>Не модифицируйте это оборудование без разрешения производителя.</p>
---	--

5.1 Требования к установке рабочих медий

Требования к полу

Основание пола должно быть изготовлено из бетона толщиной в минимально 100мм. Уклон пола может достигать максимально 1%. Антистатический пол предпочитается.

Вода

Применять надо питьевую воду с входным давлением от **0,3 МПа** по **0,6 МПа** и протоком более чем 5л/мин., без частиц больше **50 µm**, которые могут забить маленькие сечения в распределениях стоматологической установки. Если вода содержит частицы больше **50 µm**, надо предвключить фильтр в **50 µm**.

Жёсткость воды должна быть меньше чем 2,14 ммоль/л.

pH должно быть в диапазоне от 6,5 до 8,5.

Максимальная электропроводность воды максимум до 2000 µS/см.

Вода должна соответствовать местным стандартам для питьевой воды.

Рекомендуем употреблять трубки из меди/ Cu или полиэтилена/ PE.

Охлаждение инструментов с водой из центрального развода


- В центральное распределение воды этой установки входит запорный клапан и клапан для предотвращения обратного потока воды

Требования и рекомендации:

- Если центральная вода используется для охлаждения стоматологических инструментов, то необходимо установить фильтр частиц с точностью **5 µm**, прежде чем вода войдет в стоматологическую.
- Жёсткая вода может привести к дисфункции установки.
Если вода содержит более **50 мг СаО/л** или **36 мг MgO/л**, то необходимо включить устройство для умягчения твёрдости воды, подключенной на входе распределения воды.
Устройство для умягчения жёсткости воды нужно включить в случае, если не использовать дистиллированную воду.
- При требовании к установке точки для отбора проб воды на входе, на следующей схеме показано рекомендуемое расположение точки подключения для отбора проб воды на входе.

Указанные устройства не являются составной частью зубохирургического блока.

Схема подключения элементов ввода стоматологической установки (EN ISO 7494-2)

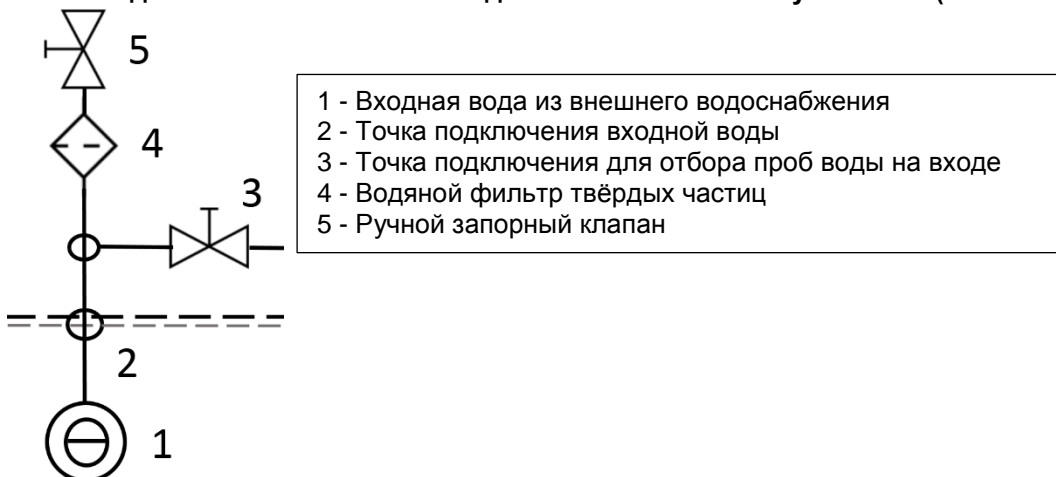

Воздух

Надо обеспечить поставку не менее **55л/мин** безмасляного, чистого и сухого воздуха при давлении **0,45** по **0,8 МПа**. Рекомендуем употреблять трубки из меди/ Cu или полиэтилена/ PE. Рекомендуемые значения предела влажности (точка росы не более -20 ° С при атмосферном давлении), предела загрязнения маслом (макс. 0,5 мг / м3), предел загрязнения для частиц (не более 100 частиц на кубический метр для частиц размером от 1 мкм до 5 мкм).

Аспирация - Отсасывание (для блоков плевательницы с большим и малым аспираторами)

Статический вакуум должен достигать величины не менее 0,005 МПа (150 mbar) по макс. 0,02МПа (200mbar) измеренных на позиции установки. В случае, когда статический вакуум превышает величину 0,02МПа, надо в линию отсасывания включить калибрационный клапан отсасывания (регуляционный), ограничивающий максимальный вакуум до величины 0,02 МПа. Этот регуляционный клапан не является составной частью стоматологической установки. Отсасывающий агрегат должен производить проток в минимально 450 л/мин., измеренное на позиции установки.

Водосточная система

Линия водостока должна оказывать связный склон величиной в **1%** с минимальным протоком в 10 л/мин. и она не должна содержать острых изгибов и мест, которые могут вызвать обратный ток. **Не употреблять одну и ту же линию водостока вместе с другой стоматологической установкой или втазом!** Применение трубок из полипропилена или из закаленного полиэтилена разрешается.



Если назначения в стране, где осуществляется установка стоматологической установки, требуют ловитель амальгамы, необходимо стоматологическую установку с блоком плевательницы без ловителя амальгамы подключить к дополнительному ловителю амальгамы. Установку дополнительного ловителя амальгамы надо провести соответственно инструкциям его изготовителя

5.2 Требования к электричеству

Величина рекомендованного сетевого предохранителя

Рекомендованная величина предохранителя сетевого присоединения 16 А (в случае защитного электрического автомата – надо применить защитный автомат с характеристикой выключения типа С). К этому присоединению нельзя подключать никакие дальнейшие виды оборудования! Максимальная электрическая потребляемая мощность стоматологической установки достигает 1900 VA. Токособирательная шина должна удовлетворять требования соответствующего национального стандарта.

Рекомендация

Если национальный стандарт не определяет другой вид, рекомендует производитель употребить защитный электрический автомат с чувствительностью в 30mA и немедленным сроком выключения.

После выполнения требований по подготовительной установке можно осуществить сборку и монтаж стоматологической установки и ее подключение к источникам рабочих медий.


Взаимные помехи

Стоматологическая установка во время своей работы не влияет на работу других электронных устройств рядом с ним

5.3 Требования к окружающей среде

Параметр	От	До
диапазон температуры окружающей среды	+15 °C	+40 °C
диапазон относительной влажности	30%	75 % non-конденсируя влажность
диапазон атмосферного давления	700 hPa	1060 hPa
высота	≤ 3000 m	


6 УСТАНОВКА СБОРКА И МОНТАЖ


	Установку должен осуществлять только сертифицированный специалист, в противном случае, претензии и рекламации, заявленные в течение гарантийного срока рассмотрены не будут. Регистрационный бланк необходимо заполнить и отослать производителю или продавцу.
---	--

Распаковка установки и контроль поставки


Проверяется неповрежденность транспортной упаковки. В случае обнаружения повреждения транспортной упаковки посылку не открывать и недостаток немедленно сообщить транспортной или продающей организации. Неповрежденную посылку бережно раскрыть и распаковать отдельные части стоматологической установки. Комплектность поставки проверить путём сравнения ее содержания с **упаковочной картой**. Если стоматологическая установка оснащена контактной клавиатурой, надо с ней в течение манипуляции обращаться бережно.

Ситка/фильтры (упакованные в упаковке с мелкими частями) вставить в наконечники отсасывателей.
--

	<p>Нагрузка на плечо пульта управления доктора</p> <p>Пантографную консоль панели управления нельзя загружать кроме текущей манипуляции с панелью управления со стороны зубного врача и разрешенной загрузки трей-столика путём повышенной загрузки вследствие опирания лиц или предметов, навеской лиц или предметов на нее ни другими подобными действиями.</p>
---	--

<p>Примечание</p> 	<p>В случае установки монтажной платы, мы рекомендуем изолировать её по периметру прозрачной силиконовой мастикой к полу.</p> <p>Когда плата не изолирована силиконовым герметиком, то может произойти повреждение изделия, вызванное воздействием воды и моющих средств, для которых производитель может не распознать любые жалобы.</p>
--	---

7 ВВЕДЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

	Дезинфекция новой стоматологической установки перед первым использованием
	Перед вводом прибора в эксплуатацию ваш техник должен провести дезинфекцию водяных путей охлаждения инструментов в соответствии с инструкциями руководства по монтажу


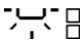

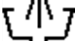





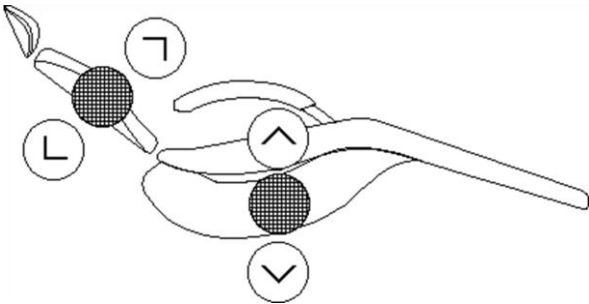







- включить компрессор и повысить давление в системе
- открыть центральную подачу воды
- включить агрегат отсасывания
- проверить, находятся ли все инструменты в их позициях
- включить центральный сетевой выключатель к элетрической сети,


тем загорается контрольный свет главного выключателя и на дисплее появляется на короткое время вводный экран/надпись:



Следом за ним изображен главный экран:

DA270/DA280

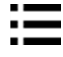
12.AUG	12:12					
 1  2  3  4		 +  U  LP  ↓				
DR.SMITH				ТИП		

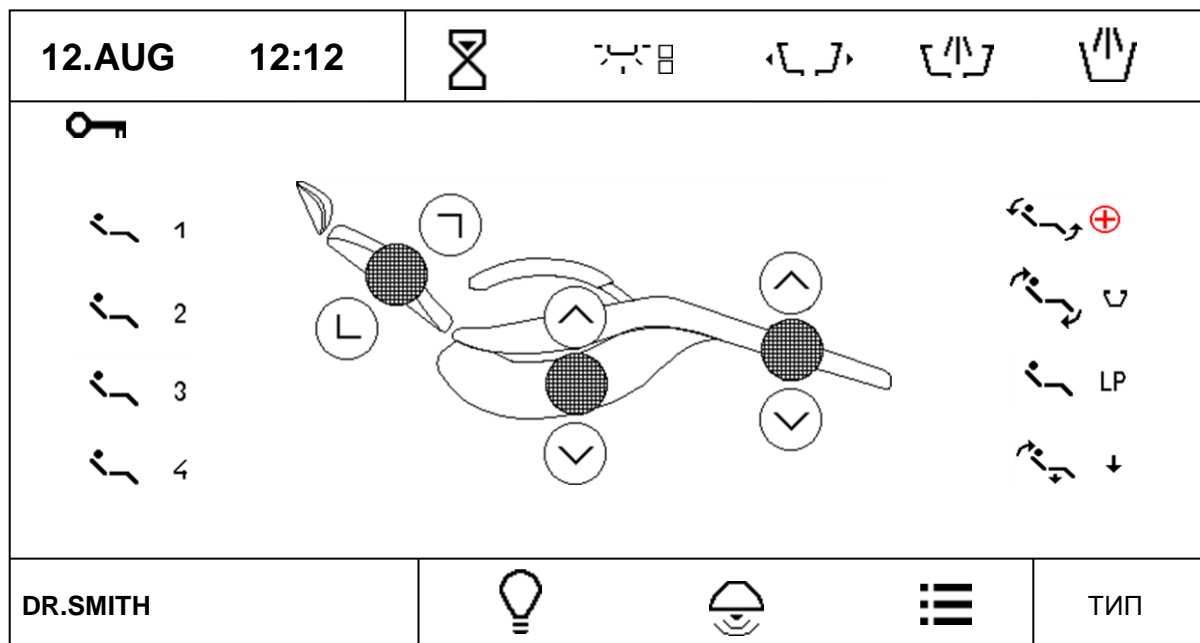

Установка подключена к распределениям воды и воздуха. **После акустического сигнала – короткий-длинный зуммер установка готова к работе.** Если в стоматологической установке встроен электрический водоподогреватель для обогрева воды для стакана пациента, надо подождать приблизительно 10 минут, чтобы температура воды достигла желаемой величины. Включая стоматологическую установку рекомендуется не снимать инструменты из гнезда, педаль ножного управления должна находиться в позиции покоя и кнопки клавиатур должны быть деактивированы.

С исключением слюноотсасывателя, большого и маленького отсасывателя, полимеризационной лампы, стоматологического шприца на панели ассистентки и стоматологического шприца на панели управления можно одновременно применять (снимать из гнезда) только один инструмент.

Несоблюдение этого условия указано на дисплее надписью:

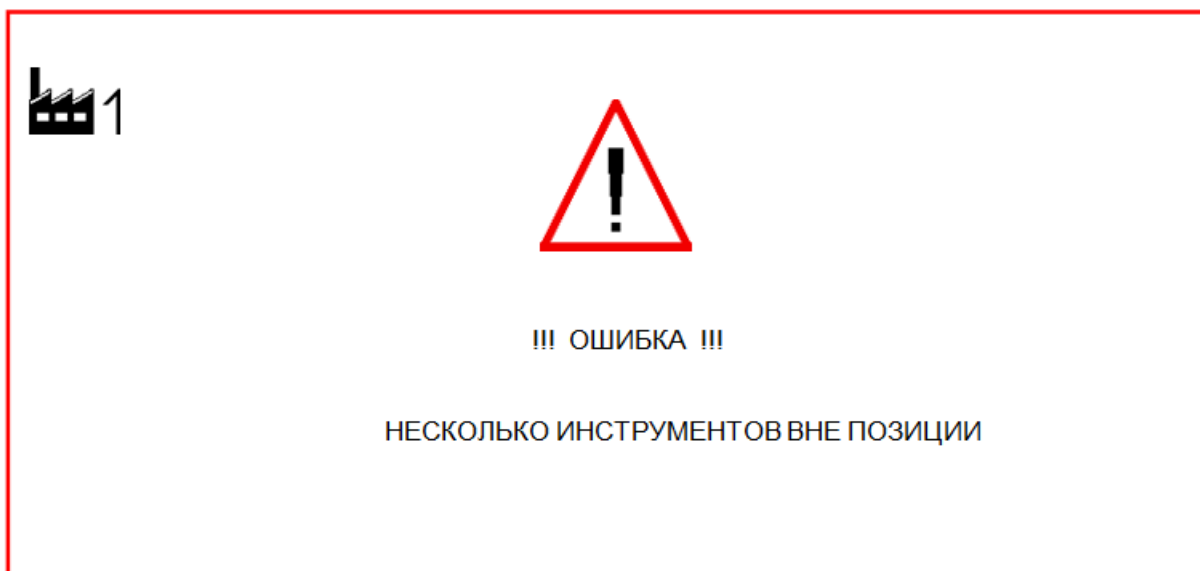

8 ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


8.1 Панель управления с инструментами

Контактный дисплей удобочитаемый в каждой рабочей позиции зубного врача (сидящей и также стоящей позиции).


8.1.1 Основной / исходный экран

Он изображается после включения стоматологической установки.

DA270/DA280

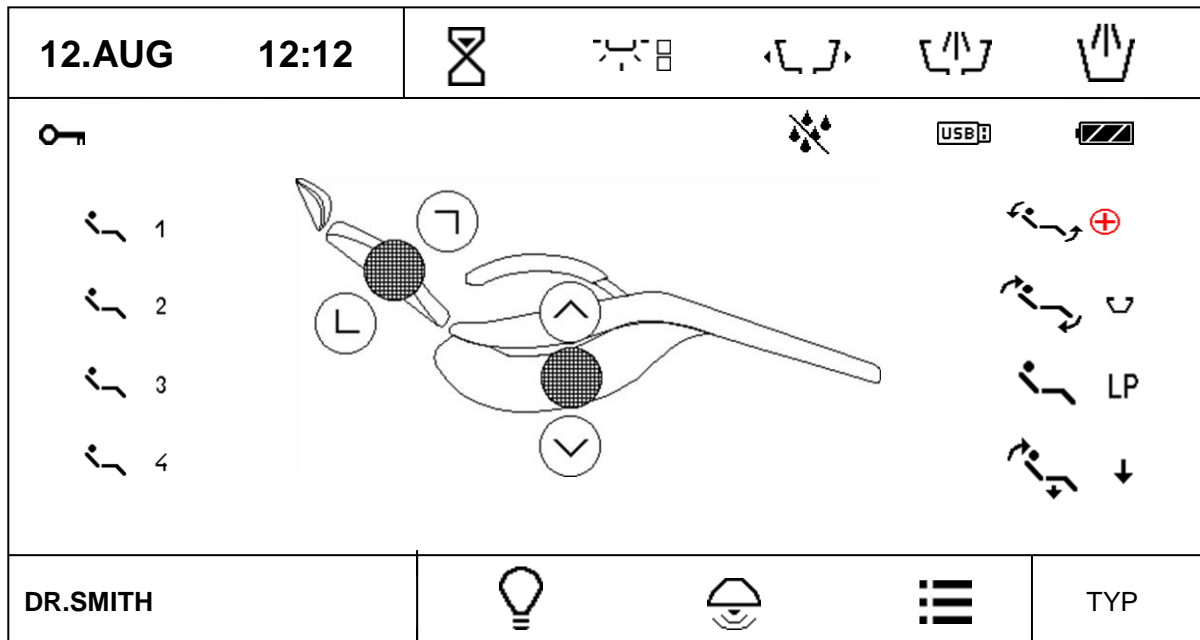

DA370/DA380

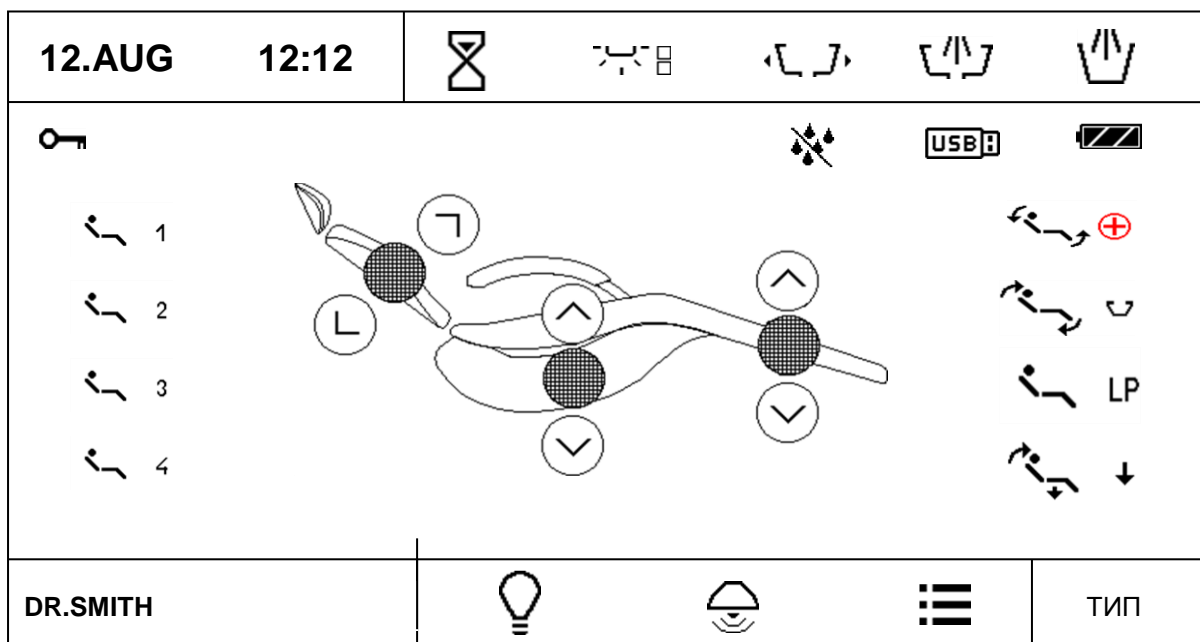


Актуальное время и дата

12.AUG 12:12

Время и дату можно настраивать в меню пользователя.


Тревога

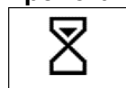

Тревога служит для предупреждения зубного врача. Также действует в виде таймера. Время можно настраивать. После нажатия на кнопку изображается меню с возможными величинами времени.

Одну из них – обозначена буквой U – можно устанавливать в меню пользователя. После нажатия на кнопку активировано отчисление времени с промежутком в 1 секунду до достижения нулевой величины. Путём повторного нажатия на кнопку в течение отчисления времени функция таймера отменяется. Когда отчисляемый период времени достигнет величину 00:00, раздаётся акустический сигнал.

Операционный светильник. У него три основных уровня яркости:

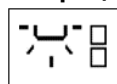

Выключен




Пониженная яркость для удобной работы со светозакаляемыми материалами/фотокомпозитами



Нормальная яркость

Путём нажатия на кнопку циклически переключаются отдельные уровни яркости.

Поворачивание плевательницы – в рабочую позицию, программирование.

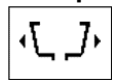

Путём нажатия на кнопку на период дольше 1 секунды поворачивается плевательница вплоть до момента освобождения кнопки и период поворачивания автоматически введен в запоминающее устройство. В случае нажатия на кнопку на период короче 1 секунды выдвигается плевательница в запрограммированную позицию. Если плевательница в момент нажатия на кнопку выдвинута, тогда возвращается в исходную позицию. Движение плевательницы можно прекратить путём нажатия на кнопку на период короче 1 секунды (относится только к плевательнице с моторным движением).

Если плевательница в момент нажатия на кнопку выдвинута, тогда возвращается в исходную позицию. Движение плевательницы можно прекратить путём нажатия на кнопку на период короче 1 секунды (относится только к плевательнице с моторным движением).

Споласкивание плевательницы



Путём нажатия на кнопку на период дольше 2 секунд активируется споласкивание плевательницы на период сходный с периодом до освобождения кнопки и период споласкивания автоматически вводится в запоминающее устройство. Кратковременное нажатие на кнопку активирует

споласкивание на введенный в запоминающее устройство период. Кратковременное нажатие на кнопку в течение споласкивания плевательницы прекращает идущий процесс споласкивания, причем введенный в запоминающем устройстве период не изменяется. Споласкивание активируется автоматически также после возвращения плевательницы в нулевую позицию. Автозапуск споласкивания можно отключить / включить в меню пользователя.

Наполнение стакана пациента



Путём нажатия на кнопку в течение дольше 2 секунд заполняется стакан пациента до освобождения кнопки и период наполнения автоматически вводится в запоминающее устройство. Кратковременное

нажатие на кнопку активирует процесс наполнения стакана на введенный в запоминающее устройство период. Кратковременное нажатие на кнопку в течение наполнения стакана прекращает идущий процесс наполнения, причем введенный в запоминающем устройстве период не изменяется.

Включение/выключение негатоскопа



Путём нажатия на кнопку повышается яркость подсвечивания дисплея до достижения величины 100% и можно приложить негатив и закрепить его посредством магнетической прихватки, которая поставляется вместе со стоматологической установкой. Путём повторного нажатия на кнопку функция прекращается и яркость возвращается на предыдущий уровень. Негатоскоп можно включить когда инструмент снят из гнезда.

Если картинка избрана из вставленного и идентифицированного USB-ключа в режиме USB-меню, потом вместо белого фона изображена избранная картинка.

Звонок



Путём длительного нажатия на кнопку включается реле звонка в блоке плевательницы.

Пользователь

DR. SMITH


Изображена информация об актуальном пользователе. Выбирать можно одного из четырех пользователей, т.е. в запоминающем устройстве введены дата для четырех пользователей.

Путём нажатия на кнопку изображается вскакивающее меню с возможными пользователями.

DR.SMITH
DR.ANTOV
DR.POLAKOWSKI
DR.SLAVIK


Селекция пользователя осуществляется путём активации соответствующей кнопки. Эдитирование имени пользователя возможно в меню пользователя. После активации соответствующей кнопки дисплей проходит повторным включением и осуществляется переустановка параметров соответственно выбранному пользователю.

Блокирование клавишной панели

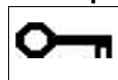

Клавиатуру можно блокировать в случае ее очистки. Путём нажатия на кнопку на период приблизительно 3 секунды осуществляется блокировка клавишной панели и это состояние указано на дисплее.






Деблокировать клавиатуру можно путём нажатия на кнопку  на период приблизительно 3 секунды. В обоих случаях время ожидания указано посредством небольшого барграфа.

Указание источника воды для инструментов





Возможные источники воды в зависимости от положения переключателя воды:


	Никакой источник воды не был выбран
	Источником является дистиллированная вода из бутылки
	Центральная водопроводная система воды

Эта индикация появляется только при плевательничковом блоке LUX

Индикация USB-ключа

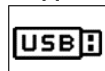

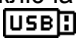




После задвижения USB-ключа в USB-штепсельный разъем и его активации изображен на центральном дисплее/экране символ . Если символ не появится в течение 5 секунд после задвижения USB-ключа, указывает это на правдеподобность, что USB-ключ не был активирован. В таком случае надо

USB-ключ выдвинуть и быстро его снова задвинуть. В случае безуспешного трехкратного повторения существует правдеподобность не осуществленной идентификации употребленного USB-ключа. Если символ  светит, можно с USB-ключом работать посредством меню USB.


Указание состояния аккумулятора в беспроводной педали ножного управления



Символ появляется только тогда, когда беспроводная педаль ножного управления подключена. Форма символа указывает на состояние аккумулятора в педали ножного управления:

	аккумулятор разряжен и необходимо его подключить для подзарядки
	аккумулятор заряжен до приблизительно 33% мощности
	аккумулятор заряжен до приблизительно 66% мощности
	аккумулятор заряжен до приблизительно 100% мощности
	аккумулятор заряжается


Главное меню

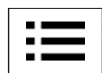


Путём активации кнопки входим в главное меню стоматологической установки.

Движение кресла пациента

DA270/DA280

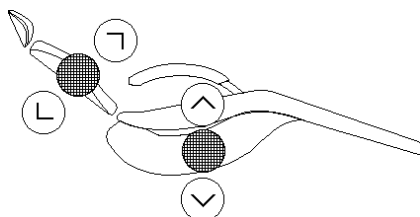


DA370/DA380

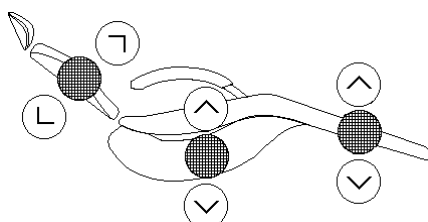

Управление основными движениями кресла пациента осуществляется посредством кнопок с символами направления движений. Движение осуществляется в течение периода нажатия на кнопку и оно указано

посредством дополнительных индикаторов в зависимости от направления движения : . Все эти клавиши прямо управляют креслом пациента когда инструменты помещены в гнезда или когда инструмент снят из гнезда педаль ножного управления находится в нулевой позиции.

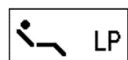

Последняя позиция – возвращение кресла пациента в предпоследнюю позицию.


Программируемые позиции.

Они служат для ввода в запоминающее устройство и для активации предварительно настроенных позиций кресла пациента.

Стоматологическая установка позволяет четыре любые позиции ² ... ⁴ и три целевые/ассигнованные позиции :



Антишоковая позиция (позиция Тренделенбурга)

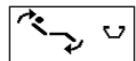

Позиция для выполаскивания / Поворот из позиции для выполаскивания



Позиция для посаживания пациента

Путём нажатия на соответствующую кнопку происходит активация желаемой позиции. Программирование и ввод позиции в запоминающее устройство осуществляется путём настройки кресла в желаемую позицию и последовательного нажатия на кнопку с соответствующей позицией в течение не менее 2 секунд. Переход в режим программирования указан посредством акустического сигнала и путём изменения цвета рамка на соответствующей клавише. После освобождения кнопки позиция вводится в запоминающее устройство. Все запрограммированные позиции хранятся отдельно для каждого пользователя и для выбора пользователя выбрать из памяти. Различные программируемые позиции представляет собой автоматизированное движение миску (когда моторизованные). Если устройство подключено к непрограммируемых позиций кресла программируемые кнопки не работают.

До начала движения кресла пациента рекомендует производитель удалить панель ассистента из трассы движения кресла пациента, чтобы предотвратить столкновение кресла пациента с панелью ассистента и в результате того возможное повреждение панели ассистента (относится к неподвижным стоматологическим установкам)

8.1.2 Система изменения параметров в отдельных экранах

Стоматологическая установка позволяет индивидуальную настройку большого количества параметров. Для настройки параметров использовано несколько способов.

1 - Настройка величины параметра с помощью кнопок +/-

12.AUG	12:12					
ТИП ИНСТРУМЕНТА						40 000 X1/min
> 1000	> 5000	> 20000	> 40000			
	П1	ПРОГРАММА 1		 <hr/>		
	1:1		3.5 Нсм			
	НОРМ	Афт	3.0s			
ЭНДОДОНТИЯ		33%				
DR.SMITH				ТИП		

Нажать на кнопку с соответствующим параметром. Позволяющие изменение величины кнопки выделены красным цветом. Величину параметра можно менять посредством кнопок +/- . Новую величину вводим в запоминающее устройство временно (в режим изменения номера программы) путём повторного нажатия на кнопку с настраиваемым параметром, или постоянно в программу посредством кнопки

2 - Настройка величины параметра напрямую посредством клавиатуры

После нажатия на кнопку изображается клавиатура

MIN:100					MAX:40000
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 0 </div>					
0	1	2	3	4	
5	6	7	8	9	
ESC	BS	.		OK	

В площади клавиатуры изображена минимальная и максимальная возможная величина для данного параметра. Если величина вне этого диапазона, указан этот факт посредством символа „!!!“ и величина после активации кнопки „OK“ не будет принята. Клавиша с десятичным пунктом изображается только тогда, если параметр такую форму величины позволяет. Путём активации кнопки ESC можно вернуться не изменив величину. Новую величину вводим в запоминающее устройство временно (в режим изменения номера программы) путём нажатия на кнопку „OK“ , или постоянно в актуальную программу посредством кнопки

3 - Настройка величины путём селекции из меню

У некоторых параметров предварительно настроены величины и их выбор осуществляется с помощью „вскакивающих меню“. После нажатия на кнопку с соответствующим параметром изображается меню с предварительно настроенными величинами, напр. для выбора передаточного отношения:


	2:1	2,7:1
1:1	4:1	5,4:1
	7:1	7,4:1
1:2	10:1	14,8:1
1:4	16:1	
1:5	20:1	
	30:1	
	100:1	
	128:1	
ESC	U 1.0:1	

После нажатия на кнопку ESC можно вернуться не изменив величину. Путём нажатия на соответствующую величину осуществляется ее временная настройка и ввод в запоминающее устройство (в режим изменения номера программы). Если изменение должно быть введено в запоминающее устройство, надо заранее нажать на кнопку

. Ввод в запоминающее устройство программы указан путём изменения цвета . Путём повторного нажатия на эту кнопку ввод в запоминающее устройство отменен.

4 - Эдитирование названия программы и имени пользователя

По аналогии к эдитированию нуммерических величин можно эдитировать также текст названия программы и имени/названия пользователя. В таком случае форма клавиатуры как следует:

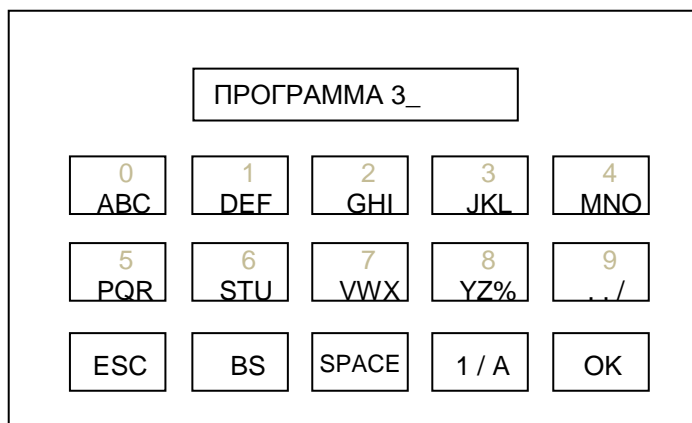

ESC	Таста служит для возвращения не изменив текст
BS	Таста служит для гашения последнего знака
SPACE	Таста служит для вставки пропуска
1/A	Таста служит для переключения режима цифра/буква
OK	Таста служит для окончания эдитирования и ввода изменения в запоминающее устройство

Главное меню



Оно позволяет доступ к отдельным настройкам стоматологической установки

НАСТРОЙКИ	
ГИГИЕНА	ESC
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	
СЕРВИС / ПРОИЗВОДСТВО	
ТЕСТ	
USB	
ИНФОРМАЦИЯ	

Меню ГИГИЕНА

Это меню предоставляется по выбору и изображено только тогда, когда в стоматологической установке установлена гигиена.

ГИГИЕНА			
	10 sec		60 sec
	10 sec		
	50 sec		

Включение /выключение непрерывного обеззараживания для маленького отсасывателя



Путём активации кнопки включается/выключается непрерывное обеззараживание маленького отсасывателя. Состояние указано посредством символа / .

Включение /выключение непрерывного обеззараживания для большого отсасывателя




Путём активации кнопки включается/выключается непрерывное обеззараживание большого отсасывателя. Состояние указано посредством символа / .

Активация обеззараживания для плевательницы



Путём активации кнопки активируется обеззараживание плевательницы.

Активация гигиены для большого и маленького отсасывателя

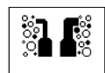

Путём активации кнопки активируется целевая гигиена обоих отсасывателей.

Активация режима дезинфицирования стакана пациента



Путём активации кнопки активируется режим дезинфицирования стакана пациента.

Активация режима дезинфицирования инструментов на панели зубного врача



Путём активации кнопки активируется режим дезинфицирования инструментов на панели зубного врача.

Активирование споласкивания инструментов на панели зубного врача



После нажатия на кнопку активировано споласкивание инструментов на панели зубного врача.

Настройка периода воздействия раствора для дезинфицирования



После нажатия на кнопку активируется режим настройки величины. Посредством кнопок + / - настроить желаемый период воздействия и повторное нажатие на кнопку вводит настроенное данное в запоминающее устройство.

Меню ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Этот режим позволяет настройку некоторых из параметров стоматологической установки пользователем.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ		
DR.SMITH	29°C	<p>ESC</p> <hr/> <p>+</p> <hr/> <p>-</p> <hr/> <p>→</p> <hr/> <p>→</p>
12:12	5.00:1	
1 29-APR-2018	LCD 100%	
01:30		
50%		
50%		

Эдитирование имени пользователя

После нажатия на кнопку изображается экран для эдитирования имени пользователя и текст можно эдитировать. Эдитировать можно только текст для актуального пользователя.

Настройка актуального времени

После нажатия на кнопку активирован режим настройки величины. Посредством кнопки **→** передвиньтесь на параметры часов / минут (актуальная позиция маркирована красным цветом) и посредством кнопок **+ / -** настройте желаемое время. Повторное нажатие на кнопку вводит настроенное время в запоминающее устройство.

Настройка актуальной даты

После нажатия на кнопку активирован режим настройки величины. Посредством кнопки **→** передвиньтесь на параметры день / месяц / год (актуальная позиция маркирована красным цветом) и посредством кнопок **+ / -** настройте желаемую дату. Повторное нажатие на кнопку вводит настроенное время в запоминающее устройство.

Настройка таймера

После нажатия на кнопку активирован режим настройки величины. Посредством кнопки **→** передвиньтесь на параметры минут / секунд (актуальная позиция маркирована красным цветом) и посредством кнопок **+ / -** настройте желаемое время. Повторное нажатие на кнопку вводит настроенное время в запоминающее устройство. При выборе времени для таймера в главном экране это время маркировано посредством символа „U“.

Настройка силы света стоматологического операционного светильника для повышенной яркости

После нажатия на кнопку активирован режим настройки величины. Посредством кнопок **+ / -** настройте желаемую силу света светильника. Повторное нажатие на кнопку вводит настроенное время в запоминающее устройство.

Величину настраивают в диапазоне между силой света при пониженной яркости и силой максимального света, т.е. 0% = сила света при минимальной яркости настроенная в сервисном меню, 100% = максимальная сила света настроенная в сервисном меню.

Настройка силы света стоматологического операционного светильника для пониженной яркости

После нажатия на кнопку активирован режим настройки величины. Посредством кнопок **+ / -** настройте желаемую силу света операционного светильника. Повторное нажатие на кнопку вводит настроенное время в запоминающее устройство. Величину настраивают в диапазоне между нулем и силой света при пониженной яркости, т.е. 0% = светильник не светит, 100% = минимальная сила света настроенная в сервисном меню.


Настройка температуры воды для стакана пациента



После нажатия на кнопку активирован режим настройки величины. Посредством кнопок + / - настройте желаемую температуру воды. Повторное нажатие на кнопку вводит настроенную величину в запоминающее устройство. Величину настраивают в диапазоне между 35 ± 5 °C.

Настройка передаточного соотношения X:I

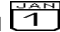

После нажатия на кнопку активирован режим настройки величины. Посредством кнопки  передвиньтесь на нужную позицию (актуальная позиция маркирована красным светом) и посредством кнопок + / - настройте желаемую величину. Повторное нажатие на кнопку вводит настроенную величину в запоминающее устройство. В течение подбора передаточного отношения во вскакивающем меню эта величина маркирована символом „U“.

Настройка силы света подсвечивания дисплея



После нажатия на кнопку активирован режим настройки величины. Посредством кнопок + / - настройте желаемую силу света подсвечивания. Повторное нажатие на кнопку вводит настроенное данное в запоминающее устройство.

Подбор языка коммуникации



После нажатия на кнопку изображается „вскакивающее меню“ с возможностями выбора языка коммуникации.

	CZ		HU
	D		HR
	F		SRB
	GB		FIN
	IT		P
	PL		TR
	РУС		ES
	SK		

Желаемый язык коммуникации выбрать путём активации соответствующей кнопки.

Если изменение нежелательно, надо нажать на кнопку „ESC“.

Подбор функции левой / правой боковой кнопки на педали ногового управления (главный экран)



После нажатия на кнопку изображается „вскакивающее меню“ с возможностями выбора функций кнопок.

Желаемую функцию выбрать путём активации соответствующей кнопки. Если изменение нежелательно, надо нажать на кнопку „ESC“.


	выдувание воздухом (Chipblower)
	охлаждение инструмента ON/OFF
	ротация мотора
	освещение инструмента ON/OFF
	центральный светильник ON/OFF
	звонок
	наполнение стакана пациента
	споласкивание плевательницы
	Ни одна функция не выбрана
P#	Переключение Программы инструмента
	Сменить цвет света инструмента (белый/синий) (только для моторов DENSIM DX BLUE, DENSIM DX PRO BLUE)

Вышеуказанные функции являются действительными только на основном экране. На экранах отдельных инструментов, действительны те функции, которые отображаются на экране. Здесь вы можете выбрать только те функции, которые допустимы для главного экрана. Остальные блокируются.

Выбор функций возможен только в установках без двигателя на третье движение кресла.

Если в установке такой мотор, боковые кнопки служат для управления этим мотором.

Переход на следующую страницу в меню пользователя.

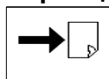

После нажатия на кнопку изображается продолжение меню пользователя.


ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ			
	AUTO		
 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>			

Включение / выключение акустической сигнализации в случае активации кнопки



Путём активации кнопки включается / выключается акустическая сигнализация активации кнопки. Состояние указано посредством символа / .

Включение / выключение обогрева воды для инструментов

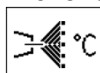

Путём активации кнопки включается / выключается обогрев воды для инструментов. Состояние указано посредством символов / . Действует только тогда, если система обогрева воды для инструментов установлена.

Настройка набора цветов



После нажатия на кнопку изображается „вскакивающее меню“ с возможностями выбора цветных наборов.


	Заводской цветной набор 1
	Заводской цветной набор 2
	Заводской цветной набор 3
	Пользовательский цветной набор

Выберите желаемый цветной набор путём активации соответствующей кнопки. Если изменение нежелательно, нажмите на кнопку „ESC“. Выбор пользовательской палитры возможно только после её настройки (см. ниже).

Настройка набора пользователя



После нажатия на кнопку изображается экран для настройки цветов:

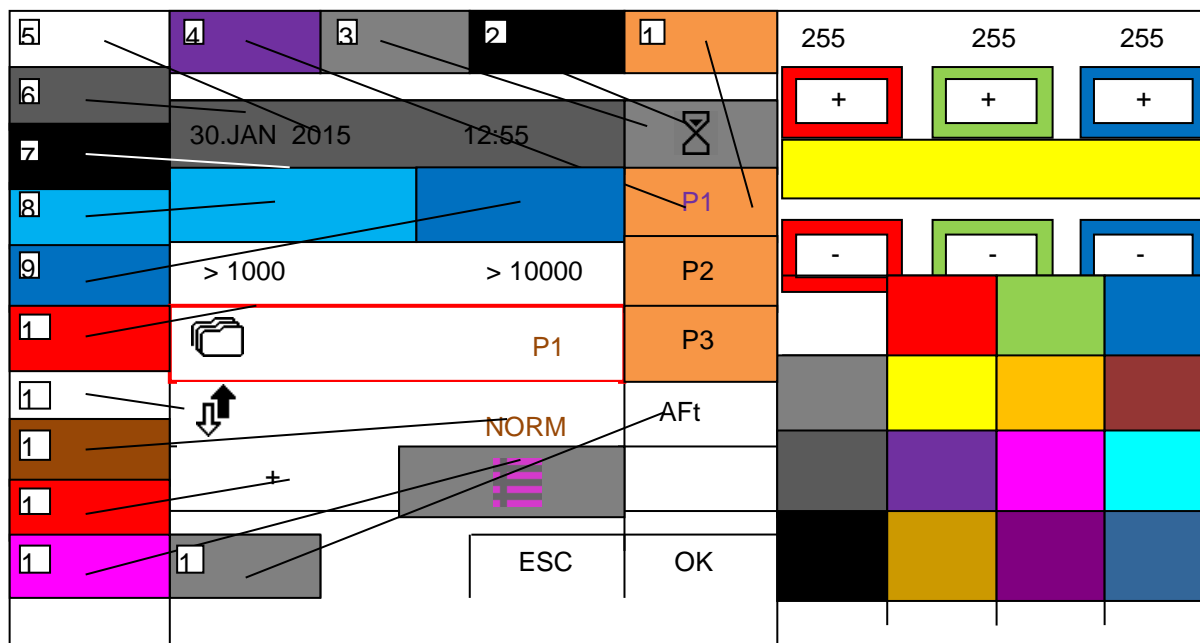

Настройка набора


Желаемый набор подобрать из предварительно выбранных цветов в правой нижней части экрана. Если цвет не удовлетворяет нас, можно его приспособить с помощью кнопок +/- в правой верхней части экрана.

Приспособленный нашим представлениям цвет изображен в оконышке находящемся между клавишами +/- . Когда цветной оттенок настроен, надо выбрать позицию, к которой оттенок будет относиться и путём активации соответствующей кнопки на окраине левой части экрана присоединим его. Этот процесс повторять до настройки всех желаемых цветов/цветных оттенков. Набор цветов ввести в запоминающее устройство путём нажатия на кнопку „OK“. В случае нажатия на кнопку „ESC“ данные не будут введены в запоминающем устройстве.

Настраивать можно следующее :


- 1- цвет фона вскакивающего меню
- 2- цвет символов
- 3- цвет фона активной части верхней и нижней строки дисплея
- 4- цвет текста вскакивающего меню
- 5- цвет текста неактивной части верхней и нижней строки дисплея – дата, время, тип
- 6- цвет фона неактивной части верхней и нижней строки дисплея
- 7- цвет линий
- 8- цвет барграфа
- 9- цвет фона барграфа
- 10- цвет рамка после активации кнопки
- 11- цвет фона экрана
- 12- цвет настраиваемых параметров
- 13- цвет элементов установки в их активном состоянии / +/-...
- 14- цвет символа „главное меню“
- 15- цвет потайного текста и символов

В случае неправильной настройки цветов (сходный цвет для нескольких позиций), могут некоторые позиции потерять удобочитаемость и управление стоматологической установкой дается трудно. В таком случае появляется экран с информацией о ошибке после снятия минимально двух инструментов из гнезда. В левом

углу этого экрана появляется символ  1.

После активации символа произойдет настройка фабричного цветного набора 1.


Та́ста для общего разрешения тревоги в случае достижения предела времени смазки инструмента.

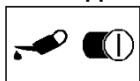

Путём активации кнопки разрешается/запрещается тревога после достижения предела времени смазки инструмента.


Состояние указано посредством символа - застегнутый / выключить. Посредством этой кнопки разрешается / запрещается тревога смазки для всех инструментов одновременно. В сервисном меню настраивается индивидуальная тревога для каждого инструмента.

Кнопка включения / выключения автоматической промывки чаши (при её повороте до основной позиции)

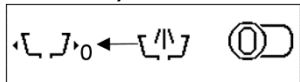

Нажатием на кнопку, включается/отключается автоматическая промывка чаши при её возвращении в исходное положение. Статус указывается символом - застегнутый/
 выключен.

Кнопка включения / выключения автоматической промывки чаши (при её движении из основной позиции)

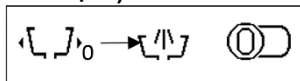


Нажатием на кнопку, включается/отключается автоматическая промывка чаши при её движении из основной позиции. Статус указывается символом - застегнутый/
 выключен.

Автоматическое включение/выключение стоматологического светильника



Когда этот параметр выбран, стоматологический светильник автоматически включается и светит на прежнем уровне после того как стул вернулся назад из позиции для посадки пациента . Когда этот параметр не выбран, врач должен включить свет самостоятельно (например, когда следующий пациент).

Переход на предыдущую страницу в меню пользователя

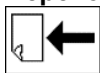

После активации кнопки изображается предыдущая страница в меню пользователя.

Отмен меню пользователя

Путём активации кнопки „ESC“ можно вернуться к основному/исходному экрану.

меню СЕРВИС / ПРОДУЦЕНТ






Это меню служит для сервисной и фабричной настройки параметров. Более подробное описание приведено в Руководстве по сервисному обслуживанию.

меню ТЕСТ


Это меню служит для проверки некоторых из функций стоматологической установки.

USB меню

Это меню служит для работы с USB-ключем. Ключ USB должен быть отформатирован в FAT32/exFAT. Предоставляет возможность ввода, изображения файлов с суффиксом **.bmp а несжатое .jpg (максимально 800x480 пунктов)** из ключа в центральном справочнике файлов. Также можно записать на ключ сигналы тревоги о расстройках от SD-карты и перенести рисунки использованных символов из USB-ключа на SD-карту в дисплее. Отдельные позиции доступны только после детектирования USB –ключа. Это состояние указано посредством символа **USB** на главном экране.



USB	
 ← USB	ESC
 → USB	
 ← USB	
 → USB	
 ← USB	


Вычет/отсчет рисунков из USB-ключа

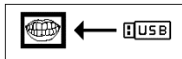


После активации кнопки осуществляется отсчет и изображение справочника файлов с рисунками:

	ESC	
00/ рисунок 0.bmp		08/ рисунок 8.jpg
01/ рисунок 1.bmp		09/ рисунок 9.bmp
02/ рисунок 2.bmp		10/ рисунок 10.bmp
03/ рисунок 3.jpg		11/ рисунок 11.bmp
04/ рисунок 4.bmp		12/ рисунок 12.bmp
05/ рисунок 5.bmp		13/ рисунок 13.bmp
06/ рисунок 6.jpg		14/ рисунок 14.bmp
07/ рисунок 7.bmp		15/ рисунок 15.bmp

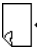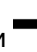Отдельные страницы справочника файлов переключаются посредством кнопок  и . Желаемый рисунок надо выбрать путём активации соответствующей кнопки. После активации кнопки рисунок изображен. Возвращение возможно путём активации кнопки „ESC“.


Выбранный рисунок изображается всегда после активации кнопки .

Запись ошибок в USB

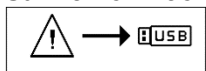


После активации кнопки осуществляется переписка списка всех зарегистрированных ошибок из запоминающего устройства терминала на USB ключ в файл error.txt. Этот файл можно обysкивать в компьютере в редакторе текстов. Позиция предусмотрена для сервисных целей.

Копирования иконки из USB на карту памяти

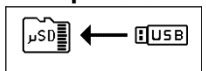


После нажатия на кнопку осуществляется копирование файлов с символами из USB ключа на внутреннюю SD карту. Таким образом не надо выбирать SD карту в целях записи новых символов до их программирования в интерном FLASH запоминающем устройстве. Позиция предназначена для сервисных целей.

Запись набора пользователя на USB ключ

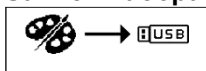

После активации кнопки осуществляется запись цветного набора, созданного пользователем, на USB ключ в файл palette_usr.hex. Копировать можно цветный набор актуального пользователя.

Запись набора пользователя из USB ключа

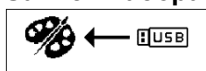

После активации кнопки осуществляется запись цветного набора, созданного пользователем и записанного на USB ключе в файл palette_usr.hex. Записанный цветной набор вводится в настройки актуального пользователя.

Меню INFO

Это меню используется для отображения информации о версии SW в отдельных электронных модулях. После нажатия кнопки следующая информация будет отображаться:

ИНФОРМАЦИЯ	
МОДУЛЬ DP LUX:	SW 2.02
МОДУЛЬ MB LUX:	SW 2.02
МОДУЛЬ PB LUX:	SW 2.02
МОДУЛЬ REG LUX:	SW 2.02
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:	12345678

ESC



8.1.3 **Настройка количества воды**

В зависимости от варианта стоматологической установки:

количество охлаждающей воды для всех инструментов с исключением стоматологического шприца можно настроить посредством находящегося на нижней стороне панели управления игольчатого клапана. В случае его полного завинтывания подача воды прекращается.

Если в стоматологической установке монтирован пропорциональный клапан, можно количество охлаждающей воды настроить от контактной панели

8.1.4 **Таста тормоза панели управления (в зависимости от варианта)**

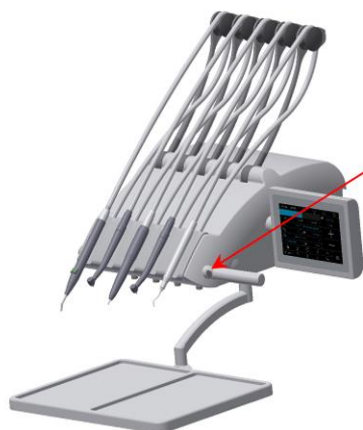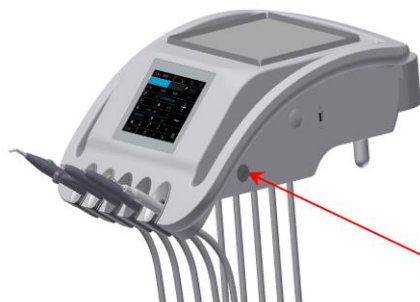


Путём активации кнопки отпускается тормоз панели управления, благодаря чему возможны движения с ней в вертикальном направлении. После настройки желаемой позиции и освобождения кнопки панель управления затормаживается.

8.1.5 Обслуживание отдельных инструментов

Сигнализация состояния тревоги


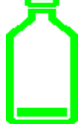

В случае наступления одного из состояний тревоги изображается на короткое время экран с тревогой и раздаётся акустический сигнал.

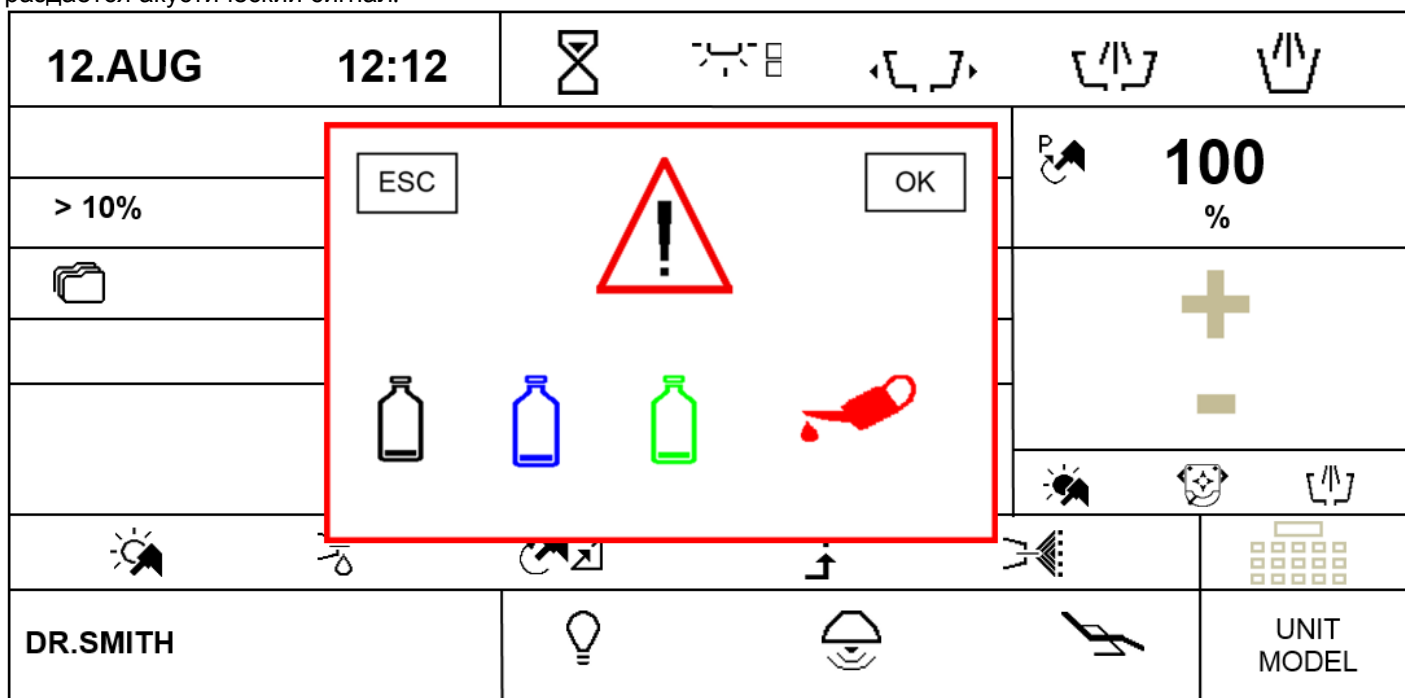

После короткого времени экран автоматически отменен и состояние тревоги указано посредством небольшого символа в правом нижнем углу дисплея:



После активации кнопки с символом тревоги изображается исходный экран с типом тревоги. Если желательно отменить сигнализацию смазки инструмента, придется активировать кнопку ОК на соответствующем экране. Таким образом счетчик времени для сигнализации смазки обнуляется и начинает отсчет нового интервала.



	- бутылка для дистиллированной воды порожняя (появляется чёрная бутылка)
	- бутылка для обеззараживающего раствора порожняя (если монтирована гигиена) (появляется зелёная бутылка)
	- бутылка для дезинфицирующего раствора порожняя (если монтирована гигиена) (появляется синяя бутылка)

Панель управления

В дополнение к выше, эти инструкции должны следовать инструкциям, приведенным в производителей инструмента инструкцию и вспомогательного оборудования.

Запирающий механизм шлангов

Если панель управления оснащена запирающим механизмом для блокировки рычагов наконечника, выполните следующие действия:

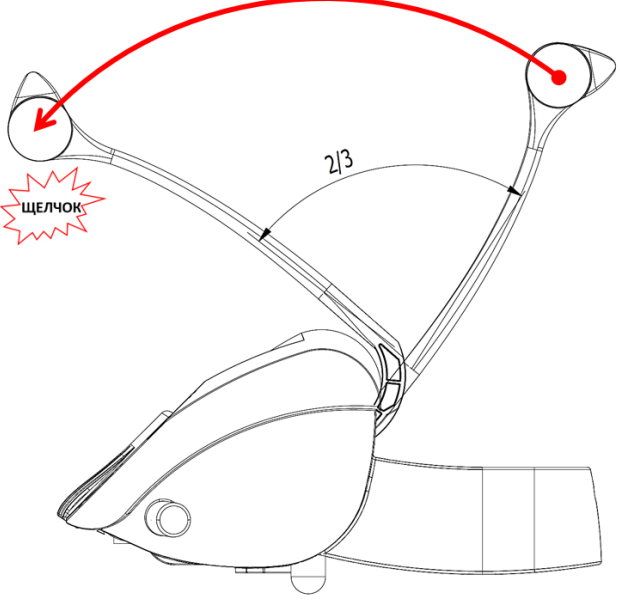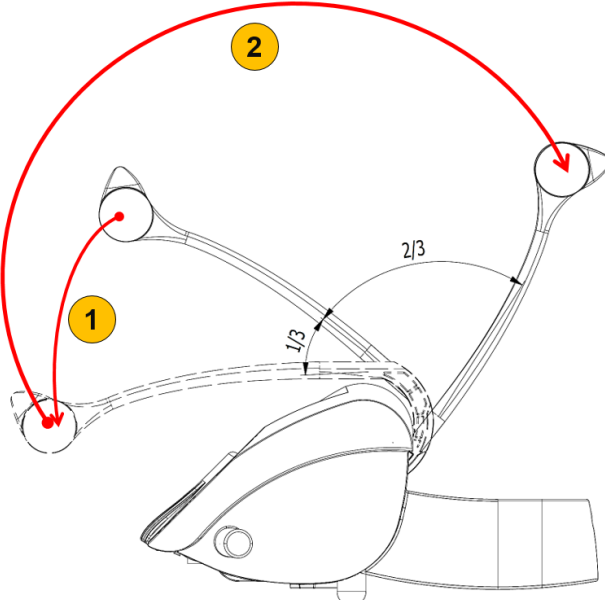ЗАПИРАНИЕ РЫЧАГА НАКОНЕЧНИКА	РАЗБЛОКИРОВКА РЫЧАГА НАКОНЕЧНИКА
<p>Возьмитесь за инструмент и потяните шланг к себе. Примерно в 2/3 полосы вы услышите щелчок. Рычаг заблокирован.</p>	<p>Возьмитесь за инструмент и потяните шланг к себе. Затем отпустите шланг назад, и рычаг вернется в исходное положение.</p>
	

Стоматологический шприц

Управление шприца:

- Для обдува воздухом, нажмите правую кнопку
- для промывки водой, нажмите левую кнопку
- для создания водной туманности (распыления) нажмите обоих кнопок одновременно

8.1.6 Турбина


12.AUG	12:12						
ТИП ИНСТРУМЕНТА						100 %	
> 10%	> 50%	> 100%					
	П 1	ПРОГРАММА 1					
			33%				
DR.SMITH					МОДЕЛЬ УСТАНОВКИ		

После снятия турбины из гнезда изображаются данные по ее настройке. Их значение следующее:




Тип инструмента

Если барграф неактивным, изображен в нем тип актуально используемого инструмента. В активном состоянии барграф графически изображает приблизительную величину главного параметра (мощность).

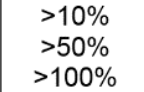Тасты для быстрого предварительного выбора мощности турбины.

 После активации соответствующей кнопки осуществляется изменение настройки мощности на данную величину. Это данное не вводится в запоминающее устройство программы автоматически. Кнопки активны только тогда, когда разрешен режим управления мощностью.

Тасты для настройки мощности турбины.

 Путём активации кнопки активирован режим настройки, в котором позволяющие изменение величины кнопки выделены красным цветом. Величину параметра можно менять посредством кнопок +/-.
Новую величину можно ввести в запоминающее устройство временно (в изменение номера программы) путём повторной активации кнопки с настраиваемым параметром или длительно посредством кнопки . Новую величину можно задать также прямо посредством нумерической клавиатуры нажав на кнопку .
Клавиша активна только тогда, когда разрешен режим управления мощностью.

Таста для селекции программы.


 После активации кнопки изображено „вскакивающее меню“ с возможностями выбора программ:

ПРОГРАММА 1	<input type="checkbox"/>
ПРОГРАММА 2	<input type="checkbox"/>
ПРОГРАММА 3	<input type="checkbox"/>
ПРОГРАММА 1	<input type="checkbox"/>
ПРОГРАММА 5	<input type="checkbox"/>
ПРОГРАММА 6	<input type="checkbox"/>
ПРОГРАММА 7	<input type="checkbox"/>
ПРОГРАММА 8	<input type="checkbox"/>
ПРОГРАММА 9	<input type="checkbox"/>
ESC	

Нажатием на соответствующую кнопку выбирается желаемая программа или выбор программы можно отменить путём активации кнопки „ESC“.


Нажмите и удерживайте кнопку (около 2 сек), чтобы сохранить все измененные настройки параметров инструмента в памяти программы.

Процесс сохранения отображается путём изменения цвета иконок и звуковой сигнал (2 коротких сигнала)

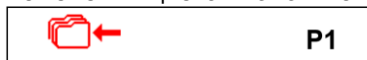


После звукового сигнала запишутся до памяти все данные, которые были сохранены во временной памяти программы.

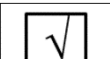


Клавиша для включения ПРОГРАММЫ для возможности переключать его из педали управления.

 Нажатием этой кнопки можно включить или исключить данную программу. Если включена, она поайавитца в списке программ, которые можно выбрать боковой кнопкой педали управления.




Таста редактирования названия программы

 После активации кнопки на приблизительно 2 секунды изображается альфанумерическая клавиатура, с помощью которой можно осуществлять редактирование текста. Максимальная длина текста 20 знаков.


Таста настройки количества охлаждающей воды.

 Путём активации кнопки активирован режим настройки, в котором позволяющие изменение величины кнопки выделены красным цветом. Величину параметра можно менять посредством кнопок +/-.
Новую величину можно ввести в запоминающее устройство временно (в изменение номера программы) путём повторной активации кнопки с настраиваемым параметром или длительно посредством кнопки . Новую величину можно задать также прямо посредством нумерической клавиатуры нажав на кнопку . Клавиша активной только тогда, когда разрешен режим охлаждения инструмента.

Таста для включения / выключения освещения инструмента.


 Путём активации кнопки освещение инструмента включается -  / выключается - 

Таста для включения / выключения поддува инструмента.

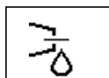

Путём активации кнопки поддув инструмента включается – / выключается - .
Таста активной только тогда, когда охлаждение включено.

Таста для изменения режима работы турбины.

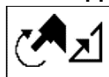

Путём активации кнопки осуществляется переключение режима работы турбины. У нее следующие два состояния:


- режим управляемой мощности .
- режим неуправляемой мощности , мощность всегда 100%.

Таста активной только тогда когда в стоматологической установке находятся принадлежности для ууправления мощностью турбины.

Кнопка изменения режима работы педали ножного управления

Кнопка активна только тогда, когда режим управления мощностью разрешен и если инструмент находится в состоянии покоя.

➤ Дискретный режим (прыжок мощности) рычага/педали ножного управления

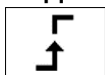

Изображение указывает дискретный режим педали, т.е. регулируемая величина после активации педали / рычага меняется скачкообразно до максимально настроенной величины и в дальнейшем остается неизменной независимо от позиции педали ножного управления. Нажав эту кнопку, можно переключиться во второй режим:

➤ Аналоговой (линейный) режим рычага/педали ножного управления



Регулируемая величина после активации рычага / педали ножного управления повышается пропорционально до достижения максимальной величины при полном отклонении рычага / педали ножного управления. Нажав эту кнопку, можно переключиться в предыдущий режим.

Таста для включения/ / выключения и настройки охлаждения инструмента.




Путём короткого нажатия на кнопку включается/выключается настроенный тип охлаждения инструмента. Нажатие на кнопку на дольше 2 секунд вызывает изображение „вскакивающего меню“ со следующими возможностями выбора:

ESC

Путём активации соответствующей кнопки выбирается желаемый тип охлаждения вода или аэрозоль или можно выбор типа охлаждения прекратить путём активации кнопки „ESC“. Если измененный тип охлаждения надо записать в запоминающее устройство длительно, надо перед тем активировать кнопку записи в запоминающее устройство . Новое состояние записи данного в запоминающее устройство указано посредством изменения цвета символа . Это состояние можно отменить путём повторной активации кнопки.

Таста для коррекции позиции пациента

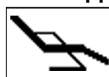

После краткосрочного нажатия на кнопку изображается экран для управления основными позициями кресла пациента и можно осуществить коррекцию позиции пациента. Возвращение из экрана возможно после активации кнопки ESC или путём ввода инструмента в эксплуатацию.

Если в течение периода снятого инструмента из гнезда изменится один из параметров на дисплее без

последующей активации кнопки , произойдет только временная запись измененного параметра в запоминающем устройстве. Это изменение остается записанным до момента изменения программы инструмента (Prog 1 – 9). Изменение сохраняется также после выключения и включения стоматологической


установки. Если временную настройку надо отменить, надо нажать на кнопку и выбрать актуальную программу. Данные переписываются данными из запоминающего устройства для данной программы. Если изменение параметра надо длительно ввести в запоминающее устройство соответствующей программы, надо

после осуществления изменения активировать кнопку .

Турбина вводится в деятельность после снятия ее из гнезда и отклонения рычага на педали ножного управления направо, или же путём нажатия на педаль ножного управления комбинированную. При этом: при полном отклонении педали ножного управления у турбины изображенная на дисплее мощность.

Деятельность завершается после возвращения рычага на педали ножного управления в исходную позицию. После окончания деятельности рекомендуется активировать функцию CHIPBLOWER.





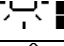




Мощность турбины можно настраивать посредством кнопок + / - в диапазоне 0-100% когда инструмент снятый из гнезда в состоянии покоя, или когда он активирован и педаль/рычаг ногого управления в максимальной позиции. В течение работы с инструментом можно мощность плавно менять посредством педали или рычага на педали ногого управления в аналоговом режиме с 0 до максимальной настроенной величины.

Когда рабочее время турбины достигнет предел интервала смазки, на дисплее появляется символ тревоги смазки инструмента  и раздается акустический сигнал. Эта сигнализация будет повторяться при каждом использовании инструмента, пока информация по необходимости смазки не будет отменена путём активации кнопки ОК в экране тревог.

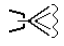Подбор функции левой / правой боковой кнопки на педали ногого управления для инструмента



После нажатия на кнопку изображается „вскакивающее меню“ с возможностями выбора функций кнопок. Желаемую функцию выбрать путём активации соответствующей кнопки. Если изменение нежелательно, надо нажать на кнопку „ESC“. Настройка должна быть выполнена отдельно для левой и правой кнопки ногого управления. Выбрать можно только те функции, которые доступны для инструмента. Остальные блокируются.

	выдувание воздухом (Chipblower)
	охлаждение инструмента ON/OFF
	ротация мотора
	освещение инструмента ON/OFF
	центральный светильник ON/OFF
	звонок
	наполнение стакана пациента
	споласкивание плевательницы
	Ни одна функция не выбрана
P#	Переключение Программы инструмента
	Сменить цвет света инструмента (белый/синий) (только для моторов DENSIM DX BLUE, DENSIM DX PRO BLUE)


Примечание



После возвращения турбины в гнездо освещение погаснет. Микромотор или турбину вернуть в гнездо всегда только после завершения работы с ними (рычаг ногого управления (педаль) находится в основной позиции).

Отработавшее масло

Отработавшее масло копится в баке – смотри рисунок. Если объем масла превысит маркированный максимальный уровень, необходимо бак отодвинуть в направлении стрелки и опорожнить его. Фильтр, если он загрязнен, надо сменить.

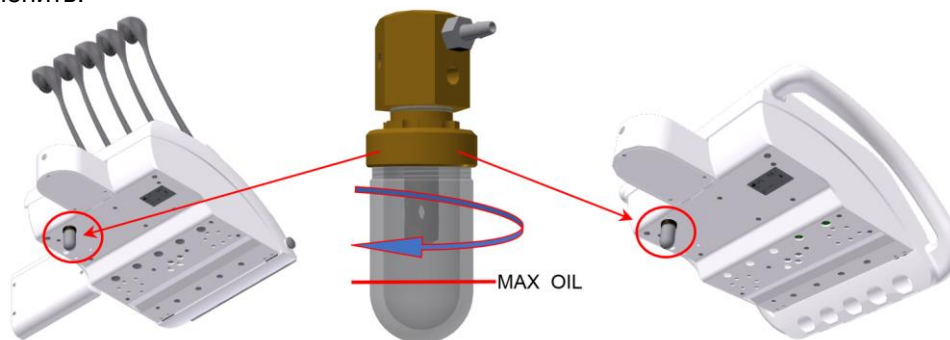












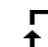







Отвод процедуральной воды

После прекращения использования инструмента (после освобождения рычага педаль контроллера), программное обеспечение стоматологической установки автоматически осуществляет продувку инструмента (микромотора или турбины) воздухом для охлаждения инструмента в течение 0,5 секунды.

8.1.7 Микромотор BLDC - DX, DX BLUE, DX PRO, DX PRO BLUE

12.AUG	12:12					
www.goldident.ru						

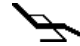ТИП ИНСТРУМЕНТА					40 000 X1/min	
> 1000	> 5000	> 20000	> 40000			
	П 1	ПРОГРАММА 1				
	5,4:1		3.5 Нсм			
	НОРМ	Афт	3.0s			
ЭНДОДОНТИЯ			33%			
						
DR.SMITH					МОДЕЛЬ УСТАНОВКИ	

После снятия инструмента из гнезда изображаются данные по его настройке. Их значение следующее:

Тип инструмента


Если барграф неактивным, изображен в нем тип актуально используемого инструмента. В активном состоянии барграф графически изображает приблизительную величину главного параметра (мощность).

>1000
>5000
>20000
>40000



Тасты для быстрого предварительного выбора вращений мотора

После активации соответствующей кнопки осуществляется изменение настройки мощности (вращений) на данную величину. Это данное не вводится в запоминающее устройство программы автоматически.

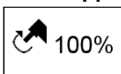
Таста для настройки вращений мотора



Путём активации кнопки активирован режим настройки, в котором позволяющие изменение величины кнопки выделены красным цветом. Величину параметра можно менять посредством кнопок +/-.

Новую величину можно ввести в запоминающее устройство временно (в изменение номера программы) путём повторной активации кнопки с настраиваемым параметром или длительно посредством кнопки . Новую величину можно задать также прямо посредством нумерической клавиатуры нажав на кнопку .

Таста для селекции программы.

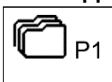


После активации кнопки изображено „вскакивающее меню“ с возможностями выбора программ:

ПРОГРАММА 1	<input type="checkbox"/>
ПРОГРАММА 2	<input type="checkbox"/>
ПРОГРАММА 3	<input type="checkbox"/>
ПРОГРАММА 1	<input type="checkbox"/>
ПРОГРАММА 5	<input type="checkbox"/>
ПРОГРАММА 6	<input type="checkbox"/>
ПРОГРАММА 7	<input type="checkbox"/>
ПРОГРАММА 8	<input type="checkbox"/>
ПРОГРАММА 9	<input type="checkbox"/>
ESC	

Нажатием на соответствующую кнопку выбирается желаемая программа или выбор программы можно отменить путём активации кнопки „ESC“.


Нажмите и удерживайте кнопку (около 2 сек), чтобы сохранить все измененные настройки параметров инструмента в памяти программы.

Процесс сохранения отображается путём изменения цвета иконок и звуковой сигнал (2 коротких сигнала)

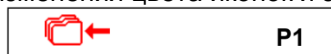

После звукового сигнала запишутся до памяти все данные, которые были сохранены во временной памяти программы.

Клавиша для включения ПРОГРАММЫ для возможности переключать его из педали управления.

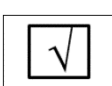


Нажатием этой кнопки можно включать или исключать данную программу. Если включена, она пойавитца в списке программ, которые можно выбрать боковой кнопкой педали управления.

Таста эдитирования названия программы

ПРОГРАММА1 После активации кнопки на приблизительно 2 секунды изображается альфанумерическая клавиатура, с помощью которой можно осуществлять редактирование текста. Максимальная длина текста 20 знаков.

Настройка передаточного соотношения наконечника.


После активации кнопки изображается „вскакивающее меню“ с возможностями настройки величин передаточных отношений:

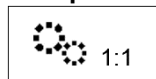

	2:1	2,7:1
1:1	4:1	5,4:1
	7:1	7,4:1
1:2	10:1	14,8:1
1:4	16:1	
1:5	20:1	
	30:1	
	100:1	
	128:1	
ESC	U 1.0:1	

После нажатия на соответствующую кнопку выбирается требуемое передаточное соотношение или выбор передаточного соотношения отменяется путём активации кнопки „ESC“. Если новую величину передаточного отношения надо записать в запоминающее устройство длительно, надо перед тем активировать кнопку записи в запоминающее устройство . Новое состояние записи данного в запоминающее устройство указано посредством изменения цвета символа . Это состояние можно отменить путём повторной активации кнопки.

Таста настройки крутящего момента мотора.

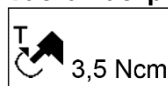

Путём активации кнопки активирован режим настройки, в котором позволяющие изменение величины кнопки выделены красным цветом. Величину параметра можно менять посредством кнопок +/-.

Новую величину можно ввести в запоминающее устройство временно (в изменение номера программы) путём повторной активации кнопки с настраиваемым параметром или длительно посредством кнопки . Клавиша активна только в режиме работы ENDODONTIC.

Таста для выбора режима работы мотора NORM / AREV / AFWD

Mod normal – Normal/нормальный



Управление мотором MX совпадает с управлением классическим мотором, разница только в том, что в MX моторе надо настраивать вращения и можно настраивать крутящий момент.

***Примечание Mod auto-reverz - AREV**

Микромотор после достижения предельного крутящего момента начинает вращаться в обратном направлении (левые вращения) вплоть до момента освобождения педали ножного управления. Реверсивный ход указан посредством мельцающего света инструмента.

***Примечание.Mod auto-forward - AFWD**

Микромотор после достижения предельного крутящего момента начинает вращаться в обратном направлении (левые вращения) вплоть до момента освобождения педали ножного управления, затем сохраняет это направление вращений в зависимости от настроенного времени, напр. AFt = 3,5 сек и после истечения этого периода он возвращается в режим первоначальных вращений (правые вращения). Этот цикл повторяется вплоть до момента освобождения педали ножного управления. Реверсивный ход указан посредством мельцающего света инструмента и также акустической сигнализацией в течение периода ATf. В этом режиме работы можно настраивать период реверсивного хода **x,x** секунд.



После активации кнопки изображается „вскакивающее меню“ с возможностями настройки режимов:

↓	NORM
↑	AREV
↕	AFWD
	ESC


После нажатия на соответствующую кнопку выбирается требуемый режим деятельности мотора или выбор режима мотора отменяется путём активации кнопки „ESC“. Если новый режим надо записать в запоминающее устройство длительно, надо перед тем активировать кнопку записи в запоминающее устройство . Новое состояние записи данного в запоминающем устройстве указано посредством изменения цвета символа . Это состояние можно отменить путём повторной активации кнопки. Кнопка активна только, если инструмент

находится в состоянии покоя.

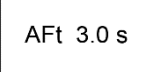


Таста настройки времени для режима AUTOFORWARD.

 Путём активации кнопки активирован режим настройки, в котором позволяющие изменение величины кнопки выделены красным цветом. Величину параметра можно менять посредством клавиш +/- . Новую величину можно ввести в запоминающее устройство временно (в изменение номера программы) путём повторной активации кнопки с настраиваемым параметром или длительно посредством кнопки  .

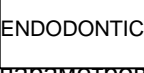


Таста режима работы с мотором.

 Существуют два возможных режима работы: ENDODONTIC, PREPARATION. В зависимости от избранного режима работы открывается доступ к отдельным позициям настройки параметров мотора. Путём активации повторяются оба режима циклически. Режим PREPARACIA позволяет только нормальный режим при максимальном крутящем моменте. Режим ENDODONCIA позволяет все режимы - Normal / Areva / AFWD. Кнопка активна только, если инструмент находится в состоянии покоя.



Таста настройки количества охлаждающей воды

 Путём активации кнопки активирован режим настройки, в котором позволяющие изменение величины кнопки выделены красным цветом. Величину параметра можно менять посредством кнопок +/- . Новую величину можно ввести в запоминающее устройство временно (в изменение номера программы) путём повторной активации кнопки с настраиваемым параметром или длительно посредством кнопки  . Новую величину можно задать также прямо посредством нумерической клавиатуры нажав на кнопку  . Клавиша активна только тогда, когда охлаждение инструмента включено.




Таста для включения/ / выключения освещения инструмента.

 Путём активации кнопки освещение инструмента включается -  / выключается -  .



Если инструмент позволяет переключаться в два цвета (белый / синий):

- короткое нажатие (время < 1 секунды) переключает цвет света  / 
- длинное нажатие (время >= 1 секунды) включит/выключит освещение инструмента

Таста для включения/ / выключения поддува инструмента.

 Путём активации кнопки поддув инструмента включается -  / выключается -  . Таста активной только тогда, когда охлаждение включено.


Таста для изменения направления вращений мотора.

 Путём активации кнопки переключается направление вращений мотора -  . Клавиша активна только в позиции рычага/педали ногого управления в состоянии покоя.

Кнопка изменения режима работы педали ногого управления

Кнопка активна только тогда, когда режим управления мощностью разрешен и если инструмент находится в состоянии покоя.

➤ Дискретный режим (прыжок мощности) рычага/педали ногого управления

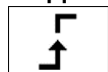


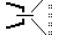
Изображение указывает дискретный режим педали, т.е. регулируемая величина после активации педали / рычага меняется скачкообразно до максимально настроенной величины и в дальнейшем остается неизменной независимо от позиции педали ногого управления. Нажав эту кнопку, можно переключиться во второй режим:


➤ Аналоговой (линейный) режим рычага/педали ногого управления







Регулируемая величина после активации рычага / педали ногого управления повышается пропорционально до достижения максимальной величины при полном отклонении рычага / педали ногого управления. Нажав эту кнопку, можно переключиться в предыдущий режим.

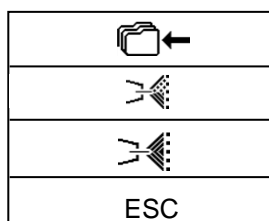
Таста для включения/ / выключения и настройки охлаждения инструмента.

 Путём короткого нажатия на кнопку включается/выключается  настроенный тип охлаждения инструмента. Нажатие на кнопку на дольше 2 секунд вызывает изображение „вскакивающего меню“ со следующими возможностями выбора:






Путём активации соответствующей кнопки выбирается желаемый тип охлаждения вода /  или аэрозоль  или можно выбор типа охлаждения прекратить путём активации кнопки „ESC“. Если измененный тип охлаждения надо записать в запоминающее устройство длительно, надо перед тем активировать кнопку записи в запоминающее устройство . Новое состояние записи данного в запоминающее устройство указано посредством изменения цвета символа . Это состояние можно отменить путём повторной активации кнопки.

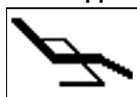
Таста для коррекции позиции пациента



После краткосрочного нажатия на кнопку изображается экран для управления основными позициями кресла пациента и можно осуществить коррекцию позиции пациента. Возвращение из экрана возможно после активации кнопки ESC или путём ввода инструмента в эксплуатацию. Если в течение периода снятого инструмента из гнезда изменится один из параметров на дисплее

без последующей активации кнопки , произойдет только временная запись измененного параметра в запоминающем устройстве. Это изменение остается записанным до момента изменения программы инструмента (Prog 1 – 9). Изменение сохраняется также после выключения и включения стоматологической установки. Если временную настройку надо отменить, надо нажать на кнопку  и выбрать актуальную программу. Данные переписываются данными из запоминающего устройства для данной программы. Если изменение параметра надо длительно ввести в запоминающее устройство соответствующей программы, надо после осуществления изменения активировать кнопку .





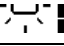





Микро мотор вводится в деятельность после отклонения рычага на педали ножного управления направо, или же путём нажатия на педаль ножного управления комбинированную. При этом: при полном отклонении педали ножного управления у микро мотора изображенная на дисплее мощность. Деятельность завершается после возвращения рычага на педали ножного управления в исходную позицию. После окончания деятельности рекомендуется активировать функцию CHIPBLOWER.

Мощность микро мотора можно настраивать посредством кнопок + / - в диапазоне 0-100% когда инструмент снятый из гнезда в состоянии покоя, или когда он активирован и педаль/рычаг ножного управления в максимальной позиции. В течение работы с инструментом можно мощность плавно менять посредством педали или рычага на педали ножного управления в аналоговом режиме с 0 до максимальной настроенной величины. Когда рабочее время турбины достигнет предел интервала смазки, на дисплее появляется символ тревоги смазки инструмента  и раздается акустический сигнал. Эта сигнализация будет повторяться при каждом использовании инструмента, пока информация по необходимости смазки не будет отменена путём активации кнопки ОК в экране тревог.

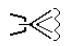Подбор функции левой / правой боковой кнопки на педали ножного управления для инструмента



После нажатия на кнопку изображается „вскакивающее меню“ с возможностями выбора функций кнопок. Желаемую функцию выбрать путём активации соответствующей кнопки. Если изменение нежелательно, надо нажать на кнопку „ESC“. Настройка должна быть выполнена отдельно для левой и правой кнопки ножного управления. Выбрать можно только те функции, которые доступны для инструмента. Остальные блокируются.

	выдувание воздухом (Chipblower)
	охлаждение инструмента ON/OFF
	ротация мотора
	освещение инструмента ON/OFF
	центральный светильник ON/OFF
	звонок
	наполнение стакана пациента
	споласкивание плевательницы
	Ни одна функция не выбрана
P#	Переключение Программы инструмента
	Сменить цвет света инструмента (белый/синий) (только для моторов DENSIM DX BLUE, DENSIM DX PRO BLUE)

Примечание



Доступность отдельных символов на дисплее и возможность настройки отдельных параметров и их пределов зависит от типа использованного мотора. До начала эксплуатации инструмента надо ознакомиться с его возможными вариантами употребления соответственно руководству производителя.

Отвод процедуральной воды

После прекращения использования инструмента (после освобождения рычага педаль контроллера), программное обеспечение стоматологической установки автоматически осуществляет продувку инструмента (микромотора или турбины) воздухом для охлаждения инструмента в течение 0,5 секунды.

8.1.8 Хирургический микромотор с перисталтическим насосом DX SRG

12.AUG	12:12						
ТИП ИНСТРУМЕНТА						40 000 X1/min	
> 1000	> 5000	> 20000	> 40000				
	П 1	ПРОГРАММА 1					
	1:1		3.5 Нсм				
				40%			
DR.SMITH							МОДЕЛЬ УСТАНОВКИ

После снятия инструмента из гнезда изображаются данные по его настройке. Их значение следующее:

Тип инструмента

Если барграф неактивным, изображен в нем тип актуально используемого инструмента. В активном состоянии барграф графически изображает приблизительную величину главного параметра (мощность).

Тасты для быстрого предварительного выбора вращений мотора

>1000	После активации соответствующей кнопки осуществляется изменение настройки мощности (вращений) на данную величину. Это данное не вводится в запоминающее устройство программы автоматически.
>5000	
>20000	
>40000	

Таста для настройки вращений мотора

100% Путём активации кнопки активирован режим настройки, в котором позволяющие изменение величины кнопки выделены красным цветом. Величину параметра можно менять посредством кнопок +/- . Новую величину можно ввести в запоминающее устройство временно (в изменение номера программы) путём повторной активации кнопки с настраиваемым параметром или длительно посредством кнопки . Новую величину можно задать также прямо посредством нумерической клавиатуры нажав на кнопку .

Таста для селекции программы.


P1 После активации кнопки изображено „вскакивающее меню“ с возможностями выбора программ:

ПРОГРАММА 1	
ПРОГРАММА 2	
ПРОГРАММА 3	
ПРОГРАММА 1	
ПРОГРАММА 5	
ПРОГРАММА 6	
ПРОГРАММА 7	
ПРОГРАММА 8	
ПРОГРАММА 9	
ESC	

Нажатием на соответствующую кнопку выбирается желаемая программа или выбор программы можно отменить путём активации кнопки „ESC“.


Нажмите и удерживайте кнопку (около 2 сек), чтобы сохранить все измененные настройки параметров инструмента в памяти программы.

Процесс сохранения отображается путём изменения цвета иконок и звуковой сигнал (2 коротких сигнала)

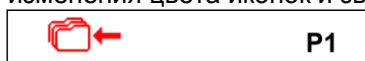


После звукового сигнала запишутся до памяти все данные, которые были сохранены во временной памяти программы.

Клавиша для включения ПРОГРАММЫ для возможности переключать его из педали управления.

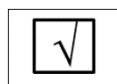


Нажатием этой кнопки можно включать или исключать данную программу. Если включена, она появится в списке программ, которые можно выбрать боковой кнопкой педали управления.

Тафта редактирования названия программы

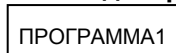

После активации кнопки на приблизительно 2 секунды изображается алфавитно-цифровая клавиатура, с помощью которой можно осуществлять редактирование текста. Максимальная длина текста 20 знаков.

Клавиша для выбора передаточного соотношения наконечника.

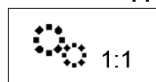


После активации кнопки изображается „вскакивающее меню“ с возможностями настройки передаточных отношений:

	2:1	2,7:1
1:1	4:1	5,4:1
	7:1	7,4:1
1:2	10:1	14,8:1
1:4	16:1	
1:5	20:1	
	30:1	
	100:1	
	128:1	
ESC	U 1.0:1	


После нажатия на соответствующую кнопку выбирается требуемое передаточное соотношение или выбор передаточного соотношения отменяется путём активации кнопки „ESC“. Если новую величину передаточного отношения надо записать в запоминающее устройство длительно, надо перед тем активировать кнопку записи в запоминающее устройство . Новое состояние записи данного в запоминающее устройство указано посредством изменения цвета символа . Это состояние можно отменить путём повторной активации кнопки.

Тафта настройки крутящего момента мотора.

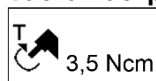


Путём активации кнопки активирован режим настройки, в котором позволяющие изменение величины кнопки выделены красным цветом. Величину параметра можно менять посредством кнопок +/- . Новую величину можно ввести в запоминающее устройство временно (в изменение номера программы) путём повторной активации кнопки с настраиваемым параметром или длительно посредством кнопки . Клавиша активна только в режиме работы ENDODONTIC

Тафта активирования / деактивирования моторического насоса

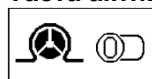

Путём нажатия на кнопку осуществляется активирование - / деактивирование - моторического насоса. Если он включен , входит в строй после отклонения рычага / педали ногого управления одновременно с активным инструментом.

Тафта настройки протока и принудительного активирования моторического насоса.

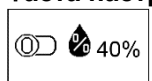

Тафта разделена в две части и она активной только во время активного моторического насоса. Путём нажатия на правую часть кнопки происходит - 40% настройка протока рабочего медия через насос. Осуществится активирование режима настройки, в котором позволяющие изменение величины кнопки выделены красным цветом. Величину параметра можно менять посредством кнопок +/- . Новую величину можно ввести в запоминающее устройство временно (в изменение номера программы) путём повторной активации кнопки с настраиваемым параметром или длительно посредством кнопки .

Новую величину можно задать также прямо посредством нумерической клавиатуры нажав на кнопку .


После нажатия на кнопку в левой части активируется принудительный ход моторического насоса во время отклонения рычага / педали ногого управления даже и вопреки тому, что мотор в состоянии покоя. Это состояние длится до момента выключения путём повторной активации кнопки.

Тафта для включения / / выключения освещения инструмента.



Путём активации кнопки освещение инструмента включается - / выключается - .


Тафта для изменения направления вращений мотора.

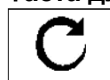

Путём активации кнопки переключается направление вращений мотора - . Клавиша активна только в позиции рычага/педали ногого управления в состоянии покоя.
Кнопка изменения режима работы педали ногого управления

Кнопка активна только тогда, когда режим управления мощностью разрешен и если инструмент находится в состоянии покоя.

➤ **Дискретный режим (прыжок мощности) рычага/педали ножного управления**

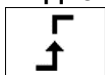


Изображение указывает дискретный режим педали, т.е. регулируемая величина после активации педали / рычага меняется скачкообразно до максимально настроенной величины и в дальнейшем остается неизменной независимо от позиции педали ножного управления. Нажав эту кнопку, можно переключиться во второй режим:

➤ **Аналоговой (линейный) режим рычага/педали ножного управления**




Регулируемая величина после активации рычага / педали ножного управления повышается пропорционально до достижения максимальной величины при полном отклонении рычага / педали ножного управления. Нажав эту кнопку, можно переключиться в предыдущий режим.

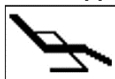

Таста для коррекции позиции пациента




После краткосрочного нажатия на кнопку изображается экран для управления основными позициями кресла пациента и можно осуществить коррекцию позиции пациента. Возвращение из экрана возможно после активации кнопки ESC или путём ввода инструмента в эксплуатацию.

Если в течение периода снятого инструмента из гнезда изменится один из параметров на дисплее без

последующей активации кнопки , произойдет только временная запись измененного параметра в запоминающем устройстве. Это изменение остается записанным до момента изменения программы инструмента (Prog 1 – 9). Изменение сохраняется также после выключения и включения стоматологической установки.

Если временную настройку надо отменить, надо нажать на кнопку  и выбрать актуальную программу. Данные переписываются данными из запоминающего устройства для данной программы. Если изменение параметра надо длительно ввести в запоминающее устройство соответствующей программы, надо после осуществления изменения активировать кнопку .





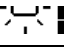





Микромотор вводится в деятельность после отклонения рычага на педали ножного управления направо, или же путём нажатия на педаль ножного управления комбинированную. При этом: при полном отклонении педали ножного управления у микромотора изображенная на дисплее мощность. Деятельность завершается после возвращения рычага на педали ножного управления в исходную позицию. После окончания деятельности рекомендуется активировать функцию CHIPBLOWER.

Мощность микромотора можно настраивать посредством кнопок + / - в диапазоне 0-100% когда инструмент снятый из гнезда в состоянии покоя, или когда он активирован и педаль/рычаг ножного управления в максимальной позиции. В течение работы с инструментом можно мощность плавно менять посредством педали или рычага на педали ножного управления в аналоговом режиме с 0 до максимальной настроенной величины. Когда рабочее время турбины достигнет предел интервала смазки, на дисплее появляется символ тревоги смазки инструмента  и раздается акустический сигнал. Эта сигнализация будет повторяться при каждом использовании инструмента, пока информация по необходимости смазки не будет отменена путём активации кнопки ОК в экране тревог.

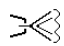Подбор функции левой / правой боковой кнопки на педали ножного управления для инструмента



После нажатия на кнопку изображается „вскакивающее меню“ с возможностями выбора функций кнопок. Желаемую функцию выбрать путём активации соответствующей кнопки. Если изменение нежелательно, надо нажать на кнопку „ESC“. Настройка должна быть выполнена отдельно для левой и правой кнопки ножного управления. Выбрать можно только те функции, которые доступны для инструмента. Остальные блокируются.

	выдувание воздухом (Chipblower)
	охлаждение инструмента ON/OFF
	ротация мотора
	освещение инструмента ON/OFF
	центральный светильник ON/OFF
	звонок
	наполнение стакана пациента
	споласкивание плевательницы
	Ни одна функция не выбрана
P#	Переключение Программы инструмента
	Сменить цвет света инструмента (белый/синий) (только для моторов DENSIM DX BLUE, DENSIM DX PRO BLUE)

8.1.9 Скейлер - Устранитель зубного камня

12.AUG	12:12						
ТИП ИНСТРУМЕНТА						P	100 %
> 25%	> 50%	> 75%	> 100%				
	П 1	ПРОГРАММА 1				+	-
ENDO		33%					
DR.SMITH					МОДЕЛЬ УСТАНОВКИ		

После снятия инструмента из гнезда изображаются данные по его настройке. Их значение следующее:

Тип инструмента


Если барграф неактивным, изображен в нем тип актуально используемого инструмента. В активном состоянии барграф графически изображает приблизительную величину главного параметра (мощность).

Кнопки для быстрого предварительного выбора мощности устранителя зубного камня

>25%
>50%
>75%
>100%


После активации соответствующей кнопки осуществляется изменение настройки мощности на данную величину. Это данное не вводится в запоминающее устройство программы автоматически.

Тасть для настройки мощности устранителя зубного камня

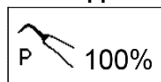

Путём активации кнопки активирован режим настройки, в котором позволяющие изменение величины кнопки выделены красным цветом. Величину параметра можно менять посредством кнопок +/- . Новую величину можно ввести в запоминающее устройство временно (в изменение номера программы) путём повторной активации кнопки с настраиваемым параметром или длительно посредством кнопки ← . Новую величину можно задать также прямо посредством нумерической клавиатуры нажав на кнопку .

Тасть для селекции программы.

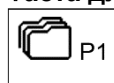


После активации кнопки изображено „вскакивающее меню“ с возможностями выбора программ:

ПРОГРАММА 1	▼
ПРОГРАММА 2	▼
ПРОГРАММА 3	▼
ПРОГРАММА 1	▼
ПРОГРАММА 5	▼
ПРОГРАММА 6	▼
ПРОГРАММА 7	▼
ПРОГРАММА 8	▼
ПРОГРАММА 9	▼
ESC	

Нажатием на соответствующую кнопку выбирается желаемая программа или выбор программы можно отменить путём активации кнопки „ESC“.


Нажмите и удерживайте кнопку (около 2 сек), чтобы сохранить все измененные настройки параметров инструмента в памяти программы.

Процесс сохранения отображается путём изменения цвета иконок и звуковой сигнал (2 коротких сигнала)

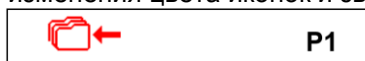


После звукового сигнала запишутся до памяти все данные, которые были сохранены во временной памяти программы.

Клавиша для включения ПРОГРАММЫ для возможности переключать его из педали управления.

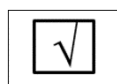


Нажатием этой кнопки можно включать или исключать данную программу. Если включена, она появится в списке программ, которые можно выбрать боковой кнопкой педали управления.

Тафта редактирования названия программы

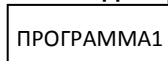


После активации кнопки на приблизительно 2 секунды изображается альфанумерическая клавиатура, с помощью которой можно осуществлять редактирование текста. Максимальная длина текста 20 знаков.

Тафта для выбора режима работы.

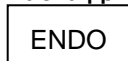


Эта клавиша активна только для инструмента, который выбор режима позволяет. После активации кнопки изображается всплывающее меню с возможностями выбора режимов работы (в зависимости от типа инструмента):

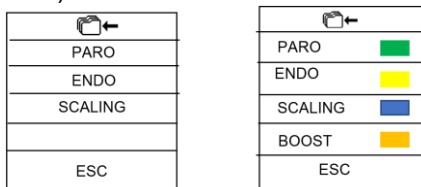

Путём активации соответствующей кнопки выбирается желаемый режим работы инструмента или выбор режима работы отменяется путём активации кнопки „ESC“.

Если измененный режим работы надо записать в запоминающее устройство длительно, надо перед тем активировать кнопку записи в запоминающее устройство . Новое состояние записи данного в запоминающее устройство указано посредством изменения цвета символа . Это состояние можно отменить путём повторной активации кнопки.

Тафта настройки количества охлаждающей воды.

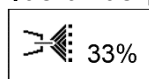

Путём активации кнопки активирован режим настройки, в котором позволяющие изменение величины кнопки выделены красным цветом. Величину параметра можно менять посредством кнопок +/- . Новую величину можно ввести в запоминающее устройство временно (в изменение номера программы) путём повторной активации кнопки с настраиваемым параметром или длительно посредством кнопки . Новую величину можно задать также прямо посредством нумерической клавиатуры нажав на кнопку . Клавиша активна только тогда, режим охлаждения инструмента активный.

Тафта для включения / / выключения освещения инструмента.




Путём активации кнопки освещение инструмента включается - / выключается - .

Кнопка изменения режима работы педали ножного управления

Кнопка активна только тогда, когда режим управления мощностью разрешен и если инструмент находится в состоянии покоя.

➤ Дискретный режим (прыжок мощности) рычага/педали ножного управления

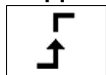

Изображение указывает дискретный режим педали, т.е. регулируемая величина после активации педали / рычага меняется скачкообразно до максимально настроенной величины и в дальнейшем остается неизменной независимо от позиции педали ножного управления. Нажав эту кнопку, можно переключиться во второй режим:

➤ Аналоговой (линейный) режим рычага/педали ножного управления




Регулируемая величина после активации рычага / педали ножного управления повышается пропорционально до достижения максимальной величины при полном отклонении рычага / педали ножного управления. Нажав эту кнопку, можно переключиться в предыдущий режим.


Тафта для включения / / выключения и настройки охлаждения инструмента.



Путём короткого нажатия на кнопку включается/выключается охлаждение инструмента. Если в течение периода снятого инструмента из гнезда изменится один из параметров на дисплее без последующей активации кнопки , произойдет только временная запись измененного параметра в запоминающем устройстве. Это изменение остается записанным до момента изменения программы инструмента (Prog 1 – 9). Изменение сохраняется также после выключения и включения стоматологической установки. Если временную настройку надо отменить, надо нажать на кнопку и выбрать актуальную программу. Данные переписываются данными из запоминающего устройства для данной программы. Если

изменение параметра надо длительно ввести в запоминающее устройство соответствующей программы, надо после осуществления изменения активировать кнопку .

Таста для коррекции позиции пациента

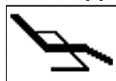





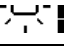





После краткосрочного нажатия на кнопку изображается экран для управления основными движениями кресла пациента и можно осуществить коррекцию позиции пациента. Возвращение из экрана возможно после активации кнопки ESC или путём ввода инструмента в эксплуатацию.

Устранитель зубного камня вводится в деятельность после отклонения рычага на педали ножного управления направо, или же путём нажатия на педаль ножного управления комбинированную. При этом: при полном отклонении педали ножного управления у устранителя зубного камня изображенная на дисплее мощность. Деятельность завершается после возвращения рычага на педали ножного управления в исходную позицию. После окончания деятельности рекомендуется активировать функцию CHIPBLOWER. Мощность устранителя зубного камня можно настраивать посредством кнопок + / - в диапазоне 0-100% когда инструмент снят из гнезда в состоянии покоя, или когда он активирован и педаль/рычаг ножного управления в максимальной позиции. В течение работы с инструментом можно мощность плавно менять посредством педали или рычага на педали ножного управления в аналоговом режиме с 0 до максимальной настроенной величины.

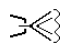Подбор функции левой / правой боковой кнопки на педали ножного управления для инструмента



После нажатия на кнопку изображается „вскакивающее меню“ с возможностями выбора функций кнопок. Желаемую функцию выбрать путём активации соответствующей кнопки. Если изменение нежелательно, надо нажать на кнопку „ESC“. Настройка должна быть выполнена отдельно для левой и правой кнопки ножного управления. Выбрать можно только те функции, которые доступны для инструмента. Остальные блокируются.


	выдувание воздухом (Chipblower)
	охлаждение инструмента ON/OFF
	ротация мотора
	освещение инструмента ON/OFF
	центральный светильник ON/OFF
	звонок
	наполнение стакана пациента
	споласкивание плевательницы
	Ни одна функция не выбрана
P#	Переключение Программы инструмента
	Сменить цвет света инструмента (белый/синий) (только для моторов DENSIM DX BLUE, DENSIM DX PRO BLUE)


Примечание



После возвращения устранителя зубного камня в гнездо освещение инструмента погаснет. Устранитель зубного камня поставить в гнездо всегда только после завершения работы с ним (рычаг / педаль ножного управления в основной позиции).

8.2 Педаль ножного управления

UNO		
Левая верхняя кнопка – позиция для посадки пациента		правая верхняя кнопка – вызов позиции кресла пациента из ЗУ / позиция для выполаскивания
Левая нижняя кнопка – функция по выбору		Правая нижняя кнопка -функция по выбору
рычаг – старт с плавной регулировкой – исходная позиция (споласкивание)		Крест -для управления креслом

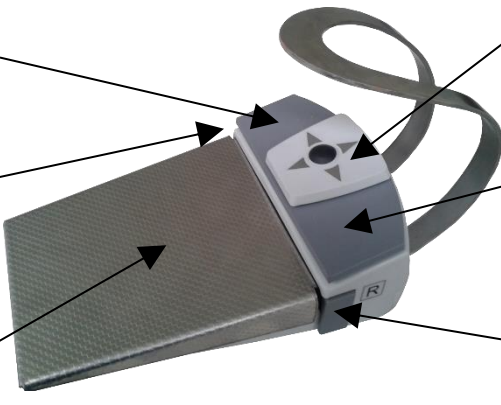NOK		
Левая верхняя кнопка – позиция для посадки пациента		Крест -для управления креслом
Левая нижняя кнопка – функция по выбору		правая верхняя кнопка – вызов позиции кресла пациента из ЗУ / позиция для выполаскивания
педаль – старт с плавной регулировкой – исходная позиция (споласкивание)		Правая нижняя кнопка -функция по выбору

Путём активации кнопки с функцией **CHIPBLOWER** на педали ножного управления активировано выдувание охлаждающего воздуха в инструментах микро мотор и турбина.

Посредством рычага на педали ножного управления вводятся инструменты в деятельность, причем в случае микро двигателя можно путём отклонения рычага на педали ножного управления управлять вращениями микро двигателя (с 0 до настроенной на дисплее величины), в случае употребления ультразвукового устранителя зубного камня и каутера, можно путём передвижения рычага на педали ножного управления регулировать мощность (с 0 по настроенной на дисплее величины).

Тасты **ПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОСАЖИВАНИЯ ПАЦИЕНТА**, **ПОЗИЦИЯ ДЛЯ ВЫПОЛАСКИВАНИЯ** и **КРЕСТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КРЕСЛОМ ПАЦИЕНТА** предназначены для управления стоматологическими креслами пациента серии DIPLOMAT.

- **Если никакой инструмент не снят из гнезда:**
Отклоняя педаль как минимум 1/3 трека начнётся споласкивание чаше
- **когда все инструменты находятся в своих позициях, так боковые кнопки у установок DA370/DA380** контролируют откидывание сиденья

Беспроводная педаль ножного управления (только по заказу)



Беспроводная педаль ножного управления поставляется с отключенной батареи из-за нежелательной утечки батареи во время транспортировки и хранения. Введение в эксплуатацию должно быть сделано всегда официальным сервисным техником

Функция кнопок и вид управления совпадает с классической педалью ножного управления. Разница только в виде передачи данных между педалью ножного управления и стоматологической установкой. У классической педали ножного управления осуществляется передача данных посредством подключенного кабеля, соединяющего стоматологическую установку с педалью ножного управления. В беспроводной педали ножного управления передача данных осуществляется посредством радиоволн – без необходимости подключения кабеля.

Соединение беспроводной педали ножного управления со стоматологической установкой


Передатчик расположен внутри педали управления и питается от батареи.

Приемник подключен креслу или зубной установке, и питается напрямую от зубной установки.





Передатчик


Питание педали ножного управления обеспечено от двух аккумуляторов NiMH 1,2V / 1800-2400 mAh.

Выдержка аккумуляторов длится в 2 месяца при стандартной эксплуатации. Необходимость зарядки указана на ПРИЁМНИКЕ путём мелькания красного светодиода led, или на дисплее посредством символа .

После начала сигнализации по необходимости зарядки аккумуляторов можно с педалью ножного управления работать еще несколько часов неподключая его к источнику энергии.



Зарядка аккумуляторов педали управления:

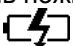Зарядка активируется после подключения соединительного кабеля между стоматологическую установку и педаль ножного управления. В течение зарядки можно педаль ножного управления употреблять – действует в качестве классической педали ножного управления. Зарядка  длится в приблизительно 3 часа и она прекращается автоматически в момент, когда аккумулятор заряжен полностью. Завершение заряда обозначается символом дисплея .

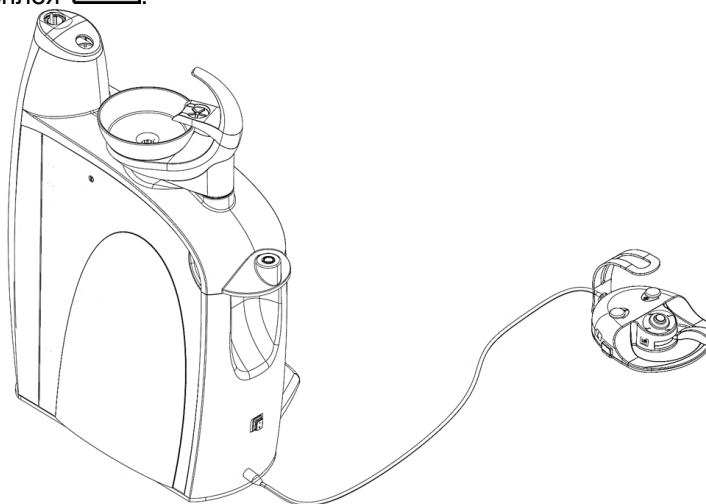

С точки зрения обеспечения правильной функции педали ножного управления и стоматологической установки необходимо кабель от педали ножного управления подключать и отсоединять только тогда, когда стоматологическая установка выключена.

Приёмник wifi

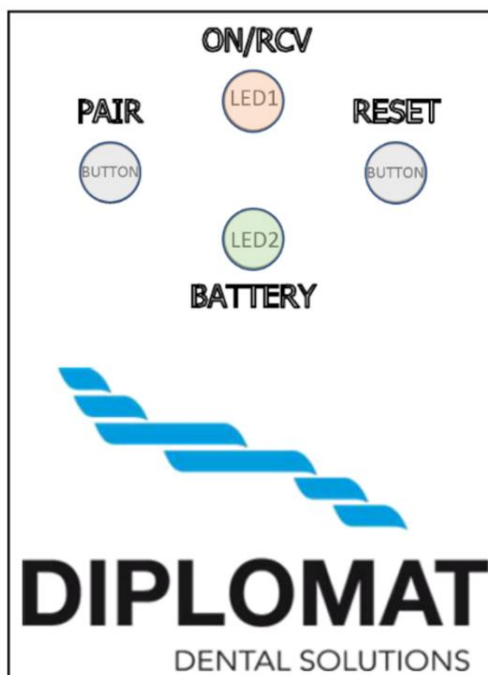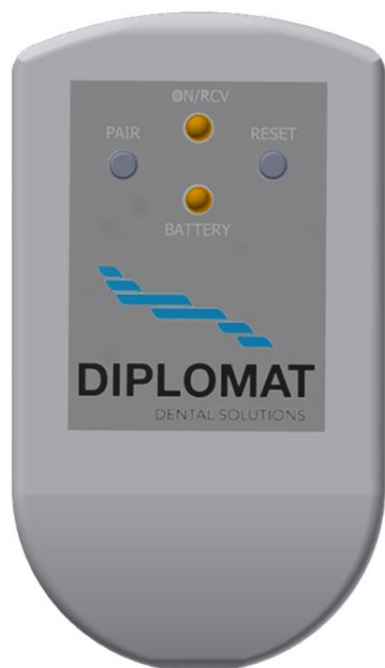

Кнопка PAIR – используется для сопряжения передатчика с приёмником

Кнопка RESET – инициализация устройства, после изменения настройки, или при неправильной функции педали управления

LED1 (ON/RCV) – показывает соединение к напряжению тока силы и обнаруживает команды от передатчика

LED2 (BATTERY) - показывает состояние заряда аккумуляторов передатчика

Возможные состояния заряда аккумуляторов (LED2):

- Горит зеленым – батарея полностью заряжена
- Устойчивый оранжевый-батарея частично разряжена
- Непрерывно горит красным цветом – батареи почти разряжены
- Мигающий красный – необходимо зарядить аккумулятор

Процедура при зарядке аккумулятора педали управления:

1. Извлеките приёмник из клеммы
2. К терминалу вместо приёмника сигнала подключите кабель для зарядки аккумулятора педали управления
3. Другой конец кабеля подключите к терминалу на спине педали управления
4. Зарядка обозначается знаком вспышки на индикаторе заряда батареи на дисплее столика врача
5. Полностью заряженный аккумулятор, когда на индикаторе батареи исчезнет характер вспышки
6. Отсоедините шнур питания от обоих терминалов
7. Подключите приёмник к терминалу



Если возникает ошибка на передатчике во время работы, пропадает сигнал, а приёмник не получает новый или подтверждающий сигнал в течение 2 секунд, приёмник автоматически посылает сигнал в комплект как педаль в нулевом положении и прерывает деятельность на данный момент используемого инструмента

Сопряжение приёмника и передатчика:

Каждый передатчик имеет уникальный адрес установленный изготовителем. Передатчик приходит от продукции спаренной с приёмником. Если произошло так, что передатчик не сопряжен с приёмником (когда инструкция отправляется от ножного контроллера, LED1 не мигает) или в случае замены ножного контроллера или приёмника, необходимо сначала выполнить сопряжение ножного контроллера с приёмником. Установка должна осуществляться специалистом в соответствии с инструкциями для обслуживания.

Список возможных расстройств

Расстройство	Возможная причина	Устранение неисправности
Приёмник не работает-LED1 не светит	Приёмник без питания	Убедитесь, что зубная установка включена
		Проверьте правильность подключения приёмника к зубной установке
Приёмник работает – LED1 горит, но приёмник не принимает команд от педали управления	Приёмник неисправен	Соедините педаль и установку через кабель, и обратитесь в авторизованный сервис
	Разряженный аккумулятор педали управления	Через индикатор батареи на дисплее столика врача, проверьте состояние заряда аккумулятора Зарядите аккумулятор педали управления
	Приемник, или передатчик неисправен	Обратитесь в авторизованный сервис
	Барьеры передачи	Обеспечьте прямую видимость между передатчиком и приемником
На максимуме рукоятки педали, представление инструментов не достигает максимум	Свободный / повреждённый потенциометр	Обратитесь в авторизованный сервис
Когда педаль в исходном положении инструменты продолжают вращаться	Свободный переключатель для начала	Обратитесь в авторизованный сервис
Педаль не вернётся в базовое положение	выпрыгнута из положения или сломанная пружина педали	Обратитесь в авторизованный сервис
Кнопка для управления движением кресла остаётся ещё нажатой	повреждена пенная пружина Кнопки	Обратитесь в авторизованный сервис

Технические данные:

Передатчик	
Напряжение питания – через кабель – аккумулятор	10-36 V DC (Номинальное напряжение 24 V) 2,4 V DC 2xAA NiMH 1200 mAh (GP Recyco+ или sanyo eneloop)
Частота	2400-2464 MHz
Жизнь батареи от одного заряда	2 месяца
Достигаемость передатчика	Не менее 2 метров
Мощность передачи	-18 дБм в зависимости от настройки SW до 4 дБм
Typ modulácie	GFSK



Приёмник	
Напряжение питания	24 V DC
Частота	2400-2464 MHz

8.3 Блок плевательницы

Бутылка с дистиллированной водой

Она помещена в блоке плевательницы и доступ к ней возможен после открытия двери блока плевательницы. Дистиллированная вода из бутылки подводится к микромотору, турбине, устранителю зубного камня, стоматологическому шприцу, пескоструйному аппарату и вообще к инструментам на панели управления зубного врача и к стоматологическому шприцу на панели ассистента.

Дополнение дистиллированной воды:

- открыть дверь на блоке плевательницы
- переключить трехпозиционный переключатель в блоке плевательницы в позицию 
- вывинтить бутылку
- дополнить дистиллированную воду в бутылку
- бутылку завинтить таким образом, чтобы избежать от утечки напорного воздуха из ней в течение работы
- трехпозиционный переключатель переключить в позицию с символом бутылки 
- проверить, не утекает ли воздух из бутылки
- закрыть дверь на блоке плевательницы

В случае израсходования дистиллированной воды до такой меры, что в распределения воды попал воздух, рекомендуется удалить воздух из водяных путей применяемых инструментов путём отбрызга воды пока из инструментов не вытекает вода без воздушных пузырьков.

Предупреждение

При повторном наполнении бутылки с водой необходимо уделить особое внимание защите от попадания в воду инородных веществ, которые могут изменить ее качественный состав.


Необходимо употреблять дистиллированную воду предназначенную для медицинских целей с максимальной электропроводностью воды до 2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$.


Не используйте дистиллированную воду для технических целей !

Производитель стоматологической установки рекомендует заменять бутылку один раз в год.


Центральное распределение воды

Если для охлаждения инструмента использована вода из центрального распределения, ненадо дополнять в бутылку дистиллированную воду – функция CENTRAL.

Эта функция активируется путём переключения помещенного в блоке плевательницы переключателя в позицию CENTRAL 

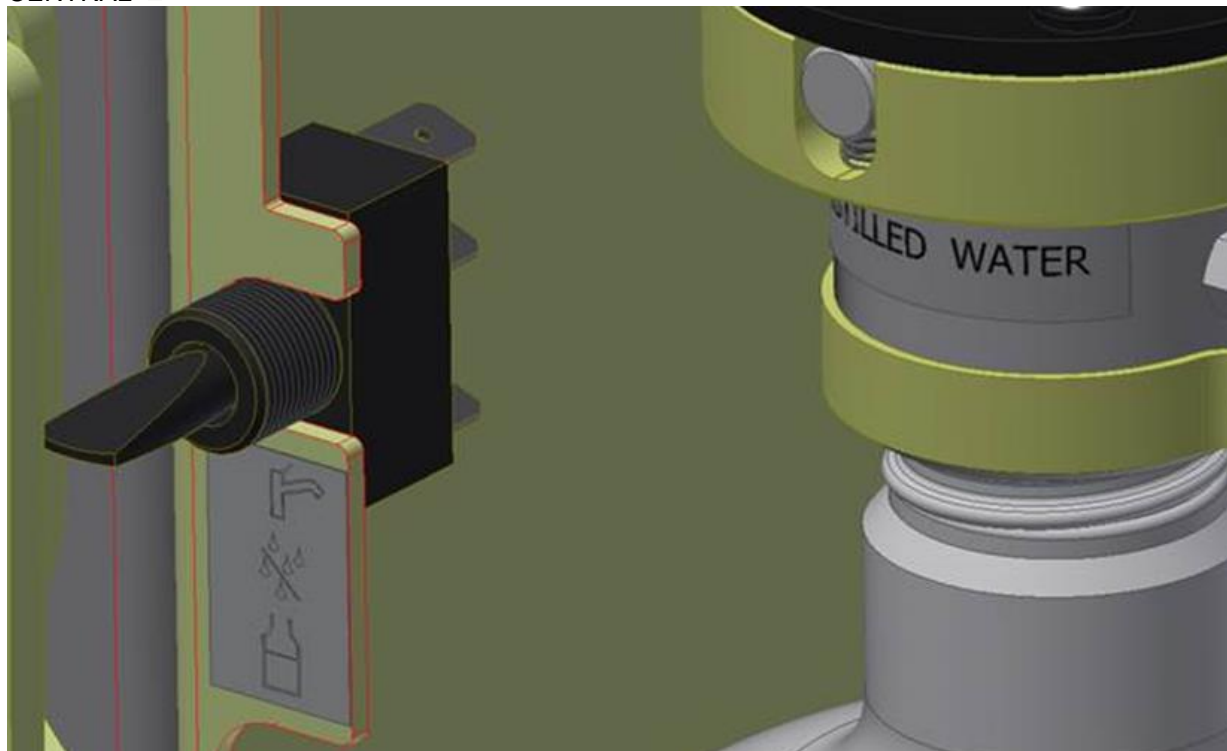

8.3.1 Панель ассистента

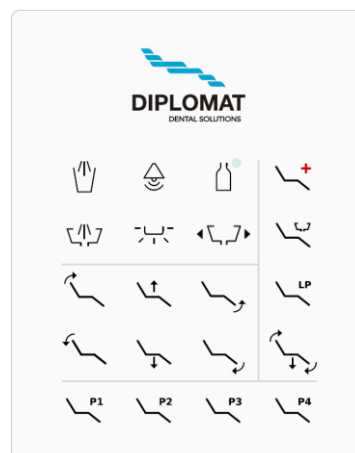

Панель ассистента

Клавиатура на панели ассистента

Клавиатура ассистента


Функции кнопок совпадают с функциями кнопок на дисплее зубного врача.

От клавиатуры ассистента невозможно программирование позиций стоматологического кресла пациента.

8.3.2 Простые панели ассистента



Двойной держатель

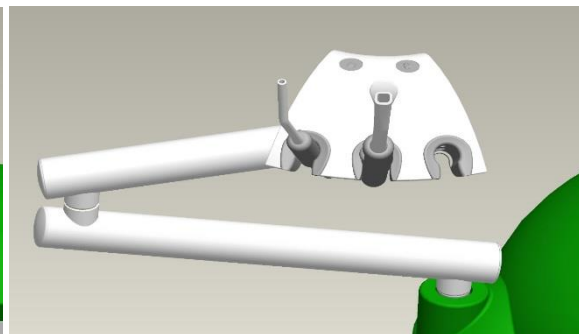

Тройной держатель

Находящиеся в гнездах простых панелей ассистента инструменты готовы к работе немедленно после снятия их из гнезда. В гнезде инструментов можно – наряду со слюноотсасывателем – поместить также полимеризационную лампу, стоматологический шприц, большой и маленький отсасыватель. На простых панелях ассистента находятся кнопки для управления режимом наполнения стакана пациента и споласкивания плевательницы (без таймера/TIMER). Посредством этих кнопок нельзя активировать наполнение стакана пациента и споласкивание плевательницы на предварительно настроенный период. Функция наполнения стакана пациента и споласкивания плевательницы активными только в период нажатия на соответствующую кнопку.

8.3.3 Оснащение блока плевательницы

Слюноотсасыватель

Он вводится в деятельность автоматически после снятия его из гнезда. При пониженной мощности прочистить ситко слюноотсасывателя следующим образом: вынуть собственный слюноотсасыватель (наконечник), стянуть насадку слюноотсасывателя, вынуть ситко - прочистить его и вставить назад, смонтировать слюноотсасыватель. Очистка ситка рекомендована минимально один раз в день.

Деятельность завершается после задвижения инструмента в гнездо. Рекомендуется прополаскивать слюноотсасыватель и отсасыватели после ухода за каждым пациентом с применением 0.1 л воды.



Наконечник слюноотсоса является одноразовым, он не предназначен для многократного использования. В случае, если наконечник слюноотсоса будет использоваться для следующего пациента, грозит вред его здоровью

Маленький отсасыватель, большой отсасыватель

Он вводится в деятельность после снятия его из гнезда. Окончание деятельности – после задвижения в гнездо. Насос слюноотсасывателей можно регулировать путём открывания регуляционного клапана отсасывателей, причем в его нижней позиции слюноотсасыватель закрыт. В теле слюноотсасывателя помещен фильтр, который необходимо минимально 1 раз в день прочистить.

i Сепаратор после заполнения его автоматически выключается – отечет в водосточную систему – работает циклически (относится к сепараторам CATTANI, METASYS, DÜRR CASI).

Полимеризационная лампа

Она готова к деятельности с момента снятия ее из гнезда и ее можно употреблять. В целях правильного употребления полимеризационной лампы прочтите, пожалуйста, руководство к полимеризационной лампе.

Внутриротовая камера

она не служит для определения диагноза, а для лучшей визуализации в течение стоматологического вмешательства.

Камера состоит из следующих частей:

- держатель
- подключение – штепсельный разъем
- собственный инструмент (камера)



Изделие защищать от контакта с водой, не хранить его во влажных пространствах

8.4 Стоматологический операционный светильник

Управление стоматологическим операционным светильником осуществляется посредством трехпозиционного переключателя на стоматологическом светильнике, причем в позиции переключателя в середине светильник выключен.

Если стоматологическая установка оснащена электронной регуляцией освещения, регулировка возможна от панели управления и консоли ассистента посредством кнопки – смотри описание функций кнопок (относится к стоматологическому операционному светильнику Sirius). Дальнейшие описания операционных светильников – смотри соответствующие приложения (XENOS, FARO).

8.5 Тележка (только для установки DA 280 – CART)

Тележка с панелью управления присоединена к блоку плевательницы посредством энергетического пучка кабелей, проведенных в защитном шланге. Шланг защищает пучок проводников от риска их механического повреждения, пыли, влажности, от сдирки и одновременно образует дополнительную изоляцию. Внешняя оболочка планга изготовлена из смягченного поливинилхлорида / PVC.

В защитном шланге вставлен внутренний спираль из жесткого поливинилхлорида / PVC, благодаря которому обеспечена неподатливость шланга в случае наступления его взрослым. Однако производитель рекомендует не наступать на шланг ни не класть на него никакие предметы. Защитный шланг нельзя загибать до диаметра меньше 70мм. Проводя очистку шланга руководствуйтесь, пожалуйста, приведенными во главе „Очистка, дезинфицирование и обеззараживание остальных частей стоматологической установки“ инструкциями.

Кнопка для регуляции блокировки (CART)



В варианте CART можно рабочую высоту панели управления вариировать в диапазоне 200мм. Панель управления захватить в боковой части обеими руками (лучше всего стоя сзади), причем пальцем одной руки нажать на помещенную на нижней стене панели управления кнопку и держать ее сжатой. Тем произойдет деблокировка механизма для регуляции высоты. Таким образом можно переустанавливать рабочую позицию панели управления. После освобождения кнопки произойдет влокировка механизма в настроенной высоте.



Перемещая тележку надо воспрепятствовать контакт соединительного кабеля от педали ножного управления или другого предмета с колесиками тележки.


8.6 Гигиена


Под названием гигиена понимается дезинфицирование вместе с обеззараживанием внутренних распределений стоматологической установки. Гигиена не является составной частью основного оснащения стоматологической установки – она поставляется только на основе специального заказа! Ближе к пункту гигиены – смотри самостоятельное приложение „Система гигиены стоматологической установки DA 270, DA 280, DA 370, DA 380.

8.7 Регулировка заголовника вручную

Позиция заголовника регулируется вручную, причем конструкция заголовника анатомическая и позволяет любую фиксацию головы пациента. Настройка по высоте проводится механически путём тяги или натиска в направлении настройки рис. 8.1. Наклон заголовника настраивается расслабив помещенный на задней стороне заголовника рычажок рис. 8.2. После перестановки настроенную позицию надо фиксировать.

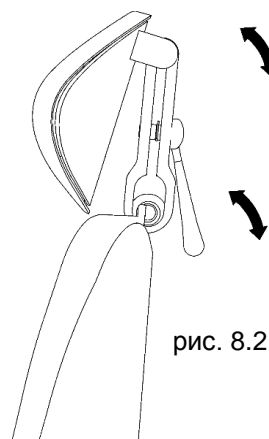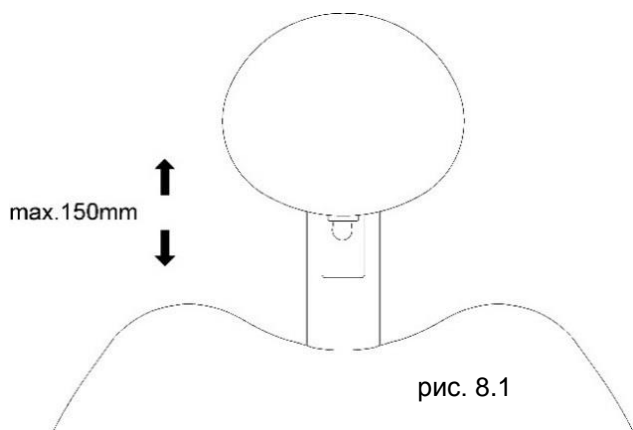


 При работе с пациентами рекомендуем использовать наружную защитную гетру к спинке головы. Защитная гетра защищает обивку от повреждений препаратами для волос

 По окончании работы производитель рекомендует ослаблять зажим подголовника

8.8 Регуляция позиции правого подлокотника вручную


В интересах повышения комфорта пациента можно дополнительно заказывать правый подлокотник. Он позволяет следующие два движения:

- Откинуть подлокотник в направлении вперед (движение No.1)
- Откинуть подлокотник в направлении вниз (движение No.2)

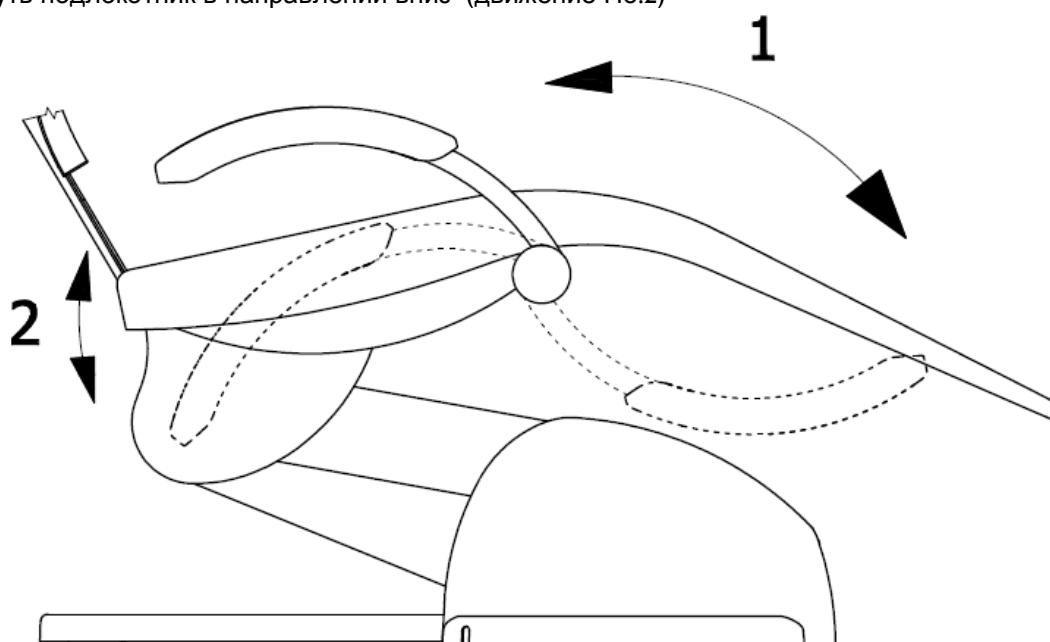


Описание порядка опрокидывания вперед (движение No.1)

захватить подлокотник и переместить его из позиции No.1 в позицию No.4, обратную фиксацию провести следующим образом: подлокотник повернуть из позиции No.4 в позицию No.3, затем подлокотник опрокинуть в направлении вверх до слышимого шелка. В тот момент подлокотник фиксирован против нежеланного движения в направлении вниз.

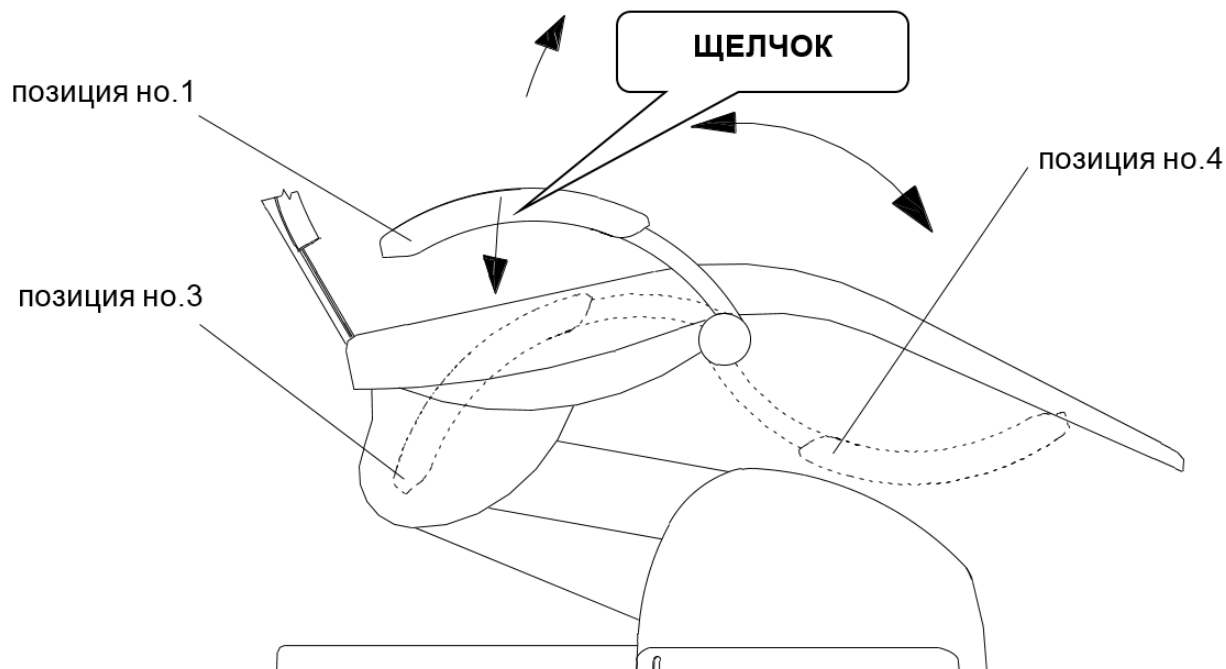

Описание порядка опускания вниз (Движение No.2)

захватить подлокотник и переместить его из позиции No.1 в позицию No.2, таким образом можно освобожденный подлокотник опрокинуть в нижнюю позицию No. 3 обратную фиксацию провести следующим образом: подлокотник опрокинуть из позиции No. 3 до слышимого щелчка. В тот момент подлокотник фиксирован против нежеланного движения в панралении вниз.

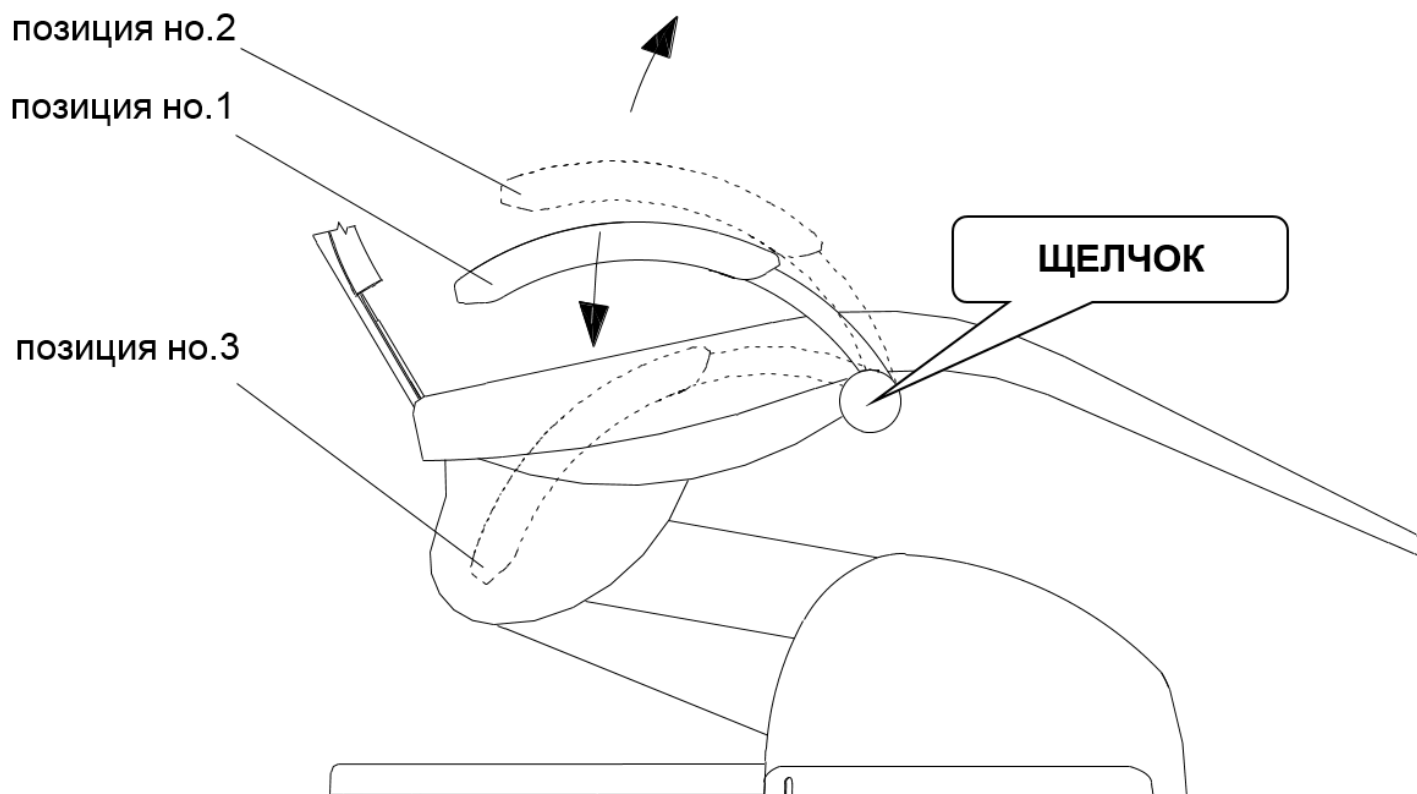

8.9 Окончание работы

Важны следующие шаги:

- выключить главный выключатель – позиция 0! Таким образом прекращается подача электрической энергии, воды и воздуха и давление во всей установке понижается
- закрыть центральную подачу воды (на рабочем месте) к стоматологической установке
- выключить компрессор – открыть отстойный клапан
- выключить отсасыватель (если он имеется в варианте установки)

9 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ

Текущий ремонт инструментов и наконечников надо проводить соответственно инструкциям их изготовителей. В случае варианта блока плевательницы с подключением к центральному распределению воды надо проверять чистоту предвключенного фильтра и функциональность оборудования для водоподготовки (соответственно руководствам их изготовителей).

Ревизии в течение гарантийного срока

В течение гарантийного срока рекомендуем пользователю стоматологической установкой призывать в регулярных **промежутках времени в 3 месяца** авторизованного сервисного специалиста с целью осуществления им периодического контрольного осмотра.

Этот контроль сосредоточен на следующие пункты:

- контроль входных фильтров (ввиду чистоты употребляемых входных медий)
- контроль отсасывательной системы
- контроль шланга водосточной системы – для отходов
- дополнение дальнейших информации и практических советов по стоматологической установке
- контроль правильного использования и текущего ремонта стоматологической установки и ее инструментов (соответственно Руководству по эксплуатации и обучению)
- контроль, или дополнительную настройку всех медий (входных, настройка давлений в турбинах и т.под.)

диапазон приведенных работ определен со стороны производителя установки на **1 по 1.5 часа** осуществленный периодический осмотр установки должен авторизованный сервисный специалист подтвердить в гарантийном свидетельстве

Контроль и ревизия после истечения гарантийного срока:

Периодический контроль изделия должен осуществлять авторизованный сервисный специалист в регулярных промежутках времени **в 6 месяцев**, причем он проводит следующие ревизии:

общий контроль стоматологической установки и ее функциональных частей

контроль и дополнительная регулировка рабочих давлений воды и воздуха

контроль фильтров воды и воздуха в блоке плевательницы

контроль комплектности электрической части и установки (электрическая безопасность)

Ревизия электрической безопасности



Она осуществляется соответственно инструкциям страны, в которой стоматологическая установка установлена.

10 ОЧИСТКА, ДЕЗИНФИЦИРОВАНИЕ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

10.1 Дезинфицирование внутренних распределений инструментов

Рекомендуется употреблять очиститель Alpron или Sanosil S003 или Dentosept P в 1%-ной концентрации в смеси с дистиллированной водой. Раствор налить в бак для дистиллированной воды и его можно употреблять долгосрочно. Это средство в 1%-ной концентрации не повреждает здоровье пациента. Регулярное применение способствует содержанию чистоты системы охлаждения и не надо применять других средств для дезинфицирования. Информации по возможностям их применения и закупки предоставит Вам Ваш дистрибьютор.

Если для охлаждения инструментов используется вода из центрального распределения, надо дезинфицирование внутренних распределений инструментов провести следующим образом:

1. Заполнить резервуар для дистиллированной воды 1%-ным раствором Alpron или Sanosil S003 или Dentosept P в смеси с дистиллированной водой
2. Трехпозиционный переключатель переключить в позицию „DESTIL“ .
3. Прополаскивать водяной путь любого инструмента в течение 30 секунд, остальные инструменты, которые работают с охлаждающей водой, прополаскивать в течение 10 секунд
4. Трехпозиционный переключатель переключить в позицию „CENTRAL“ .










Изготовитель рекомендует проводить вышеописанную дезинфекцию минимально один раз в день, лучше всего в заключение рабочего дня.

10.2 Полуавтоматическая дезинфекция водяных дорожек шлангов инструментов (по запросу)

В режим ГИГИЕНА войти начиная в изображении НАСТРОЙКИ на экране, путём активации кнопки ГИГИЕНА .

НАСТРОЙКИ	
ГИГИЕНА	ESC
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	
СЕРВИС /ПРОИЗВОДСТВО	
ТЕСТ	
USB	
ИИНФОРМАЦИЯ	

Изобразится экран гигиены:

ГИГИЕНА			
			ESC
	10 sec		60 sec
	10 sec		+
	50 sec		-
			→

Активной является только клавиша:



После активации кнопки изображена в нижней части экрана надпись :

ВСТАВЬТЕ БУТЫЛКУ С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ

Надев бутылку с дезинфицирующим раствором надо этот шаг подтвердить путём активации кнопки с надписью. После активации кнопки изображается новая надпись:


ВСТАВЬТЕ ШЛАНГИ В ДЕРЖАТЕЛЬ

В бак задвинуть воронку (рис. 1а).

Таким образом подготовленный бак насадить на плевательницу (рис. 1б).

Снимите все инструменты для дезинфицирования водяных путей охлаждения.

Инструменты надо снять со шлангов и шланги вставить в гнезда в баке на плевательнице.

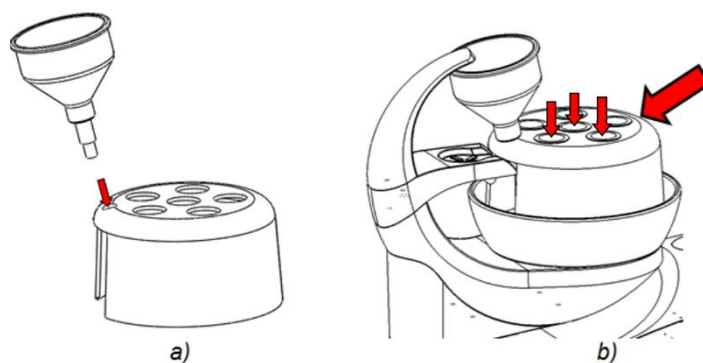

Ввиду того, что управление стоматологическим шприцем оснащенного автономным клапаном, заполнение стоматологического шприца необходимо провести вручную следующим образом: вставьте шприц наконечником в гнездо инструментов, нажмите на левую кнопку и держите ее нажатой до момента, когда начнет из него истекать дезинфицирующее средство. Шприц оставить в гнезде

Всегда надо следить за тем, чтобы все шланги были помещены в гнездах, поскольку дезинфицирующий раствор течет одновременно до всех шлангов!!!.

Непосредственно до этого момента можно отменить процесс дезинфицирования инструментов путём активации кнопки ESC.

Активация кнопки СТАРТ активирует режим дезинфицирования системы охлаждения инструментов и начинается

процесс заполнения системы охлаждения инструментов дезинфицирующим раствором.

Вставив все шланги в их гнезда надо этот шаг подтвердить путём активации кнопки Старт

СТАРТ

Процесс указан посредством надписи:

ЗАГРУЗКА
29

В нижней части кнопки изображается период до окончания процесса наполнения стакана в секундах. После заполнения системы охлаждения инструментов дезинфицирующим раствором начинается процесс действия раствора. Состояние указано посредством надписи:

ВЛИЯНИЕ	ПЕРЕРЫВ	ВЛИЯНИЕ
ВЛИЯНИЕ		ВЛИЯНИЕ

Процесс можно в любое время прекратить нажав на кнопку ПРЕКРАЩЕНИЕ или выключив стоматологическую установку. Период воздействия раствора зависит от решения обслуживающего персонала и он должен находиться в пределах с минимально 60 минут, в оптимальном случае в течение ночи или выходных.

Путём активации кнопки ПРЕКРАЩЕНИЕ или после включения стоматологической установки, если она была выключена в течение воздействия, изображается надпись:

ВСТАВЬТЕ БУТЫЛКУ С ВОДОЙ

Насадив бутылку с водой надо действие подтвердить путём активации кнопки с соответствующей надписью. После активации кнопки изображена новая надпись:

ПРОМЫВ
01:29

В нижней части кнопки изображается период до окончания процесса промыва в секундах



Ввиду того, что управление стоматологическим шприцем оснащено автономным клапаном, надо его заполнение осуществить вручную:
стоматологический шприц поместить над гнездо инструментов, нажать левую кнопку и держать её нажатой до момента, когда из шприца начнет истекать чистая вода (приблизительно 2 минуты)

После окончания режима промывки изображена на дисплее новая надпись:

КОНЕЦ

Подтверждение путём активации кнопки завершает процесс дезинфицирования инструментов и шланги можно вернуть в соответствующие гнезда на панели зубного врача.

10.3 Очистка и обеззараживание слюноотсасывателя

Очистка эжектора должны быть сделаны следующим образом - снять саму (наконечник) слюноотсасыватель, скачать слюноотсасывателя наконечник, удалите сито рис. 10.1 - вычистить и вернуть обратно. Мы рекомендуем, чтобы очистить сито, по крайней мере один раз в день.

Обеззараживание слюноотсасывателя проводить минимально один раз в день (например после окончания работы) применяя средство SAVO Prim в 1%-ной концентрации и объеме в минимально 100 мл разбавленного раствора путём отсасывания через наконечник слюноотсасывателя.


После каждого рабочего цикла слюноотсасывателя надо прочистить шланг слюноотсасывателя прополоскнув его приблизительно 100 мл чистой воды после ухода за каждым пациентом.



10.4 Очистка и обеззараживание большого и маленького отсасывателя

Очистку большого и маленького отсасывателя осуществлять в следующем порядке: Достать поз. 1 и 2 из шлангов отсасывателей и вынуть поз. 3 и 4 (фильтр), поз. 3 и 4 прочистить (сполоснуть) под текущей водой и затем вернуть/вставить обратно в шланги отсасывателей и поз. 1 и 2 вставить обратно в шланги. Рекомендуется прочищать поз. 3 и 4 не реже одного раза в день.

После работы с большим и маленьким отсасывателем надо их шланги прополоскнуть приблизительно 0.1 л чистой воды после ухода за каждым пациентом.

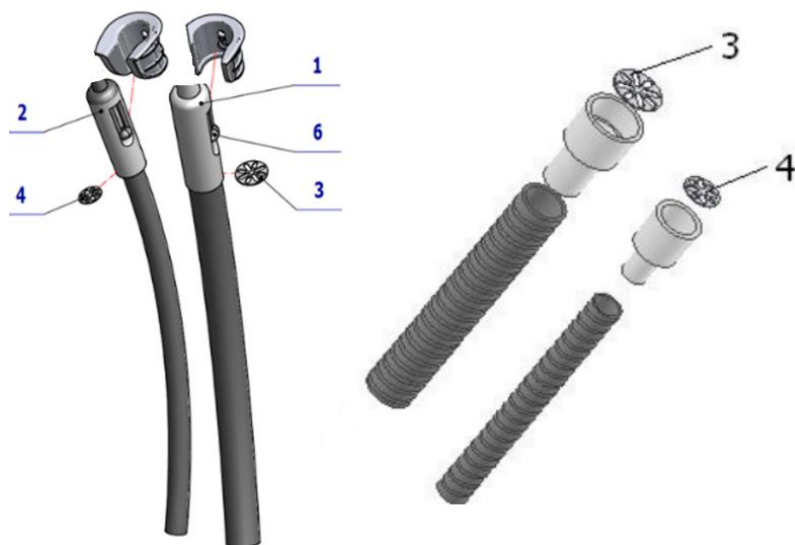


- 1 - Большой отсасыватель
- 2 - Маленький отсасыватель
- 3 - Фильтр грубых нечистот Р 22
- 4 - Фильтр грубых нечистот Р 16
- 6 - Регуляционный клапан отсасывания

10.5 Очистка ситка сепарационного блока

Очистку фильтра в отдельном блоке осуществлять в следующем порядке:

Снять крышку и достать фильтр грубых нечистот из сепарационного блока, затем прочистить (сполоснуть) под текущей водой и вставить обратно в отдельный блок. Рекомендуется прочищать не реже одного раза в день.

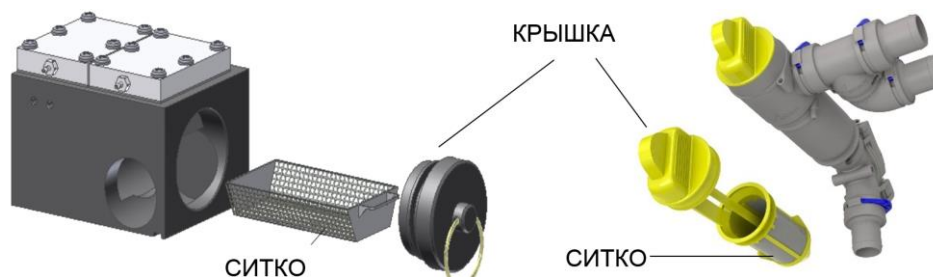

Сепаратор с двумя мембранами

Сепаратор без мембран

10.6 Очистка и дезинфекция клапана Dürr в плевательнице использованного на влажной системе отсасывания в стоматологических установках DIPLOMAT

Для очистки и дезинфекции требуется следующее:

Материал-совместимое, обеззараживающее/чистящее средство, которое одобрено производителем Dürr, например Orotol плюс или Orotol Ультра.





Процедура:

- 1 - Запустите полоскание чаши плевательницы.
- 2 - Держите жёлтую кнопку очистки клапана на панели управления, пока ополаскивание плевательницы закончено.
- 3 - Залейте дезинфицирующий раствор в плевательницу и в то же время нажмите жёлтую кнопку очистки клапана на панели управления, пока дезинфицирующий раствор был придыхан.

Ежемесячное обслуживание:

Нажмите кнопку чистки, чтобы очистить ёмкость. Очистите желтый фильтр грубой очистки или замените его при необходимости. Желтый фильтр грубой очистки предотвращает попадание крупных зубных частиц во всасывающую трубу.

Кнопка Очистки

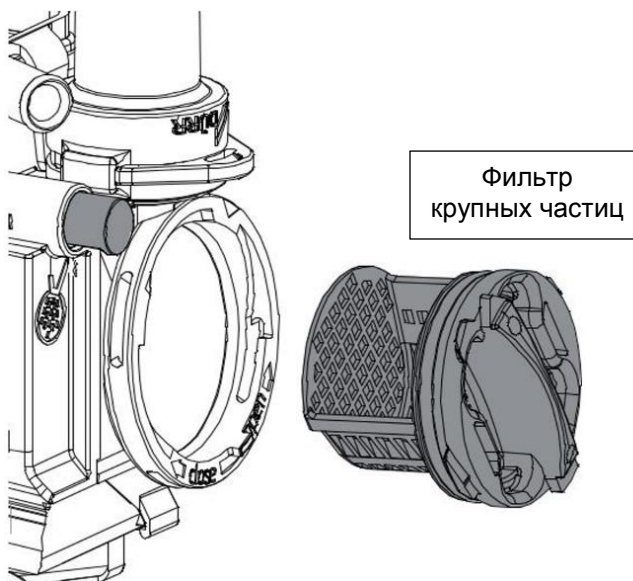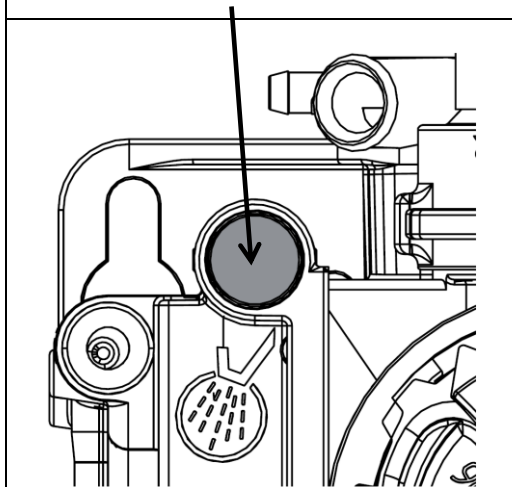

Фильтр крупных частиц



Отказ или повреждение оборудования из-за использования неправильных продуктов может привести к аннулированию гарантии

- Не используйте пенящиеся препараты, например чистящих средств бытовых.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Не используйте средства, содержащие хлор.
- Не используйте какие-либо растворители, такие как ацетон.

10.7 Обеззараживание плевательницы

Обслуживающий персонал должен проверять состояние ситка/фильтра в ловителе грубых нечистот в плевательнице и в случае надобности прочистить его.

Если стоматологическая установка оснащена одним слюноотсасывателем, употребляется для обеззараживания раствор 1%-ного средства SAVO Prim (Чешская республика). Обеззараживание плевательницы надо проводить не реже одного раза в день (например после окончания работы), употреблять при этом дезинфицирующее вещество SAVO Prim в 1% -ной концентрации в объеме не менее 200 мл разбавленного раствора вылив его в плевательницу.

Если стоматологическая установка оснащена отсасывателем, зависит тип подходящего средства для дезинфекции от типа встроенного в стоматологической установке сепаратора:

- Если в установке встроен сепаратор CATTANI, надо употреблять средство PULI - JET PLUS.
- Если в установке встроен амальгама-сепаратор METASYS, надо применить средство GREEN & CLEAN M2,
- в случае амальгама-сепаратора DÜRR CAS 1 или сепаратора DÜRR CS 1 надо употребить средство OROTOL PLUS.

Гигиена при использовании сепаратора CATTANI:

Руководство по применению дезинфицирующих пилюль CATTANI с противопеняющим воздействием для стоматологических отсасывателей

В течение работы с отсасывателем образуется турбулентное течение, когда кровь, слизь и все виды санитарных веществ образуют значительное количество пены, которая может вызвать частое и внезапное нежеланное прекращение отсасывания.

Регулярное употребление пилюль с противопеняющим воздействием редуцирует в значительной мере наличие таких прекращений.

Каждая пилюля покрыта растворимым в воде защитным слоем, который гарантирует хранение и безопасную манипуляцию невзирая на то, что этот продукт неклассифицирован в качестве опасного. Защитный слой не удаляйте, он растворимый в воде. Всасывание небольшого количества воды через наконечник в больших или малых аспиратора после помещения таблетки внутри блока ситами блок разделения достаточно для получения немедленного противопеняющего воздействия. Если таблетки надо вставить в очень маленькое пространство, удалите защитный слой/фильм (рекомендуется надеть перчатки) и разломьте ее на 2 части путём задавливания продоль назначенного нареза. В интересах правильной функции датчиков надо их очистить от слоя тонкой шлифовальной шкуркой.

При протоке жидкости таблетка медленно растворяется и выделяет дезинфицирующие и противопеняющие компоненты в течение целого рабочего дня.

Руководство по применению очистительного вещества PULI - JET PLUS

Изготовитель сепаратора рекомендует дезинфицировать отсасывательную систему ежедневно после окончания работы и провести не менее одного очищающего промывания в середине рабочего дня. Наполнение дозатора: поставьте бутылку в вертикальной позиции, предпочтается поставить на плоскую поверхность. Отвинтить затвор и путём умеренного сжимания на обозначенных двумя наклейками местах наполнить дозатор до окраины (осторожно – не переполнить).

Гигиена при использовании амальгама сепаратора METASYS MST 1:

Руководство по употреблению очистительного вещества GREEN & CLEAN M2

Двухкратно сжав дозатор средства впрыснуть **6 ml GREEN & CLEAN M2** в смесительный бак и дополнить водой из водопровода до достижения знака. Перемешать раствор и постепенно отсасывать через маленький и большой отсасыватель в баке. После отсасывания вынуть патрубок из бака, приподнять его, чтобы выпустить жидкость из шланга в канализационный коллектор и в сепаратор. Остающийся в баке раствор вылить в плевательницу и смыть небольшим количеством воды.

Продуцент сепаратора рекомендует применить очистительное средство **GREEN & CLEAN M2** 2 раза в течение каждого рабочего дня.

Гигиена при использовании амальгама сепаратора DÜRR CAS 1 или DÜRR CS 1:

Руководство по употреблению очистителя OROTOL PLUS


До начала каждого процесса дезинфицирования с применением дезинфицирующего средства **Orotol Plus** отсосать через шланги большого и маленького отсасывателя по 1л чистой холодной воды (для этого использовать бак Oro Cup). Проводя дезинфицирование средством **Orotol Plus** надо поступать в следующем порядке:

1. Отвинтить затвор бака Oro Cup
2. Налить в бак Oro Cup 2л холодной воды (до достижения отметки)
3. Добавить нужную порцию дезинфицирующего средства **Orotol Plus**, т.е. два мерника средства (один

- мерник – до достижения отметки крышки **Orotol Plus** соответствует 20мл раствора)
4. Навинтить затвор бака Oro Cup
 5. Хорошо промешать дезинфекционный раствор с водой в баке Oro Cup
 6. Откинуть крышку затвора Oro Cup-а
 7. Поставить бак Oro Cup в вертикальной позиции (позиция указана на баке Oro Cup). Эта позиция бака Oro Cup позволяет отсосать 1л намешанного раствора через шланги отсасывателей (0,5л через шланг большого и 0,5л через шланг маленького отсасывателя)
 8. С помощью адаптера надеть шланги отсасывателей на наконечники бака Oro Cup
 9. Остаток разбавленного раствора (приблизительно 1л) вылить из бака Oro Cup в плевательницу и слить его небольшим количеством воды
 10. Водосточную и отсасывательную систему дезинфицировать не реже одного раза в день (удобнее всего всегда в конце каждого рабочего дня) употребляя средство **Orotol Plus**
 11. В начале следующего дня отсосать через шланг большого и маленького отсасывателя всегда 1л чистой холодной воды.

10.8 Очистка, дезинфицирование и обеззараживание остальных частей стом. установки

- Для очистки поверхности стоматологической установки включая стеклянной поверхности экрана, достаточно использовать влажное полотенце
- рекомендованное чистящее средство **Incidin™ Foam** - спрей, (HENKEL – ECOLAB)
- Поверхность необходимо очищать не реже одного раза в день, а также в случае загрязнения поверхности прибора биологическим материалом.

	<ul style="list-style-type: none"> • Запрещается очищать обивку кресла нарушающими структуру искусственной кожи очистителями (ацетон, трихлор, перхлор, алкоголь содержанием более 10%, абразивные очистители, полировальные вещества) • Запрещается производить очистку веществами, разрушающими структуру лака и пластика (средства на базе фенолов и альдегидов)
--	---


Не реже одного раза в день прочистите следующие части установки:


- ситко блока сепаратора находится в блоке плевательницы
- ситко/фильтр на входе в амальгама-сепаратор
- ситко/фильтр слюноотсасывателя,
- ситко/фильтр маленького и большого отсасывателя
- ситко в чаше плевательницы



Инструменты и наконечники

Очистку, дезинфицирование и стерилизацию инструментов и их наконечников необходимо проводить, следуя прилагаемым к ним инструкциям производителя.

	<p>Проводя очистку напольного покрытия (поливинилхлорид/ PVC) с помощью дезинфицирующего средства, запрещается ставить педаль ногового управления на непросушенный пол</p>
---	--

	<p>Изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате использования других дезинфицирующих и чистящих средств, кроме рекомендованных</p>
---	--

11 УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Часть	Основной материал	Рециклируемый материал	Хранимый материал	Опасный материал
Металл	Сталь	X		
Пластмасса	Алюминий	X		
Пластмассы	PUR/Полиуретан		X	
	PVC /Поливинилхлорид			X
	РА, ABS	X		
	Стеклопластик		X	
	Другие пластмассы	X		
Резина			X	
Стекло		X		
Инструменты			X	
Электроника		X		
Кабели	Медь	X		
Трансформатор		X		
Амальгама-сепаратор	Фильтры			X
	Сборник с амальгамой			X
Упаковка	Дерево	X		
	Папка	X		
	Бумага	X		
	PUR/Полиуретан		X	



Не выбрасывать в качестве коммунальных отходов.

Некоторые части можно сдать в специальных приемных пунктах, например электрочасти.

Проводя утилизацию стоматологической установки необходимо соблюдать законодательские правила в соответствующей стране. До начала демонтажа надо установку обеззаразить – очистить поверхность, прочистить отсасывательную и водоотводную систему, вынуть амальгаму из сепаратора и сдать ее в приемном пункте. Рекомендуется поручить ликвидацию стоматологической установки специальной фирме.

12 РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА

В случае расстройства на стоматологической установке проспросите ближайший сервисный центр или вашего торгового партнера информации по ближайшей сервисной сети.

13 ГАРАНТИЯ

Изготовитель предоставляет на изделие гарантию соответственно Гарантийному свидетельству.

Риск повреждения товара переходит из продающего на покупателя:

- с момента сдачи его первому транспортнеру с целью транспорта к покупателю,
- или же с момента сдачи – приема товара прямо покупателем.

Покупатель обязан заполнить гарантийный формбланк и отправить его обратно производителю в момент сдачи-приема изделия.

Изготовитель закрепляет за собой право на изменения изделия в рамках его усовершенствования.



Расстройства на стоматологической установке, возникшие вследствие халатности обслуживания или несоблюдения приведенных в Руководстве по эксплуатации инструкций не будут признаны в качестве предмета рекламации в течение гарантийного срока

14 СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ

Основное оснащение	DA270,DA370	DA280, DA380
Стоматологическое кресло пациента	1	
Панель управления и пантограф* панели управления (*с исключением варианта CART)	1	
Тележка (только для варианта CART)	-	1
Блок плевательницы с консолью ассистента	1	
Плевательница	1	
Пантограф стоматологического операционного светильника	1	
Стоматологический операционный светильник	1	
Педаля ножного управления	1	
Трей-стол	1	-
Подлокотник правый (соответственно заказу)	1	
Стол для откладывания инструментов (соответственно заказу)	1	
Консоль монитора (соответственно заказу)	1	
Монитор (соответственно заказу)	1	
Внутриротовая камера (соответственно заказу)	1	
Держатель пантографа стоматологического операционного светильника	1	
Инструменты, принадлежности, мелкие части и комплектовочная карта, упакованы в закупоренном картоне	1	

Сопровождающая техническая документация

- Руководство по эксплуатации
- Гарантийное свидетельство
- Инструкции от субподрядчиков
- Комплектовочная карта (вложена в закупоренном картоне с инструментами)
- Регистрационная форма

15 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

- Упаковки со стоматологическим оборудованием предназначены для перевозки в закрытых транспортных средствах сохранены максимум в 3 слоя.
- Упаковки должны быть плотно зафиксированы и защищены от движения
- При загрузке и выгрузке не опрокидывать и не перекатывать


Условия перевозки		
Параметр	От	До
диапазон температуры окружающей среды	-25 °C	+50 °C
диапазон относительной влажности	5 %	95 % не-конденсирующая влажность
диапазон атмосферного давления	700 hPa	1060 hPa


16 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Стоматологическое оборудование следует хранить в сухих помещениях без резких перепадов температур
- Нелакированные детали необходимо защитить от коррозии
- Запрещено хранить совместно с химическими веществами.

Условия хранения		
Параметр	От	До
диапазон температуры окружающей среды	-25 °C	+50 °C
диапазон относительной влажности	5 %	95 % не-конденсирующая влажность
диапазон атмосферного давления	700 hPa	1060 hPa

17 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ПО EN 60601-1-2

	Использование других принадлежностей, чем указанных в инструкции по применению стоматологического блока, может привести к увеличению электромагнитных излучений или снижению электромагнитного иммунитета и вызвать нарушение работы стоматологического блока
---	---

	Портативное оборудование связи RF необходимо использовать на расстоянии больше чем 30 см от любой части зубоучасточного блока. В противном случае функциональность зубоучасточного блока может быть повреждена
---	--

17.1 Электромагнитное излучение

Испытание на выбросы	Соответствие	Электромагнитная обстановка
Радиочастотное излучение CISPR11	Группа 1	Зубоучасточный блок использует энергию RF только для своей функции. Его радиочастотное излучение очень низкое и не может вызвать каких-либо помех для находящегося рядом электронного оборудования.
Радиочастотное излучение CISPR11	Класс B	Зубоучасточный блок конструируется быть использованным во всех окружающих средах, включая жилого района и его можно сразу соединить с общественной коммунальной электросети
Гармонические выбросы EN 61000-3-2	Класс A	
Колебания напряжения/фликер выбросов EN 61000-3-3	Выполняет	

17.2 Устойчивость к электромагнитным помехам

Зубоучасточный блок предназначен для пользы в электромагнитной окружающей среде соответствующей в таблице 17.2. Потребитель зубоучасточного блока должен убедиться что зубоучасточный блок использован в такой окружающей среде.


Таблица 17.2


Испытание невосприимчивости	EN 60601 уровень теста	Соответствие	Электромагнитная обстановка
Иммунитет к электростатическим разрядам по EN 61000-4-2	Контактный разряд ± 6 кВ Разряд ± 8 кВ воздушный	Контактный разряд ± 6 кВ Разряд ± 8 кВ воздушный	Полы должны быть из дерева, бетона или керамической плитки. Если полы покрыты синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не более 30%.
Невосприимчивость к электрическим быстрым переходным процессам и взрывам согласно EN 61000-4-4	± 2 кВ для линий электропитания ± 1 кВ для входных/выходных линий	± 2 kV for power supply lines ± 1 kV for input/output lines	Качество электросети электроэнергии следует, что в типичной коммерческой или больничной среды.
Иммунитет перенапряжения согласно EN 61000-4-5	± 1 кВ линия(и) к линии(ям) ± 2 кВ линия(и) на землю	± 1 кВ линия(и) к линии(ям) ± 2 кВ линия(и) на землю	Качество электросети электроэнергии следует, что в типичной коммерческой или больничной среды.
Невосприимчивость к магнитному полю частоты силы по EN 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Частота магнитного поля не должна превышать значений, характерных для коммерческой или больничной среды.
Иммунитет к провалу напряжения, коротким прерыванием и изменениями напряжения питания на входных линиях питания по EN 61000-4-11	< 5% UT (> 95% dip в UT для 0,5 цикла) 40% UT (60% dip в UT для 5 циклов) 70% UT (30% dip в UT для 25 циклов) < 5% UT (> 95% dip в UT для 5 циклов)	< 5% UT (> 95% dip в UT для 0,5 цикла) 40% UT (60% dip в UT для 5 циклов) 70% UT (30% dip в UT для 25 циклов) < 5% UT (> 95% dip в UT для 5 циклов)	Качество электросети электроэнергии следует, что в типичной коммерческой или больничной среды. Если пользователю зубоучасточного блока требуется непрерывная деятельность во время прерыва питания то порекомендовано, чтобы зубоучасточный блок был соединен с резервным источником.


17.3 Устойчивость к электромагнитным помехам

Зубоврачебный блок предназначен для пользы в электромагнитной окружающей среде соответствующей в таблице 17.3. Потребитель зубоврачебного блока должен убедиться что зубоврачебный блок использован в такой окружающей среде.

Таблица 17.3

Испытание невосприимчивости	EN 60601 уровень теста	Соответствие	Электромагнитная обстановка
Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным полям по EN 61000-4-6	3 Veff 150 kHz до 80 MHz	3 Veff	Портативное и мобильное оборудование радиочастотной связи должно использоваться не ближе, чем рекомендованное расстояние разделения, рассчитанное по уравнению, применимому к частоте передатчика.
Невосприимчивость к излученному электромагнитному полю радиочастоты согласно EN 61000-4-3	3 V/m 80 MHz до 2,5 GHz	3 V/m	<p>Рекомендуемые минимальные расстояния: $d = 1,167 \sqrt{P}$ 150 kHz до 80 MHz $d = 1,167 \sqrt{P}$ 80 MHz до 800 MHz $d = 2,333 \sqrt{P}$ 800 MHz до 2,5 GHz</p> <p>R[W]- Номинальная Максимальная выходная мощность d[m] – рекомендуемые защитные расстояния</p> <p>Напряженность поля от фиксированных радиочастотных передатчиков должна быть ниже уровня соответствия в каждом частотном диапазоне.</p> <p>Помехи могут возникать вблизи оборудования, отмеченного символом </p>

 Для частоты 80 МГц применяется Диапазон частот от 80 МГц до 800 МГц
а для частоты 800 МГц применяется Диапазон частот от 800 МГц до 2,5 ГГц

 Данные рекомендации могут применяться не во всех ситуациях.
На распространение электромагнитных волн влияют поглощение и отражение от конструкций, объектов и людей

Интенсивность поля от стационарных передатчиков, таких как базовые станции беспроводных телефонов, мобильной радиосвязи, любительские радиоприемники, радио-и телевизионных передатчиков и тому подобное, не возможно теоретически определить заранее. Для оценки электромагнитной обстановки в условиях стационарных передатчиков, полезно рассмотреть измерения электромагнитных полей. Если измеренная напряженность электромагнитного поля в месте расположения установки превышает указанный выше уровень, вы должны проверить его правильное функционирование. Если вы испытываете ненормальное поведение зубной установки, она должна быть установлена на другом месте.

В диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц сила поля должна быть менее 3 В/м (V/m).

17.4 Рекомендуемые расстояния между портативным и мобильным оборудованием радиочастотной связи и стоматологической установкой

Стоматологическая установка предназначена для использования в электромагнитной среде, в которой радиочастотные помехи контролируются. Клиент или пользователь стоматологической установкой может помочь предотвратить электромагнитные помехи, поддерживая минимальное расстояние между портативным и мобильным оборудованием радиочастотной связи и стоматологической установки согласно таблице 17.4.


Таблица 17.4


Номинальная Максимальная выходная мощность передатчика P[W]	Защитное расстояние в зависимости от частоты передатчика d[m]		
	150 kHz до 80 MHz $d = 1,167 \sqrt{P}$	80 MHz до 800 MHz $d = 1,167 \sqrt{P}$	800 MHz до 2,5 GHz $d = 2,333 \sqrt{P}$
0,01	0,117	0,117	0,233
0,1	0,369	0,369	0,738
1	1,167	1,167	2,333
10	3,69	3,69	7,377
100	11,67	11,67	23,33

P[W]- Номинальная Максимальная выходная мощность

d[m] – рекомендуемые защитные расстояния

Для передатчиков, рассчитанных на максимальную выходную мощность, не указанную выше, расстояние рассчитывается с использованием уравнения, применимого к соответствующей частоте.

	Для частоты 80 МГц применяется Диапазон частот от 80 МГц до 800 МГц а для частоты 800 МГц применяется Диапазон частот от 800 МГц до 2,5 ГГц
---	--

	Данные рекомендации могут применяться не во всех ситуациях. На распространение электромагнитных волн влияют поглощение и отражение от конструкций, объектов и людей
---	--