

ANHEL

Ваш персональный менеджер

Телефон:
www.anel.ru

Стерилизатор паровой медицинский

Romax

YS-18L-E / YS-22L-E



РЗН №2021/15011
ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.45874/22


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- ⊕ Камера: 18 л, 22 л
- ⊕ Размер лотков: 145×290 мм
- ⊕ Количество лотков: 3 шт
- ⊕ Температура стерилизации: С 121°, 134°
- ⊕ Управление: сенсорное
- ⊕ Отображение информации: LCD экран
- ⊕ Мини-принтер, печать контрольного чека
- ⊕ Количество стандартных программ стерилизации: 10 шт
- ⊕ Пользовательская программа стерилизации
- ⊕ Vacuum test
- ⊕ Bowie&Dick test
- ⊕ Режим самоочистки
- ⊕ Потребляемая мощность: 1600 Вт
- ⊕ Емкость резервуара с дистиллированной водой: 3,5 л
- ⊕ Емкость резервуара с отработанной водой: 3 л
- ⊕ Габариты прибора ШхГхВ: 500 x 610 x 430 мм
- ⊕ Вес нетто: 51 кг
- ⊕ Вес брутто: 59 кг
- ⊕ Габариты упаковки: 570 x 730 x 510 мм



РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- Ⓜ Пористые материалы
t, °C 134
Предварительное вакуумирование, 3-х кратно
Время стерилизации, мин 4
- Ⓜ Твердые инструменты
t, °C 134
Предварительное вакуумирование, 1 кратно
Время стерилизации, мин 4
- Ⓜ Полые и пористые инструменты и материалы
t, °C 134
Предварительное вакуумирование, 3-х кратно
Время стерилизации, мин 4
- Ⓜ Подозрение на заражение прионными белками
t, °C 134
Предварительное вакуумирование, 3-х кратно
Время стерилизации, мин 19
- Ⓜ Твердые инструменты простой формы
t, °C 121
Предварительное вакуумирование, 1 кратно
Время стерилизации, мин 20
- Ⓜ Полые и пористые инструменты
t, °C 121
Предварительное вакуумирование, 3-х кратно
Время стерилизации, мин 20
- Ⓜ Самоочистка
t, °C 105
Предварительное вакуумирование, 3-х кратно
Время стерилизации, мин 5
- Ⓜ Пористые материалы
t, °C 121
Предварительное вакуумирование, 3-х кратно
Время стерилизации, мин 20
- Ⓜ Пользовательский режим
t, °C 121 или 134
Предварительное вакуумирование, 1 или 3-х кратно
Время стерилизации, мин 4—60
- Ⓜ V&D тест
t, °C 134
Предварительное вакуумирование, 3-х кратно
Время стерилизации, мин 4
- Ⓜ Вакуумный тест
t, °C —
Предварительное вакуумирование, согласно тест режима
Время мин 15

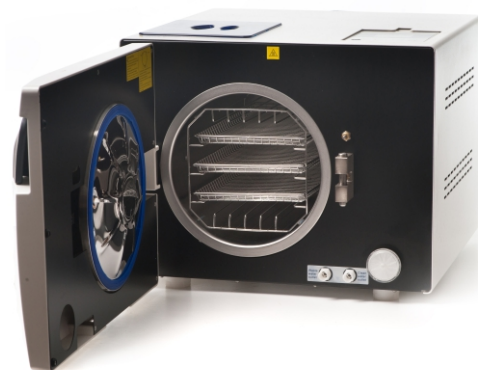

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ⓜ Трехуровневая стойка с 3 лотками
- Ⓜ Экстрактор (используется для выемки простерилизованного материала)
- Ⓜ Дренажная трубка для слива воды
- Ⓜ Сетевой шнур питания
- Ⓜ Комплект документации

ОСОБЕННОСТИ

- ⊕ Система двойной блокировки двери во время стерилизации с механическим и электронным замками
- ⊕ Раздельные емкости чистой и отработанной воды
- ⊕ Автономный клапан безопасности
- ⊕ Визуальный и звуковой контроль за процессом автоклавирования
- ⊕ Управляемое воздушное охлаждение
- ⊕ Оснащен раздельным парогенератором и нагревательным элементом
- ⊕ Водяная мини-помпа производства Италия
- ⊕ Возможность подключения мини-принтера
- ⊕ Запись результатов стерилизации на флеш-диск через USB-разъем
- ⊕ Жидкокристаллический монитор

О ПРОДУКТЕ

- ⊕ В стерилизаторе используется микропроцессор с системой интеллектуального контроля и удобный интерфейс. Стерилизатор легкий, безопасен и надежен в работе. Параметры и условия программы отображаются на экране во время работы. Для обеспечения надежности стерилизации устройство будет автоматически выполнять самодиагностику, система защиты сработает от перегрева или превышения давления. Внутри стерилизатор имеет коллектор конденсатной воды, который предотвращает загрязнение окружающей среды паром.
- ⊕ Стерилизатор предназначен для стерилизации инвазивных медицинских приборов. Предотвращает перекрестную инфекцию. Стерилизатор предназначен для отделений больниц, стоматологии, офтальмологии и биологических научно-исследовательских учреждений. Используется для стерилизации хирургического оборудования, стоматологических инструментов, шприцов и т.д. Им можно стерилизовать упакованные и неупакованные предметы, твердую, полую загрузку, продукты типа А. Данный стерилизатор может использоваться в ветеринарии, косметологии.

ИНФОРМАЦИЯ О НАС

Эксклюзивный дилер и официальный представитель
на территории РФ - ООО «Анхел Трейдинг»

ООО «Анхел Трейдинг»
410031, ул. Валовая, 61/67, Саратов, Саратовская обл.
Оптовый отдел 8 800 775 90 38
Розничный отдел 8 800 700 38 20
e-mail: info@anhel.ru
http://www.anhel.ru

СТОИМОСТЬ:

Ваш персональный менеджер

Телефон:

www.anhel.ru